

PROYECTO DE ROTULO (Envase Primario)
Preservativos Femeninos

Marca: XXX

Modelo: XXX

Fecha de fabricación: XXX

Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX

Ancho nominal: XXX mm

Producto para usar una sola vez.

Abrir solamente en el momento de uso.

Preservativo de látex de caucho natural.

Lubricado con aceite de silicona.

Elaborado por: CUPID LIMITED.

Dirección: A-68, MIDC (MALEGAON), SINNAR, NASHIK - 422113, MAHARASHTRA INDIA
MALAYSIA.

Para: FUNCARE S.R.L

Dirección: Santa Rosa 3842 - Florida Oeste - Vicente López - Provincia de Buenos Aires
- Argentina.

Certificado de Registro de Producto (PM): 2828-3. Legajo único: 2828



SERGIO D. TAMOLA
FUNCARE S.R.L.
Socio Gerente



CARLOS G. CASTRO
Farmacéutico - DT
M.N. 30244/19946
FUNCARE S.R.L.

**PROYECTO DE ROTULO (Envase secundario)
Preservativos Femeninos**

Elaborado por: CUPID LIMITED.

Dirección: A-68, MIDC (MALEGAON), SINNAR, NASHIK - 422113, MAHARASHTRA INDIA
MALAYSIA.

Para: FUNCARE S.R.L

Dirección: Santa Rosa 3842 - Florida Oeste - Vicente López - Provincia de Buenos Aires -
Argentina.

Tel/fax.: 011-7713-4908

e-mail: info@funcare.com.ar

Marca: XXX

Modelo: XXX

Cantidad: XXX unidades

Fecha de fabricación: XXX

Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX

No Fraccionar.

Proteja este producto del calor, humedad y de la luz Atención al consumidor: 0800 - 122 -
0460.

Confeccionado con látex de caucho natural, lubricante de aceite de silicona.

Producto para usar una sola vez.

Lea las instrucciones de uso en el interior del envase.

Director Técnico: Farmacéutico - Carlos Gustavo Castro MN: 8994



SERGIO D. TAMOLA
FUNCARE S.R.L.
Socio Gerente

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM: 2828-3

Uso sin prescripción



CARLOS G. CASTRO
Farmacéutico - DT
M.N. 8994 M.P. 0946
FUNCARE S.R.L.

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Preservativos Femeninos

Descripción:

El condón femenino Cupid es una funda delgada, suave y holgada hecha de látex de caucho natural. Se debe usar dentro de la vulva, hay un anillo octogonal flexible en el extremo abierto y espuma de poliuretano suave en forma de rosquilla en el extremo cerrado. La espuma de poliuretano en el extremo cerrado de la funda se usa para insertar el condón dentro de la vulva y sostenerlo en su lugar durante el coito. El anillo exterior octogonal en el extremo abierto de la vaina permanece fuera de la vulva y cubre parte de los genitales externos. El condón femenino de Cupido debe insertarse en la vulva antes del coito. Retiene el espermatozoides del hombre después de la eyacuación, ayudando así a prevenir embarazos no deseados. También actúa como barrera contra las infecciones de transmisión sexual (ETS), incluido el VIH.

Uso previsto:

Anticoncepción y prevención contra 'infecciones de transmisión sexual' (ETS).

Contraindicaciones:

Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluido shock anafiláctico, si el usuario es alérgico al látex.

Advertencias:

Rotura clínica, rotura no clínica, deslizamiento clínico, mala dirección clínica e invaginación clínica.

Precauciones:

En caso de que el paciente sea alérgico al látex natural, no lo use.

Condiciones de Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar directa.

INSTRUCCIÓN GENERAL

- 1) Para uso único.
- 2) El condón femenino está diseñado para ser retenido en la vagina durante las relaciones sexuales para prevenir el embarazo y la transmisión de infecciones de transmisión sexual.
- 3) Ningún método de barrera, incluidos condones masculinos o femeninos brinda protección del 100% contra el embarazo y ITS.
- 4) Asegúrese de que haya una lubricación adecuada. Si agrega lubricante, use un lubricante a base de agua.
- 5) El condón femenino está fabricado con látex de caucho natural. No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite para bebé, lociones

corporales, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc. Ya que son perjudiciales para la integridad del condón femenino.

- 6) Si estas utilizando algún tratamiento médico en la zona genital (Cremas, lociones, unguentos, etc). Consulte a su médico para asegurarse de que el tratamiento no afecte negativamente al condón.
- 7) Busque asistencia médica lo antes posible, al menos dentro de las 72 horas, en caso de que un condón femenino gotee o reviente durante su uso.
- 8) Cualquier uso de los condones femeninos para otras relaciones que no sean vaginales puede aumentar el potencial de daño al condón.

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1: abre el paquete del condón femenino con cuidado desgarro en la muesca en la parte superior derecha del paquete. No utilice tijeras ni cuchillo para abrir. Evite dañar el condón femenino con uñas, joyas, etc.



Paso 2: El anillo exterior del condón femenino cubre el área alrededor de la abertura de la vagina. La esponja interior se utiliza para la inserción y para ayudar a mantener la funda en su lugar durante el coito.



Paso 3: Mientras sostiene la funda por el extremo cerrado, agarre la esponja y apriétela con el pulgar y el índice para que quede larga y estrecha.



Paso 4: Elija una posición que le resulte cómoda para la inserción, agáchese, levante una pierna, sintiese o acuéstese. Inserte suavemente la esponja interna en la vagina. El condón femenino debe insertarse en la vagina antes de que se produzca cualquier contacto entre la vagina y el cuerpo de la pareja para ayudar en la prevención de las ITS y el embarazo.



Paso 5: Coloque el dedo índice en el interior del condón y empuje la esponja interior hacia arriba hasta el tope. Asegúrese de que la funda no este torcida. El anillo exterior debe permanecer en el exterior de la vagina.



Paso 6: El condón femenino ya está colocado y listo para usarlo con su pareja.



Paso 7: Asegúrese de que el pene de su pareja no entre por los lados, entre la vaina y la pared de la vagina. Si alguna de las personas siente que el condón femenino se desliza dentro o fuera de la vagina, deténgase inmediatamente y revise.



Paso 8: Guíe suavemente el pene de su pareja hacia la abertura de la funda con la mano para asegurarse de que entre correctamente.



Paso 9: Retire el pene poco después de la eyaculación dejando el condón femenino colocado en la vagina. Para quitar el condón femenino, después de su uso, gire el anillo exterior y extraiga suavemente el condón.



Paso 10: Envuelva el condón en el paquete o en un pañuelo de papel y tírelo a la basura. No lo pongas en el baño.



SERGIO D. TAMOLA
FUNCARE S.R.L.
Socio Gerente



CARLOS G. CASTRO
Farmacéutico - DT
M.N. 8994 M.P. 8646
FUNCARE S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: FUNCARE SRL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.