

PROYECTO DE RÓTULO

Fabricado por: Osatu S Coop

Edificio Zearrekobuelta, Subida de Areitio 5 Portal 4, 48260, ERMUA (Viscaya/Bizkaia), España

Importado por: GIKramer S.A

Av Boedo 724 piso 2 of "C" CABA, (depósito: Av Regimiento de los Patricios 330 9 "B" CABA)

Marca: Osatu

Nombre genérico: Desfibrilador externo automatizado

Modelos: Reanibex 100

SERIE Nº

FECHA DE FABRICACIÓN

Rango de conservación entre 0 C y 50° C.

Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Graciela Rey, Farmacéutica M.N. 12620

CONDICIÓN DE USO: "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2551-06



Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620



IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por: Osatu S Coop

Edificio Zearrekobuelta, Subida de Areitio 5 Portal 4, 48260, ERMUA (Viscaya/Bizkaia), España

Importado por: GiKramer S.A

Av Boedo 724 piso 2 of "C" CABA, (depósito: Av Regimiento de los Patricios 330 9 "B" CABA)

Marca: Osatu

Nombre genérico: Desfibrilador externo automatizado

Modelos: Reanibex 100

Rango de conservación entre 0 C y 50° C.

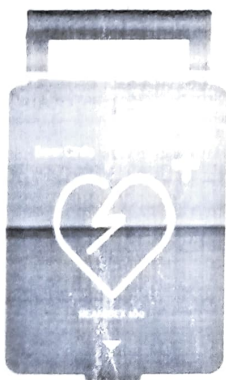
Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Graciela Rey, Farmacéutica M.N. 12620

CONDICIÓN DE USO: "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

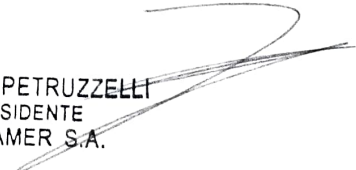
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2551-06

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO:



Al conectarse a un paciente, el REANIBEX 100 analiza automáticamente su electrocardiograma (ECG) y decide si es necesario administrar una descarga eléctrica. Si se recomienda una descarga eléctrica, el dispositivo cargará automáticamente la energía necesaria. Dependiendo del modo de funcionamiento (semiautomático o totalmente automático), puede ser necesario pulsar un botón para realizar la desfibrilación. El dispositivo guiará al usuario a través del episodio proporcionándole mensajes de voz. El REANIBEX 100 funciona con baterías desechables de LiMnO2.


Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

El REANIBEX 100 cuenta con una memoria interna que almacena los datos de la última intervención realizada por el equipo. Estos datos incluyen las señales de ECG del paciente y los eventos ocurridos durante la intervención. Además, el equipo almacena las últimas 50 pruebas realizadas a petición del paciente, el usuario o durante una prueba automática.

Además del modo de funcionamiento relacionado con el paciente descrito anteriormente, el REANIBEX 100 cuenta con una función de encendido especial que accede al modo de información. Este modo permite obtener información sobre el estado del dispositivo.

Durante el arranque y la operación, el REANIBEX 100 realiza una serie de pruebas automáticas para detectar cualquier fallo o condición anómala en el equipo que pueda comprometer la seguridad del funcionamiento. Los errores se indican mediante mensajes de voz.

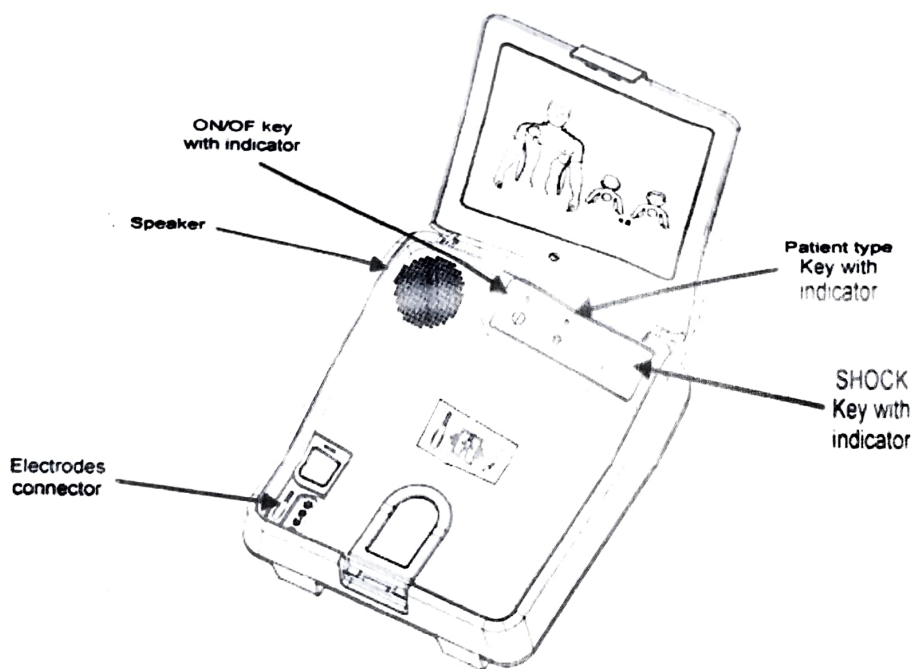


Figura 1 Vista frontal con la tapa abierta


Fam. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

CONTROL

DESCRIPCIÓN



BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO El equipo se enciende automáticamente al abrir la tapa. Además este botón permite encender y apagar el equipo. Cuando el equipo está encendido, este botón se ilumina con un LED.



TECLA DE TIPO DE PACIENTE Este botón se utiliza para seleccionar el tipo de paciente. Si el tipo de paciente seleccionado es PEDIÁTRICO, el botón se ilumina con un LED. Para pacientes menores de 8 años o con un peso inferior a 25 kg (55 lb), se debe seleccionar el modo pediátrico.



BOTÓN DE DESCARGA Este botón se utiliza para administrar una descarga de desfibrilación. Parpadea cuando el desfibrilador está listo para administrar la descarga.



LED INDICADOR DE ESTADO En modo de espera, este LED, visible a través de la cubierta del REANIBEX 100, indica el estado general del dispositivo. Cuando el dispositivo esté listo, el LED parpadeará cada 7 s. Si se detecta algún problema, el indicador de estado se apagará.

En la esquina inferior izquierda del dispositivo reanibex 100 hay dos conectores:

El conector de electrodos, que se utiliza para conectar los electrodos de desfibrilación cuando se utiliza el dispositivo reanibex 100 para tratar a un paciente.

Un conector USB-B, que puede utilizarse para conectar el dispositivo REANIBEX 100 a un PC para intercambiar información con el sistema de monitorización web REANIBEX.

La vida útil de la batería depende de su uso y frecuencia. Con un uso y mantenimiento adecuados, su vida útil es de 5 años.

INDICACIONES DE USO:

El desfibrilador externo automático (DEA), Reanimex 100, está destinado a ser usado en pacientes adultos o pediátricos en parada cardíaca, que están inconscientes, no respiran y no presentan signos vitales. El dispositivo ajustará los niveles de energía y los parámetros necesarios del paciente según el tipo de paciente seleccionado: adulto o pediátrico.

El Reanibex 100 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios y extrahospitalarios, para personas con conocimiento o con formación mínima en reanimación cardiopulmonar (RCP).

ADVERTENCIAS:

- El REANIBEX 100 debe utilizarse en un solo paciente a la vez.
- **PELIGRO DE EXPLOSIÓN.** Existe riesgo de explosión si el REANIBEX 100 se utiliza en presencia de mezclas con concentraciones de oxígeno superiores al 25 % o productos anestésicos inflamables.
- Evite conectar al paciente a varios dispositivos al mismo tiempo para evitar exceder los límites de corriente de fuga.
- Evite tocar los electrodos u otros dispositivos de medición cuando estén colocados sobre el paciente, ya que esto puede afectar la seguridad y los resultados.
- Evitar que las partes conductoras de los electrodos y conectores asociados a las partes aplicadas, incluido el electrodo neutro, entren en contacto con otras partes conductoras, incluida la tierra.

Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620

IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

- **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO.** El desfibrilador puede suministrar hasta 200 julios de energía. Si no se utiliza correctamente, como se describe en estas instrucciones de uso, esta energía puede causar lesiones graves o la muerte. Asegúrese de familiarizarse con el uso del equipo antes de usarlo
- No desmonte el desfibrilador. Este equipo contiene alto voltaje peligroso. Para reparaciones, contacte con personal de servicio técnico autorizado.
- Nunca utilice el REANIBEX 100 sobre agua estancada. No sumerja el equipo ni ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro líquido. No derrame líquido sobre el equipo ni sobre ninguno de sus accesorios. Si el equipo se moja, séquelo con una toalla. • No limpie el equipo con agentes inflamables como acetonas.
- No esterilice el equipo en autoclave ni por ningún otro medio.
- **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA PELIGROSA**
El desfibrilador puede suministrar hasta 200 julios de energía durante la descarga. Durante la descarga, no toque al paciente ni los electrodos de desfibrilación.
Durante la desfibrilación, evite que las partes del cuerpo del paciente (piel descubierta de la cabeza y las extremidades) entren en contacto con líquido conductor como gel, sangre o suero y/o objetos metálicos como la camilla, que pueden dar lugar a vías no deseadas para la corriente de desfibrilación.
Asegúrese de que nadie toque al paciente, la cama ni ningún material conductor en contacto con él durante la desfibrilación. La corriente de desfibrilación podría descargarse parcialmente a través de la persona, causando lesiones al usuario y a las personas cercanas a la unidad.
- Mantenga los pies y las manos alejados del borde de los electrodos. •
Durante la administración de la descarga, nunca toque al paciente ni ningún equipo conectado a él (incluida la cama o la camilla).
- Las cavidades de aire que se forman entre los electrodos de desfibrilación y la piel del paciente pueden causar quemaduras durante la desfibrilación. Asegúrese de que los electrodos de desfibrilación estén perfectamente adheridos a la piel del paciente. Una vez adheridos, si es necesario cambiar la posición de los electrodos, retírelos y sustitúyalos por unos nuevos.
- Evite que los electrodos de desfibrilación entren en contacto entre sí o con cualquier material conductor durante la desfibrilación. Este contacto puede generar un arco eléctrico y causar quemaduras en la piel del paciente, lo que a su vez podría desviar la corriente del corazón
- Siga cuidadosamente las instrucciones indicadas en las etiquetas de los electrodos de desfibrilación.
- Los electrodos de desfibrilación deben usarse antes de la fecha de caducidad indicada en sus etiquetas. Si se secan o dañan, pueden generar arcos eléctricos y quemaduras durante su uso.
- No abra el embalaje del electrodo de desfibrilación hasta justo antes de usarlo. No reutilice los electrodos de desfibrilación. Deséchelos después de usarlos.
- Vigile atentamente al paciente durante la desfibrilación. Un retraso en la administración de la descarga puede implicar un cambio espontáneo de un ritmo analizado como desfibrilable a uno no desfibrilable, lo que da lugar a una administración inadecuada de la descarga.
- **POSIBLE INTERFERENCIA ELÉCTRICA**
La presencia de fuentes de radiofrecuencia (RF) cerca del REANIBEX 100 puede provocar un funcionamiento incorrecto del equipo. Debe verificarse la compatibilidad electromagnética de los equipos adyacentes antes de utilizar el REANIBEX 100.
Evite usar el REANIBEX 100 junto a otros equipos o encima de ellos. Si es necesario usarlo junto a otros equipos o encima de ellos, asegúrese de que funcione correctamente antes de usarlo en un paciente.


Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

El REANIBEX puede causar interferencias de radio o interferir con el funcionamiento de equipos adyacentes. Podría ser necesario mitigar estos efectos reorientando o moviendo el equipo REANIBEX 100 o blindando la ubicación.

El uso de cables, electrodos o accesorios no especificados en este manual para el REANIBEX 100 puede provocar un aumento de las emisiones o una menor inmunidad a las interferencias electromagnéticas o de radio. Estas interferencias pueden afectar el funcionamiento del desfibrilador o de los equipos en su entorno inmediato.

- El REANIBEX 100 no tiene la capacidad de rechazar los pulsos de marcapasos internos en todos los casos.
El equipo puede detectar pulsos de marcapasos internos como complejos QRS y, por lo tanto, el algoritmo de aviso de descarga puede proporcionar una decisión incorrecta de descarga o no descarga.
- El REANIBEX 100 ha sido diseñado para el tratamiento del paro cardíaco en pacientes adultos y pediátricos. Para aplicar la terapia, se debe seleccionar el tipo de paciente adecuado.
- Siga las regulaciones locales, regionales o nacionales de su país para la eliminación de baterías gastadas.
- No exponga las baterías a temperaturas superiores a 40 °C durante períodos prolongados ya que esto reduce la vida útil de la batería.
- Mantenga las baterías alejadas de las llamas y otras fuentes de calor.
- No utilice las baterías en entornos con alta humedad. Asegúrese de que no se mojen.
- No aplaste, golpee, abolle ni deforme las baterías
- Coloque los electrodos de desfibrilación desechables como se indica en el embalaje de los electrodos.
- Para garantizar la seguridad del paciente, no coloque el REANIBEX 100 en una posición desde donde pueda caer sobre el paciente.
- Se deben realizar comprobaciones periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del REANIBEX 100 y sus accesorios. Las pruebas manuales deben realizarse al menos una vez al mes, como se describe en la sección MANTENIMIENTO de este manual.
- No retire la batería del equipo mientras trabaja con un paciente, ya que esto apagará el equipo.
- Mantenga el REANIBEX 100 y sus accesorios fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantenga el REANIBEX 100 alejado de fuentes de calor o llamas.

PRECAUCIONES:

• Descarga eléctrica peligrosa. El reanibex 100 no está diseñado para ser utilizado por personal sin la capacitación adecuada. El uso del equipo por parte de personal no capacitado puede causar lesiones o la muerte. El equipo debe ser utilizado únicamente por personas con una formación mínima en las siguientes áreas:

- reanimación cardiopulmonar (rcp)
- uso de un dea según las recomendaciones de la american heart association o del european resuscitation council

- El uso de electrodos o baterías de otros fabricantes puede afectar el correcto funcionamiento del equipo e invalidar la certificación de seguridad. Utilice únicamente los accesorios especificados en esta GUÍA.
- El uso del REANIBEX 100 o sus accesorios en condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual puede afectar el correcto funcionamiento del equipo o de los


Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

accesorios. Antes de utilizar el REANIBEX 100, asegúrese de que el equipo esté estabilizado dentro del rango de temperatura de funcionamiento.

- Posibles daños al equipo
El equipo puede resultar dañado por malos tratos mecánicos o físicos, como inmersión en agua o caída desde una altura superior a 0,1 m.
Los componentes del equipo pueden dañarse si la unidad se ubica cerca de fuentes de vibración.
- Peligro de incendio o descarga eléctrica: asegúrese de que los accesorios y todos los componentes estén correctamente conectados. Los componentes o accesorios mal conectados pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
- Peligro de explosión. No intente abrir ni manipular la batería. No la incinere. Evite el contacto eléctrico entre los terminales de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO

Conexión del cable de electrodos

El equipo reanibex 100 puede ser utilizado para proporcionar terapia mediante electrodos desechables tanto a pacientes adultos como pediátricos.

Normalmente, los electrodos estarán preconnectados al dispositivo reanibex 100. De no ser así, conecte el cable del electrodo al conector del reanibex 100:

1. Alinee el conector del cable del electrodo desechable con la entrada del conector.
2. Presione firmemente hasta que el conector esté en su lugar.

Instalación de la batería

El reanibex 100 puede funcionar con batería. Para instalarla:

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior del dispositivo.
2. Coloque la batería en el compartimento de la batería.
3. Conecte el conector de la batería. Asegúrese de oír un clic.
4. Cierre el compartimento de la batería.

Preparación para la desfibrilación externa automatizada

Realice los siguientes pasos antes de realizar la desfibrilación automática:

1. Verificar que el paciente haya sufrido una parada cardiorrespiratoria, es decir que el paciente presente los siguientes síntomas:

- el paciente no responde (inconsciente)
- el paciente no respira espontáneamente

2. Si es posible, coloque al paciente sobre una superficie dura, lejos del agua o de cualquier material conductor.

3. Prepare la piel del paciente para la aplicación de los electrodos:

- retire toda la ropa del pecho del paciente.

Si es necesario, depile el pecho del paciente. Evite rasguñarle o cortarle la piel. Evite colocar los electrodos o las palas sobre piel lastimada.

Limpie la piel del paciente. Retire cualquier parche o pomada con medicamento de la piel del paciente.

- nunca utilice alcohol puro o éter para limpiar la piel del paciente, ya que pueden aumentar la irritación de la piel. Resistencia.

- seque enérgicamente la piel del paciente con una toalla o gasa, con el fin de eliminar la grasa y las células cutáneas. Y mejorar la adherencia de los electrodos.

4. Asegúrese de que los electrodos de desfibrilación multifunción no estén caducados y que el electrodo el embalaje está intacto.

5. Coloque las almohadillas de electrodos sobre el tórax del paciente siguiendo las instrucciones del envase. Coloque las palas firmemente sobre el tórax desnudo en posición anterolateral, una


Farm. Graciela Rey
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

debajo de la clavícula derecha y la otra en la axila izquierda. En pacientes pediátricos, si las palas son demasiado grandes para el tamaño del paciente y existe peligro de que se produzca un arco eléctrico a través de ellas, una debe colocarse en la parte superior de la espalda, debajo del omóplato izquierdo, y la otra en la parte delantera, a la izquierda del esternón. Esta posición se conoce como anteroposterior.

Posición ~~anterolateral~~



: Colocación de los electrodos en posición ~~anterolateral~~ (adulto y pediátrico)

Posición anteroposterior



Colocación de electrodos en posición anteroposterior (pediátrico)

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones especiales al colocar las almohadillas de electrodos:

Pacientes pediátricos. Para pacientes menores de 8 años o con un peso inferior a 25 kg (55 lb), asegúrese de que el equipo esté configurado en modo pediátrico.

Pacientes con obesidad o con mamas grandes. Coloque los electrodos sobre una superficie plana del torso. Si la piel se pliega o el tejido mamario impide una correcta adherencia, puede ser necesario estirar los pliegues para lograr una superficie plana.

- Pacientes delgados. Presione las almohadillas de electrodos sobre la superficie del torso, siguiendo el contorno de las costillas para evitar burbujas de aire.

Pacientes con marcapasos. Coloque los electrodos de desfibrilación al menos a 10 cm del paciente. generador y seguir el mismo protocolo que para cualquier paciente con paro cardíaco.

Pacientes con desfibriladores implantados. Coloque los electrodos de desfibrilación a una distancia mínima de 12-15 cm del generador y siga el mismo protocolo que para cualquier paciente con paro cardíaco.

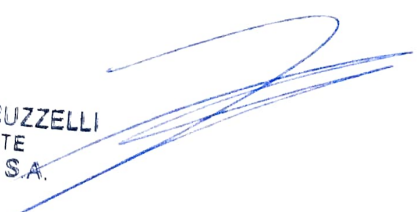
6. Conecte el cable del electrodo al REANIBEX 100 si no se ha conectado previamente

Advertencia: RIESGO DE ESTRANGULACIÓN

Coloque con cuidado los electrodos de desfibrilación para reducir la posibilidad de que el paciente se enrede o estrangule.

Procedimiento de desfibrilación externa automatizada


Farm. Graciela Rcy
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

Después de preparar la piel del paciente, realice los siguientes pasos para realizar la desfibrilación automatizada:

1. Encendido del equipo. El REANIBEX 100 se enciende automáticamente al abrir la tapa. Si no se enciende automáticamente, utilice el botón de encendido/apagado para encenderlo.
2. Seleccione el tipo de paciente. El REANIBEX 100 emitirá un mensaje de voz indicando el tipo de paciente seleccionado (adulto/pediátrico). Si el tipo de paciente no es adecuado, cámbielo pulsando el botón de selección. Si el tipo de paciente seleccionado es pediátrico, el LED sobre el botón de selección se encenderá.
3. Conecte los electrodos. Tras encenderse, el REANIBEX 100 comprobará que los electrodos estén correctamente conectados. Si los electrodos no están correctamente conectados al paciente, se mostrará el siguiente mensaje: "APLIQUE LOS ELECTRODOS AL PACIENTE" o "COMPROBAR EL BUEN CONTACTO DE LOS ELECTRODOS".
4. Siga las instrucciones de voz. Tras conectar correctamente los electrodos, el REANIBEX 100 comenzará a analizar la señal de ECG y emitirá el siguiente mensaje de texto y la instrucción de voz : «NO TOCAR AL PACIENTE».

Durante el análisis de la señal, el equipo emitirá el siguiente mensaje de texto y mensaje de voz: "ANALIZANDO RITMO CARDÍACO".

No mueva el equipo durante el análisis. Mover el equipo puede generar diagnósticos erróneos. No toque al paciente ni el equipo durante el análisis.

Una vez finalizado el análisis pueden producirse dos situaciones:

El equipo detecta un ritmo cardíaco que no requiere desfibrilación y emite el mensaje «NO SE RECOMIENDA DESCARGA». El botón de descarga permanecerá desactivado, ya que no es necesario administrarla.

El equipo guiará al reanimador para realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP) y emitirá el siguiente mensaje: "INICIAR RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR". Durante este tiempo, configurable, no se realiza el análisis de la señal de ECG. Además, sonará un metrónomo para ayudar a aplicar las frecuencias de compresión y la ventilación al paciente con la frecuencia y la relación adecuadas.

Transcurrido el tiempo de RCP, el equipo iniciará automáticamente un nuevo análisis.

SE ACONSEJA CHOQUE

El equipo detecta un ritmo cardíaco que requiere desfibrilación y emite el mensaje "DESCARGA RECOMENDADA". Una vez detectado, se detiene el análisis del ritmo y se carga la energía. El REANIBEX 100 carga la energía automáticamente. La señal de ECG del paciente no se analiza durante la carga de energía ni mientras el equipo se prepara para administrar la descarga. Una vez finalizada la carga, el equipo está listo para administrar la descarga.

5. Administración de descarga en modo semiautomático. Si el REANIBEX 100 está configurado en modo semiautomático, el botón de descarga parpadeará y se emitirán los siguientes mensajes de voz: «NO TOQUE AL PACIENTE», «TOQUE EL BOTÓN INTERMITENTE PARA ADMINISTRAR LA DESCARGA».

Antes de administrar la descarga, asegúrese de que nadie toque al paciente, la cama ni el equipo, y de que no haya nada conectado al paciente. Para administrar la descarga, presione el botón de descarga.

Si la descarga no se administra en menos de 15 segundos, aparecerá el mensaje ""SHOCK DELIVERED".

6. Administración de la descarga en modo totalmente automático. Si el REANIBEX 100 está configurado en modo totalmente automático, el botón de descarga parpadeará para avisar al usuario de que se recomienda una descarga y se emitirá el siguiente mensaje de voz: "NO TOCAR AL PACIENTE" 5 segundos antes de administrar la descarga. Asegúrese de que nadie toque al


Farm. Graciela Rcy
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

paciente, la cama ni el equipo, y de que no haya nada conectado al paciente. La descarga se administrará automáticamente.

7. Dependiendo de la configuración del equipo (número de descargas consecutivas), puede iniciarse un nuevo ciclo de análisis después de que el REANIBEX 100 administre la descarga. Esto ocurrirá hasta que se administre el número de descargas establecido en el parámetro "Descargas consecutivas". Sin embargo, si el número de descargas consecutivas se ha establecido en 1, el equipo entrará en tiempo de RCP.

PRUEBAS

El modo Información se puede utilizar para forzar al equipo a realizar pruebas manuales para comprobar la integridad del equipo

Al encenderse y durante el funcionamiento con el paciente, el equipo realiza diversas pruebas y comprobaciones automáticas para garantizar el correcto funcionamiento de todos sus componentes. Las pruebas manuales complementan las comprobaciones automáticas del equipo.

Además de estas pruebas manuales realizadas por el usuario, cuando el equipo está apagado y equipado con batería, realiza pruebas automáticas diarias, semanales y mensuales. También realiza una prueba automática en la batería cada vez que detecta una batería nueva.

Advertencia:

Asegúrese de que el REANIBEX 100 no esté conectado a un paciente cuando se realicen pruebas en el modo de configuración.

MANTENIMIENTO

Aunque el REANIBEX 100 realiza pruebas automáticas al encenderse, durante el funcionamiento y periódicamente al encenderse o apagarse, esto no reemplaza la necesidad de realizar un mantenimiento regular para garantizar el correcto funcionamiento de todos sus componentes. Se recomienda realizar un mantenimiento periódico para complementar las pruebas automáticas.

Se recomiendan los siguientes pasos para inspeccionar el equipo y los accesorios:

- Asegúrese diariamente de que el REANIBEX 100 esté limpio y que ni el equipo ni sus accesorios están visiblemente dañados.

Asegúrese de que los conectores y electrodos no estén dañados ni agrietados, y de que los cables no estén rotos. Asegúrese de que las conexiones sean seguras. Compruebe que los electrodos de desfibrilación no hayan caducado y que exista suficiente cantidad de ellos disponibles.

- Compruebe que la batería esté cargada y sin daños.

Después de cada uso, asegúrese de tener todos los suministros, accesorios y repuestos necesarios para el siguiente uso.

Asegúrese de que los electrodos de desfibrilación no estén caducados ni dañados

LISTA DE VERIFICACIÓN

A continuación se muestra una lista de comprobaciones y verificaciones recomendadas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda revisar el REANIBEX 100, sus accesorios y fungibles después de cada uso.



Farm. Graciela Rcy
Directora Técnica
M.N. 12.620



IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.

El equipo está sucio	Limpiar el equipo
El equipo presenta grietas o daños.	Contacte con el Servicio Técnico Autorizado
Conectores y cables dañados o rotos	Sustituya los elementos que estén dañados y contacte con el Servicio Técnico Autorizado.
Hay suficientes electrodos de desfibrilación presentes	Ninguno
Electrodos de desfibrilación caducados o abiertos	Reemplazar los electrodos de desfibrilación
Batería dañada o con fugas	Reemplace la batería
Prueba de hardware realizada	Si aparece un error, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpe el REANIBEX 100 después de haberlo utilizado para tratar a un paciente. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones al limpiar el REANIBEX 100:

Utilice un paño suave ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza abrasivos ni inflamables.

- No sumerja el equipo en líquidos y asegúrese de que los líquidos de limpieza no entren en el equipo.
- Limpie el equipo con las baterías instaladas para evitar que los líquidos entren en la batería. contactos.
- Retire cualquier resto adherido al equipo antes de limpiarlo.
- Utilice únicamente los siguientes productos:

Alcohol Isopropílico o etílico (disuelto al 70% en agua)

Compuestos de amonio cuaternario

Peróxido de hidrógeno

Agua jabonosa

Precuaciones:

- El REANIBEX 100 y sus accesorios no deben esterilizarse ni sumergirse en líquidos a menos que se indique lo contrario en las instrucciones suministradas con los accesorios.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos ni disolventes fuertes como lejía, disolventes a base de lejía, acetona o agentes de limpieza a base de cetona.
- No utilice agentes de limpieza inflamables ni mezcle desinfectantes (como lejía o amoníaco), ya que esto puede generar gases peligrosos.

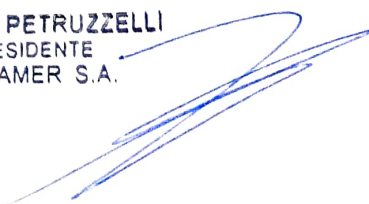
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO . Antes de limpiar, apague el REANIBEX 100 y desconéctelo de la batería.

ALMACENAMIENTO

Siga las siguientes instrucciones para almacenar el equipo cuando el REANIBEX 100 no esté en uso:

- Conservar el REANIBEX 100 con las baterías de Li-MnO₂ instaladas a una temperatura entre 0°C y 50°C.
- Conservar el REANIBEX 100 sin las baterías instaladas a una temperatura entre -25°C y 70°C.


Farm. Graciela Roy
Directora Técnica
M.N. 12.620


IGNACIO PETRUZZELLI
PRESIDENTE
GIKRAMER S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: GIKRAMER S.A. ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.