

EvenCare[®]

G3TM



Sistema de control de glucosa en sangre

Guía del usuario



REF


EZEQUIEL SOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

MPH3540

APROBADO por Ivy Hu a las 11:38, el 1 de julio de 2022.

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre EvenCare G3 para ayudar a monitorear los niveles de glucosa en sangre de sus pacientes. El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre EvenCare G3 está diseñado para ser preciso y fácil de usar. Este manual del usuario contiene toda la información necesaria para usar y mantener el Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre EvenCare G3. Por favor léalo cuidadosamente antes de usar el Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre EvenCare G3.

Este sistema es sólo para Rx.

Si necesita ayuda, llame al Centro de Servicio Técnico de Medline al 1-866-274-2131, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 (hora central de los EE. UU.)



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

El sistema de monitorización de glucosa en sangre EvenCare G3 está diseñado para la medición cuantitativa de glucosa en muestras de sangre capilar entera fresca extraída de las yemas de los dedos, el antebrazo o la palma de la mano. Está indicado para utilizarse en varios pacientes en un entorno clínico por parte de profesionales de la salud, como ayuda para monitorizar los niveles en Diabetes Mellitus. Este sistema sólo debe utilizarse con dispositivos de punción de un solo uso y autodesactivables. No está indicado para el diagnóstico o cribado de la diabetes ni para uso neonatal.

Importante:

- Deshidratación: una deshidratación grave puede dar lugar a resultados inexactos en las pruebas de glucemia.
- Intervalo de hematocrito: un intervalo de hematocrito superior al 55 % o inferior al 30 % puede provocar resultados inexactos en la prueba de glucemia.
- No debe utilizarse en neonatos.
- Las pruebas se realizan fuera del organismo (uso diagnóstico in vitro).



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Instrucciones importantes de seguridad

- Siga las precauciones estándar cuando manipule o utilice este dispositivo. Todas las partes del sistema de monitorización de glucosa deben considerarse potencialmente infecciosas y son capaces de transmitir patógenos sanguíneos entre pacientes y profesionales de la salud. Para más información, consulte la "Guía de precauciones de aislamiento": Prevención de la transmisión de agentes infecciosos en entornos sanitarios 2007", <http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html> .
- El medidor debe desinfectarse después de su uso con cada paciente. Este sistema de monitorización de glucosa en sangre sólo puede utilizarse para realizar pruebas a varios pacientes cuando se sigan las precauciones estándar y los procedimientos de desinfección del fabricante.
- Con este dispositivo sólo deben utilizarse dispositivos de punción de un solo uso con autodesactivación.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Los enlaces a las notificaciones de salud pública y a las directrices sobre prácticas normalizadas son los siguientes:

- "Notificación de salud pública de la FDA: *Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication*" (2010)
<http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- "Recordatorio clínico de los CDC: *Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens*" (2010)
[http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick- DevicesBGM.html](http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingertick-DevicesBGM.html)


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

1. Acerca del sistema de control de glucosa en sangre EvenCare G3	
Contenido del kit.....	6
Medidor EvenCare G3	7
Pantalla	9
Tira reactiva EvenCare G3	13
Soluciones de control EvenCare G3.....	14
2. Configuración del contador	
Insertar la batería.....	15
Ajustar la fecha y la hora	17
Activar/desactivar la alarma	19
Ajuste del modo bloqueo QC	21
Pruebas de soluciones de control.....	23
3. Medición de la glucemia de un paciente	
Preparación del dispositivo de punción	30
Pruebas en lugares alternativos (AST por su sigla en inglés)	32
Cómo realizar un análisis de glucosa en sangre.....	34
Eliminación de tiras reactivas y lancetas usadas	38

Resultados de la prueba de glucosa en sangre.....	39
---	----

5. Visualización de la memoria del medidor

Visualización de lecturas y promedios registrados.....	41
--	----

6. Cuidado del contador 45

7. Solución de problemas 53

8. Especificaciones del sistema 57

9. Garantía del producto 58


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

1. Acerca del sistema de control de glucosa en sangre EvenCare G3

Contenido del kit

El sistema de control de glucosa en sangre EvenCare G3 incluye los siguientes elementos:

- Medidor EvenCare G3
- Guía del usuario
- Maletín de transporte



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Medidor EvenCare G3



Puerto para tiras reactivas

Pantalla de visualización

Muestra los resultados de los análisis de glucosa en sangre, los valores de la memoria, las medias y otros mensajes.

Botón de inicio

Manténgalo pulsado para encender o apagar el medidor.

Botones de desplazamiento (▼▲)

Pulse este botón para acceder al modo de control al insertar la tira reactiva, durante la configuración del medidor o para ver los resultados y promedios registrados.



Puerto de datos

La función aún no está disponible.


Compartimento de la batería

Contiene una batería de litio de 3 V (CR2032).

Eyector de tiras reactivas

Deslice para expulsar la tira reactiva usada.

Pantalla de visualización del contador

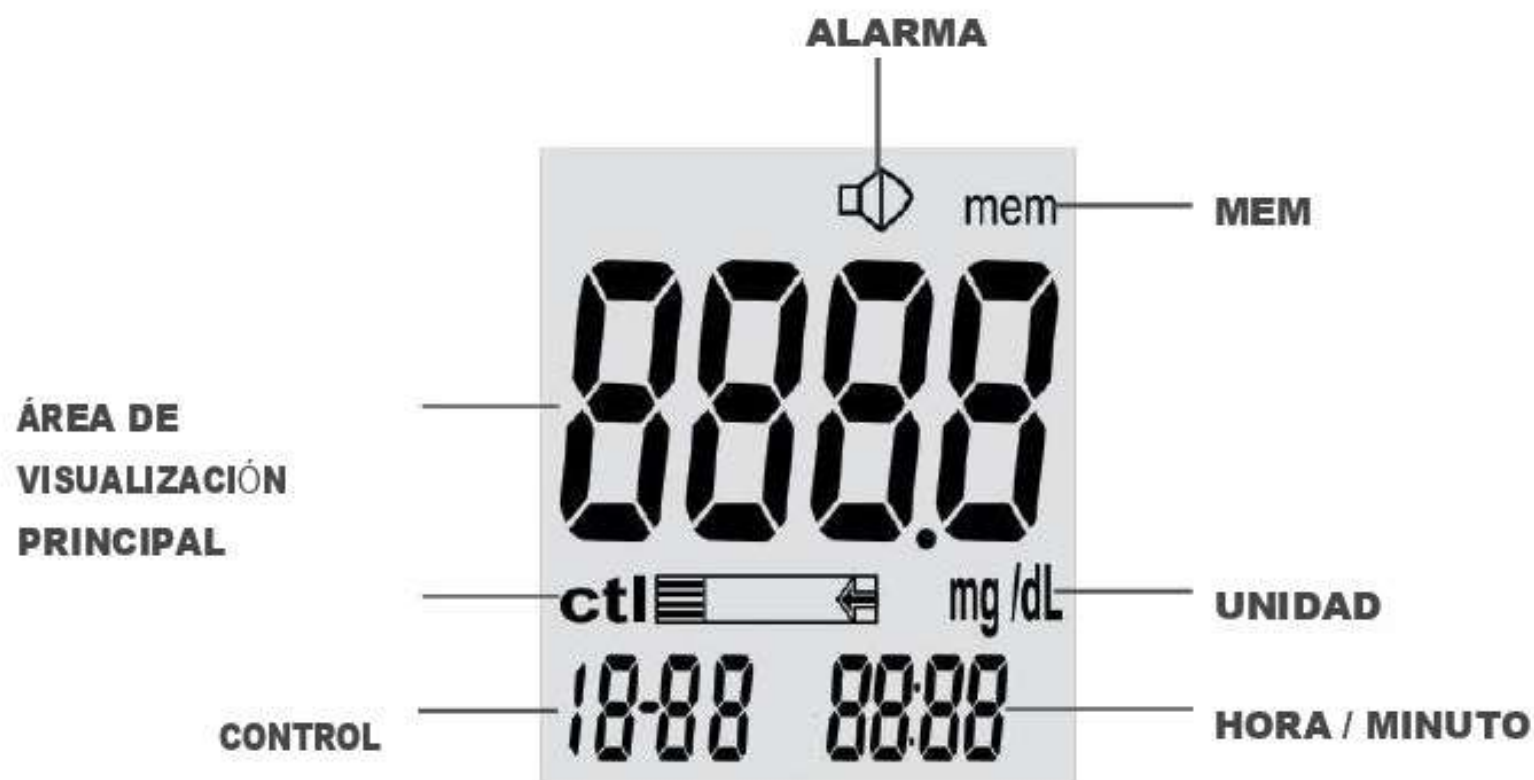

CARA FELIZ/TRISTE



BATERIA

TEMPERATURA



GOTA DE SANGRE

MEDIA DIARIA

**DAY
AVG**

**AM
PM**

AM / PM


EZEQUIEL SOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

AREA PRINCIPAL DE VISUALIZACIÓN ...Muestra los resultados de las pruebas, los resultados registrados, los promedios de los resultados y los mensajes.

ALARMA.....Indica que la función alarma está activada
(Ver Activar/Desactivar la alarma).

BATERÍAAparece cuando la batería está baja y es necesario sustituirla (Consulte Inserción de la batería).

MEM.....Indica que el número en el área de visualización es un resultado de prueba registrado (consulte Visualización de la memoria del contador).

UNIT.....Indica la unidad de medida (mg/dL).

CONTROL..... Indica una prueba de solución de control
(Consulte Prueba de la solución de control).


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

TIRA DE PRUEBAIndica que el medidor está preparado para que se inserte la tira reactiva.

GOTA DE SANGREAparece cuando se introduce una tira reactiva en el medidor y el medidor está listo para la prueba.

MEDIA DIARIA.....Aparece cuando se visualizan los promedios diarios
(Consulte Visualización de la memoria del medidor).

CARA FELIZ/TRISTE.....Indica si la electrónica del medidor funciona correctamente.

TEMPERATURA.....Aparece cuando hace demasiado frío o demasiado calor para realizar la prueba.


(Fuera del rango de funcionamiento de 50°F - 104°F).


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Tira reactiva de glucosa en sangre EvenCare G3

PUNTOS DE CONTACTO

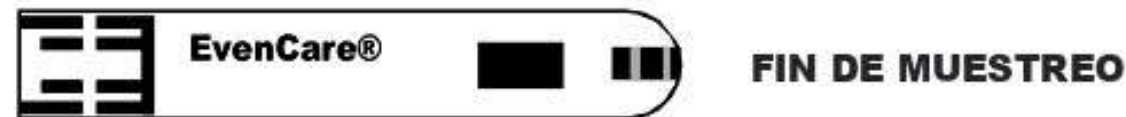

PUNTOS DE CONTACTO

Inserte este extremo en el puerto para tiras reactivas del medidor.

EXTREMO DE LA MUESTRA

Aplique aquí sangre o solución de control.

Importante:

- Utilice únicamente las tiras reactivas de glucosa en sangre EvenCare G3 con el medidor EvenCare G3. Otras marcas de tiras reactivas no funcionarán con este medidor.
- En el caso de las tiras reactivas de aluminio, consérvelas en su envoltorio hasta el momento de utilizarlas.

- Para las tiras reactivas en frasco, mantenga el frasco de tiras reactivas bien tapado y alejado de la luz solar en todo momento. Vuelva a colocar la tapa inmediatamente después de sacar una tira reactiva del frasco.
- Compruebe la fecha de vencimiento impresa en el frasco de tiras reactivas. NO utilice tiras reactivas vencidas.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Soluciones para el control de la glucosa EvenCare G3

Comuníquese con el proveedor local para pedir la solución de control. Si no la tienen en stock, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medline para realizar un pedido.

EvenCare G3 Glucose Control Solution es la solución de concentración de glucosa estándar necesaria para realizar una prueba de solución de control (Ver Prueba de la solución de control).

Está disponible en dos niveles. La Solución de Control de Glucosa EvenCare G3 Nivel 1 (tapa blanca) ayuda a validar el rendimiento del sistema en una lectura de glucosa en sangre de rango bajo, mientras que la Solución de Control de Glucosa Nivel 3 (tapa azul) ayuda a validar el rendimiento del sistema en una lectura de glucosa en sangre de rango alto. Realice la prueba de control para asegurarse de que el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente juntos para practicar el procedimiento de prueba y cuando utilice un nuevo paquete de tiras reactivas de glucosa en sangre EvenCare G3.




EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

2. Configuración del contador

Cómo insertar la batería

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3
- Una pila de litio de 3 V (CR2032)

Paso 1. Retire la tapa del compartimento de las pilas.

Paso 2. Si hay una pila vieja en el compartimento, sáquela. Inserte una pila nueva, con el polo positivo (+) hacia arriba.

Paso 3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.



IMPORTANTE:

Elimine las baterías usadas de acuerdo con las reglamentaciones locales.

NOTA:

Los resultados registrados no se eliminan al cambiar la batería.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Configuración de la fecha y la hora

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3

NOTA:

- Si la fecha y la hora del medidor EvenCare G3 no están configuradas, los resultados de las pruebas no se almacenarán en la memoria del medidor.
- El medidor le pedirá automáticamente que configure la fecha y la hora después de cambiar la batería.



Paso 1. Encienda el medidor

Mantenga pulsada ◀ la flecha hacia abajo para encender el medidor. Si la tira reactiva parpadea en la pantalla, deberá elegir el modo SET (CONFIGURAR) para cambiar la fecha y la hora. Pulse la flecha ▼ dos veces. La palabra SET aparece ▶ en la pantalla.



ingresará automáticamente la fecha y la hora.
Continúe con el paso 2).



EZEQUIEL SOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Paso 2. Ingrese el año

El año parpadeará. Pulse los botones de desplazamiento ▼▲ para seleccionar el año correcto. Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección y avanzar para ajustar el mes.



Paso 3. Ingrese el mes

El mes parpadeará. Pulse los botones de desplazamiento ▼▲ para seleccionar el mes correcto. Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección y avanzar para ajustar la fecha.



Paso 4. Ingrese el día

El día parpadeará. Pulse los botones de desplazamiento ▼▲ para seleccionar la fecha correcta. Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección y avanzar para ajustar el formato de hora.



Paso 5. Ajuste el formato de la hora a 12 horas o 24 horas

Pulse el botón arriba ▲ para seleccionar el formato deseado (12 horas o 24 horas). Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección y avanzar para ajustar la hora.

Paso 6. Ajuste la hora

La hora parpadeará. Pulse los botones de desplazamiento ▼▲ para seleccionar la hora correcta. Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección y avanzar para ajustar los minutos.

Paso 7. Ajustar los minutos

Los minutos parpadearán. Pulse los botones de desplazamiento ▼▲ para seleccionar los minutos correctos. Pulse la flecha hacia abajo para confirmar la selección.

El medidor volverá al modo de prueba.

Comience la prueba introduciendo una tira reactiva o mantenga pulsada la flecha hacia abajo durante 3 segundos para apagar el medidor.



Activación/desactivación de la alarma

Configure el medidor para que emita un pitido que le avise de mensajes importantes.




Paso 1. Mantenga pulsada la flecha hacia abajo para encender el medidor.

Paso 2. El medidor realizará una serie de autocomprobaciones. El ícono ☺ aparecerá en la pantalla cuando todas las pruebas hayan finalizado. Si aparece el ícono ☹ o otros mensajes de error (Err 2, Err 3, etc.), consulte la sección Solución de problemas.

Paso 3. Navegue hasta el ajuste de la alarma pulsando el botón ▼ hacia abajo tres veces. La pantalla mostrará el ícono de la alarma.

Paso 4. Pulse la flecha hacia abajo para ingresar en el modo de ajuste de la alarma.

Paso 5. Pulse el botón arriba ▲ para encender o apagar la alarma.

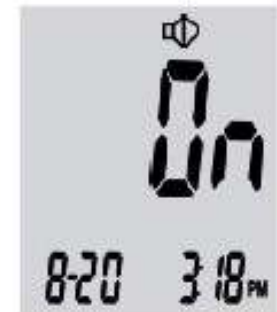

mostrará en todo momento.

Paso 6. Pulse y suelte  . El medidor vuelve al modo de prueba.

Comience el análisis introduciendo una tira reactiva o mantenga pulsada la flecha hacia abajo durante 3 segundos para encender el medidor.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957


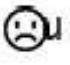
Ajuste del modo *QC Lock* (bloqueo de control)

El medidor EvenCare G3 tiene la opción de ponerse en modo de bloqueo QC. Cuando el modo QC está activado y no se han realizado pruebas de control en las últimas 24 horas, el mensaje "qC" parpadea en la pantalla. Es necesario realizar dos pruebas con solución de control antes de poder realizar una prueba de glucosa.

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3

Paso 1. Mantenga pulsada la flecha hacia abajo para encender el medidor.

Paso 2. El medidor realizará una serie de autocomprobaciones. El ícono  aparecerá en la pantalla cuando se hayan completado todas las pruebas. Si aparece el ícono  u otros mensajes de error (Err 2, Err 3, etc.), consulte la Solución de problemas.

Paso 3. Pulse el botón abajo ▼ cuatro veces para llegar al modo de bloqueo QC.
La pantalla mostrará el ícono "ctl".

Paso 4. Pulse la flecha hacia abajo para entrar en el modo de ajuste QC.

Paso 5. Pulse el botón arriba ▲ para activar o desactivar el modo de bloqueo QC.

Paso 6. Pulse la flecha hacia abajo. El medidor vuelve al modo de prueba.

Inicie la prueba introduciendo una tira reactiva o mantenga pulsada la tecla
← durante 3 segundos para apagar el medidor.

Cuando el modo de bloqueo QC está activado y no se han realizado pruebas de control en las últimas 24 horas, en la pantalla parpadeará "qC". Las pruebas de control L1 y L3 deben completarse antes de que el medidor realice una prueba de glucosa en sangre.



Pruebas con solución de control

El propósito de la prueba con solución de control es validar que el Medidor EvenCare G3 funciona correctamente con las tiras reactivas. Las soluciones de control no están incluidas en el kit. Póngase en contacto con su proveedor local para solicitar las soluciones de control de glucosa EvenCare G3.

Debe realizar una prueba con solución de control cuando:

- Utiliza el medidor por primera vez.
- Utiliza un nuevo paquete de tiras reactivas de glucosa en sangre EvenCare G3.
- Al menos una vez por semana para verificar que el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente juntos.
- Para las tiras del frasco, si el frasco de tiras reactivas se deja abierto.
- Si el medidor se cae.
- Si sospecha que el medidor y las tiras reactivas no funcionan correctamente juntos.
- Si los resultados de las pruebas no coinciden con cómo se siente el paciente.
- Si las lecturas de un paciente parecen ser anormalmente altas o bajas.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

- Cuando se está practicando la técnica para realizar las pruebas.

Pruebas de soluciones de control

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3
- Soluciones de control de glucosa EvenCare G3 (Nivel 1 o Nivel 3)
- Una nueva tira reactiva de glucosa en sangre EvenCare G3

NOTA:

- Utilice únicamente las soluciones de control de glucosa EvenCare G3 con las tiras reactivas de glucosa en sangre EvenCare G3. Otras marcas de soluciones de control producirán resultados inexactos.
- Compruebe siempre la fecha de vencimiento de la solución de control. NO utilice una solución de control vencida.
- Anote la fecha en el frasco cuando abra un nuevo frasco.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

- Las soluciones de control pueden utilizarse hasta tres meses después abiertas o hasta la fecha de vencimiento indicada en el frasco, lo que ocurra primero.
- NO CONGELAR. Almacene las soluciones de control a una temperatura ambiente de 59°F - 86°F.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Paso 1. Introduzca una tira reactiva en el medidor con los puntos de contacto orientados hacia arriba. Asegúrese de introducir firme y completamente la tira reactiva en el medidor. El medidor se encenderá automáticamente.



Importante:

- No utilice tiras reactivas vencidas. Compruebe la fecha de vencimiento impresa en el envase de las tiras reactivas.
- En el caso de tiras reactivas envueltas en papel de aluminio, utilice cada tira reactiva inmediatamente después de sacarla de su envoltorio.
- En el caso de tiras reactivas en frasco, utilice cada tira reactiva inmediatamente después de sacarla del frasco.
- En el caso de tiras reactivas en frasco, cierre el tapón del frasco inmediatamente después de extraer una tira reactiva.
- No utilice tiras reactivas húmedas, dobladas, rayadas o visiblemente dañadas.
- Mantenga las tiras reactivas alejadas de la luz solar directa y del calor.

cuando abra un nuevo frasco de tiras reactivas. Deseche las tiras reactivas que no haya utilizado seis meses después de abrirlas.

- Las tiras reactivas en frasco pueden utilizarse hasta seis meses después de abiertas o hasta la fecha de vencimiento indicada en el frasco, lo que ocurra primero.
- Las tiras reactivas envueltas en papel de aluminio son válidas hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Asegúrese de que realiza la prueba en un entorno de entre 50°F-104°F.
- Si el medidor muestra un icono de temperatura, significa que el medidor ha estado expuesto a una temperatura extrema, fuera del rango de temperatura de funcionamiento. Mueva el medidor a un área que esté entre 50°F-104°F y espere de 10 a 15 minutos para que alcance la nueva temperatura antes de usarlo. Su medidor no comenzará la prueba si detecta que está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

Paso 2. El medidor realizará una serie de autocomprobaciones. El icono de cara feliz aparecerá en la pantalla cuando se hayan completado todas las pruebas. Si aparece el icono de cara triste u otros mensajes de error (Err 2, Err 3, etc.), consulte la Solución de problemas.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

NOTA:

- El mensaje "qC" parpadea y "ctl" aparece en la pantalla cuando el modo QC está activado y no se han realizado pruebas de control en las últimas 24 horas. Deben realizarse pruebas de control antes de que el medidor realice una prueba de glucosa en sangre.

Paso 3. Espere hasta que parpadeen los iconos de la gota de sangre y la flecha junto al ícono de la tira reactiva en la pantalla del medidor, pulse el botón abajo ▼ o arriba ▲ para entrar en el modo de prueba de la solución de control.

El icono "**ctl**" aparecerá junto al icono de la tira reactiva en la pantalla del medidor, indicando que el medidor está en modo de prueba con solución de control. Pulse el botón abajo ▼ o el botón arriba ▲ para salir del modo de prueba con solución de control.



Paso 4. Cuando aparezca el icono de la gota de sangre en la pantalla, eche una gota de la solución de control sobre una superficie limpia, seca y no absorbente, como el tablero de la mesa.

Acerque suavemente la tira reactiva a la gota de solución de control de forma que el extremo de muestreo de la tira reactiva toque la solución de control. La tira reactiva absorberá automáticamente la gota de solución de control.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE




JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

NOTA:

- Vuelva a colocar la tapa de la solución de control inmediatamente después de su uso.
- Si la muestra es insuficiente, el icono de la tira parpadeará y se mostrará el mensaje "Err". Expulse y deseche la tira reactiva utilizada. Repita la prueba de la solución de control con una tira reactiva nueva.

Paso 5. La pantalla mostrará barras de cuenta atrás - - - -. Transcurridos 6 segundos, aparecerá en pantalla el resultado de la prueba de la solución de control.

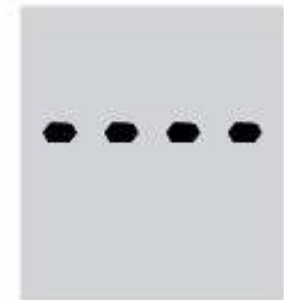

Paso 6. Para las tiras reactivas en frasco, compare la lectura en la pantalla con el rango de solución de control impreso en el frasco de tiras reactivas. Para las tiras reactivas envueltas en papel de aluminio, compare la lectura en la pantalla con el rango de solución de control impreso en la caja.

NOTA:

Si el resultado de la prueba de control está fuera del rango proporcionado, haga lo siguiente:

- No mida la glucemia del paciente.
- Asegúrese de que está utilizando la Solución de Control de Glucosa EvenCare G3.
- Asegúrese de que el entorno de prueba está entre 50°F-104°F.
- Asegúrese de que la solución de control de glucosa y las tiras reactivas no han vencido.
- Repita la prueba con una nueva tira reactiva.
- Los resultados de la prueba de solución de control se almacenarán en la memoria del medidor con la etiqueta ctl.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico de Medline llamando al 1-866-274-2131 entre las 8:00 y las 17:00 (hora central de los EE. UU.), de lunes a viernes.

Paso 7. Elimine la tira reactiva en un contenedor de residuos adecuado.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Importante:

- NO reutilice las tirasreactivas.
- Repita con otro nivel de solución de control.

3. Medición de la glucemia de un paciente

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3
- Una nueva tira reactiva de glucosa en sangre EvenCare G3
- Dispositivo de punción de un solo uso autodesactivable

Dispositivo de punción

Utilice un dispositivo de punción de un solo uso con autodesactivación para tomar la muestra de sangre. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo debe utilizarse el dispositivo de punción.

Importante:

- Póngase en contacto con su proveedor local para solicitar dispositivos de punción de un solo uso con desactivación automática.
- Los usuarios deben seguir las precauciones estándar cuando manipulen o utilicen este dispositivo. Todas las partes del sistema de monitorización de glucosa deben considerarse potencialmente infecciosas y son capaces de transmitir patógenos sanguíneos entre pacientes y profesionales de la salud.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Siga las directrices prácticas que se indican a continuación:

Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos (BMBL) en
<http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/>

"Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Guía
aprobada -Tercera edición" Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M29-
A3.




EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Información importante sobre las pruebas en lugares alternativos (AST)

El sistema de control de glucosa en sangre EvenCare G3 puede medir la glucosa en sangre en zonas distintas de la yema del dedo, como la palma de la mano y el antebrazo (pruebas en lugares alternativos o AST). Las pruebas en lugares alternativos pueden ser menos dolorosas que las pruebas en la yema del dedo. Debido a las diferencias fisiológicas entre la yema del dedo, la palma de la mano y el antebrazo⁽¹⁾, los resultados de las pruebas en lugares alternativos pueden ser significativamente diferentes de los resultados de la yema del dedo en determinadas condiciones. Las pruebas en lugares alternativos sólo deben realizarse en condiciones de glucemia constante.

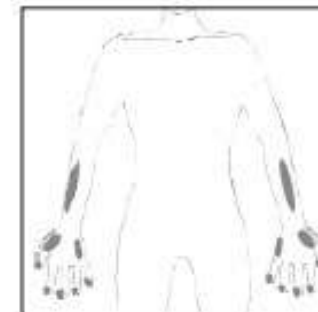

HAGA AST SÓLO en los siguientes casos:

- Antes de las comidas o en ayunas (más de 2 horas desde la última comida).
- 2 horas o más después de tomar insulina.
- 2 horas o más después de hacer ejercicio.

Las mediciones en sitios alternativos nunca deben utilizarse para calibrar los monitores continuos de glucosa (MCG). Las mediciones en sitios alternativos nunca deben utilizarse para calcular la dosis de insulina.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Las pruebas en lugares alternativos NO DEBERÍAN utilizarse cuando:

- Los pacientes no son conscientes de la hipoglucemia.
- En las 2 horas siguientes a una comida, ejercicio o medicación.
- Cuando se debe manejar alguna maquinaria o conducir un automóvil.
- En momentos de estrés.
- Si el paciente está enfermo.
- Si la glucemia del paciente es baja.
- Para pruebas de hiperglucemia.
- Los resultados rutinarios de glucosa de los pacientes suelen ser fluctuantes.

NOTA:

Si los resultados de las pruebas en lugares alternativos no coinciden con el estado del paciente, utilice en su lugar la prueba de la yema del dedo.

Referencia:

1. Shu M, Osamu F, Kazuhiro H, Yoshihito A: La tasa de detección de la hipoglucemia difiere entre los distintos centros de control de la glucemia. Diabetes Care 28(3):708-709, 2005


Cómo realizar la prueba

Paso 1. Introduzca una tira reactiva en el medidor.

Importante:

- El usuario debe ponerse un nuevo par de guantes limpios antes de realizar la prueba a cada paciente.

Paso 2. El medidor realizará una serie de autocomprobaciones. El icono de cara feliz aparecerá en la pantalla cuando todas las pruebas hayan finalizado. Si aparece el icono de cara triste u otros mensajes de error (Err 2, Err 3, etc.), consulte la Solución de problemas.

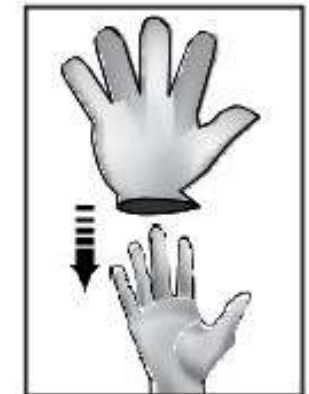


Paso 3. Para la prueba de la yema del dedo:

Lave bien la mano del paciente y séquela bien. Sostenga el dispositivo de punción de un solo uso contra el lateral de la yema del dedo del paciente y realice la punción en el dedo. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo debe utilizarse el dispositivo de punción.




CONSEJOS:

- Masajear suavemente la mano y el dedo hacia el lugar de punción para formar una gota de sangre. No "ordeñe" ni apriete alrededor del lugar de punción.
- Pinche en el lateral de la yema del dedo para evitar el dolor. Para evitar callosidades, elija cada vez un lugar diferente para la prueba.
- Si se utilizan toallitas con alcohol para limpiar la yema del dedo, asegúrese de que la yema del dedo esté completamente seca antes de obtener la muestra de sangre.

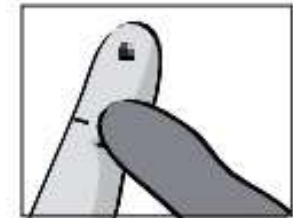

Para pruebas en la palma de la mano y el antebrazo (AST):

Sujete el dispositivo de punción contra el lugar de la prueba (base de la palma de la mano o antebrazo). Evite la zona de punción con venas, lunares, exceso de vello o hueso. Presione firmemente el dispositivo de punción contra la zona de punción y realice la punción. No levante el dispositivo de punción.

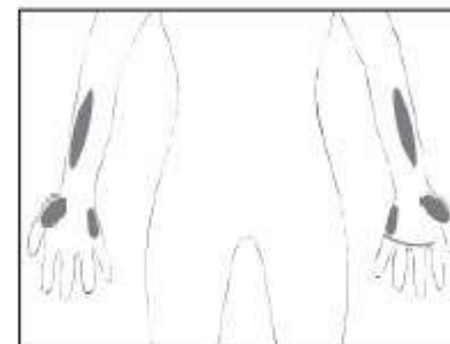

Para las zonas de prueba del antebrazo, aplique y libere presión en el dispositivo de punción durante unos segundos mientras mantiene el dispositivo de punción en contacto constante con la piel. Cuando se forme una gota de sangre, levante el dispositivo de punción en línea recta sin extender la sangre.

NOTA:

- Deseche las lancetas adecuadamente como residuos de riesgo biológico.

Paso 4. Cuando aparezca el icono de la gota de sangre en la pantalla acerque suavemente la tira reactiva al lugar de la prueba y toque la gota de sangre.

La tira reactiva extraerá automáticamente la gota de sangre.



NOTA:

- NO toque el extremo de muestreo de la tirareactiva.
- NO extienda la gota de sangre al extremo de muestreo.
- NO añada ni aplique una segunda gota de sangre. Esto puede provocar un resultado falso.
- Cuando la muestra de sangre sea insuficiente, aparecerá el icono de la tira y el mensaje "Err". Expulse y deseche la tira reactiva usada. Repita la prueba con una tira reactiva nueva.

Paso 5. La pantalla mostrará barras de cuenta atrás ----. Después de 6 segundos, el resultado de la prueba aparecerá en la pantalla. El resultado de la prueba se almacenará automáticamente en la memoria del medidor (Ver Visualización de la Memoria del Medidor).



Paso 6. Expulse la tira reactiva a un contenedor de residuos adecuado.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

PRECAUCIÓN:

- Si ve "HI" o "LO" en la pantalla, el nivel de glucosa en sangre del paciente puede estar por encima de 600 mg/dL o por debajo de 20 mg/dL. Repita la prueba de glucosa en sangre. Si obtiene el mismo resultado, póngase en contacto con el médico o el profesional de salud del paciente.

Eliminación de tiras reactivas y lancetas usadas

PRECAUCIÓN:

Las lancetas y tiras reactivas usadas son material de riesgo biológico y pueden transmitir enfermedades de transmisión sanguínea. Deseche las lancetas y tiras reactivas usadas de acuerdo con las reglamentaciones locales.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

4. Cómo entender los resultados de un análisis de glucosa en sangre

Resultados de la prueba de glucosa en sangre

Los resultados de los análisis de glucosa en sangre variarán en función de la ingesta de alimentos, la medicación, la salud, el estrés y el ejercicio. Los intervalos ideales para los adultos sin diabetes son ⁽²⁾:

- Menos de 100 mg/dL antes de las comidas.
- menos de 140 mg/dL después de las comidas.

Si el medidor muestra un resultado que es "HI" o "LO" O un paciente obtiene un resultado que es superior a 250 mg/dL o inferior a 50 mg/dL, Y el paciente se siente mal:

- Póngase en contacto con el médico o profesional de la salud del paciente.

Si el medidor muestra un resultado que es "HI" o "LO" o un paciente obtiene un resultado que es superior a 250 mg/dL o inferior a 50 mg/dL y el paciente NO se siente mal:

- Vuelva a realizar la prueba con una nueva tirareactiva.
- Llame al Centro de Servicio Técnico de Medline al 1-866-274-2131.

NOTA:

- Pueden producirse resultados imprecisos en individuos gravemente hipotensos o en pacientes en estado de shock.
- Pueden producirse resultados bajos inexactos en individuos que experimenten un estado hiperglucémico-hiperosmolar, con o sin cetosis.
- Los pacientes en estado crítico no deben someterse a pruebas con glucómetros.

Referencia:

2. Declaración de posición de la Asociación Americana de Diabetes: Estándares de atención médica en diabetes-2010. Diabetes Care 2010; 33 (Supl.1): S11-S61.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

5. Visualización de la memoria del medidor

El medidor EvenCare G3 almacena automáticamente hasta 300 resultados de pruebas de glucosa junto con la fecha y la hora. El medidor también proporciona promedios de 7, 14 y 30 días para ayudar a seguir la tendencia de glucosa en sangre del paciente. La hora y la fecha deben estar configuradas para poder utilizar la memoria y la función de promedios diarios (consulte Configuración de la fecha y la hora). La memoria del medidor no almacenará los resultados de las pruebas si la fecha y la hora no están configuradas.

Visualización de lecturas almacenadas y promedios de 7, 14 y 30 días desde la memoria del medidor

Materiales necesarios:


- Medidor EvenCare G3

Paso 1. Mantenga pulsado el botón para encender el medidor.



Paso 2. El medidor realizará una serie de auto comprobaciones. El ícono de cara feliz aparecerá en la pantalla cuando se hayan completado todas las pruebas. Si aparecen el ícono de cara triste u otros mensajes de error (Err 2, Err 3, etc.), consulte la Solución de problemas.

Paso 3. Pulse el botón abajo ▼ una vez para entrar en el modo de memoria del medidor. En la pantalla aparecerá el icono "mem".

Paso 4. Pulse el botón  para acceder al modo memoria.

Paso 5. El resultado más reciente de la prueba de glucosa se muestra en la pantalla. Pulse el botón abajo ▼ para ver el siguiente resultado, y el siguiente, y así sucesivamente. Si mantiene pulsado el botón hacia arriba, podrá ir pasando por los resultados del medidor.

"nil" aparecerá en la pantalla después del último registro, si se guardaron menos de 300 resultados. Pulse el botón arriba ▲ para retroceder, viendo desde los resultados más antiguos a los más recientes.



Paso 6. En el resultado más reciente, continúe presionando el botón hacia arriba ▲ para ver los promedios diarios. El medidor mostrará el promedio de 7 días. Presione arriba otra vez para ver el promedio de 14 días, y presione arriba otra vez para ver el promedio de 30 días.

El número de resultados de las pruebas incluidos en el cálculo de la media se muestra a la derecha del ícono

^{DÍA}
AVG . Los resultados de las pruebas con solución de control no se incluirán en el cálculo de la media.



Paso 7. Pulse la flecha hacia abajo para salir del modo de recuperación de memoria y volver al modo de prueba.

NOTA:

- Cuando la memoria del medidor esté vacía, la pantalla mostrará "nil".
- Cuando no haya medias diarias disponibles, la pantalla mostrará 0 mg/dL.
- Si la memoria del medidor está llena, al añadir un nuevo resultado se borrarán el más antiguo.
- Los resultados de las pruebas y los promedios diarios de la memoria del medidor no se borrarán cuando se retire la batería.
- El medidor se apagará automáticamente.

6. Cuidado del medidor

Cuidar el Medidor EvenCare G3 es fácil. Siga estas sencillas pautas para mantener el EvenCare G3 Meter funcionando correctamente.

NOTA:

- NO deje que entre agua en el medidor EvenCare G3. Nunca sumerja el medidor ni lo sostenga bajo agua corriente.
- NO utilice limpiacristales ni productos de limpieza domésticos para el medidor.
- NO intente limpiar el soporte de la tira reactiva.
- NO desmonte el medidor EvenCare G3. Si lo hace se anulará la garantía. Si tiene problemas técnicos o preguntas sobre el uso del medidor, comuníquese con el Centro de Servicio Técnico de Medline al 1- 866-274- 2131 entre las 8:00 y las 17:00 (hora del centro de los EE. UU.), de lunes a viernes.
- Manipule el medidor con cuidado: un golpe fuerte, como la caída del medidor, podría dañar los componentes electrónicos.


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Procedimientos de limpieza y desinfección del medidor

El medidor EvenCare G3 debe limpiarse y desinfectarse entre cada paciente. El medidor está validado para soportar un ciclo de limpieza y desinfección de diez veces al día durante un período medio de tres años. Los siguientes productos han sido aprobados para la limpieza y desinfección del Medidor EvenCare G3:

- Dispatch® Hospital Cleaner - Toallitas desinfectantes con lavandina (Número de registro EPA: 56392-8)
- Medline Micro-Kill+™ - Toallitas desinfectantes, desodorizantes y limpiadoras con alcohol (Número de registro EPA: 59894-10)
- Clorox Healthcare® Bleach - Toallitas germicidas y desinfectantes (Número de registro EPA: 67619-12)
- Medline Micro-Kill™ Bleach - Toallitas germicidas con lavandina (Número de registro de la EPA: 37549-1)

Estas toallitas desinfectantes están disponibles a través de los principales minoristas en línea o llamando al 1-866-274-2131 para comprarlas.

Se pueden utilizar otras toallitas registradas por la EPA para desinfectar el sistema EvenCare G3; sin embargo, estas toallitas no han sido validadas y podrían afectar al rendimiento de su medidor. Si utiliza una toallita registrada por la EPA que no figura en la lista anterior y observa alguno de los problemas que se indican a continuación, deje de utilizar el dispositivo y llame al servicio técnico de Medline al 1-866-274-2131.

- La solución de control fuera del rango
- La pantalla LCD del medidor nublada
- Corrosión o erosión de la carcasa de plástico o de los botones
- Rotura de la carcasa de plástico
- Mal funcionamiento de cualquier botón del contador

Nota: Estos desinfectantes se validaron en forma independiente; por lo tanto, sólo debe utilizarse un desinfectante en el dispositivo durante toda su vida útil, ya que no se ha evaluado el efecto de utilizar más de un desinfectante en forma alternada.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

Materiales necesarios:

- Medidor EvenCare G3
- Guantes
- Una toallita desinfectante validada

Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón.

Paso 2. Póngase guantes médicos de protección de un solo uso.

Paso 3. Inspeccione si hay sangre, residuos, polvo o pelusas en cualquier parte del medidor.
La sangre y los fluidos corporales deben limpiarse a fondo de la superficie del medidor.

Paso 4. Para limpiar el medidor, utilice un paño húmedo (no mojado) sin pelusas y humedecido con un detergente suave. Limpie todas las áreas externas del medidor, incluidas las superficies frontal y posterior, hasta que queden visiblemente limpias.
Evite mojar el puerto de la tira reactiva del medidor.



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Paso 5. Para desinfectar su medidor, limpie la superficie del medidor con una de las toallitas desinfectantes aprobadas. Se pueden utilizar otras toallitas registradas por la EPA para desinfectar el sistema EvenCare G3; sin embargo, estas toallitas no han sido validadas y podrían afectar al rendimiento del medidor. Deje que la superficie del medidor permanezca húmeda a temperatura ambiente durante el tiempo de contacto indicado en el instrucciones de uso de la toallita. Limpie todas las áreas externas del medidor, incluyendo



la parte frontal y posterior hasta que estén visiblemente húmedas. Evite mojar el puerto de la tira reactiva del medidor.

Paso 6. Quítese los guantes.

Eliminación de material infeccioso:

La sangre, los fluidos corporales y los materiales de limpieza deben eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales para la eliminación de residuos infecciosos.

NOTA:

- Los guantes médicos de protección de un solo uso deben utilizarse siempre durante los procedimientos de desinfección y también por toda persona que realice pruebas de glucosa en sangre a otra persona.
- Los dispositivos de punción utilizados en un entorno clínico deben ser los modelos de seguridad comercializados para un solo uso.

- Los medidores de glucosa utilizados en un entorno clínico para realizar pruebas a varias personas deben limpiarse y desinfectarse entre pacientes.
- Hay que quitarse los guantes usados y lavarse las manos antes de pasar al siguiente paciente.
- Los profesionales de la salud deben cambiarse los guantes entre pacientes, incluso si se utilizan dispositivos de análisis dedicados al paciente y dispositivos de punción de un solo uso y autodesechables.
- NO reutilice el dispositivo de punción de un solo uso.
- Mantenga las toallitas desinfectantes fuera del alcance de los niños.
- NO tire las toallitas desinfectantes por el inodoro.

La lista de signos de deterioro después de la desinfección incluye:

- Solución de control fuera del rango
- Pantalla LCD nublada
- Corrosión de la carcasa de plástico
- Corrosión de los botones


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8957

Si se observan estos signos de deterioro, deje de utilizar el medidor y llame al Servicio Técnico de Medline al 1-866-274-2131.

Almacenamiento y precauciones

- El medidor y las tiras reactivas están diseñados para ser utilizados dentro de un rango de temperatura de 50°F a 104°F.
- Evite dejar el medidor en lugares extremadamente calientes o fríos, como cerca de una fuente de calor o en un automóvil extremadamente caliente o frío.
- No guarde ni utilice el medidor ni las tiras reactivas en lugares con altos niveles de humedad, como el cuarto de baño o la cocina.
- En el caso de las tiras reactivas en frasco, cierre siempre la tapa del frasco inmediatamente después de extraer una tira reactiva. Asegúrese de que la tapa está bien cerrada.





EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE









LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357



7. Solución de problemas

En esta sección se detallan los mensajes de la pantalla y los códigos de error que puede encontrar al utilizar el medidor EvenCare G3 y las tiras reactivas. Si su medidor sigue sin funcionar después de haber seguido las instrucciones de solución de problemas, llame al Servicio Técnico de Medline al 1-866-274-2131.

Lo que ve	Qué significa	Lo que debe hacer
	Problema con la electrónica del medidor.	Sustituya la pila y vuelva a encender el medidor.
	Tira reactiva usada.	Repita la prueba con una nueva tira reactiva.

Lo que ve	Qué significa	Lo que debe hacer
	<p>La tira se retiró del medidor mientras se realizaba la prueba.</p>	<p>Repita la prueba con una nueva tira reactiva.</p>
	<p>La muestra de sangre era demasiado escasa.</p>	<p>Repita la prueba con una nueva tira reactiva.</p>
	<p>La temperatura está fuera del rango.</p>	<p>Mueva el Medidor a un área que esté entre 50°F - 104°F, y espere 15 minutos para que alcance la nueva temperatura.</p>

Lo que ve	Qué significa	Lo que debe hacer
	<p>La batería está baja.</p>	<p>Cambie la batería de acuerdo con la sección "Insertar (o cambiar) la batería" del manual del usuario.</p>
	<p>El resultado de la prueba de glucosa es superior a 600 mg/dL.</p>	<p>Lávese y séquese las manos y repita la prueba en la yema del dedo del paciente con una nueva tira reactiva. Si el resultado sigue siendo "HI", póngase en contacto con el médico o profesional de salud del paciente.</p>
	<p>El resultado de la prueba de glucosa es inferior a 20 mg/dL.</p>	<p>Lávese y séquese las manos y repita la prueba en la yema del dedo del paciente con una nueva tira reactiva. Si el resultado sigue siendo "LO", póngase en contacto con el médico o profesional de salud del paciente.</p>

Lo que ve	Qué significa	Lo que debe hacer
	<p>No hay resultados registrados en el medidor.</p>	<p>Compruebe si la fecha y la hora están configuradas correctamente. Consulte Configuración de la fecha y la hora.</p>
	<p>No hay medias diarias.</p>	<p>N/C</p>

8. Especificaciones del sistema

Tiras reactivas:	Tiras reactivas de glucosa en sangre EvenCare G3 (no incluidas)
Dimensiones (largo x ancho x alto):	105x 53 x 15 mm (4 ¹ / ₈ " x 2" x 5/8")
Peso (batería incluida):	67,3 g (2,37 oz)
Rango de la prueba:	20 - 600mg/dL
Calibración:	Plasma
Tiempo de prueba:	6 segundos
Tamaño de la muestra:	Mínimo 0,8µL
Intervalo de hematocrito:	30 % - 55 %
Tipo de pantalla:	Pantalla LCD grande
Memoria:	300 resultados de pruebas
Promedio de resultados:	Promedio de 7, 14 y 30 días
Batería:	1 batería de litio CR2032 de 3V
Apagado automático:	Después de 3 minutos sin uso
Temperatura de funcionamiento:	50°F - 104°F
Humedad de funcionamiento:	22 % - 90 %

Para obtener información adicional, consulte el prospecto de la tira reactiva EvenCare G3 Blood Glucose.

9. Garantía del producto

Se garantiza que el medidor de glucosa en sangre EvenCare G3 está libre de defectos de mano de obra y de materiales durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de la compra. La responsabilidad de Medline reclamos durante la garantía se limita a la reparación o sustitución, y en ningún caso Medline será responsable por daños indirectos o consecuentes, o por cualquier pérdida derivada del mal uso, uso inadecuado, uso indebido, negligencia, reparación no autorizada o modificación.

Esta garantía queda anulada y sin efecto en caso de uso indebido del producto, uso inadecuado, mal uso, negligencia, reparación no autorizada o modificación. Esta garantía excluye específicamente las tiras reactivas EvenCare G3 y la solución de control EvenCare G3.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA, CON EXCLUSIÓN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, TODAS LAS CUALES QUEDAN ANULADAS Y EXCLUIDAS.

Todos los reclamos durante la garantía deben dirigirse al Centro de Servicio Técnico de Medline en 1-866-274-2131. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del medidor.

www.medline.com ©2022 Medline Industries, LP

Medline y EvenCare son marcas registradas de Medline Industries, LP. Medline Micro-Kill y Medline Micro-Kill+ son marcas comerciales de Medline Industries, LP. Clorox Healthcare y Dispatch son marcas registradas de The Clorox Company. Envasado en Taiwán para Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

Asistencia técnica: 1-866-274-2131

Para reiterar pedidos: 1-800-MEDLINE

V3 RF22APB

EvenCare® G 3™


EZEQUIEL SOEZIO
SOCIO-GERENTE


JULIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAJ. 8357

ROTULADO

MPH3540



REF

MPH3540

GTIN (01):

10884389831199

Serial No (21):

0110884389831199


 EZEQUIEL BOEZIO
 SOCIO-GERENTE


 LILIANA E. PARODI
 FARMACEUTICA
 MAJ. 8367

SOBRE-ROTULO

Importado y distribuido por: EXSA S.R.L., LEGAJO 1489

Av. Juan B. Justo N° 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Ader N° 3620, Villa Adelina, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Parodi Liliana Edith, M.N. N° 9357

Producto: Sistema de monitorizacion de la glucemia - EvenCare G3

Código: MPH3540

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA DAÑADO O ABIERTO

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO”

AUTORIZADO POR A.N.M.A.T PM N° 1489-75



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT. 8957


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT. 8357

SOBRE-ROTULO

Importado y distribuido por: EXSA S.R.L., LEGAJO 1489

Av. Juan B. Justo N° 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Ader N° 3620, Villa Adelina, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Parodi Liliana Edith, M.N. N° 9357

Producto: Sistema de monitorizacion de la glucemia - EvenCare G3

Código: MPH3550/MPH3550Z

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA DAÑADO O ABIERTO

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO”







AUTORIZADO POR A.N.M.A.T PM N° 1489-75




EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT. 9357

		REF MPH3550FL 			REF MPH3550FL 
		(01)40888277365941			(01)40888277365941
		GTIN (01): 40888277365941 Exp DTS: YYYY-MM-DD Lot ID#: 			GTIN (01): 40888277365941 Exp DTS: YYYY-MM-DD Lot ID#:

<h2>EvenCare® G3</h2> <h3>Blood Glucose Test Strips</h3> <p>Temperature limits: 39°F – 86°F. Keep away from sunlight. Protect from freezing, avoid excessive heat. Not made with natural rubber latex. Rx Only.</p>		<h2>EvenCare® G3</h2> <h3>Blood Glucose Test Strips</h3> <p>Temperature limits: 39°F – 86°F. Keep away from sunlight. Protect from freezing, avoid excessive heat. Not made with natural rubber latex. Rx Only.</p>
---	---	---

<p>QTY: 12 BOXES</p>	<p>www.medline.com 402022 Medline Industries, LP Manufactured for Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA, Made in Taiwan. P400-MEDLINE_VA REG22APR</p>	<p>QTY: 12 BOXES</p>
--	--	--

	<p>PO: Gross Wt:</p>	
--	---------------------------------	--

EvenCare® G3™ Blood Glucose Test Strip

GTIN (01): 10888277365940

Exp (17): **YYYY-MM-DD**

Lot (10):

Manufactured for Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.


EZEQUIEL BOEZIO
SÓCIO-GERENTE


LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT 8357

SOBRE-ROTULO

Importado y distribuido por: EXSA S.R.L., LEGAJO 1489

Av. Juan B. Justo N° 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Ader N° 3620, Villa Adelina, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Parodi Liliana Edith, M.N. N° 9357

Producto: Sistema de monitorizacion de la glucemia - EvenCare G3

Código: MPH3550FL/MPH3550FLZ

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA DAÑADO O ABIERTO

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO”


AUTORIZADO POR A.N.M.A.T PM N° 1489-75



EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE



LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
M.N. 9357

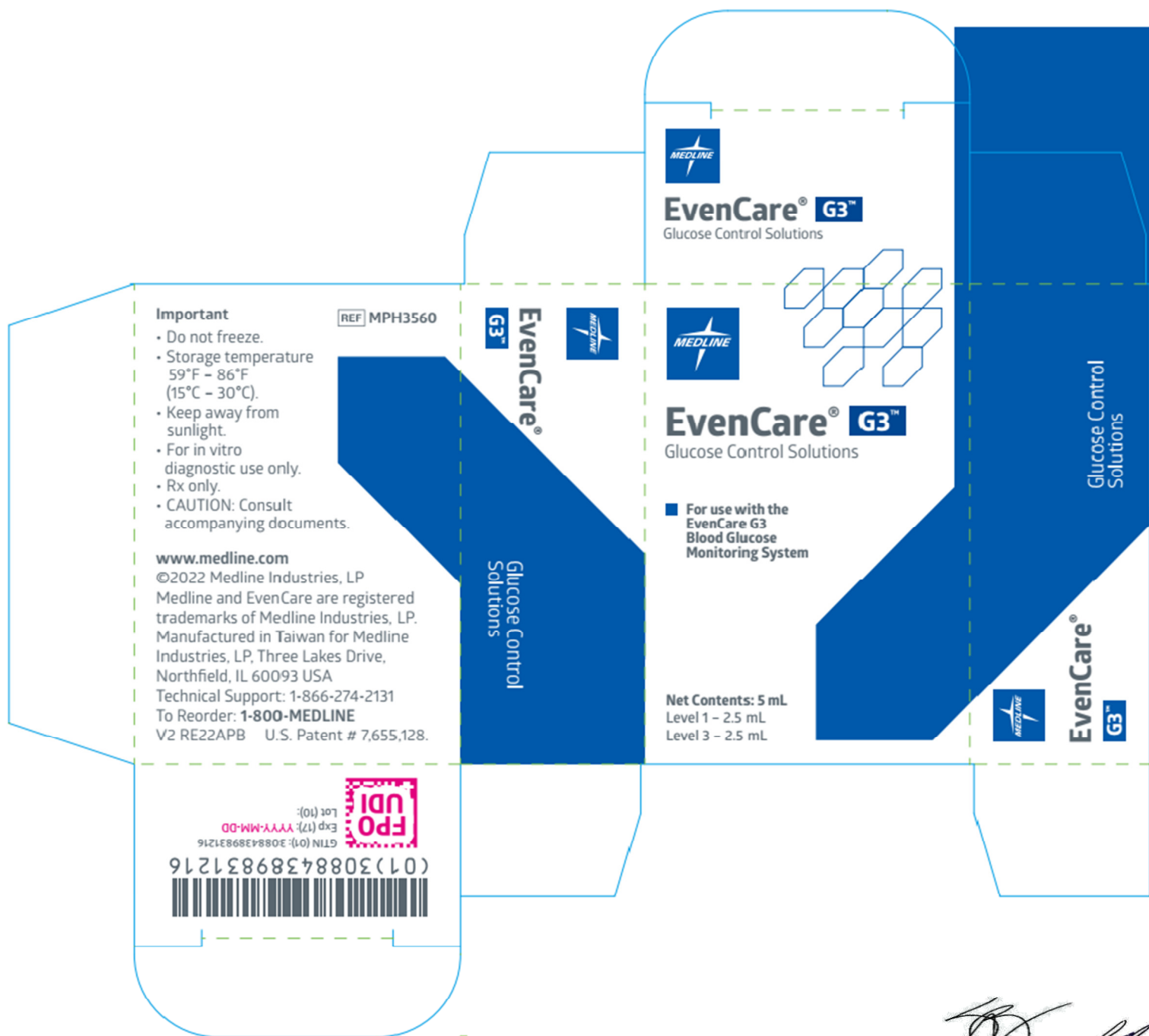


EZEQUIEL BOEZIO
SÓCIO-GERENTE


LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT. 8357

Storage temperature: 59°F - 86°F (15°C - 30°C)
Do not freeze.
Keep away from sunlight.
For In Vitro Diagnostic Use.
Rx Only.
CAUTION: Consult accompanying documents.

MEDLINE

EvenCare®
G3™

Control Solution
Glucose Concentration
38 mg/dL

■ **Level 1**

FPO UDI

REF MPH3560
GTIN (01): 30884389831216
Exp (17): YYYY-MM-DD
Lot (10):

Date Opened:
(Use within 3 months after first opening or before the expiration date)

www.medline.com
©2022 Medline Industries, LP. Manufactured in Taiwan for Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
1-800-MEDLINE V2 RE22APB

Storage temperature: 59°F - 86°F (15°C - 30°C)
Do not freeze.
Keep away from sunlight.
For In Vitro Diagnostic Use.
Rx Only.
CAUTION: Consult accompanying documents.

MEDLINE

EvenCare®
G3™

Control Solution
Glucose Concentration
130 mg/dL

■ **Level 3**

FPO UDI

REF MPH3560
GTIN (01): 30884389831216
Exp (17): YYYY-MM-DD
Lot (10):

Date Opened:
(Use within 3 months after first opening or before the expiration date)

www.medline.com
©2022 Medline Industries, LP. Manufactured in Taiwan for Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
1-800-MEDLINE V2 RE22APB

MEDLINE

EvenCare® G3™

Glucose Control Solutions

Do not freeze.
Keep away from sunlight.
Temperature limits: 59°F - 86°F (15°C - 30°C).
Rx Only.

PO:
Gross Wt:

QTY:
6 BOXES

www.medline.com
Manufactured for Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.
Made in Taiwan. 1-800-MEDLINE V2 RE22APB

FPO UDI

REF MPH3560
GTIN (01): 40884389831213
Exp (17): YYYY-MM-DD
Lot (10):

MEDLINE

EvenCare® G3™

Glucose Control Solutions

Do not freeze.
Keep away from sunlight.
Temperature limits: 59°F - 86°F (15°C - 30°C).
Rx Only.

QTY:
6 BOXES

www.medline.com
Manufactured for Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.
Made in Taiwan. 1-800-MEDLINE V2 RE22APB

FPO UDI

REF MPH3560
GTIN (01): 40884389831213
Exp (17): YYYY-MM-DD
Lot (10):

SOBRE-ROTULO

Importado y distribuido por: EXSA S.R.L., LEGAJO 1489

Av. Juan B. Justo N° 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Ader N° 3620, Villa Adelina, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Parodi Liliana Edith, M.N. N° 9357

Producto: Sistema de monitorización de la glucemia - EvenCare G3

Código: MPH3560/MPH3560Z

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA DAÑADO O ABIERTO

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO”

AUTORIZADO POR A.N.M.A.T PM N° 1489-75


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
MAT. 9357

MPHCABLE



EvenCare® Download Cable
6.3 in x 3 in x 1 in (16 cm x 7.5 cm x 2.54 cm)

REF **MPHCABLE**

Qty: **1**

LOT

Latex Free
Non Sterile

www.medline.com Manufactured for: Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Made in Taiwan 1-800-MEDLINE V1 RH22APB



(01)10888277177505

SOBRE-ROTULO

Importado y distribuido por: EXSA S.R.L., LEGAJO 1489

Av. Juan B. Justo N° 2780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bernardo Ader N° 3620, Villa Adelina, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Parodi Liliana Edith, M.N. N° 9357

Producto: Sistema de monitorización de la glucemia - EvenCare G3

Código: MPHCABLE

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA DAÑADO O ABIERTO

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO”

AUTORIZADO POR A.N.M.A.T PM N° 1489-75


EZEQUIEL BOEZIO
SOCIO-GERENTE


LILIANA E. PARODI
FARMACEUTICA
M.N. 9357



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- EXSA S R L

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 78 pagina/s.