



Jujuy 2944 – (2000) Rosario - Santa Fe
Tel: +54 0341 4373361 y Rotativas
Mail: info@drogueriacomarsa.com.ar

ANEXO III.B

2- ROTULOS

ENVASE PRIMARIO

PRESERVATIVOS DE CAUCHO DE LATEX NATURAL GREAT FEEL

Según corresponda: LUBRICADO CON ACEITE DE SILICONA

Según corresponda: LISO

LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ANCHO NOMINAL:

FABRICANTE: Nulatex Sdn. Bhd.- Lot 1870, 4th Mile, Jalan Mengkibol, 86000
Kluang, Johor, MALASIA

IMPORTADOR: DROGUERIA COMARSA S.A.- JUJUY 2944(2000) ROSARIO –
SANTA FE – ARGENTINA

DIRECTOR TECNICO: FARM. ANDRES BOIAGO

MATRICULA: 3361

USO SIN PRESCRIPCION

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM- [661]- [158]

Producto para usar una sola vez. Abrir solamente en el momento de uso.

DROGUERIA COMARSA S.A.
DIRECTOR TÉCNICO
FARM. BOIAGO ANDRES
Mat. 3361

DROGUERIA COMARSA S.A.
Lic. ADRIAN COSTA
DNI: 25750305
APODERADO



Jujuy 2944 – (2000) Rosario - Santa Fe
Tel: +54 0341 4373361 y Rotativas
Mail: info@drogueriacomarsa.com.ar

ENVASE DE CONSUMO (SECUNDARIO)

PRESERVATIVOS DE CAUCHO DE LATEX NATURAL GREAT FEEL

Según corresponda: LUBRICADO CON ACEITE DE SILICONA

Según corresponda: LISO

CANTIDAD:

LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Proteja este producto del calor, humedad y de la luz

FABRICANTE: Nulatex Sdn. Bhd.- Lot 1870, 4th Mile, Jalan Mengkibol, 86000
Kluang, Johor, MALASIA

IMPORTADOR: DROGUERIA COMARSA S.A.- JUJUY 2944(2000) ROSARIO –
SANTA FE – ARGENTINA

DIRECTOR TECNICO: FARM. ANDRES BOIAGO

MATRICULA: 3361

USO SIN PRESCRIPCION

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM- [661]- [158]

NO FRACCIONAR

Atención al consumidor: (+54 341) 4370353

Producto para usar una sola vez. Lea las instrucciones de uso.

DROGUERIA COMARSA S.A.
DIRECTOR TÉCNICO
FARM. BOIAGO ANDRES
Mat. 3361

DROGUERIA COMARSA S.A.
Lic. ADRIAN COSTA
DNI: 25750305
APODERADO



Jujuy 2944 - (2000) Rosario - Santa Fe
Tel: +54 0341 4373361 y Rotativos
Mail: info@drogueriacomarsa.com.ar

ANEXO III.B

3- INSTRUCCIONES DE USO

PRESERVATIVOS DE CAUCHO DE LATEX NATURAL GREAT FEEL

Según corresponda: LISO

Según corresponda: LUBRICADO CON ACEITE DE SILICONA

Los preservativos GREAT FEEL usados en forma adecuada son un medio muy efectivo para evitar embarazos y transmisión de enfermedades sexuales.

Producto para usar una sola vez. Descartar luego de su uso. No arrojar al inodoro.

NO utilice este preservativo combinado con aceites como vaselina, loción para el cuerpo, etc. dado que pueden provocar su rotura.

Ante la ocurrencia de reacciones alérgicas por el uso del producto consulte con su médico para su debida orientación.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Antes de abrir el envase unitario verificar la integridad del mismo y la fecha de vencimiento. Extraer con cuidado el preservativo al momento de usarlo asegurándose que esté bien enrollado.



- 2- Colocar el preservativo sobre el pene erecto comprimiendo el reservorio y evitando que quede aire en este. Tener en cuenta el lado correcto para poder desenrollarlo.

DROGUERIA COMARSA S.A.
DIRECTOR TÉCNICO
Frm. BOIAGO ANDRES
Mat. 3361

DROGUERIA COMARSA S.A.
Lic. ADRIAN COSTA
DNI: 25750305
APODERADO



Jujuy 2944 – (2000) Rosario - Santa Fe
Tel: +54 0341 4373361 y Rotativas
Mail: info@drogueriacomarsa.com.ar



- 3- Desenrollar el preservativo con cuidado hasta la base del pene. Evitar el contacto del mismo con otras partes del cuerpo, ropa de cama, etc., para no perder lubricante.



- 4- Luego de eyacular retire el pene de la vagina antes de perder la erección para evitar que el semen salga del preservativo. Sacar el preservativo desenrollándolo con cuidado evitando derrames de semen.



- 5- Envolver el preservativo y descartarlo convenientemente. No arrojarlo al inodoro. De requerir lubricante adicional utilizar aquellos de base acuosa o siliconada. No exponer el preservativo a sustancias oleosas como vaselina, cremas cosméticas u otros compuestos que alteren las propiedades del látex.



DROGUERIA COMARSA S.A.
DIRECTOR TÉCNICO
FARM. BOIAGO ANDRES
Mat. 3361

DROGUERIA COMARSA S.A.
Lic. ADRIAN COSTA
DNI: 25750305
APODERADO

Proteja este producto del calor, humedad y de la luz

FABRICANTE: Nulatex Sdn. Bhd.- Lot 1870, 4th Mile, Jalan Mengkibol, 86000
Kluang, Johor, MALASIA

IMPORTADOR: DROGUERIA COMARSA S.A.- JUJUY 2944(2000) ROSARIO –
SANTA FE – ARGENTINA

DIRECTOR TECNICO: FARM. ANDRES BOIAGO

MATRICULA: 3361



Jujuy 2944 – (2000) Rosario - Santa Fe
Tel: +54 0341 4373361 y Rotativas
Mail: info@drogueriacomarsa.com.ar

USO SIN PRESCRIPCION
AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM- [661]- [158]

NO FRACCIONAR

Atención al consumidor: (+54 341) 4370353

Producto para usar una sola vez. Lea las instrucciones de uso.

DROGUERIA COMARSA S.A.
DIRECTOR TÉCNICO
FARM. BOIAGO ANDRES
Mat. 3361

DROGUERIA COMARSA S.A.
Lic. ADRIAN COSTA
DNI: 25750305
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DROGUERIA COMARSA S.A. ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.