

Proyecto de Instrucciones de uso

**Importado por:**

Drogueria Farmaquio S.R.L.  
Avenida Centenario N° 2751 (EX 1271), Quilmes, Provincia de Buenos Aires  
Argentina.

**Fabricado por:**

Shenzhen SiSensing Co., Ltd.  
Room 901, Building 1, Gaoshi Jiulongshan Technology Park,  
No. 26 Shijing Road, Fumin Community, Fucheng Street, Longhua District,  
518110 Shenzhen, Guangdong, República Popular de China  
[support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com)

**Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa**

**SIBIONICS**

**GS1**

N° de serie: Ver el producto

Vencimiento: Ver producto

Contenido: 1 Aplicador de sensor, 1 Paquete de sensores, 1 Parche, 1 Inserto del Producto, 1 Guía de Usuario.

De un solo uso - No reutilizar.

Condiciones de transporte, almacenamiento y uso:

Transporte y guarde el paquete del sensor y el aplicador a temperaturas entre 4°C y 25°C.

Humedad Relativa entre 10%-90%

No Apto para RM

Pieza aplicable tipo BF

Radiación electromagnética no ionizante

No utilizar si el embalaje está dañado.

Producto de un solo uso - No reutilizar

Ver la Guía de Usuario que acompaña al producto

Método de esterilización: Esterilizado por radiación.

Condición de uso: Uso bajo prescripción de profesional de la salud


Director Técnico: Farm. Marcos D. Chaves M.P. 17.356

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM- -2763-2.

**Sistema de Medición Continua de Glucosa GS1**

**DESCRIPCIÓN**

El sistema de monitoreo continuo de glucosa (CGM) GS1 está indicado para el monitoreo continuo de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en pacientes con diabetes mellitus. El sistema proporciona niveles de glucosa en tiempo real, detecta tendencias de glucosa, fluctuaciones y TIR

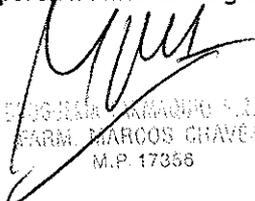  
DROGUERIA FARMAQUIO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356




  
DROGUERIA FARMAQUIO S.R.L.  
CENTRO DE ATENCION AL PACIENTE  
ANTONIO JAVIER RIQUELME  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

(tiempo en rango). Los niveles de glucosa se monitorean mediante un sensor electroquímico que está calibrado en origen y no requiere calibración ni punción digital .

El Sistema de Medición Continua de Glucosa GS1 consta de dos partes principales: un kit de sensor y la aplicación SIBIONICS.


El kit de sensor incluye dos partes principales, una se coloca en el Paquete de Sensores y la otra se coloca en el Aplicador de Sensores.

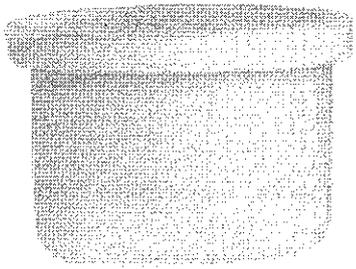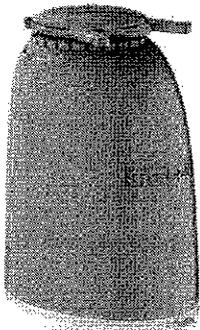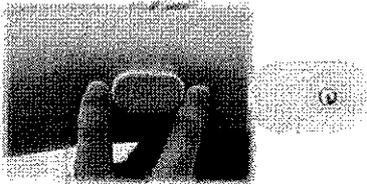Paquete de Sensores	Aplicador de Sensores
	
Se utiliza con el Aplicador de Sensores para preparar el sensor para su uso.	Aplica el sensor en su cuerpo.
 <p data-bbox="587 1552 1038 1585">Sensor (visible después de la aplicación)</p>	

Puede utilizar su Smartphone para descargar e instalar la aplicación. Al abrir el kit, verifique que todos los contenidos estén presentes y en buen estado. Si falta alguna pieza o está dañada, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en [support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com).

Para fijar el sensor, se proporciona también un parche para adherir el sensor a la piel.

  
ROQUEIRA FARMACIO S.R.L.  
PARA: MARCOS CHAVES  
M.P. 17358

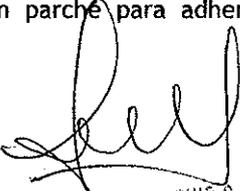  
ROQUEIRA FARMACIO S.R.L.  
CALLE 27 N. 35-8  
ALFONSO DE LA HERRERA  
COORDINADOR

### INDICACIONES

El Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa está indicado para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2. El Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa GS1 es un dispositivo de medición de glucosa en tiempo real de un solo uso. Está destinado a reemplazar las pruebas de punción digital para las decisiones de tratamiento de la diabetes, incluidas las dosis de insulina.

Su prescripción para niños (de 3 a 12 años) se limita a aquellos que están bajo la supervisión de un cuidador que tenga al menos 18 años de edad. El cuidador es responsable de gestionar o asistir al niño en la gestión de la Aplicación y el Sensor, así como de interpretar o ayudar al niño a interpretar las lecturas de glucosa del sensor.


### INSTRUCCIONES DE USO

1.- Aplique los sensores solo en la parte posterior del brazo superior. Evite áreas con cicatrices, lunares, estrías o bultos.



2.- Lave el lugar de aplicación con un jabón neutro, séquelo y luego límpielo con una toallita con alcohol.

Nota: El área DEBE estar limpia y seca siguiendo estas instrucciones, o el sensor puede no permanecer en su lugar durante todo el período de uso de 14 días.

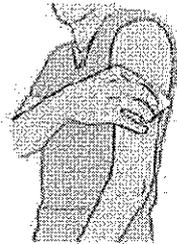


3.- Abra el Paquete de Sensores despegando completamente la tapa. Destape el tapón del Aplicador de Sensores y coloque el tapón a un lado.


Precaución: NO lo utilice si el Paquete de Sensores o el Aplicador de Sensores parecen estar dañados o ya están abiertos. NO lo utilice si ha pasado la fecha de vencimiento.




4.- Alinee el pequeño resalte blanco del Aplicador de Sensores con la concavidad en el borde del Paquete de Sensores. En una superficie dura, presione firmemente sobre el Aplicador de Sensores hasta que se detenga.

Precaución: NO retire el clip de seguridad (ver paso 6) del Aplicador de sensores.

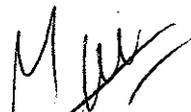  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

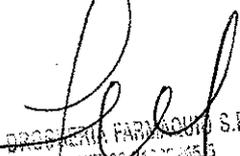  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
ALFONSO CAVIER MENDOZA  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

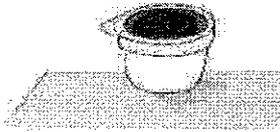


5.- Levante el Aplicador de Sensores fuera del Paquete de Sensores.



Precaución: El Aplicador de Sensores ahora contiene una punta. NO toque el interior del Aplicador de Sensores ni lo Vuelva a colocar en el Paquete de Sensores.

6.- Presione el clip de seguridad y retírelo del Aplicador de Sensores.

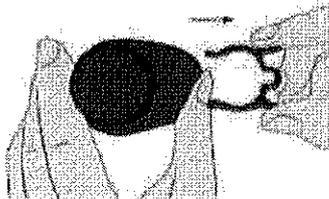


7.- Coloque el Aplicador de Sensores sobre el sitio preparado y presione firmemente para aplicar el sensor en su cuerpo. Precaución: NO presione sobre el Aplicador de Sensores hasta que esté colocado sobre el sitio preparado para evitar resultados no deseados o lesiones. Asegúrese de que el pequeño resalte blanco del Aplicador de Sensores esté en la dirección hacia arriba o hacia abajo.

  
FARMACIA FARMACUO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17353

  
FARMACIA FARMACUO S.R.L.  
CALLE 20, ZONA 15-5  
ALFONSO GARCIA RIVERA  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

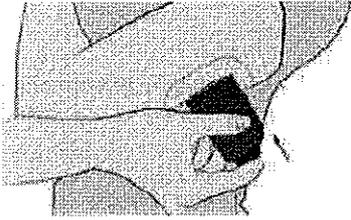


8.- Separe suavemente el aplicador del sensor de su cuerpo. El sensor debería estar ahora adherido a su piel.

Nota: La aplicación del sensor puede causar más tonos o sangrado. En caso de hemorragia persistente, retire el sensor y póngase en contacto con su profesional sanitario.



9.- Asegúrese de que el sensor está bien sujeto después de la aplicación.

Nota: Utilice su teléfono para comunicarse con el sensor justo después de la aplicación.

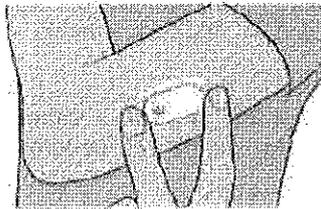

Advertencias:

Antes de utilizar el Sistema de Medición Continua de Glucosa GS1, por favor, lea todas las instrucciones del producto y la inserción. La Guía del Usuario incluye toda la información de seguridad y las instrucciones de uso.

Se utiliza en combinación con la aplicación SIBIONICS descargada desde la tienda Apple APP Store y Google Play.

No seguir las instrucciones de uso del sistema GS1 puede resultar en la falta de detección de un evento grave de hipoglucemia o hiperglucemia y/o en la toma de decisiones de tratamiento que pueden causar lesiones. Si las alertas de glucosa y las lecturas del Sistema no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido con un medidor de glucosa en sangre mediante punción en el dedo para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes. Busque atención médica cuando sea necesario.

  
DROGUERÍA FARMACUO S.A.S.  
CARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

  
DROGUERÍA FARMACUO S.A.S.  
ALFONSO  
SOCIOS

## Proyecto de Instrucciones de uso

### Precaución

No use el Sistema GS1 si tiene menos de 3 años, está embarazada, en diálisis o gravemente enfermo. No se sabe cómo las condiciones de salud o los medicamentos comunes en estas poblaciones pueden afectar el rendimiento del sistema.

No utilice el sensor si el paquete estéril ha sido dañado o abierto, ya que puede causar una infección.

No utilice un sensor o aplicador vencido.

El sensor es de un solo uso. La reutilización del sensor puede causar daños a la sonda, lecturas inexactas de glucosa e irritación o infección en el sitio de aplicación.

El ejercicio intenso puede hacer que el sensor se afloje debido al sudor o al movimiento del sensor. Si el sensor se afloja o la punta del sensor sale de la piel, es posible que no se obtengan lecturas o se obtengan lecturas bajas no confiables. jubilarse reemplace el sensor si comienza a aflojarse y siga las instrucciones para seleccionar un sitio de aplicación adecuado. No intente volver a insertar el sensor. En caso de duda sobre la precisión de las lecturas del sensor cuando se afloja, verifique los niveles de glucosa utilizando un medidor de glucosa en sangre.

El sistema contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se ingieren. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Verifique sus niveles de glucosa con un medidor de glucosa en sangre o consulte a su equipo de atención médica profesional para tomar decisiones sobre el tratamiento y ajustes de terapia cuando los síntomas no coincidan con las lecturas, o se sospeche que las lecturas sean inexactas, Utilice los valores de glucosa en sangre obtenidos mediante una punción en el dedo con un medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones relacionadas con el tratamiento de la diabetes. Busque atención médica cuando sea necesario. Reemplace el sensor si es necesario.

El sensor se detiene automáticamente después del período de uso de 14 días y debe ser reemplazado. Si el sensor no se retira después del período de uso, puede ser peligroso.

### CONTRAINDICACIONES:

El sistema debe ser retirado antes de someterse a una Resonancia Magnética (RM) o una tomografía computarizada (TC).


El sistema no debe utilizarse con sistemas automatizados de dosificación de insulina (ADI), incluidos sistemas de bucle cerrado y sistemas de suspensión de insulina, ni con software para guiar la dosificación de insulina.


El sensor no debe ser insertado en un lugar donde existan quemaduras graves en la piel, quemaduras solares, heridas, úlceras o cicatrices quirúrgicas.

El sistema no está destinado a pacientes con lesiones cutáneas graves en todo el cuerpo, como eczema extenso, cicatrices extensas, tatuajes extensos, dermatitis herpética, edema severo y psoriasis.

#### Advertencia

No seguir las instrucciones de uso del sistema GS1 puede resultar en la falta de detección de un evento grave de hipoglucemia o hiperglucemia y/o en la toma de decisiones de tratamiento que pueden causar lesiones. Si las alertas de glucosa y las lecturas del Sistema no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice un valor de

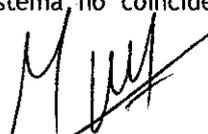  
INGENIERIA FARMACIUTICA S.R.L.  
PARR. MARCO CHAVES  
M.P. 17358

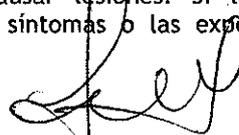  
INGENIERIA FARMACIUTICA S.R.L.  
CALLE 24 DE JULIO 45-8  
ALFONSO DEL VALLE  
SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

glucosa en sangre obtenido con un medidor de glucosa en sangre mediante punción en el dedo para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes. Busque atención médica cuando sea necesario.

### ADVERTENCIAS

No seguir las instrucciones de uso del sistema GS1 puede resultar en la falta de detección de un evento grave de hipoglucemia o hiperglucemia y/o en la toma de decisiones de tratamiento que pueden causar lesiones. Si las alertas de glucosa y las lecturas del Sistema no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido con un medidor de glucosa en sangre mediante punción en el dedo para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes. Busque atención médica cuando sea necesario.

### PRECAUCIONES

No utilice el sensor si el paquete estéril ha sido dañado o abierto, ya que puede causar una infección.

No utilice un sensor o aplicador vencido.

El sensor es de un solo uso. La reutilización del sensor puede causar daños a la sonda, lecturas inexactas de glucosa e irritación o infección en el sitio de aplicación.

El ejercicio intenso puede hacer que el sensor se afloje debido al sudor o al movimiento del sensor. Si el sensor se afloja o la punta del sensor sale de la piel, es posible que no se obtengan lecturas o se obtengan lecturas bajas no confiables. Jubilarse reemplace el sensor si comienza a aflojarse y siga las instrucciones para seleccionar un sitio de aplicación adecuado. No intente volver a insertar el sensor. En caso de duda sobre la precisión de las lecturas del sensor cuando se afloja, verifique los niveles de glucosa utilizando un medidor de glucosa en sangre.

El sistema contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se ingieren. Manténgalo fuera del alcance de los niños.


Verifique sus niveles de glucosa con un medidor de glucosa en sangre o consulte a su equipo de atención médica profesional para tomar decisiones sobre el tratamiento y ajustes de terapia cuando los síntomas no coincidan con las lecturas, o se sospeche que las lecturas sean inexactas. Utilice los valores de glucosa en sangre obtenidos mediante una punción en el dedo con un medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones relacionadas con el tratamiento de la diabetes. Busque atención médica cuando sea necesario. Reemplace el sensor si es necesario.


El sensor se detiene automáticamente después del período de uso de 14 días y debe ser reemplazado. Si el sensor no se retira después del período de uso, puede ser peligroso.

#### 4. Emparejar su Sensor para recibir lecturas de glucosa

Después de aplicar el Sensor en su brazo, el Sensor debe emparejarse con la aplicación para que pueda recibir datos de glucosa. Para hacer esto:


1. Abra la aplicación SIBIONICS e inicie sesión si se le solicita.

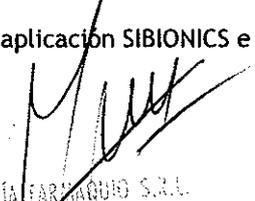  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
FARM. MEXCOS CHAVES  
M.P. 17356

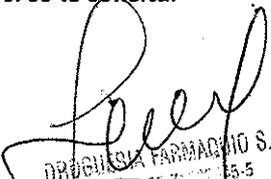  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
CALLE TERCERA 15-5  
ALFONSO DEL VALLE MERCADO  
SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

2. Pulsa Conectar un dispositivo en la parte superior de la pantalla.

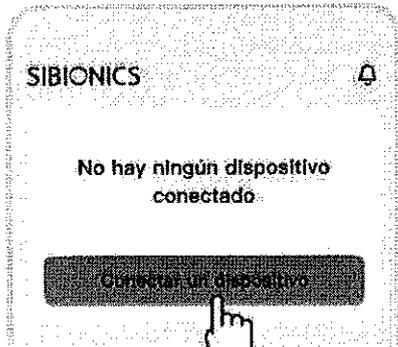


Esto abrirá la cámara del teléfono para que se pueda escanear el código del Sensor. Siga los siguientes pasos:

1. Abra la aplicación SIBIONICS (Consulte 2. Descargar la aplicación anterior para aprender cómo hacerlo) e inicie sesión si se le solicita.
2. Pulsa Conectar un dispositivo en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá la cámara del teléfono para que se pueda escanear el código del Sensor.

### Nota:

*Es posible que se le solicite permitir que la aplicación acceda a la cámara de su teléfono. Debe otorgar este permiso, de lo contrario, no se podrá escanear el código del Sensor y no podrá recibir ningún dato de glucosa.*

3. Escanee el código QR del sensor o ingrese manualmente el código de 8 dígitos que está impreso debajo del código QR en la caja de embalaje para emparejar con el Sensor.

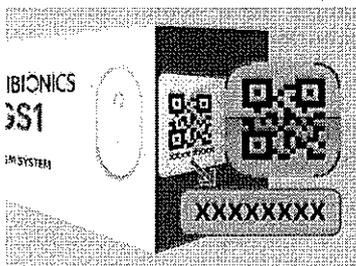

### Nota:

  
DROGUERIA FARMAQUITO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17336

  
DROGUERIA FARMAQUITO S.R.L.  
CALLE 20-70-70E 46-5  
ALFONSO JAVIER MERCADO  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

*Solo se puede emparejar un sensor a la vez. Por ejemplo, si se empareja un nuevo Sensor, el Sensor actual se desemparejará automáticamente.*

**Precaución:** Active el Bluetooth en el teléfono para que el teléfono/aplicación pueda emparejarse y comunicarse con el sensor.

5. Inicie el sensor. Espere. Durante el período de calentamiento, el sensor no proporciona alarmas ni lecturas de glucosa. Las lecturas comenzarán después de que haya pasado el período de calentamiento de 1 hora del sensor. La pantalla muestra la cuenta regresiva para el calentamiento del sensor.



6. Revise las lecturas de glucosa.

El calentamiento del sensor está completo. El teléfono muestra la lectura actual de glucosa junto con una flecha que indica la tendencia de la glucosa. La lectura actual de glucosa se actualiza cada 5 minutos.



**Precaución:** Mantenga el sensor y el dispositivo de visualización dentro de 6 metros (20 pies) sin obstáculos (como paredes o metal) entre ellos, de lo contrario, la comunicación puede verse comprometida

Qué hacer si el teléfono y el sensor no pueden comunicarse Si el teléfono y el sensor no se están comunicando correctamente, se mostrará la siguiente figura en la pantalla.



Siga las instrucciones para volver a conectar:

  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
FARM. MARCOS ONAVES  
M.P. 17036

  
DROGUERIA FARMACUO S.R.L.  
CALLE 25-5  
ALONZO SAINZA MERCADO  
SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso


1. Verifique si aplicó correctamente el Sensor. Si no lo ha hecho, consulte 3 Aplicación de su sensor para aprender cómo aplicar el sensor y vuelva a conectar su teléfono y sensor. Si el problema persiste, proceda con los siguientes pasos.
2. Verifique si el Bluetooth está encendido en la configuración del teléfono. Siga las indicaciones en la aplicación para activar el Bluetooth y restablecer la comunicación con el sensor.
3. Compruebe si la distancia entre el teléfono y el sensor supera los 6 metros (20 pies). Si es así, mantenga el teléfono dentro de los 6 metros (20 pies) del sensor.
4. Verifique si hay otro teléfono conectado al sensor (el sensor no puede estar conectado a más de un dispositivo al mismo tiempo). Si es así, apague el Bluetooth del teléfono original antes de conectarlo al nuevo teléfono.
5. Intente reiniciar el teléfono y conectarlo al sensor nuevamente.
6. Verifica si ha ocurrido algún evento mencionado en la sección 1.3 Declaraciones de seguridad del sistema.

Nota: Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

7. Cuando el sensor haya completado el calentamiento y restablezca la comunicación, todos los datos de glucosa registrados se comunicarán al teléfono. Después de eso, el nivel actual de glucosa continúa actualizándose cada 5 minutos y se muestra en el teléfono hasta el final del período de uso de 14 días.

### 5. Obtención de lecturas de glucosa

La siguiente figura muestra el gráfico de tendencias de glucosa de la aplicación.

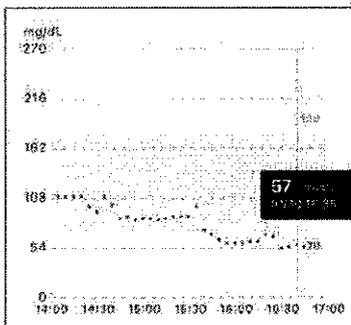

### Notas:

- El gráfico muestra las lecturas de glucosa del sensor por encima de 450 mg/dL en 450 mg/dL.
- El rango de glucosa objetivo no está relacionado con la configuración de la alarma de glucosa.



COOPERATIVA FARMACIUM S.R.L.  
CALLE MARCOS CHAYES 45-5  
ALFONSO NAVARRETTA  
SOCIO REPRESENTANTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

Las flechas de tendencia muestran la velocidad y dirección de las tendencias de glucosa según las lecturas recientes de GS1.

↑	Rápidamente ascendente (2 - 3 mg/dL por minuto)
↗	Lentamente ascendente (1 - 2 mg/dL por minuto)
→	Estable (Menos de 1 mg/dL por minuto)
↘	Descendiendo lentamente (1 - 2 mg/dL por minuto)
↓	Rápidamente descendente (2 - 3 mg/dL por minuto)

Los gráficos incluyen:

1. Datos de glucosa del sensor durante las últimas 3 a 24 horas, mostrados como una línea de tendencia, terminando con la lectura más reciente de glucosa a la extrema derecha.

- Toque el gráfico en cualquier punto de datos de glucosa para resaltar el valor asociado.
- Cambie entre una vista de 3 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas de los datos de glucosa tocando la duración de la vista deseada sobre el gráfico.
- Vea los gráficos en pantalla completa tocando  sobre el gráfico.

2. Las notas adicionales aparecen como símbolos gráficos en el momento registrado de cada evento. Toque cualquier símbolo para mostrar información detallada sobre el evento.

### Registro de eventos

El registro de eventos ayuda a capturar información que puede afectar los niveles de glucosa. La función de eventos en la aplicación se puede utilizar para ingresar y guardar ciertos tipos de eventos.

Proyecto de Instrucciones de uso

Icono de registro:	Descripción
	La hora de la comida y lo que comió.
	El tipo y duración de la rutina de ejercicio.
	El tipo, cantidad y hora de tomar medicamentos.
	El tipo, cantidad y hora de entrega de insulina.
	Lecturas del medidor de glucosa en sangre. Estos pueden

	utilizarse para el manejo glucémico.
	La hora a la que te acuestas y te levantas.
	Cómo te sientes, por ejemplo, feliz, enojado o enfermo.

Siga los pasos a continuación para agregar registros de eventos:

1. Toque el ícono y seleccione el ícono de registro que desea agregar.
2. Seleccione o ingrese la información requerida.
3. Toque Listo para guardar las notas.
4. Puede ver los registros de eventos:
5. Tocando el símbolo de evento en el gráfico de tendencia de glucosa para mostrar información detallada sobre un evento o,
6. Tocando Perfil > Eventos para revisar todos los eventos que ha agregado.

6. Configuración de la alarma de glucosa

Las alarmas de glucosa son notificaciones de la aplicación cuando los niveles de glucosa salen del rango de alarma establecido.

Para configurar o activar las alarmas de glucosa, pulse Perfil > Configuración de Alarmas. Seleccione la alarma que desea activar y configurar.

Precaución

- Asegúrese de que su dispositivo de visualización esté siempre dentro de los 6 metros (20 pies) a su alrededor y active las alarmas. Es posible que no escuche las alarmas si está fuera de rango.
- Evite forzar el cierre de la aplicación. Para recibir alarmas, la aplicación debe estar en funcionamiento en segundo plano.

## Proyecto de Instrucciones de uso

▫ Active la configuración de Anular No molestar en la aplicación para las alarmas de Glucosa Baja Urgente, Glucosa Baja, Glucosa Alta y Pérdida de Señal para asegurarse de recibir alarmas audibles si el modo No molestar o el volumen de los medios silenciosos de su dispositivo está ACTIVADO.

▫ Debe otorgar permiso a la función No molestar para usar la función Anular No molestar.

▫ Para iOS: Debe aceptar la solicitud de permiso de la aplicación para Alertas Críticas para utilizar esta función. También puede habilitar la configuración de Alertas Críticas directamente desde la configuración de notificaciones de la aplicación.


▫ Para Android: Debe aceptar la solicitud de permiso de la aplicación para acceder al No molestar para utilizar esta función.

También puede habilitar la configuración de acceso al No molestar directamente desde la configuración de notificaciones de la aplicación.

### Alarma de Glucosa Baja Urgente:

Le avisará cuando su lectura de GS1 es de 55 mg/dL o menos en un plazo de 3 0 minutos. Pulse OK para reconocer esta alarma.

Puede personalizar

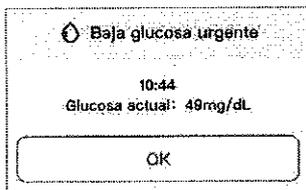


Puede personalizar esta alarma:

1. Pulse Perfil Ajustes de alarma > Alarma de glucosa baja urgente
2. Elija entre Sonido o Vibración y sonido para el estilo de alarma.
3. Seleccione el sonido para esta alarma. El volumen coincidirá con la configuración de su dispositivo.
4. Toque Hecho para guardar su configuración.

  
DROGUERIA FARMACIUM S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17335

  
DROGUERIA FARMACIUM S.R.L.  
CLUB DE FARMACIA 1-5  
ALONSO JAVIER MERCADO  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

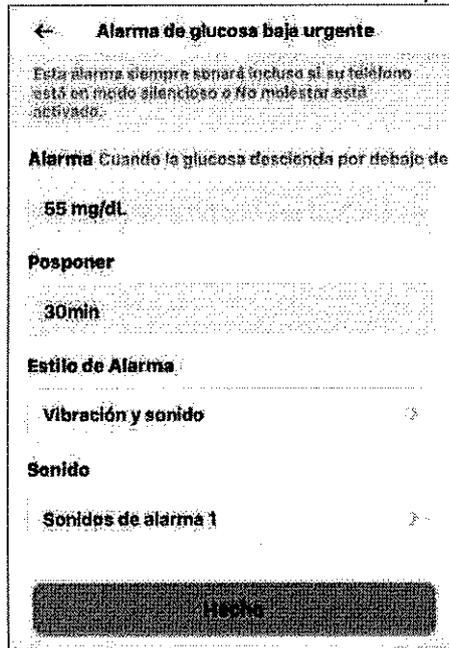


Notas:

▫ La alarma de Glucosa Baja Urgente siempre sonará aunque su dispositivo esté en silencio o No molestar esté ACTIVADO.

El nivel de la Alarma de Glucosa Baja Urgente es de 55 mg/dL, y la duración de la Siesta es de 30 minutos. No son modificables. Después de que reconozcas tu primer alarma de Bajo Glucosa Urgente, se repetirá si tu lectura GS1 permanece por debajo de 55 mg/dL durante 30 minutos.

Alarma de Bajo Glucosa:

Te avisará cuando la lectura GS1 está en o por debajo del nivel que has establecido. Pulse OK para reconocer esta alarma.

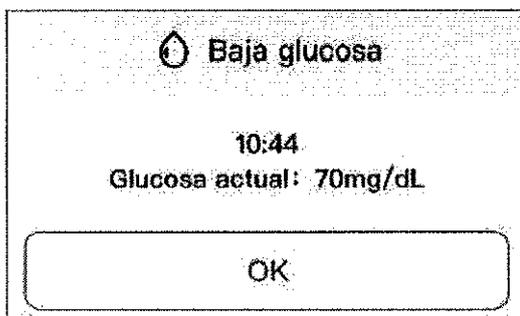


Puede personalizar esta alarma:

FARMACIA FARMACIA S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

FARMACIA FARMACIA S.R.L.  
M.P. 17356  
CALLE 27  
CARR. PANAMERICANA  
SUCIO RENOVABLE


Proyecto de Instrucciones de uso

1. Pulse Perfil > Ajustes de alarma > Alarma de glucosa baja
2. Establece el nivel de la Alarma de Bajo Glucosa entre 60 mg/dL y 100 mg/dL.
3. Establezca la duración de la función de Aplazamiento para su alarma de baja glucosa según sea necesario.
4. Elija entre Sonido o Vibración y sonido para el estilo de alarma.
5. Seleccione el sonido para esta alarma. El volumen coincidirá con la configuración de su dispositivo.
6. Toque Hecho para guardar su configuración.

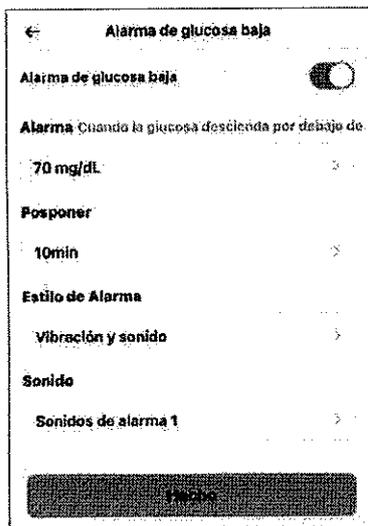

Alarma de Alta Glucosa:

Te avisará cuando la lectura GS1 está en ó por encima del nivelestablecido. Pulse OK para reconocer la alarma.

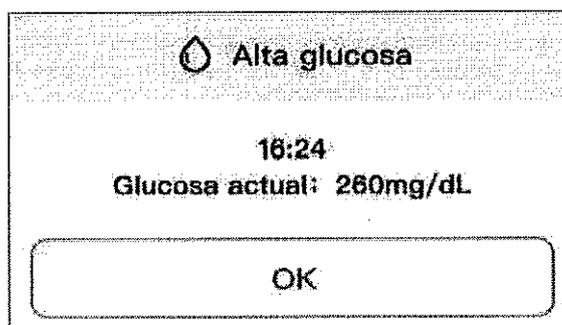

DRUGUETA FARMACIUM S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

DRUGUETA FARMACIUM S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

## Proyecto de Instrucciones de uso

Puede personalizar esta alarma:

1. Pulse Perfil > Ajustes de alarma Alarma de glucosa alta
2. Establece el nivel de la Alarma de Alta Glucosa entre 120 mg/dL y 400 mg/dL.
3. Establece la duración de la pausa para tu Alarma de Alta Glucosa según tus necesidades.
4. Elija entre Sonido o Vibración y sonido para el estilo de alarma.
5. Seleccione el sonido para esta alarma. El volumen coincidirá con la configuración de su dispositivo.
6. Toque Hecho para guardar su configuración Alarma de

← Alarma de glucosa alta

Alarma de glucosa alta

Alarma Cuando la glucosa sube por encima de

250 mg/dL

Posponer

10min

Estilo de Alarma

Vibración y sonido

Sonido

Sonidos de alarma 1

Hecho

## Alarma de Pérdida de Señal:

Te avisará cuando tu Sensor no ha comunicado temporalmente con la aplicación y no estás recibiendo lecturas de glucosa o alarmas de Bajo o Alto Glucosa. Pulse Intentar de Nuevo para volver a comunicarte con tu Sensor. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en [support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com)

## Pérdida de señal

Intentar de nuevo


DRUGERIA FARMACU S.R.L.  
PABLO MARCOS CHAVES  
M.P. 17355

DRUGERIA FARMACU S.R.L.  
ALFONSO JAY DE MENDOZA  
SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

Puede personalizar esta alarma:

1. Pulse Perfil > Ajustes de alarma > Alarma de pérdida de señal
2. Establece una duración de pausa para esta alarma para que te avise cuando tu Sensor no haya comunicado con la aplicación durante más tiempo del especificado.
3. Elija entre Sonido o Vibración y sonido para el estilo de alarma.
4. Seleccione el sonido para esta alarma. El volumen coincidirá con la configuración de su dispositivo.
5. Toque Hecho para guardar su configuración.

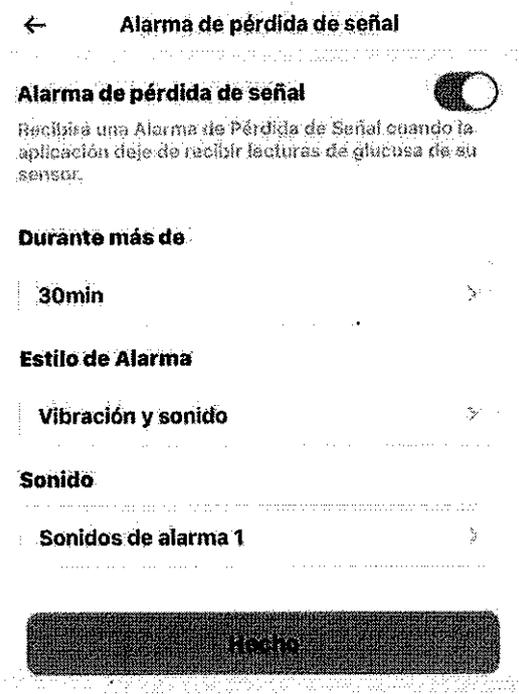

Responder a las alarmas:

Cuando recibas una alarma, por favor, confírmala en tu dispositivo de pantalla táctil pulsando Aceptar en la ventana de la alarma.

Hasta que no reconozcas la alarma, el cuadro de alarma persistirá en la pantalla de tu aplicación. El sonido y/o la vibración se repetirán cuando el sistema active la próxima alarma. El sistema analiza tus lecturas GS1 cada 5 minutos.

Notas:

- Para la Alarma de Bajo Glucosa Urgente, la duración de la pausa está fijada en 30 minutos y no se puede ajustar. Si la alarma no es reconocida, se repetirá si tu lectura GS1 permanece en 55 mg/dL o menos durante este tiempo.

ORQUERÍA FARMACUO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17358

ORQUERÍA FARMACUO S.R.L.  
CALLE 15-5  
AV. CARRERA 14  
BOCA DE UJIGUAY

## Proyecto de Instrucciones de uso

▫ Para la Alarma de Bajo/Alto Glucosa y la Alarma de Pérdida de Señal, puedes personalizar la duración de la pausa, y la alarma se repetirá según la duración seleccionada.

Si no recibe alarmas:

Verifica lo siguiente para identificar posibles causas:

- Bateria demasiado baja: Si la batería del teléfono está agotada, no se obtendrán lecturas GS1 ni alarmas.
- Aplicación apagada: verifica la configuración de la aplicación para asegurarte de que esté encendida para recibir lecturas GS1 o alarmas.
- Alarmas desactivadas: Mantén la función de alarma en la aplicación activada para recibir alarmas.
- Volumen no funciona: Mantenga el volumen lo suficientemente alto como para escuchar las alertas.
- Altavoz y vibraciones no funcionan: no escucharás ni sentirás tus alarmas, verifica si están apagados o no funcionan.
- Fuera de rango: Mantenga su dispositivo de visualización a no más de 6 metros (20 pies) del Sensor, sin obstáculos entre ellos, para garantizar una comunicación adecuada. Si no está dentro del alcance, no se obtendrán lecturas GS1 ni alarmas.
- Errores del sistema: en caso de un error del sistema indicado en la aplicación, como la ausencia de lecturas, error del sensor o pérdida de señal, no se obtendrán lecturas GS1 ni alarmas.
- Durante el calentamiento y después de que finaliza la sesión: no se obtendrán alertas ni lecturas de GS1 durante la fase de calentamiento de 1 hora o después de que finaliza una sesión del Sensor.


## Visualización de registros de alarma de glucosa

Puedes ver los registros de alarmas de glucosa baja y alta pulsando  en la esquina superior derecha de la pantalla de Monitoreo. Revisar y comprender tu historial de glucosa puede ser una herramienta importante para mejorar el control de tu glucosa. Trabaja con tu equipo de atención médica profesional para entender tu historial de glucosa.

## Advertencia

- Si la alarma de glucosa alta/baja no coincide con los síntomas o expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre obtenido con una punción en el dedo y un medidor de glucosa en sangre. Busque atención médica cuando sea necesario.
- Las alarmas de glucosa alta/baja no son aplicables en caso de embarazo, diálisis o enfermedad crítica. Los niveles de alarma alta/baja en este estudio clínico son los valores recomendados para pacientes con diabetes tipo I y tipo II, excluyendo a las poblaciones mencionadas anteriormente.

  
FARMACIA FARMACUINO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17336

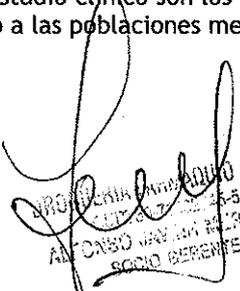  
FARMACIA FARMACUINO S.R.L.  
CALLE 17 N° 25-5  
ALVARO NAVARRA MERCADO  
SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

### 7. Obtención del informe de glucosa

Vea su informe de glucosa para el día o para un rango de tiempo específico. Si es necesario, también puede exportar su informe AGP.

#### 7.1 Visualización de informes diarios

Vea informes diarios en Informes diarios que muestran información detallada diaria.

##### Informe diario general

Muestra el promedio de las lecturas de glucosa del sensor, el porcentaje de tiempo en el que las lecturas de glucosa del sensor estuvieron dentro y fuera del rango objetivo de glucosa.

##### Tendencia diaria

Es un gráfico de las lecturas de glucosa del sensor por día. Los símbolos que identifican eventos se muestran en el gráfico.

##### Seleccionar fecha

▫ Toque Anterior y Siguiente en la parte superior de la pantalla para ver datos del día anterior y del siguiente respectivamente, o

▫ Toca el ícono en la parte superior del medio para seleccionar la fecha que deseas revisar.

#### 7.2 Visualización de informes AGP durante varios días

Visualización de informes AGP en Informes AGP y comparación de tendencias de glucosa en Comparación de tendencias.

##### Informes AGP

Los informes AGP muestran resúmenes de información durante varios días.

AGP muestra el patrón y la variabilidad de los niveles de glucosa del sensor durante un día típico.


La parte verde muestra el rango objetivo de las lecturas de glucosa.

  
DROGUERÍA FARMAQUIO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17336

  
DROGUERÍA FARMAQUIO S.R.L.  
CALLE 15  
ALFONSO LAYAN MERCADO  
S.O.D. BESANTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

### Perfil de glucosa ambulatorio ①

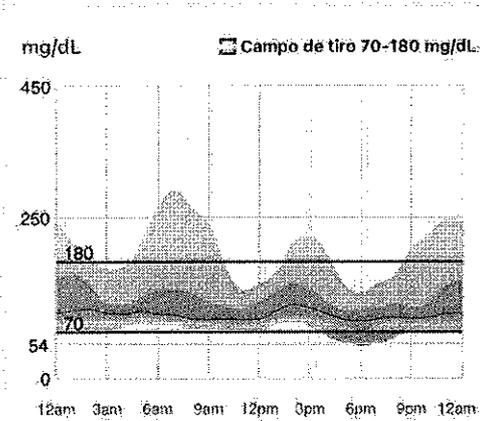

#### Nota:

AGP necesita al menos 5 días de datos de glucosa.

#### Comparación de tendencias

Seleccione días para comparar la tendencia de la glucosa.

#### 7.3 Exportar informe AGP

1. Toque Informes AGP.
  2. Seleccione el rango de tiempo en la parte superior de la pantalla.
  3. Toque Informe para generar el informe del rango de tiempo deseado.
8. Cambio de perfil de usuario

En la pantalla de perfil, puede editar la información de la cuenta o la configuración de su aplicación. Vea la siguiente tabla para referencia.

  
FARMACIA FARMACIA S.R.L.  
FRAN. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

  
FARMACIA FARMACIA S.R.L.  
CENTRO DE ATENCIÓN AL PACIENTE  
ALFONSO MARCOS CHAVES  
ABDIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

Nombre del botón	Descripción
Editar perfil	Edite la información de la cuenta y configure el rango de glucosa objetivo.
Eventos	Muestra un historial de eventos, incluida la hora y la información agregada por el usuario.
Dispositivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra información del sensor.</li> <li>Vea las lecturas de glucosa del sensor tocando Más datos y exporte estos a un archivo de Excel con Exportar todo.</li> <li>Reemplace el sensor con uno nuevo tocando Cambiar.</li> </ul>
Configuración de alarma	<ol style="list-style-type: none"> <li>Configure los objetivos de alarma de glucosa alta y baja del sensor y el estilo de alarma.</li> <li>Active la configuración de alarma para establecer el estilo de alarma y los objetivos de alarma.</li> <li>Toque Hecho para guardar su configuración.</li> </ol>
Vista remota	Invite a un amigo a ver las lecturas de glucosa del sensor y los gráficos de tendencias. Siga las instrucciones en pantalla para compartir datos.
Ayuda	Busca ayuda en la aplicación y la conexión.

Configuraciones

Toque el ícono  en la esquina superior derecha de la pestaña Perfil para configurar ajustes.

Nombre del botón	Descripción
Borrar todos los datos	<p>Elimine todos los datos de glucosa del sensor almacenados en el teléfono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para eliminar, toque Sí.</li> </ul> <p>Nota:</p> <p>Los datos no se pueden restaurar una vez eliminados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para cancelar, toque "x" en la esquina superior</li> </ul>

  
 DROGUERIA FARMACUIG S.A.S.  
 FARM. MARCOS CHAVEZ  
 M.P. 17356


  
 DROGUERIA FARMACUIG S.R.L.  
 C.R. 12 45-9  
 \*EXCLUSIVO PARA EL MERCADO  
 DE COLOMBIA\*

Proyecto de Instrucciones de uso

	derecha de la caja de diálogo.
Restablecer contraseña	Restablecer la contraseña de inicio de sesión. Siga las instrucciones en pantalla para restablecer la contraseña.
Unidad	Selecciona la unidad que se muestra en la aplicación.
Idioma	Selecciona el idioma de la aplicación.
País	Selecciona el país de la lista o ingresa el nombre del país en el cuadro de búsqueda para buscar el país objetivo.
Sobre nosotros	Versión de visualización de la aplicación SIBIONICS, información de actualización, correo electrónico de contacto, términos de uso y política de privacidad. Actualiza la aplicación SIBIONICS si hay una nueva versión disponible.
Documentos Legales	Consulta los Términos de Uso y la Política de Privacidad.
Eliminar la cuenta	Elimina la cuenta actual y todos los datos. Nota: Los datos no se pueden restaurar una vez eliminados.

9. Actividades diarias

El Sistema Sibionics GS1 se puede utilizar durante una amplia variedad de actividades.

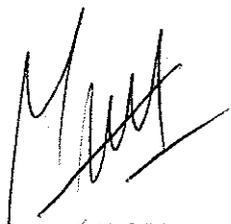  
 BIOGENIA FARMACIUM S.R.L.  
 PARM. MARCOS CHAVES  
 M.P. 17068

  
 BIOGENIA FARMACIUM S.R.L.  
 CUI: 03-71102-45-5  
 ALONSO RIVERA MORALES  
 SOCIO GERENTE

Proyecto de Instrucciones de uso

Actividad	Lo que necesitas saber
Dormir	Mantén el teléfono dentro de 6 metros (20 pies) del Sensor sin obstáculos (como paredes o metal) o la comunicación puede verse comprometida. Para recibir alarmas o recordatorios mientras duermes, asegúrate de que el sonido y/o la vibración estén activados en tu teléfono.
Bañarse, ducharse y nadar	El sensor es resistente al agua y se puede usar mientras te bañas, duchas o nadas. Nota: NO sumerjas el Sensor a una profundidad mayor de 1 metro (3 pies) ni por más de 1 hora.
Otras actividades	El ejercicio intenso puede hacer que el Sensor se suelte. Protege el Sensor de golpes cuando lo uses durante el ejercicio, por ejemplo, usando el parche. Correr no afectará al rendimiento del Sensor.

10. Quitar tu sensor

1. Levanta el borde del adhesivo que mantiene el sensor unido a la piel.

Pela lentamente lejos de la piel en un solo movimiento. Aplicar alcohol alrededor del adhesivo puede facilitar la eliminación del Sensor.

*Nota:*

*Cualquier residuo adhesivo en la piel se puede eliminar con agua tibia y jabón o alcohol isopropílico.*

2. Desecha el sensor usado siguiendo las indicaciones de tu proveedor de atención médica. Consulte 14 Cuidado , mantenimiento y eliminación del sistema GS1 Al aplicar un nuevo Sensor, sigue las instrucciones en 3 Aplicación de tu Sensor . Si el último sensor se retiró después del período de uso de 14 días, se te pedirá que inicies un nuevo sensor.

Precaución

El sensor se puede llevar durante un máximo de 14 días. Al final del período de uso, el sensor dejará de actualizar los datos de glucosa y debe retirarse según las instrucciones.

11. Reemplazar tu sensor

El sensor se detiene automáticamente después del período de uso de 14 días y debe ser reemplazado. Reemplaza el sensor en caso de irritación o molestias en el sitio de aplicación.

  
OPQUEEN TARMAGUO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17358

  
OPQUEEN TARMAGUO S.R.L.  
M.P. 17358  
SOCIO BENEFICARIO

## Proyecto de Instrucciones de uso

### Precaución

Si el sensor se afloja o la punta del sensor sale de la piel, es posible que no se obtengan lecturas o se obtengan lecturas inexactas y bajas.

Verifica que el sensor no se haya soltado. Si se ha soltado, retíralo y aplica uno nuevo.

### Consulte:

10 Retirar su Sensor para retirar el Sensor.


12. Desinstalar la aplicación SIBIONICS.

1. Toca y mantén presionado el icono en el escritorio del teléfono.

2. Selecciona Eliminar aplicación en el menú emergente.

3. Alternativamente, selecciona Configuración > Aplicación Administrador de aplicaciones, selecciona la aplicación SIBIONICS y desinstala.

  
DROGUERÍA FARMACUO S.R.L.  
PARR. MARCOS CHAVES  
M.P. 17066

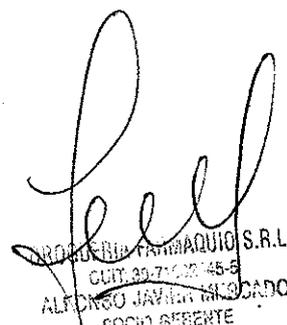  
DROGUERÍA FARMACUO S.R.L.  
CUI. 39-7102745-8  
ALFREDO JAVIER MUCADO  
SOCIO GERENTE

13. Solución de problemas.

Problema	Causa(s) posible(s)	Solución
El sensor no se adhiere a la piel.	El sitio no está libre de suciedad, aceite, cabello o sudor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retira el sensor.</li> <li>2. Limpia el sitio con agua y jabón y luego limpia con una toallita de alcohol. Espera a que el alcohol se seque antes de aplicar el Sensor.</li> <li>3. Aplica un nuevo sensor siguiendo las instrucciones en <i>3. Aplicando tu sensor</i>. Considera afeitar el sitio, evita usar lociones antes de la inserción y aplica un nuevo sensor en el brazo no dominante.</li> </ol>
Irritación en la piel en el sitio de aplicación del sensor.	Costuras u otras prendas o accesorios restrictivos que causan fricción en el sitio.	Asegúrate de que nada roce en el sitio.
	Puede que seas sensible al material adhesivo.	Si la irritación es donde el adhesivo toca la piel, comunícatelo con tu profesional de la salud para identificar la mejor solución.
La lectura de glucosa no se actualiza.	El teléfono no está lo suficientemente cerca del sensor.	Asegúrese de que el teléfono esté dentro de 6 metros (20 pies) del Sensor e intente emparejar el Sensor para obtener una lectura de glucosa.
	El sensor está demasiado caliente o demasiado frío.	Muévete a un lugar donde la temperatura esté entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F) y vuelve a vincular el Sensor en unos minutos.

14. Cuidado, mantenimiento y eliminación del sistema GS1

Almacenamiento

Almacenar correctamente el sistema ayuda a prevenir fallas del sistema.

Mantenga el Sensor en su envase estéril hasta que esté listo para ser utilizado.

Almacena a temperaturas entre 4°C (39,2°F) y 25°C (77°F).

Almacena entre el 10% y el 90% de humedad relativa.

Almacenar fuera del rango recomendado puede causar lecturas inexactas de GS1.

  
 CROQUENIA FARMACUO S.R.L.  
 PARRA MARCOS CHAVES  
 M.P. 17058

  
 CROQUENIA FARMACUO S.R.L.  
 PARRA MARCOS CHAVES  
 M.P. 17058  
 SOCIO GERENTE

## Proyecto de Instrucciones de uso

Puedes almacenar el sensor en el refrigerador si está dentro del rango de temperatura recomendado.

Almacene los sensores en un lugar fresco y seco. No lo almacene en un coche estacionado en un día caluroso o en el congelador.

### Mantenimiento:

El sistema no tiene piezas reparables. El mantenimiento del software se proporciona mediante actualizaciones de software.

### Eliminación del Sistema:

Diferentes regiones tienen diferentes requisitos para desechar dispositivos electrónicos (sensor) y piezas que han estado en contacto con fluidos corporales o sangre (aplicador y sensor).

El sensor no debe desecharse mediante la recolección municipal de residuos. La recopilación separada de residuos de equipos eléctricos y electrónicos está ordenada en la Unión Europea por la Directiva 2012/19/UE.

Antes de desechar el Aplicador del Sensor, realiza las siguientes operaciones:

Tira hacia atrás la estructura interna del aplicador de sensor con el bulto de la tapa hasta que encaje en su lugar. Cubre el aplicador de sensor con la tapa y vuelve a colocar el clip de seguridad.

Consulta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener instrucciones sobre cómo desechar los aplicadores de sensor en un lugar designado para la colección de objetos punzantes.

### Advertencia

El sensor utilizado contiene una sonda de sensor desechable, que está en contacto con el líquido intersticial durante el uso. El sensor es de un solo uso. La reutilización del sensor puede causar daño a la sonda, lecturas inexactas de glucosa e irritación o infección en el sitio de aplicación.

El sensor contiene una batería de litio que no debe incinerarse.

Batería puede explotar al ser incinerada.

El aplicador del sensor es de un solo uso. Contiene una aguja guía en su interior después de la aplicación. NO intentes quitar la aguja guía del aplicador ni limpiarla ni esterilizarla. De lo contrario, pueden ocurrir resultados no deseados o lesiones.

  
SPOQUERIN FARMACUO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17996

  
SPOQUERIN FARMACUO S.R.L.  
CARR. 30-71000-15  
ALFONSO JAVIER ALONSO  
A.D. 20 GERENTE

Proyecto de Rótulo

**Importado por:**

Droguería Farmaquío S.R.L.  
Avenida Centenario Nº 2751 Quilmes, Provincia de Buenos Aires  
Argentina.

**Fabricado por:**

Shenzhen SiSensing Co., Ltd.  
Room 901, Building 1, Gaoshi Jiulongshan Technology Park,  
No. 26 Shijing Road, Fumin Community, Fucheng Street, Longhua District,  
518110 Shenzhen, Guangdong, República Popular de China  
[support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com)

**Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa**

**SIBIONICS**

**GS1**

N° de serie: Ver el producto

Vencimiento: Ver producto

Contenido: 1 Aplicador de sensor, 1 Paquete de sensores, 1 Parche, 1 Inserto del Producto, 1 Guía de Usuario.

De un solo uso - No reutilizar.

Condiciones de transporte, almacenamiento y uso:

Transporte y guarde el paquete del sensor y el aplicador a temperaturas entre 4°C y 25°C.

Humedad Relativa entre 10%-90%

No Apto para RM

Pieza aplicable tipo BF

Radiación electromagnética no ionizante

No utilizar si el embalaje está dañado.

Producto de un solo uso - No reutilizar

Ver la Guía de Usuario que acompaña al producto

**INDICACIONES**

El Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa está indicado para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 2. El Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa GS1 es un dispositivo de medición de glucosa en tiempo real de un solo uso. Está destinado a reemplazar las pruebas de punción digital para las decisiones de tratamiento de la diabetes, incluidas las dosis de insulina. Su prescripción para niños (de 3 a 12 años) se limita a aquellos que están bajo la supervisión de un cuidador que tenga al menos 18 años de edad. El cuidador es responsable de gestionar o asistir al niño en la gestión de la Aplicación y el Sensor, así como de interpretar o ayudar al niño a interpretar las lecturas de glucosa del sensor.

DROGUERÍA FARMACUÍO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVARRA  
M.P. 7688

DROGUERÍA FARMACUÍO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVARRA  
M.P. 7688

Proyecto de Rótulo

Uso bajo prescripción de profesional de la salud

Director Técnico: Farm. Marcos D. Chaves MP 17.356

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-2763-2.

Importado por:

Drogueria Farmaquío S.R.L.

Avenida Centenario N° 2751 (EX 1271), Quilmes, Provincia de Buenos Aires  
Argentina.

Fabricado por:

Shenzhen SiSensing Co., Ltd.

Room 901, Building 1, Gaoshi Jiulongshan Technology Park,

No. 26 Shijing Road, Fumin Community, Fucheng Street, Longhua District,

518110 Shenzhen, Guangdong, República Popular de China

[support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com)

Sistema de Medición Continua de Glucosa

SIBIONICS GS1

Paquete de Sensor

N° de serie: Ver el producto

Vencimiento: Ver producto

Contenido: 1 Paquete de sensor

Estéril - De un solo uso - No reutilizar

Sistema de barrera estéril único

Condiciones de transporte, almacenamiento y uso:

Transporte y guarde el paquete del sensor y el aplicador a temperaturas entre 4°C y 25°C.

Humedad Relativa entre 10%-90%.

No utilizar si el embalaje está dañado.

Ver la Guía de Usuario antequé acompaña al producto.

No Apto para RM

Pieza aplicable tipo BF

Método de esterilización: Esterilizado por Radiación

Condición de venta: Uso bajo prescripción de profesional de la salud

Director Técnico: Farm. Marcos D. Chaves MP 17.356

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-2763-2.

DROGUERIA FARMAQUIO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

DROGUERIA FARMAQUIO S.R.L.  
CUIT: 30 71052045-9  
ALFONSO JAVIER MERCADO  
SOCIO GERENTE

Proyecto de Rótulo

**Importado por:**

**Droguería Farmaquío S.R.L.**

**Avenida Centenario N° 2751 (EX 1271), Quilmes, Provincia de Buenos Aires  
Argentina.**

**Fabricado por:**

**Shenzhen SiSensing Co., Ltd.**

**Room 901, Building 1, Gaoshi Jiulongshan Technology Park,  
No. 26 Shijing Road, Fumin Community, Fucheng Street, Longhua District,  
518110 Shenzhen, Guangdong, República Popular de China  
[support@sibionics.com](mailto:support@sibionics.com)**

**Sistema de Medición Continua de Glucosa**

**SIBIONICS GS1**

**Aplicador de Sensor**

**N° de serie: Ver el producto**

**Vencimiento: Ver producto**

**Contenido: 1 Aplicador de sensor**

**Condiciones de transporte, almacenamiento y uso:**

**Transporte y guarde el paquete del sensor y el aplicador a temperaturas entre 4°C y 25°C.**

**Humedad Relativa entre 10%-90%.**

**No utilizar si el embalaje está dañado.**

**Producto de un solo uso - No reutilizar**

**Ver la Guía de Usuario que acompaña al producto.**

**Radiación electromagnética no ionizante**

**Condición de venta: Uso bajo prescripción de profesional de la salud**

**Director Técnico: Farm. Marcos D. Chaves, M.P. 17.356**

**Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-2763-2.**

  
DROGUERÍA FARMAQUIO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356

  
DROGUERÍA FARMAQUIO S.R.L.  
FARM. MARCOS CHAVES  
M.P. 17356  
AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-2763-2  
2010 PRESENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DROGUERIA FARMAQUIO SRL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.