

RÓTULOS

Fabricado por:

Laboratorios Dr. Preston SRL

Villarino 2318 – CABA

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO

Marca: Dickinson

Modelo: PARAMONOCLOROFENOL Alcanforado

Lote: xxxxxx

Fecha de vencimiento: (mm-aaaa)

CONSERVAR a T < 30°C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR Y LA HUMEDAD.

SIEMPRE LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Director Técnico: Dra . SCHECHTMANN DE KLURFAN, BEATRIZ, Farmacéutica - MN 4071.

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1313-221


Laboratorios Dr. Preston S.R.L.
Farm. Beatriz S. de Klurfan
D.T. M.N. 4071


LABORATORIOS DR. PRESTON S.R.L.
ALBERTO RAFAEL KLURFAN
SOCIO GERENTE

INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por: Laboratorios Dr. Preston SRL - Villarino 2318 - CABA - Tel: (+5411) 4303-1474
Correo electrónico: labpreston@ciudad.com.ar - Sitio web: www.dickinsondental.com.ar

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO

Marca: Dickinson

Modelo: PARAMONOCLOROFENOL Alcanforado

INDICACIONES DE USO: Medicación temporaria odontológica endodóntica.

COMPOSICIÓN: Paramonoclorofenol 1%; Alcanfor 30%; Fenol 25%; Vehículo hidrofílico c.s.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO: PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO DICKINSON, es un líquido incoloro o amarillento, con olor característico, con propiedades antisépticas del fenol y del cloro.

CONTRAINDICACIONES: En caso de alergia o intolerancia comprobada a cualquiera de sus componentes.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Es recomendable interrogar al paciente sobre ciertas predisposiciones hacia algunos de los componentes de fórmula. A tal fin, lea atentamente la composición declarada, con el fin de descartar la ocurrencia de estos eventos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1-Instrumentar y secar bien la zona a aplicar.

2-El producto debe ser aplicado en el gabinete odontológico con ayuda de un hisopo, cono o papel absorbente, según técnica.

ANTES DEL USO DEL PRODUCTO: Asegúrese que el paciente no tiene alergias a cualquiera de los componentes de fórmula. Deberá considerarse el uso de anestesia, previo a la aplicación del producto.

LUEGO DEL USO DEL PRODUCTO: Asegúrese que el paciente no manifieste irritación o dolor en la zona adyacente a la aplicación del producto. Enjuague bien toda la zona.

ADVERTENCIAS: El odontólogo actuante, deberá hacer uso de guantes, cofia, barbijo y anteojos protectores durante su empleo. Es necesario tomar todas las precauciones para evitar que el producto tome contacto con piel o mucosas, fuera del campo de acción específico.

Para ser usado exclusivamente por el profesional odontólogo dentro de las pautas de buenas prácticas de dispensación, conforme la legislación de cada Estado parte.

No emplear este producto, fuera de las indicaciones del mismo. Ver la fecha de vencimiento en el envase. No utilizar una vez vencido el producto. **Mantener alejado de los niños.** En caso de ingestión accidental mantener al paciente hidratado y efectuar la consulta correspondiente al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 – Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/6458-7777.

PRESENTACIÓN: Se presenta en frascos de vidrio con gotapón o gotero tetina, de varios tamaños.

EFFECTOS DE RECIPROCIDAD: Se pueden producir efectos de reciprocidad con otros materiales aplicados a la sustancia dental, en particular pastas con hidróxido de calcio.

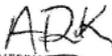
CONSERVAR a T < 30°C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR Y LA HUMEDAD. No exponer a la luz solar. Proteger de la humedad. Mantener el envase bien cerrado.

Director Técnico: Dra. SCHECHTMANN DE KLURFAN, BEATRIZ, Farmacéutica - MN 4071.

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1313-221


Laboratorios Dr. Preston S.R.L.
Farm. Beatriz S. de Klurfan
D.T. M.N. 4071


LABORATORIOS DR. PRESTON S.R.L.
ALBERTO RAFAEL KLURFAN
SOCIO GERENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO LABORATORIOS DR PRESTON SRL.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.