

PROYECTO DE RÓTULO

1. Fabricado en: Mittelbacher Str. 18, 01896 Pulsnitz Germany – Allmed Medical GmbH
2. Importador por: STORING INSUMOS MÉDICOS SRL-C.M Cuenca 648, Villa Lynch, Buenos Aires
3. **Hemodializador de fibra hueca – Marca: BIOREMA/POLYPURE/VAPURE**
4. **Modelos: xxx**
5. **Lote: xxxx**
6. **Forma de presentación: xxx**
7. Producto estéril por Gamma /Steam
8. Advertencias: No reutilizar/No usar si el envase está dañado
9. Ver instrucciones de uso en manual de usuario
10. Director Técnico: GERMAIN PABLO ANDRES- MN°:14716- Farmacéutico
11. Autorizado por ANMAT – PM-2823-8
12. Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Farm. Pablo Germain
Director Técnico M.P. 17617 M.N. 14716
Storing Insumos Médicos SRL

Farm. Pablo Germain
Director Técnico M.P. 17617 M.N. 14716
Storing Insumos Médicos SRL



Campichuelo 260, PB Oficina 23 / Cuenca 648- Villa Lynch
E-mail: info@storingmedical.com
<https://storingmedical.com/>

IVA Responsable Inscripto
CUIT N° 30-70887571-2

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado en: Mittelbacher Str. 18, 01896 Pulsnitz Germany – Allmed Medical GmbH
2. Importador por: STORING INSUMOS MÉDICOS SRL-C.M Cuenca 648, Villa Lynch, Buenos Aires
3. Hemodializador de fibra hueca – Marca: BIOREMA/POLYPURE/VAPURE
4. Modelos: xxx
5. Lote: xxxx
6. Forma de presentación: xxx
7. Preparación
 - Verificar la fecha de vencimiento.
 - Confirmar que el envase esté íntegro.
 - Retirar el dispositivo utilizando técnica aséptica.
 - Instalar el hemodializador en el monitor de diálisis conforme a las instrucciones del fabricante del equipo.
8. Cebado
 - Conectar las líneas sanguíneas.
 - Realizar el cebado con solución fisiológica según protocolo institucional.
 - Eliminar completamente el aire del circuito extracorpóreo.
9. Finalización
 - Desconectar al paciente según protocolo clínico.
 - Desechar el hemodializador y el circuito extracorpóreo como residuo patológico.
10. Condiciones de almacenamiento: Entre 5 °C y 35 °C. En lugar seco y protegido de la luz solar directa. Mantener en su envase original hasta el momento de uso.
11. Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación cuando se almacena conforme a las condiciones recomendadas. Consultar la fecha de vencimiento indicada en el envase.
12. Eliminación: Después de su uso, eliminar el dispositivo conforme a la normativa local aplicable para residuos biológicos y patológicos.
10. Director Técnico: GERMAIN PABLO ANDRES- MN°:14716- Farmacéutico
11. Autorizado por ANMAT – PM-2823-8
12. Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Farm. Pablo Germain
Director Técnico M.P. 17617 M.N. 14716
Storing Insumos Médicos SRL



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y Manual de instrucciones 77008

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.