




Equipamiento - Insumos Médicos - Droguería

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar

PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por: Water-Jel Technologies, LLC.- 50 Broad Street, Carlstadt, NJ EUA 07072.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. – Argentina
3. Apósitos para quemaduras.
4. Modelo: XX
5. Marca: Water-Jel
6. Libre de látex.
7. Esterilizado por radiación gamma.
8. Producto de uso único. No reutilizar.
9. Formas de presentación: Por unidad (en bolsa/envase rígido)
10. Almacenar entre 15°C y 25°C.
11. Lote N°/Serie:
12. Fecha de Fabricación:
13. Fecha de Vencimiento: 5 años.
14. Director técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
15. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-429
16. Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.


PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13086 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar

INSTRUCCIONES DE USOApósitos

No se requiere una formación especial para el manejo de los apósitos WaterJel®.

Antes de aplicar WaterJel®, si es posible, deben retirarse los restos de ropa que cedan de forma espontánea.

Si fuera necesario o urgente, los apósitos WaterJel® pueden aplicarse directamente encima de la ropa quemada, su efecto humectante permite el paso del gel facilitando la posterior retirada de los tejidos adheridos, minimizando el trauma para el paciente.

Seleccionar el tamaño del apósito que mejor se adapte al tamaño de la lesión, nuestro objetivo es: estabilizar la temperatura en la zona afectada.

Una vez aplicado el apósito verter el resto de gel que queda en el envase sobre los mismos.

Pueden removerse cuantas veces sea necesario para valorar la evolución de la herida.

De manera general se deben seguir las instrucciones:

Abra el empaque.

Remueva el apósito para quemaduras y aplique inmediatamente sobre el área quemada.

Enrolle alrededor del área sin aplicar presión.

Deje el apósito fijo en el lugar. Busque ayuda médica adicional

En cada envase individual pueden observarse las instrucciones mediante símbolos/dibujos.

- Código 0606 (Apósito de 5x15cm):



- Código 0404 (Apósito de 10x10cm)



PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO


PROPATO HNOS. S.A.I.C.
Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13085 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868

Equipamiento - Insumos Médicos - Droguería


PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar


- Código 0416 (Apósito de 10x40cm)

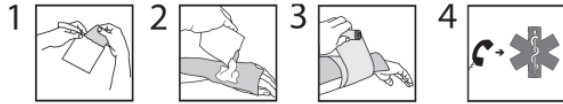


- Código 0818 (Apósito de 20x45cm)

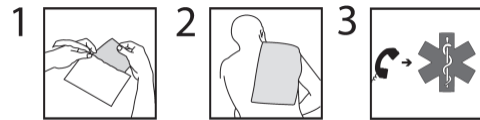

- Código 0820 (Apósito de 20x55cm)

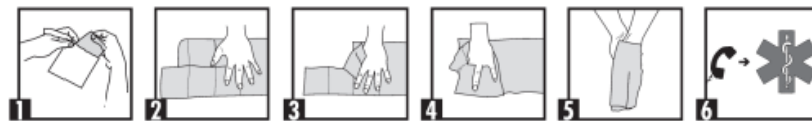

-Código 1216 (Apósito 30x40cm)

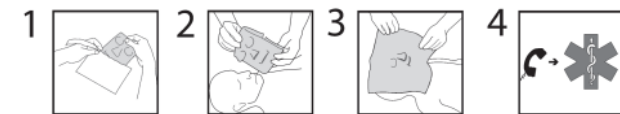

Características y recomendaciones


Los apósitos no se adhieren al lecho de la herida, no son grasos, ni tóxicos y no enmascaran la quemadura, facilitando su posterior valoración.


WaterJel® es biodegradable e hidrosoluble, por lo que se elimina fácilmente con agua.

En caso de quemaduras de etiología química, se aconseja realizar una abundante irrigación con agua antes de proceder a aplicar los dispositivos WaterJel®. Algunos productos químicos pueden requerir el uso de un neutralizante específico antes de proceder a aplicar los dispositivos WaterJel®. La manipulación debe de realizarse con equipos de protección adecuados.

En quemaduras eléctricas recuerde separar a la víctima de la fuente de energía antes de aplicar WaterJel®.

WaterJel® no es apto para quemaduras criogénicas.

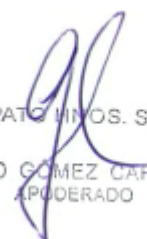
PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO

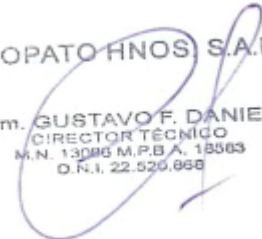PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13085 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868



Equipamiento - Insumos Médicos - Droguería

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar

INDICACIONES DE USO

Los apósitos para quemaduras WaterJel, permiten adaptarse y fijarse con facilidad a las distintas zonas anatómicas afectadas, junto con el gel alivian el dolor al instante disminuyendo la necesidad de analgesia adicional, inhiben el desarrollo de cepas bacterianas (incorpora un antiséptico natural, no contiene ingredientes activos) y no inducen hipotermia.

La eficacia de WaterJel®, además de su fácil almacenaje y transporte, lo convierten en el producto ideal para la primera asistencia en quemaduras y está especialmente indicado para el equipamiento de unidades de emergencia hospitalaria y extra-hospitalaria, brigadas de bomberos, protección civil, así como para material de primeros auxilios en botiquines de empresas.

Con WaterJel® se consiguen todos los objetivos relacionados en los protocolos sobre el manejo del paciente quemado más actualizados con un solo producto, aspecto que resulta fundamental en situaciones críticas dado que ahorra tiempo y simplifica la actuación de los equipos de primeros auxilios y de emergencias.

† Quemadura de distinta profundidad en tronco. Aplicación de la manta WaterJel® de 91x76 cm.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Producto de un único uso.

No reutilizar.

No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.
Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13085 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868



Equipamiento - Insumos Médicos - Droguería

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar

En quemaduras de etiología química, irrigar previamente con agua o solución fisiológica para arrastrar el agente químico.

En quemaduras eléctricas recuerde separar a la víctima de la fuente de energía antes de aplicar WaterJel®.

Los apósitos para quemaduras WaterJel® no es apto para quemaduras criogénicas.

Retire y busque consejo médico si se desarrolla erupción. Busque atención médica de emergencia para quemaduras graves. El dispositivo es solo para uso externo. No aplique compresión alrededor del gel. No utilizar después de la caducidad proporcionada en el embalaje. Desechar como residuos clínicos según los protocolos locales.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE


Almacenar en un ambiente fresco y seco, entre 15°C y 25°C.


FORMAS DE PRESENTACIÓN

Por unidad (en bolsa/envase rígido)

PERIODO DE VIDA ÚTIL

5 años.


PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO

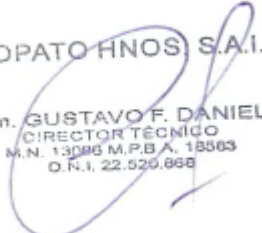PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13085 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868




Equipamiento - Insumos Médicos - Droguería

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Av. Rodríguez Peña 2169 - B1676BUQ - Santos Lugares - Bs.As.
Teléfono: (011) 5556-8800 - Fax: (011) 5556-8888
web: www.propato.com.ar - e-mail: contacto@propato.com.ar

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por: Water-Jel Technologies, LLC.- 50 Broad Street, Carlstadt, NJ EUA 07072.
2. Importado por PROPATO HNOS. S.A.I.C., Equipamientos e Insumos Hospitalarios – Av. Rodríguez Peña 2045/2169 – Santos Lugares – Bs. As. – Argentina
3. Apósito para quemaduras
4. Modelo: XX
5. Marca: Water-Jel
6. Libre de látex.
7. Producto estéril.
8. Esterilizado por radiación gamma.
9. Producto de uso único. No reutilizar.
10. Formas de presentación: Por unidad (en bolsa/envase rígido)
11. Director técnico: Gustavo Daniele – Farmacéutico – MN 13086
12. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-647-429
13. Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.


PROPATO HNOS. S.A.I.C.
PABLO GÓMEZ CARATTO
APODERADO

PROPATO HNOS. S.A.I.C.

Farm. GUSTAVO F. DANIELE
DIRECTOR TÉCNICO
M.N. 13086 M.P.B.A. 18563
O.N.I. 22.520.868



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO PROPATO HNOS. S.A.I.C.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.