



PROYECTO DE RÓTULO
Según disposición ANMAT N° 2318/02 TO2004

MCM, EUROMIX**APOSITO HIDROCOLOIDE**

Modelos: G1302, G1305, G1308, G1315, G1317, G1318,
 G1402, G1405, G1408, G1415, G1430,
 G15417, G15418, G1502, G1505, G1508, G1515, G1517, G1518,
 G1602, G1605, G1608, G1615, G1617, G1618,
 G1700, G1701, G1702, G1703, G1704,
 5045, 5046, 5047, 5048, 5049,
 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059,
 5060, 5061, 5062, 5063,
 5079, 5080, 5081, 5082, 5083

Antes de utilizarlo lea las instrucciones de uso

Importado por EURO SWISS S.A.

Dirección: Brandsen 5302, La Tablada, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Dirección: Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

Autorizado por la ANMAT PM N° 1440-148

Director Técnico: Farm Jorge Daniel Lewkowicz MP 19.351

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias'

Conservación: proteger de la luz solar directa. Mantener en lugar seco.

Lote

Fecha de vencimiento

	El apósito hidrocólicoide ha sido esterilizado con radiación gamma
	Si el paquete está roto, no utilice ni vuelva a esterilizar el producto..
	No lo use si el paquete está dañado.
	Proteger de la luz solar directa.
	Mantener seco.
	Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. Dirección : Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

Adriana Saraniti
 Apoderada
 DNI 18443171

Daniel Jorge Lewkowicz
 Director Técnico
 Euro Swiss SA

**Sumario de Informaciones básicas de las instrucciones de uso
según Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)**



MCM, EUROMIX

APOSITO HIDROCOLOIDE

Modelos: G1302, G1305, G1308, G1315, G1317, G1318,
G1402, G1405, G1408, G1415, G1430,
G15417, G15418, G1502, G1505, G1508, G1515, G1517, G1518,
G1602, G1605, G1608, G1615, G1617, G1618,
G1700, G1701, G1702, G1703, G1704,
5045, 5046, 5047, 5048, 5049,
5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059,
5060, 5061, 5062, 5063,
5079, 5080, 5081, 5082, 5083

Importado por EURO SWISS S.A.

Dirección: Brandsen 5302, La Tablada, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Dirección: Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

Autorizado por la ANMAT PM N° 1440-148

Director Técnico: Farm Jorge Daniel Lewkowicz MP 19.351

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias'

Descripción

Apósito hidrocoloide de Longterm Medical Technology Co., Ltd. consiste en una película de poliuretano semipermeable o espuma de PU recubierta con un hidrocoloide que contiene carboximetilcelulosa (CMC) como principal agente absorbente y formador de gel. El apósito hidrocoloide es permeable al vapor de agua pero impermeable al exudado y a los microorganismos. En presencia de exudado, la CMC absorbe líquido y se hincha para formar un gel cohesivo que no tiende a desintegrarse ni a dejar residuos en el lecho de la herida.

Indicaciones

El apósito hidrocoloide se puede utilizar en el tratamiento de heridas con exudado bajo a moderado, como úlceras venosas en las piernas, úlceras por presión, quemaduras superficiales, quemaduras superficiales de espesor parcial, zonas donantes, heridas posoperatorias, abrasiones cutáneas y heridas pequeñas. También se puede utilizar para rehidratar el tejido necrótico, que luego se elimina mediante autólisis.

Adriana Saraniti
Apoderada
DNI 18443171

Daniel Jorge Lewkowicz
Director Técnico
Euro Swiss SA

Contraindicaciones


Recomendamos que el apósito hidrocoloide no se utilice en músculos o huesos expuestos, ni se aplique a pacientes que se sabe que son sensibles a uno de los ingredientes. Nuestro producto no es el producto de elección para su aplicación en heridas con mucho exudado, al menos en las etapas iniciales del tratamiento, ya que el apósito requeriría ser reemplazado con demasiada frecuencia.

Precauciones

1. Asegúrese de que el área de la herida esté seca antes de usar el apósito.
2. El apósito hidrocoloide debe ser 2 cm más grande que el área de la herida para garantizar que el apósito pueda cubrir la herida.
3. Si la profundidad de la herida es superior a 5 mm, es mejor llenar la herida con el material adecuado antes de usar el apósito hidrocoloide.
4. No es adecuado para heridas con exudados abundantes.
5. Cuando el apósito se vuelve blanco y se hincha, indica que se debe cambiar el apósito.
6. Al comenzar a usar el apósito, el área de la herida puede agrandarse, this is caused by the debridement function of the dressing and it is normal phenomenon.
7. El gel estará formado por la mezcla de molécula de hidrocoloide y exudados. Como parece una secreción purulenta, se malinterpretaría como una infección de la herida. Simplemente límpielo con solución salina.
8. A veces puede haber algo de olor en el vendaje, y este olor podría desaparecer después de limpiar la herida con agua salina.
9. El apósito debe cambiarse inmediatamente cuando se produzcan fugas alrededor del apósito.
10. El apósito debe calentarse suavemente entre las manos antes de usarlo para mejorar la adhesión y, cuando sea posible, el peso del paciente debe mantenerse alejado del apósito durante un mínimo de 20 minutos para permitir que se adhiera a la piel.
11. Si no se puede quitar el vendaje por completo, limpie la piel con un algodón salino. Se recomienda humedecer la piel antes de retirar el apósito.
12. Para un fuerte rendimiento adhesivo del apósito hidrocoloide, la piel periherida puede dañarse si el apósito se cambia demasiado pronto o con demasiada frecuencia. Se recomienda conservar el apósito durante 48-72 h o cuando el color de apariencia del apósito sea blanco lechoso.

Frecuencia de cambio

El intervalo entre cambios normalmente estará determinado por el grado de exudado producido. El apósito se puede dejar hasta 7 días.

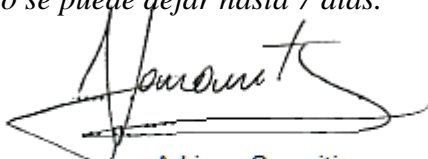







Adriana Saraniti
Apoderada
DNI 18443171




Daniel Jorge Lewkowicz
Director Técnico
Euro Swiss SA

El tiempo de uso acumulativo más largo del permiso debe ser inferior a 30 días. Almacenamiento
Los apósitos hidrocoloideos se almacenan en una sala limpia y bien ventilada con espacio
Temperatura y humedad relativa inferiores al 80%, sin gases corrosivos.

Detalle de simbología utilizada

	El apósito hidrocoloide ha sido esterilizado con radiación gamma
	Si el paquete está roto, no utilice ni vuelva a esterilizar el producto..
	No lo use si el paquete está dañado.
	Proteger de la luz solar directa.
	Mantener seco.
	Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. Dirección : Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

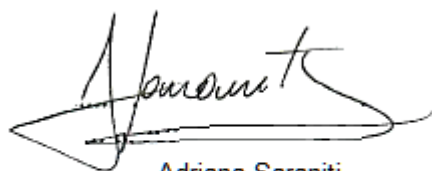

Adriana Saraniti
 Apoderada
 DNI 18443171



Daniel Jorge Lewkowicz
 Director Técnico
 Euro Swiss SA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EURO SWISS S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.