

PROYECTO DE RÓTULO
Según disposición ANMAT N° 2318/02 TO2004

MCM, EUROMIX

APOSITO DE ALGINATO

Antes de utilizarlo lea las instrucciones de uso

Importado por EURO SWISS S.A.

Dirección: Brandsen 5302, La Tablada, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Dirección: Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

Autorizado por la ANMAT PM N° 1440-150






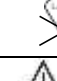




Director Técnico: Farm Jorge Daniel Lewkowicz MP 19.351

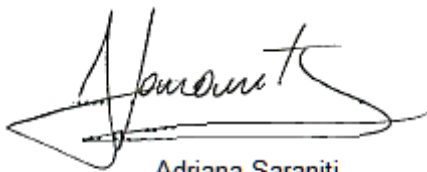
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias'

Conservación: proteger de la luz solar directa. Mantener en lugar seco.

Lote

Fecha de vencimiento

	El apósito de alginato ha sido esterilizado con radiación gamma
	Si el paquete está roto, no utilice ni vuelva a esterilizar el producto..
	No lo use si el paquete está dañado.
	Proteger de la luz solar directa.
	Mantener seco.
	Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. Dirección : Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.
	No contiene latex de caucho natural
	Atencion leer instrucciones
	Numero de lote  fecha de vencimiento


Adriana Saraniti
 Apoderada
 DNI 18443171


Daniel Jorge Lewkowicz
 Director Técnico
 Euro Swiss SA

**Sumario de Informaciones básicas de las instrucciones de uso
según Anexo III.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)**



**MCM, EUROMIX
APOSITO DE ALGINATO**

Antes de utilizarlo lea las instrucciones de uso

Importado por EURO SWISS S.A.

Dirección: Brandsen 5302, La Tablada, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Argentina.

Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd.

Dirección: Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.

Autorizado por la ANMAT PM N° 1440-150

Director Técnico: Farm Jorge Daniel Lewkowicz MP 19.351

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias'

Descripción

Apósito de alginato de Longterm Medical Technology Co., Ltd. es un apósito primario para heridas elaborado a partir de la sal cálcica del ácido algínico. Se prepara como una fibra textil unida mediante un proceso especial de unión con agujas y se presenta como una "cuerda" para empaquetar caries y una almohadilla plana no tejida para aplicar en heridas abiertas más grandes.

Indicaciones

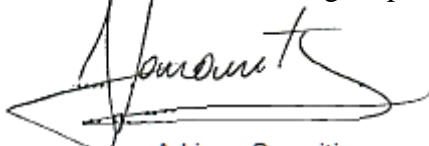
El apósito de alginato se puede aplicar a heridas con exudado de moderado a intenso, como quemaduras de espesor parcial, zonas donantes, úlceras en las piernas, úlceras por presión, heridas cavitadas y la mayoría de las otras heridas granuladas. Logró hemostasia.

Contraindicaciones

Recomendamos que el apósito de alginato no se utilice en heridas necróticas negras, secas o cubiertas con C.

Método de uso

Se coloca un apósito de alginato, elegido para que sea ligeramente más grande que el área de la herida, en contacto íntimo con la base de la herida. Cualquier superposición se puede cortar o doblar sobre la superficie de la herida antes de la aplicación de un apósito secundario estéril mantenido en su lugar con cinta quirúrgica o un vendaje, según corresponda. La naturaleza del apósito secundario estará regida por el estado de la herida.



Adriana Saraniti
Apoderada
DNI 18443171



Daniel Jorge Lewkowicz
Director Técnico
Euro Swiss SA

Si se prevén grandes cantidades de exudado, puede ser necesario un apósito absorbente simple; pero a medida que la herida cicatriza y se produce menos exudado, una gasa más delgada con una película plástica de baja adherencia puede ayudar a conservar la humedad y evitar que la herida se seque demasiado rápido. Las heridas de cavidades más profundas o los senos paranasales se pueden vendar con una cuerda de alginato, que se debe colocar con cuidado en su posición, pero sin apretar demasiado.

Frecuencia de cambio











El intervalo entre cambios de apósito dependerá enteramente del estado de la herida y de la naturaleza del apósito secundario. El intervalo entre cambios puede ampliarse hasta 7 días en algunas circunstancias.

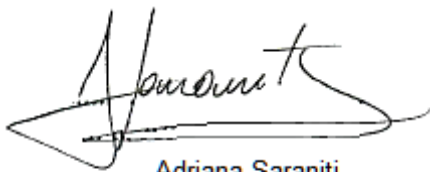
Advertencias

Las heridas que muestren signos de infección clínica pueden vendarse con este producto, pero el vendaje debe cambiarse diariamente y considerarse el uso de terapia antibiótica sistémica.

Almacenamiento

Los apósitos de alginato se almacenan en una sala limpia y bien ventilada con una humedad relativa inferior al 80 %, una temperatura de -10 °C a 40 °C y sin gases corrosivos.

	El apósito de alginato ha sido esterilizado con radiación gamma
	Si el paquete está roto, no utilice ni vuelva a esterilizar el producto..
	No lo use si el paquete está dañado.
	Proteger de la luz solar directa.
	Mantener seco.
	Fabricado por: Zhejiang Longterm Medical Technology Co., Ltd. Dirección : Huangcheng North Road 493, Mo Gan Mountain, National High-tech District, 313200, Deqing, Zhejiang, P. R. China.
	No contiene latex de caucho natural
	Atencion leer instrucciones
	Numero de lote  fecha de vencimiento


Adriana Saraniti
Apoderada
DNI 18443171


Daniel Jorge Lewkowicz
Director Tecnico
Euro Swiss SA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EURO SWISS S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.