

**ANEXO III.B**

**PROYECTO DE RÓTULO**

*Fabricado por:* **Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.**, N° 925 Jinyuan yi Road,  
201803 Shanghai, P.R. China.

*Importado por:* **MTG GROUP S.R.L.**

Av. Cramer 3226, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**Micro Catéter**

**Marca:** INT / Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.

**Modelo:** según corresponda

CONTENIDO: por UNIDAD

REF.

Lote N°:

Fecha de fabricación:

Fecha de Vencimiento:



Rx Only



PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

Esterilizado por óxido de etileno.

STERILE EO



*Lea las Instrucciones de Uso.*

Director Técnico: Farm. Germán Szmulewicz – Matricula Nacional: 6324

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT **PM-1991-229**

NICOLAS JUANA  
APODERADO  
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324

**ANEXO IIIB –**  
**PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO**

*Fabricado por:* **Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.**, N° 925 Jinyuan yi Road,  
201803 Shanghai, P.R. China.

*Importado por:* **MTG GROUP S.R.L.**

Av. Cramer 3226, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**Micro Catéter**

**Marca:** INT / Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.

**Modelo:** según corresponda

CONTENIDO: por UNIDAD

REF.

Lote N°:



Rx Only



PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

Esterilizado por óxido de etileno.

STERILE	EO
---------	----



*Lea las Instrucciones de Uso.*

Director Técnico: Farm. Germán Szmulewicz – Matricula Nacional: 6324

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA ANMAT **PM-1991-229**

NICOLAS JUANA  
APODERADO  
MTG GROUP S.R.L.

Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324

Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324



**3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;**

No Aplica

**3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;**

- 1) Retirar el producto del envase.
  - 2) Elegir el alambre guía compatible con este microcatéter.
  - 3) Usar solución salina heparinizada para limpiar el microcatéter a través del aro de protección y procurar que la superficie del producto esté totalmente lubricada.
  - 4) Insertar el alambre guía en el microcatéter.
  - 5) Insertar el alambre guía y el microcatéter lentamente en la ubicación de la lesión a través del conector Y o la vaina.
- Una vez que el microcatéter se encuentra en la posición deseada, tomar las medidas de diagnóstico o terapéuticas que correspondan; abrir la válvula de hemostasis y retirar el microcatéter lentamente del vaso.

**3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;**

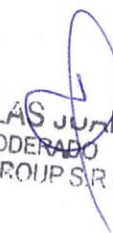
No corresponde


**3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;**

No aplica

**3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de Re esterilización;**

No utilizar si el envase está dañado

  
NICOLÁS JUNNA  
APODERADO  
GTG GROUP SRL

  
Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324

**3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser Re esterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.**

**En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;**

No aplica.

**3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);**

No aplica

**3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;**


No aplica

**3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;**

No aplica

**3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;**

- Mantener alejado de la luz solar
- Conservar en un lugar seco

  
NICOLÁS JUAN  
APODERADO  
MTG GROUP S.R.

  
Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324

**3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;**

No Aplica

**3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;**

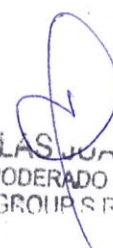
El producto puede entrañar el riesgo de contaminación biológica. Manipúlelo y deséchelo según la normativa vigente.


**3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;**

No Aplica

**3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.**

No Aplica

  
NICOLÁS J. J. J.  
APODERADO  
MTG GROUP S R

  
Germán Szmulewicz  
Farmacéutico  
Mat. 6324



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** MTG GROUP S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.