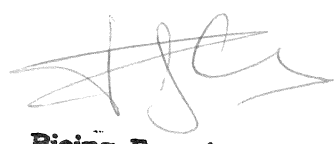


## **RÓTULOS**

### **YUWELL**

**HeartSave Y, HeartSave YA**

  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° 1-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**

## **Yuwell Heart Save Y, Heart Save YA**

**Modelos :** HeartSave Y0, HeartSave Y1, HeartSave Y2, HeartSave Y3, HeartSave Y5, HeartSave Y6, HeartSave Y7, HeartSave Y8, HeartSave YA0, HeartSave YA1, HeartSave YA2, HeartSave YA3, HeartSave YA5, HeartSave YA6, HeartSave YA7, HeartSave YA8.

**Fabricado por:** JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD  
No. 1 Baisheng Road Development Zone  
Danyang, Jiangsu 212300  
República Popular de China

**Importado y Distribuido por:** DRIPLAN S.A.  
Catalina de Boyle 3340 (Calle 28)  
Gral San Martín (B1650IMD)  
Bs. As. Argentina

**Fecha de Fabricación:**

**Número de Serie:**

**Temperatura de almacenamiento:** 0 a 50 °C **Temperatura de Operación:** 0 a 55 °C

### **Instrucciones de Uso**

Leer el Manual de Instrucciones


### **⚠ Advertencias y Precauciones**


Leer Manual de Instrucciones

**Director Técnico:** Bioing. Francisco Rivas MP: I-6762

**Condición de venta: "Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias"**

**AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM: 1608-108**

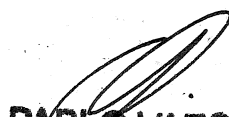  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**


## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**YUWELL**

**HeartSave Y, HeartSave YA**



**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**



**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**



## **Yuwell Heart Save Y, Heart Save YA**

**Modelos :** HeartSave Y0, HeartSave Y1, HeartSave Y2, HeartSave Y3, HeartSave Y5, HeartSave Y6, HeartSave Y7, HeartSave Y8, HeartSave YA0, HeartSave YA1, HeartSave YA2, HeartSave YA3, HeartSave YA5, HeartSave YA6, HeartSave YA7, HeartSave YA8.

**Fabricado por:** JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD  
No. 1 Baisheng Road Development Zone  
Danyang, Jiangsu 212300  
República Popular de China

**Importado y Distribuido por:** DRIPLAN S.A.  
Catalina de Boyle 3340 (Calle 28)  
Gral San Martín (B1650IMD)  
Bs. As. Argentina

**Fecha de Fabricación:**

**Número de Serie:**

**Temperatura de almacenamiento:** 0 a 50 °C **Temperatura de Operación:** 0 a 55 °C

### **Instrucciones de Uso**

Leer el Manual de Instrucciones

### **⚠ Advertencias y Precauciones**


Leer Manual de Instrucciones

**Director Técnico:** Bioing. Francisco Rivas MP: I-6762

**Condición de venta: "Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias"**

**AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM: 1608-108**

  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**



## YUWELL HeartSave Y, HeartSave YA

### Uso acorde a los fines establecidos

El Desfibrilador Externo Automático HeartSave Series Y y YA está diseñado para su uso en adultos y niños en caso de fibrilación ventricular.


Las series HeartSave Y | YA también guían al usuario durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante voz.

Si se detecta un ritmo desfibrilable en un paciente, el dispositivo administra una descarga al corazón para normalizar el ritmo.

El dispositivo de las series HeartSave Y | YA se mantiene en el paciente hasta que llega la asistencia profesional, incluso si el paciente comienza a respirar nuevamente.

El equipo está diseñado para el tratamiento de pacientes adultos y niños en combinación con los parches de electrodos OBS-DE/P(303A1204)/REF 97847. Los pacientes de 8 años o más y/o con un peso superior a 25 kg se tratan como adultos. Los pacientes de 1 a 8 años que pesan menos de 25 kg se tratan como niños.

### Descripción de los detalles del equipo

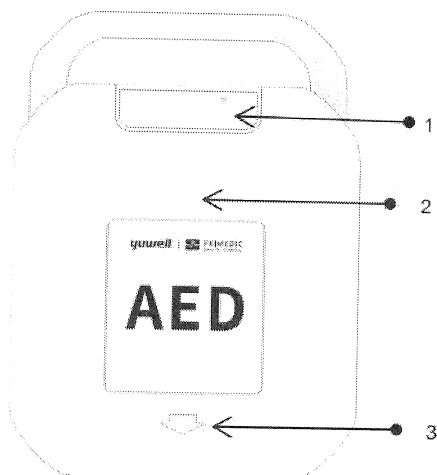


**Fig. 1 Vista frontal con cubierta**


- (1) Pantalla de estado
- (2) Cubierta del dispositivo
- (3) Abrir la cubierta como indica el icono

**PABLO VAZQUEZ**  
**PRÉSIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**

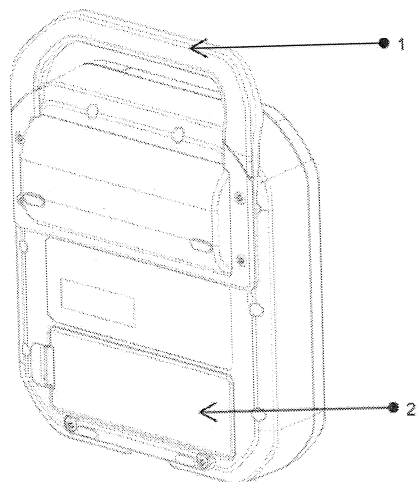

**Fig. 2 Vista trasera**  
 (1) Asa de transporte  
 (2) Batería

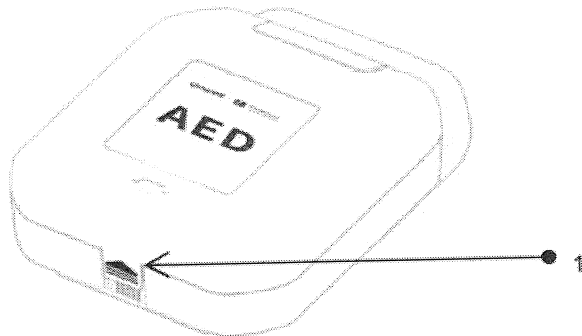


**Fig. 3 Vista inferior**  
 (1) Bloqueo de apertura de la cubierta del dispositivo

  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**




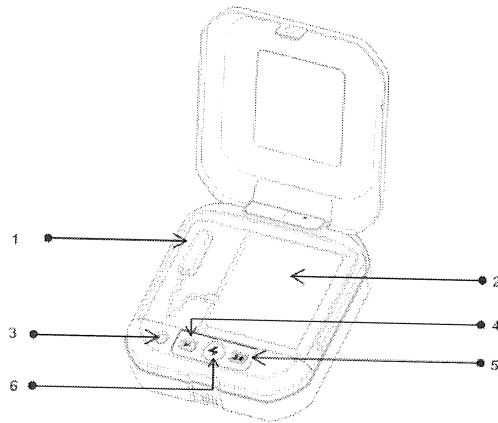

**Fig. 4 Vista frontal de las series HeartSave Y | YA**

- (1) Enchufe para conectores de electrodos y puerto USB
- (2) Parches de electrodos
- (3) Interruptor de encendido/apagado con retroiluminación verde  
Luces verdes: el equipo está encendido y puede funcionar correctamente
- (4) Botón de cambio de idioma
- (5) Botón de modo pediátrico con retroiluminación  
Luces verdes: modo pediátrico  
No se enciende: modo para adultos
- (6) Botón de descarga con retroiluminación roja solo para la serie HeartSave Y (botón de liberación para desfibrilación)  
Rojo parpadeante: listo para generar una descarga

Los electrodos del HeartSave Y | YA vienen preconectados de fábrica y no es necesario enchufarlos antes del primer uso. No obstante, si se han sustituido o desenchufado, deben volver a conectarse a la unidad de acuerdo con el siguiente procedimiento.

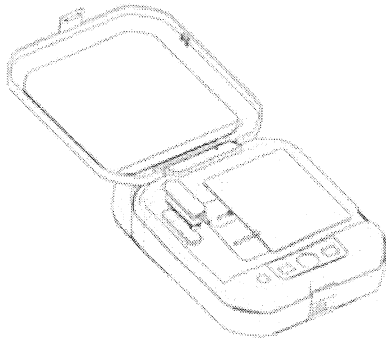

#### Procedimiento de instalación:

- Presione la tapa para abrir la cubierta del dispositivo
- Inserte el conector del electrodo en la interfaz del electrodo
- Coloque los parches de electrodos en el dispositivo


**PABLO VAZQUEZ**  
PRESIDENTE  
DRIPLAN S.A.

**Bioing. Francisco Rivas**  
Matricula N° I-6.762  
Co. Director Técnico  
Driplan S.A.

## Aplicación de los electrodos

### Extracción de la película de los electrodos

- (1) Película protectora en los electrodos
- (2) Parches de electrodos de desfibrilación

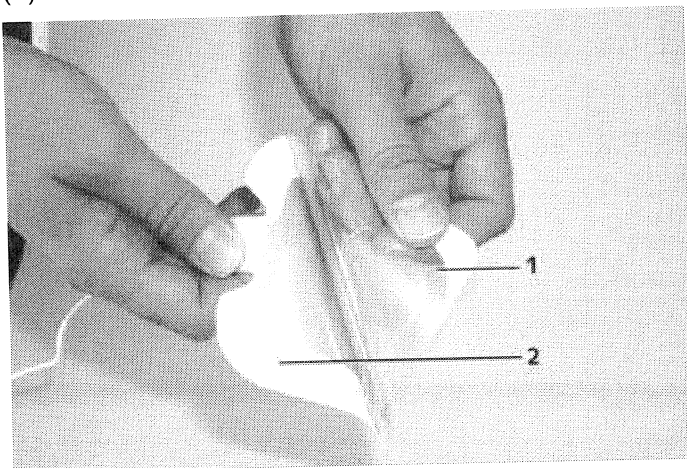


### Posición de los electrodos en adultos

Las posiciones de los electrodos son:

Rojo ①: en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, y

Verde ②: en el lado izquierdo del pecho, arriba del vértice del corazón en la línea axilar.

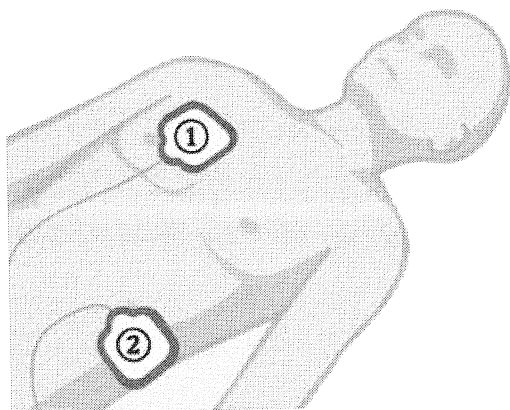


### Posición de los electrodos en niños

Las posiciones de los electrodos son:

Rojo ①: en la espalda, a la misma altura que el corazón

Verde ②: en el centro del pecho

  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

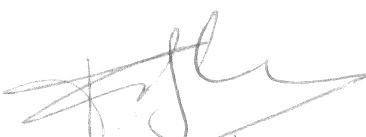
  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**

Para limpiar su equipo, siga estas reglas:


1. Apague el equipo, desconecte los cables y retire la batería.
2. Limpie la pantalla de estado con un paño limpio y suave humedecido con limpiacristales.
3. Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave y limpio humedecido con el producto de limpieza recomendado.
4. Quite toda la solución de limpieza con un paño seco después de limpiar si es necesario.
5. Seque su equipo en un lugar ventilado y fresco.



**PABLO VAZQUEZ**  
**PRÉSIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**



**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° I-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**

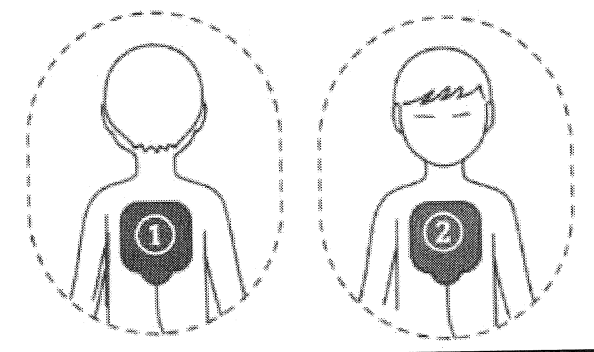

El HeartSave le indicará con un mensaje de voz que le coloque los electrodos de desfibrilación al paciente.

**Pegar los electrodos como se muestra en la imagen**

**Retire toda la ropa del pecho del paciente, abra los electrodos y péguelos en el torso desnudo como se muestra en la imagen**

Procedimiento:


- Abra el embalaje de los electrodos de desfibrilación.
- Retire la película protectora de uno de los electrodos y luego coloque inmediatamente el electrodo en la posición que había determinado anteriormente.
- Proceda a retirar la película protectora del segundo electrodo y colóquelo en su posición.
- Alise los electrodos sobre el paciente asegurándose de que no haya burbujas de aire debajo de los electrodos.

## Limpieza

Los productos de limpieza recomendados son:

- Agua
- Etanol (75 %)
- Alcohol isopropílico (70 %)

  
**PABLO VAZQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**DRIPLAN S.A.**

  
**Bioing. Francisco Rivas**  
**Matricula N° 1-6.762**  
**Co. Director Técnico**  
**Driplan S.A.**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** DRIPLAN SOCIEDAD ANONIMA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.