

Densell®

Bio Densell Repair Z Fast

Cemento reparador biocerámico endurecimiento rápido.

INTRODUCCIÓN

Bio: Biocerámico/ Biocompatible/ Bioactivo

Repair: Reparador

Z: Óxido de Zirconio

Fast: Endurecimiento Rápido

Densell: Marca Nacional Argentina

Bio Densell Repair Z en virtud de los resultados clínicos satisfactorios y comprobados por trabajos científicos realizados el producto cumple con las características clínicas y biológicas necesarias para un excelente tratamiento dentario.

DEFINICIÓN

- Nueva fórmula cuyo tamaño de partículas después de la hidratación permite una fácil manipulación e inserción en la cavidad dental.
- Adición de radiopacificador óxido de zirconio y dióxido de titanio que no causa manchas en la raíz o en la corona dental.
- Baja solubilidad.

Debido a las propiedades físicas inherentes al polvo del producto, la consistencia del polvo es de fácil manipulación, además de fácil utilización en el tratamiento reparador.

Mejoramos esta característica, y desarrollamos una nueva formulación del líquido con una buena plasticidad y con agente catalizador que auxilia en el proceso de endurecimiento rápido.

Esta nueva fórmula mantiene todas las propiedades químicas y biológicas del biocerámico original, que garantiza el éxito del tratamiento, aunque altera sus propiedades físicas de manipulación. El resultado es un producto con buena plasticidad, facilitando la manipulación y la inserción en la cavidad dental.

INDICACIONES

El Reparador biocerámico Bio Densell Repair Z Fast, es un cemento a base de trisilicatos de calcio, aluminio y hierro como principio activo con óxido de zirconio y dióxido de titanio como radiopacificador.

P/DENTAL MEDRANO S.A.

APODERADA
ALEXIA ALINE GEDIKIAN

Dr. Roberto de Oliveira
Farmacéutico
Matrícula N° 16.742

Esta última generación, de reparadores bioactivo, basado en una química mineral de alta pureza, posee una excelente capacidad de sellado, estimulando la mineralización de la estructura dentinaria, produciendo una unión química a la misma en el tiempo.

Tiene propiedades, bioactivas para estimular la cicatrización periapical, antimicrobianas gracias a la liberación de hidróxido de calcio.

PROPIEDADES

Excelente radiopacidad para facilitar el seguimiento y de fácil manipulación (polvo/líquido que no requiere aparatología para su preparación).

Más radiopaco que dentina y hueso.

Ausencia de decoloración dental debido al radiopacificador de óxido de zirconio utilizado

Además posee un tiempo de endurecimiento acelerado (14 minutos) sin contracción, mejorando la solubilidad y el lavado del material en el sitio de colocación.

INSTRUCCIONES USO

1. Esterilice los materiales que se van a utilizar en la espátulación (lozeta y espátula), inserción y condensación.

2. Dispense el contenido de 1 cuchara y 1 gota del líquido en la placa de vidrio.

3. Espatular durante 20 a 30 seg, hasta la homogeneización completa del polvo y el líquido.

El cemento obtenido se parece a una masilla.

4. Lleve al lugar deseado con un aplicador y condenselo con instrumental adecuado para esta finalidad.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

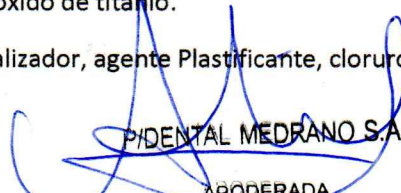
Avíos conteniendo:

- 1ml de líquido + 1g de polvo
- 1ml de líquido + 3,5g de polvo
- 2ml de líquido + 2g de polvo
- 3ml de líquido + 3g de polvo
- 5ml de líquido + 5g de polvo todos con Cuchara dosificadora + Instrucciones de Uso.

Repuestos de líquido: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml.

COMPOSICIÓN

- Polvo: Trisilicatos de $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; Silicato dicálcico $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; Aluminato tricálcico $3\text{CaO} \cdot \text{Al}$, óxido de zirconio, carbonato de calcio, dióxido de titanio.
- Líquido: Agua, Conservantes, Catalizador, agente Plastificante, cloruro de calcio y aluminato.


DENTAL MEDRANO S.A.
APODERADA
ALEXIA ALINE GEDIKIAN


Dra. Gabriela de Oliveira
Farmacéutica
Matrícula Nº 16.742

PRECAUCIONES

- Use gafas de protección, máscara y guantes al manipular. En caso de contacto del producto con los ojos o con la piel lave con agua;
- El producto es muy sensible a la humedad;

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar a temperatura ambiente, al abrigo de la luz y humedad. Utilizar antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase. Vida útil 2 años.

 Dental Medrano S.A.


Paraguay 3026/28/32. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Dir. Tec.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255.

www.dentalmedrano.com Rev5 IV/24 PK 76829

P/DENTAL MEDRANO S.A.

APODERADA
ALEXIA ALINE GEDIKIAN


Dra. Tatiane de Oliveira
Farmacéutica
Matrícula N° 16.742

Avío 1g+1ml

Avío 3,5g+1ml

Avío 2g+2ml

Bio Densell® Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 1g
Dental Medrano S.A.
A.N.M.A.T. PM-235-255. Rev1 IV/24. WGT WG0544 04-2025

Bio Densell® Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 3,5g
Dental Medrano S.A.
A.N.M.A.T. PM-235-255. Rev1 IV/24. WGT WG0544 04-2025

Bio Densell® Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 2g
Dental Medrano S.A.
A.N.M.A.T. PM-235-255. Rev1 IV/24. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 1ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 1ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 2ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® WGT WG0742 09-2025
BIO Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 1ml + 1g
Dental Medrano S.A. Paraguay 3026/28/32 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 235-255. Rev1 IV/24. Dir. Tecn.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. www.dentalmedrano.com **Cod:1129**

Densell® WGT WG0742 09-2025
BIO Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 1ml + 3,5g
Dental Medrano S.A. Paraguay 3026/28/32 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 235-255. Rev1 IV/24. Dir. Tecn.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. www.dentalmedrano.com **Cod:1129**

Densell® WGT WG0742 09-2025
BIO Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 2ml + 2g
Dental Medrano S.A. Paraguay 3026/28/32 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 235-255. Rev1 IV/24. Dir. Tecn.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. www.dentalmedrano.com **Cod:1129**

Avío 3g+3ml

Avío 5g+5ml

Repuestos de líquidos

Bio Densell® Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 3g
Dental Medrano S.A.
A.N.M.A.T. PM-235-255. Rev1 IV/24. WGT WG0544 04-2025

Bio Densell® Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 5g
Dental Medrano S.A.
A.N.M.A.T. PM-235-255. Rev1 IV/24. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 3ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 5ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 1ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 2ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® WGT WG0742 09-2025
BIO Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 3ml + 3g
Dental Medrano S.A. Paraguay 3026/28/32 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 235-255. Rev1 IV/24. Dir. Tecn.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. www.dentalmedrano.com **Cod:1129**

Densell® WGT WG0742 09-2025
BIO Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido 5ml + 5g
Dental Medrano S.A. Paraguay 3026/28/32 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 235-255. Rev1 IV/24. Dir. Tecn.: Farm. Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. www.dentalmedrano.com **Cod:1129**

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 3ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

Densell® Rev1 IV/24
Bio Densell Repair Z Fast
Cemento reparador biocerámico de endurecimiento rápido. AGITE ANTES DE USAR 5ml
Dental Medrano S.A. Autorizado por la A.N.M.A.T. PM-235-255. Dir. Tec. Farm.: Tatiane de Oliveira Silva MN 16742. WGT WG0544 04-2025

p/DENTAL MEDRANO S.A.

LILIANA C. CHAHBALIAN
APODERADA

Dra. Tatiane de Oliveira
Farmacéutica
Matrícula N° 16.742



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DENTAL MEDRANO S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.