

# FRANLAU S.R.L.

**DISTRIBUCIONES MEDICAS**  
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4  
GODOY CRUZ, MENDOZA  
CEL.:0261-156546830  
eduardorissopatron@speedy.com.ar

## PROYECTO DE RÓTULO

1. Fabricante: DEMETECH CORP – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
2. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
3. Sutura de acero no absorbible - Marca: Demetech, modelo: DemeSTEEL, códigos: según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
4. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
5. No utilizar si el envase se encuentra dañado
6. ESTÉRIL / RAYOS GAMMA
7. Lote N°
8. Fecha de elab.
9. Fecha de vto.
10. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
11. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
12. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
13. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
14. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-10
15. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"



FRANLAU S.R.L.  
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS  
Farmacéutica: ANA C. AZNAR  
MAX. 2160  
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ  
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.  
CUIT. 30-71432154-0  
EDUARDO RISSO PATRON  
SOCIO GERENTE

# FRANLAU S.R.L.

**DISTRIBUCIONES MEDICAS**  
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4  
GODOY CRUZ, MENDOZA  
CEL.:0261-156546830  
eduardorissopatron@speedy.com.ar

## PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricante: DEMETECH CORP – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
2. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
3. Sutura de acero no absorbible - Marca: Demetech, modelo: DemeSTEEL, códigos: según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
4. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
5. No utilizar si el envase se encuentra dañado
6. ESTÉRIL / RAYOS GAMMA
7. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
8. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
9. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
10. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
11. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-10
12. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

## INDICACIÓN, FINALIDAD O USO AL QUE SE DESTINA

La sutura quirúrgica de acero inoxidable está indicada para el cierre de heridas abdominales, reparo de hernia, cierre esternal y procedimientos ortopédicos, incluso para el cerclaje y reparo de tendones

## 3. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALES Y ACLARACIONES SOBRE EL USO DEL PRODUCTO MÉDICO

### REACCIONES

DemeSTEEL sutura de acero inoxidable quirúrgico provoca una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido y no se absorbe.



FRANLAU S.R.L.  
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS  
Farmacéutica: ANA C. AZNAR  
MAT. 2160  
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ  
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.  
CUIT. 30-71432154-0  
EDUARDO RISSO PATRON  
SOCIO GERENTE

# FRANLAU S.R.L.

**DISTRIBUCIONES MEDICAS**  
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4  
GODOY CRUZ, MENDOZA  
CEL.:0261-156546830  
eduardorissopatron@speedy.com.ar

## CONTRAINDICACIONES

El uso de esta sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a acero inoxidable, o metales constituyentes tales como el cromo y el níquel.

## ADVERTENCIAS

- No re-esterilizar.
- Descartar suturas abiertas que no hayan sido utilizadas.
- La seguridad y la compatibilidad de esta sutura no se ha evaluado en un entorno de Resonancia Magnética. \*\*
- El calentamiento o la migración de esta sutura no se ha probado en el entorno de Resonancia Magnética. \*\*
- La imagen producida por equipo de Resonancia Magnética puede ser distorsionada en pacientes con suturas de acero inoxidable. \*\*
- Existe un mínimo riesgo de movimiento de la sutura durante los procedimientos que utilizan equipos de Resonancia magnética nuclear. \*\*
- Usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicas que involucren suturas no-absorbibles, antes de emplear suturas quirúrgicas de acero inoxidable de DemeTECH, para cerrar heridas; ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el sitio de aplicación y el material de sutura utilizado.
- la práctica quirúrgica aceptable debe ser seguido para el tratamiento de las heridas contaminadas o infectadas.
- En el manejo de este o cualquier otro material de sutura, se debe tener cuidado para evitar daños. Con suturas de acero inoxidable, evitar torceduras o torsión excesiva.
- Suturas de acero inoxidable pueden ser difíciles de anudar. Grandes bucles son arrojados al formar nudos para reducir la posibilidad de fractura en el tiro final. Las suturas también pueden ser asegurados girando los dos extremos del alambre juntos, ya sea manual o mecánicamente, teniendo cuidado de evitar la fractura del material.
- Se debe tener cuidado al asegurar los extremos de las suturas de acero inoxidable para evitar la irritación del tejido circundante.



FRANLAU S.R.L.  
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS  
Farmacéuticos: ANA C. AZNAR  
MAX 2160  
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ  
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.  
CUIT. 30-71432154-0  
EDUARDO RISSO PATRON  
SOCIO GERENTE

# FRANLAU S.R.L.

**DISTRIBUCIONES MEDICAS**  
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4  
GODOY CRUZ, MENDOZA  
CEL.:0261-156546830  
eduardorissopatron@speedy.com.ar

- No re-usar. La reutilización de productos de un solo uso puede causar contaminación y afectar la seguridad de los dispositivos, el rendimiento y la eficacia, exponiendo a los pacientes y al personal a riesgos innecesarios. El diseño y el material utilizados no son compatibles con la limpieza convencional y procedimientos de esterilización.

**\*\* DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE LAS PRUEBAS MRI DESPUÉS DE USAR DemeSTEEL suturas de acero DemeSTEEL es una sutura de acero inoxidable comparables, igual en todos los aspectos a las suturas de acero inoxidable que se encuentran en uso en la profesión médica. Aunque DemeSTEEL no se evaluó mediante pruebas de resonancia magnética, otras evaluaciones de las suturas de acero inoxidable la han clasificado como MR- Condicional.**

Demetech cree que la decisión de realizar una prueba de resonancia magnética a un paciente después de aplicar suturas DemeSTEEL de acuerdo a las indicaciones, es mejor dejarlo a la discreción del profesional médico que esta al cuidado y el bienestar de la paciente. Por lo tanto, aconsejamos a todos la preocupación, e informar a todos los profesionales médicos si ha de tener un implante DemeSTEEL, o algún implante de acero inoxidable, antes de la prueba de resonancia magnética.

## PRECAUCIONES

- En el manejo de la sutura quirúrgica, se debe tener cuidado para evitar el daño por manejo como retorcimiento o torsión excesiva.
- Para evitar el daño de las puntas de las agujas y el área de unión de la aguja con la sutura, sostener la aguja en un punto a una distancia de (1/3) o (1/2) de la longitud de la unión de la aguja a la sutura hasta el punto final.
- Re amoldar las agujas pueden causar que pierdan fuerza y sean menos resistentes al doblaje o al rompimiento.
- Usuarios deben de ejercer extremo cuidado cuando manejan agujas quirúrgicas para evitar pinchazos inadvertidos.
- Descartar agujas usadas en contenedores 'fuertes' destinados para esa función.



FRANLAU S.R.L.  
DISTRIBUIDORA FRODO MEDICOS  
Farmacéuticos: ANA C. AZNAR  
MAT. 21 ED  
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ  
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.  
CUIT: 30-71432154-0  
EDUARDO RISSO PATRON  
SOCIO GERENTE

# FRANLAU S.R.L.

**DISTRIBUCIONES MEDICAS**  
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4  
GODOY CRUZ, MENDOZA  
CEL.:0261-156546830  
eduardorissopatron@speedy.com.ar

## REACCIONES ADVERSAS

- Efectos adversos, que pueden estar relacionados al uso de este producto, incluyen: dehiscencia de la herida, reacción alérgica en pacientes con sensibilidades conocidas por el acero inoxidable, o metales constituyentes tales como el cromo y el níquel , infecciones, reacción inflamatoria mínima ligera del tejido, dolor, edema y eritema en el lugar de la herida.
- Agujas rotas pueden resultar en cirugías largas o cirugías adicionales o cuerpos extraños residuales en los tejidos.
- Pinchazos inadvertidos de agujas con agujas quirúrgicas contaminadas pueden resultar en la transmisión de patógenos o enfermedades por la sangre.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


Es recomendado que las suturas sean almacenadas debajo de 25°C y se mantengan lejos de fuentes directas de calor y humedad. Observar cuidadosamente la fecha de expiración.

## FORMA DE PRESENTACIÓN

Cajas x 12 unidades estériles envasadas unitariamente

## VIDA ÚTIL

5 años

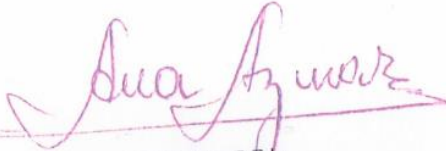

FRANLAU S.R.L.  
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS  
Farmacéutica: ANA C. AZNAR  
MAT. 2160  
MARCONI 726 - Dpto. 4 - GODOY CRUZ  
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.  
CUIT. 30-71432154-0  
EDUARDO RISSO PATRON  
SOCIO GERENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROT, E, INST, DE USO- FRANLAU S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.