



PROYECTO DE RÓTULO Anexo III.B  
SETS DE HEMOCONCENTRADOR CON PAQUETE DE TUBULADURA

Importador:  
CARDIOMEDIC S.A.  
Sargento Cabral 3995 / Díaz Vélez 4592/98. Munro, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Fabricante:  
Chalice Medical Ltd.  
Manton Wood Enterprise Park, Worksop, Nottinghamshire, S80 2RS, Reino Unido.

SETS DE HEMOCONCENTRADOR CON PAQUETE DE  
TUBULADURA

CHALICE Modelo: \_\_\_\_\_

LOT XXXXXXXXX



STERILEEO



NO REESTERILIZAR

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRESCO PROTEGIDO CONTRA LA LUZ SOLAR DIRECTA

Directora Técnica: Muriel Ratti. Farmacéutica Mat. Nac N° 11371

**USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Autorizado por la ANMAT PM-598-117

CARDIOMEDIC S.A.  
Jorge Gelo  
Presidente

MURIEL CAROLINA PATRICIA RATTI  
FARMACEUTICA  
M.N. 11371 M.P. 13381  
DIR. TEC. CARDIOMEDIC S.A.

Importador:**CARDIOMEDIC S.A.****Sargento Cabral 3995 / Díaz Vélez 4592/98. Munro, Vicente López, Provincia de Buenos Aires.**Fabricante:**Chalice Medical Ltd.****Manton Wood Enterprise Park, Worksop, Nottinghamshire, S80 2RS, Reino Unido.****SETS DE HEMOCONCENTRADOR CON PAQUETE DE  
TUBULADURA****CHALICE Modelo: \_\_\_\_\_****STERILEEO****NO REESTERILIZAR****NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO****ALMACENAR EN LUGAR SECO Y FRESCO PROTEGIDO CONTRA LA LUZ SOLAR DIRECTA****Directora Técnica: Muriel Ratti. Farmacéutica Mat.Nac N° 11371****USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS****Autorizado por la ANMAT PM-598-117****ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

- Estos productos están destinados a un solo uso (para evitar la contaminación cruzada).
- No reutilizar ni reesterilizar.
- Garantizar el uso adecuado de anticoagulantes
- Comprobar la integridad del envase estéril antes de su uso. No utilizar si el producto está dañado.
- Cada producto se entrega estéril y envasado individualmente. La esterilidad solo puede garantizarse si el envase no ha sido abierto ni dañado de alguna manera.
- Compruebe la "fecha de caducidad" antes de utilizarlo (no lo utilice si la fecha ha vencido)
- Inspeccione visualmente el paquete de tubos para detectar cualquier daño antes de su uso
- Los paquetes de tubos usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente.

**INDICACIONES DE USO**

Están diseñados para la filtración y eliminación de elementos no necesarios de la sangre, tales como la urea, la creatinina, solutos producidos por el cuerpo y/o que se han añadido al circuito como parte de la terapia. Forman parte de un circuito de circulación extracorpórea, y es también parte de los sets una bolsa colectora donde se depositan los residuos de la filtración.


**Duración de uso**

Los Sets de Hemoconcentrador con paquete de tubuladura están pensados para un uso clínico de hasta seis horas.

  
**CARDIOMEDIC S.A.**  
**Jorge Gelo**  
**Presidente**

## INSTRUCCIONES DE USO

### Set de hemoconcentrador con Paquete de tubuladura y bolsa

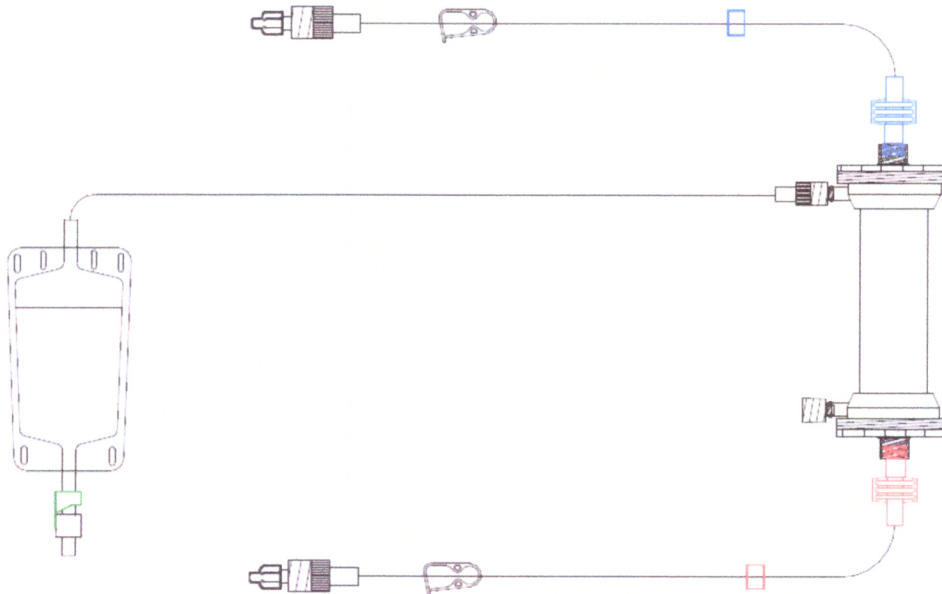


- Compruebe la integridad del producto. Si es dudosa, no utilice el dispositivo y póngase en contacto con el fabricante.
- Con una técnica aséptica estricta, retire el paquete y las protecciones y asegure inmediatamente el dispositivo dentro del sistema circulatorio extracorpóreo.
- Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y estén apretadas.
- Asegúrese de que la bolsa de residuos esté colocada y la válvula de vaciado de la bolsa esté cerrada.
- Enjuague con una bolsa de 500 ml de solución salina.
- Conecte la vía arterial (roja) del hemoconcentrador a una vía arterial de alta presión dentro del circuito extracorpóreo.
- Conecte la vía venosa (azul) del hemoconcentrador a una vía venosa de baja presión dentro del circuito extracorpóreo.
- Desbloquee la vía arterial y asegúrese de que la vía venosa de retorno no esté restringida. La sangre debe fluir ahora a través del hemoconcentrador.

### Almacenamiento

Los productos están empaquetados individualmente.

Incluso con un almacenamiento correcto, el paquete de tubos tiene una vida útil limitada. Preste atención a la fecha de caducidad que figura en el envase. El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco, a temperatura ambiente y protegido de la luz solar directa o de los rayos UV.

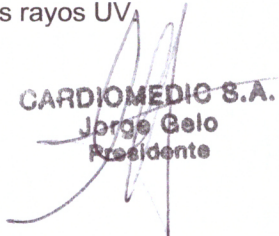  
CARDIOMEDIC S.A.  
Jorge Gelo  
Presidente

**Más información**

Todos los incidentes graves relacionados con este producto deben comunicarse a Chalice Medical Ltd o al representante de ventas/distribuidor y a la autoridad competente del Estado en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.


El informe se puede realizar por correo electrónico a [quality@chalicemedical.com](mailto:quality@chalicemedical.com).

Un producto asociado a un incidente no debe desecharse inmediatamente después de su uso. Si el producto debe ser devuelto por cualquier motivo, solicite la aprobación previa de Chalice Medical Ltd.

Si el producto está contaminado, es responsabilidad del usuario preparar y etiquetar adecuadamente el producto para el envío de devolución. La dirección de envío para devoluciones es la dirección del Fabricante o del representante de ventas/distribuidor en la región.



**CARDIOMEDIC S.A.**  
**Jorge Gelo**  
**Presidente**

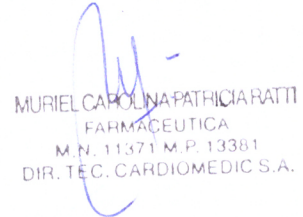

MURIEL CAROLINA PATRICIA RATTI  
FARMACEUTICA  
M.N. 11371 M.P. 13381  
DIR. T.E.C. CARDIOMEDIC S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** CARDIOMEDIC S.A. rótulos e instrucciones de uso

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.