



INSTRUCCIONES DE USO

(según Anexo III.B Disposición ANMAT N.º 2318/02 T.O. 2004).

ADVAMRYL

SUTURA QUIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORBIBLE SINTÉTICA POLIGLECAPRONA MONOFILAMENTO COLOR 25

DESCRIPCIÓN

La sutura ADVAMRYL es una sutura quirúrgica estéril monofilamento absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de un copolímero de glicólido y ϵ -caprolactona. La fórmula empírica del copolímero es $[(CH_2-CO-O)x-[C_5H_{10}-CO-O]y]_n$ - (donde, $x : y = 7.5:2.5$).

Se ha descubierto que el copolímero de poliglecaprona 25 es no antigénico, no pirogénico y provoca sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. La sutura ADVAMRYL está disponible en violeta y sin teñir. La sutura está teñida con D y C violeta núm. 2 (Índice de color N.º. 60725/Violeta solvente 13).

La sutura ADVAMRYL está disponible en diferentes tamaños.

La sutura ADVAMRYL cumple con la Farmacopea europea para "Suturas monofilamento absorbibles sintéticas estériles" y el requisito de la Farmacopea de los Estados Unidos para "Sutura quirúrgica absorbible" con un diámetro apenas mayor.

INDICACIONES

La sutura ADVAMRYL está indicada para uso en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en cirugía oftálmica, microcirugía, tejidos cardiovasculares y neurológicos.

APLICACIONES

La selección de la sutura dependerá del estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida.

RENDIMIENTO

La sutura ADVAMRYL se bioabsorbe y se biodegrada durante el período. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de la sutura ADVAMRYL se produce mediante hidrólisis. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa. Toda la resistencia a la tracción original se pierde 21 días después de la implantación. La absorción de la sutura ADVAMRYL es totalmente completa hasta 90 días.

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglecaprona 25.

Día de implantación	% aproximado de fuerza original restante	
	TEÑIDO	NO TEÑIDO
7 Día (1 to 5-0)	60 %	55 %
14 Día (1 to 3-0 & 5-0)	40 %	20 %
14 Día (4-0)	40 %	15 %

CONTRAINDICACIONES

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglecaprona 25.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Los usuarios deben conocer el procedimiento quirúrgico en el que se utilizan suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el material de sutura utilizado.

Alcamed S.R.L.
Alberto Brandolino
Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TÉCNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL

Achea 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

info@alcamedsrl.com.aralcamedsrl@gmail.comwww.alcamedsrl.com.ar**ALCAMED S.R.L**
INSUMOS MEDICOS

Los cirujanos deben considerar el rendimiento in vivo de la sutura que se ha detallado en la sección de rendimiento antes de la aplicación de la sutura.

Esta sutura puede ser inapropiada en pacientes ancianos, desnutridos o debilitados, o en pacientes que padecen condiciones que pueden retrasar la cicatrización de heridas.

Al igual que con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con soluciones salinas, como las que se encuentran en las vías urinarias o biliares, puede provocar la formación de cálculos. Se debe seguir una práctica quirúrgica aceptable para el tratamiento de heridas contaminadas o infectadas.

La sutura ADVAMRYL es un material de sutura quirúrgico absorbible; se debe considerar el uso de sutura no absorbible suplementaria siempre que se requiera refuerzo adicional, es decir, donde la sutura se usa en lugares que pueden expandirse o estirarse.

Las suturas cutáneas que deben permanecer en su lugar durante más de 7 días pueden causar irritación localizada y deben cortarse o retirarse según se indique. La sutura subcuticular debe colocarse lo más profundamente posible para minimizar el eritema y la induración, normalmente asociados con el proceso de absorción.

En algunas circunstancias, especialmente en procedimientos ortopédicos, la inmovilización de las articulaciones mediante un refuerzo externo puede emplearse a discreción de los cirujanos.

Se debe tener en cuenta el uso de sutura absorbible en tejido con riesgo sanguíneo deficiente, ya que puede producirse una extrusión de la sutura y una absorción demorada.

Los nudos de sutura ADVAMRYL deben colocarse correctamente para que sean seguros. La seguridad adecuada del nudo requiere las técnicas quirúrgicas aceptadas de ataduras cuadradas y planas con vueltas adicionales según lo justifiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Se debe tener cuidado al manipular la sutura quirúrgica, especialmente la aguja. No sostenga la aguja cerca de la parte de la punta, manténgala entre 1/3 y 1/2 parte del lado de unión de la aguja. Las agujas están especialmente acanaladas, según corresponda, para ayudar a sujetarlas con firmeza.

Agarrar el área de la punta podría afectar el rendimiento de la penetración y provocar que la aguja se quiebre.

Tomar la parte trasera o el accesorio podría causar que se doble o se rompa. Las agujas estéticas pueden hacer que pierdan fuerza y sean menos resistentes a doblarse y romperse.

Los usuarios deben tener cuidado al manipular las agujas quirúrgicas para evitar pinchazos deseche las agujas usadas en un recipiente para objetos punzantes.

Deseche la sutura usada de acuerdo con las Reglas Locales de Manejo de Desechos Biomédicos.

Evite los daños por aplastamiento o rizado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos como pinzas o portaagujas.

No reutilice el producto, ya que puede provocar una infección y no lo vuelva a esterilizar, ya que puede provocar cambios en las propiedades de la sutura o afectar el rendimiento del producto.

REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos, que pueden estar asociados con el uso de este producto, incluyen: dehiscencia de la herida, falta de refuerzo adecuado a la herida en los lugares donde se produce la expansión, estiramiento o distensión, falta de apoyo adecuado a la herida en pacientes con afecciones que pueden retrasar la herida. cicatrización, irritación localizada cuando las suturas cutáneas se dejan colocadas durante más de 7 días, formación de cálculos cuando se produce un contacto prolongado con soluciones salinas, mayor infectividad bacteriana, reacción inflamatoria aguda mínima e irritación local transitoria.

ESTERILIDAD

La sutura ADVACRYL se esteriliza con óxido de etileno. No utilice paquetes de suturas abiertos o dañados. El producto es sensible a la humedad, por lo tanto, incluso una pequeña abertura/orificio puede dañar la resistencia de la sutura de manera adversa. No doble parte del paquete de suturas ni use vendas elásticas para atar los paquetes de suturas. Deseche las suturas abiertas sin usar.

ALMACENAMIENTO

La condición de almacenamiento recomendada es entre 2°C y 25°C. Mantener alejado de la humedad y el calor directo. No utilice el paquete de papel aluminio después de la fecha de expiración.

Alcamed S.R.L.
Alberto Brandolini
Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TÉCNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
Achea 3076 – CABA, Argentina.
Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
INSUMOS MEDICOS



CONDICIÓN DE USO

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

VIDA ÚTIL

5 años a partir de su fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

Se presentan en estuches o cajas de 12 unidades envasadas individualmente.

FABRICANTE

Advanced MedTech Solutions Private Limited - P-21-22, 25-26, 34-35, GIDC Manjusr, Tal Savli, Dist.-
Vadodara - 391775 Gujarat, India.

IMPORTADOR

ALCAMED SRL, Pje. Achea 3076 – CABA, Argentina.
Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554
Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS RÓTULOS:

- No volver a esterilizar
- No volver a utilizar
- No usar en caso de que el envoltorio esté dañado
- Precaución
- Fabricante
- Esterilizado con óxido de etileno
- Utilizar antes de la fecha
- Código de lote
- Fecha de fabricación
- Mantener alejado de la luz solar
- Límite de temperatura
- Mantener en lugar seco
- Consultar las instrucciones de uso

IMPORTADOR

ALCAMED SRL, Pje. Achea 3076 – CABA, Argentina.
Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554
Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

instrucciones de uso

ADVAMRYL

Fabricado en India



Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.
P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusr,
Tal - Savli, Dist - Vadodara - 391775.

Número gratuito: 1800 419 0607

e-mail - customer-care@amsltd.com

AMR/FU/SP/01

Alcamed S.R.L.
Alberto Brandorino
Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TÉCNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACÉUTICO - M.P. 8554



ADVAMRYL

Sutura quirúrgica absorbible (sintética)
 Poliglicaprona monofilamento
 color 25 - Sin teñir y violeta

Descripción:

La sutura ADVAMRYL es una sutura quirúrgica estéril monofilamento absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de un copolímero de glicólido y α -caprolactona. La fórmula empírica del copolímero es $[(CH_2 - CO-O)_x - (CH_2 - CO-O)]_n$, - (donde, $x : y = 7.5:2.5$)

Se ha descubierto que el copolímero de poliglicaprona 25 es no antigénico, no pirógeno y provoca sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. La sutura ADVAMRYL está disponible en violeta y sin teñir. La sutura está teñida con D y C violeta núm. 2 (índice de color N° 60725/Violeta solvente 13).

La sutura ADVAMRYL está disponible en diferentes tamaños [2 (5 métrico) - 6-0 (0.7 métrico)], longitudes con agujas sin ojos traumáticas de acero inoxidable incorporadas o sin aguja.

La sutura ADVAMRYL cumple con la Farmacopea europea para "Suturas: monofilamento absorbibles sintéticos estériles" y el requisito de la Farmacopea de los Estados Unidos para "Suturas quirúrgicas absorbibles" con un diámetro apenas mayor.

INDICACIONES:

La sutura ADVAMRYL está indicada para uso en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en cirugía oftálmica, microcirugía, tejidos cardiovasculares y neurológicos.

APLICACIONES:

La selección de la sutura dependerá del estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida.

RENDIMIENTO:

La sutura ADVAMRYL se bioabsorbe y se biodegrada durante el periodo. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de la sutura ADVAMRYL se produce mediante hidrólisis. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa.

Toda la resistencia a la tracción original se pierde 21 días después de la implantación. La absorción de la sutura ADVAMRYL es totalmente completa hasta 90 días.

Día de implantación	% aproximado de fuerza original restante	
	TEÑIDO	NO TEÑIDO
7 Día (1 to 5-0)	60 %	55 %
14 Día (1 to 5-0 & 5-0)	40 %	20 %
14 Día (4-0)	40 %	15 %

Intraindicaciones:

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglicaprona 25.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Los usuarios deben conocer el procedimiento quirúrgico en el que se utilizan suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el material de sutura utilizado.

Los cirujanos deben considerar el rendimiento in vivo de la sutura que se ha detallado en la sección de rendimiento antes de la aplicación de la sutura.

Esta sutura puede ser inapropiada en pacientes ancianos, desnutridos o debilitados, o en pacientes que padecen condiciones que pueden retrasar la cicatrización de heridas.

Al igual que con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con soluciones salinas, como las que se encuentran en las vías urinarias o biliares, puede provocar la formación de cálculos. Se debe seguir una práctica quirúrgica aceptable para el tratamiento de heridas contaminadas o infectadas.

La sutura ADVAMRYL es un material de sutura quirúrgico absorbible; se debe considerar el uso de sutura no absorbible suplementaria siempre que se requiera refuerzo adicional, es decir, donde la sutura se usa en lugares que pueden expandirse o estirarse.

Las suturas cutáneas que deben permanecer en su lugar durante más de 7 días pueden causar irritación localizada y deben cortarse o retirarse según se indique. La sutura subcuticular debe colocarse lo más profundamente posible para minimizar el enjambre y la induración, normalmente asociados con el proceso de absorción.

En algunas circunstancias, especialmente en procedimientos ortopédicos, la inmovilización de las articulaciones mediante un refuerzo externo puede emplearse a discreción de los cirujanos.

Se debe tener en cuenta el uso de sutura absorbible en tejido con riesgo sanguíneo deficiente, ya que puede producirse una extrusión de la sutura y una absorción demorada.

Los nudos de sutura ADVAMRYL deben colocarse correctamente para que sean seguros. La seguridad adecuada del nudo requiere las técnicas quirúrgicas aceptadas de abaduras cuadradas y planas con

vueltes adicionales según lo justifiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Se debe tener cuidado al manipular la sutura quirúrgica, especialmente la aguja. No sostenga la aguja cerca de la parte de la punta, manténgala entre 1/3 y 1/2 parte del lado de unión de la aguja. Las agujas están especialmente acanaladas, según corresponda, para ayudar a sujetarlas con firmeza.

Agarrar el área de la punta podría afectar el rendimiento de la penetración y provocar que la aguja se quiebre. Tomar la parte trasera o el accesorio podría causar que se doble o se rompa. Las agujas estéticas pueden hacer que pierdan fuerza y sean menos resistentes a doblarse y romperse.

Los usuarios deben tener cuidado al manipular las agujas quirúrgicas para evitar pinchazos. Deseche las agujas usadas en un recipiente para objetos punzantes. Deseche la sutura usada de acuerdo con las Reglas Locales de Manejo de Desecho Biomédico. Evite los daños por aplastamiento o rizado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos como pinzas o portaagujas.

No reutilice el producto, ya que puede provocar una infección y no lo vuelva a esterilizar, ya que puede provocar cambios en las propiedades de la sutura o afectar el rendimiento del producto.

REACCIONES ADVERSAS:

Los efectos adversos, que pueden estar asociados con el uso de este producto, incluyen: dehiscencia de la herida, falta de refuerzo adecuado a la herida en los lugares donde se produce la expansión, estiramiento o distensión, falta de apoyo adecuado a la herida en pacientes con ateciones que pueden retrasar la herida, cicatrización, irritación localizada cuando las suturas cutáneas se dejan colocadas durante más de 7 días, formación de cálculos cuando se produce un contacto prolongado con soluciones salinas, mayor infectividad bacteriana, reacción inflamatoria aguda mínima e irritación local transitoria.

ESTERILIDAD:

La sutura ADVAMRYL se esteriliza con óxido de etileno. No utilice paquetes de suturas abiertos o dañados. El producto es sensible a la humedad, por lo tanto, incluso una pequeña abertura/orificio puede dañar la resistencia de la sutura de manera adversa. No doble parte del paquete de suturas ni use vendas elásticas para atar los paquetes de suturas. Deseche las suturas abiertas sin usar.

ALMACENAMIENTO:

La condición de almacenamiento recomendada es entre 2°C y 25°C. Mantener alejado de la humedad y el calor directo. No utilice el paquete de papel aluminio después de la fecha de expiración.

Alcamed S.R.L.
 Alberto Brandolino
 Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
 DIRECTOR TÉCNICO
 MARIO G. MITELMAN
 FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
Acheha 3076 – CABA, Argentina.
Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
INSUMOS MEDICOS



PROYECTO DE ROTULOS SEGÚN DISPOSICIÓN 2318/02 Y 2323/02 ANEXO III.B

ADVAMRYL

SUTURA QUIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORBIBLE SINTÉTICA POLIGLECAPRONA MONOFILAMENTO 25

ROTULADO ENVASE PRIMARIO - SOBRE INDIVIDUAL

Toll Free No.: 1800 419 0607
Mfg. Lic. No. MFG/MD/2019/000174
AMR/PVND/XX

ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)

ADVAMRYL

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 VIOLET
STERILISED SURGICAL SUTURE



Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.
P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusr, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.
e-mail - customercare@amsttd.com



ADVAXXXX
X-X(X metric)
XX cm

Needle
description



VXXXXX
LOT

MM/YYYY
MFG.

MM/YYYY
EXP.

PEEL HERE

Toll Free No.: 1800 419 0607
Mfg. Lic. No. MFG/MD/2019/000174
AMR/PVS/D/XX

ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)

ADVAMRYL

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 VIOLET
STERILISED SURGICAL SUTURE



Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.
P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusr, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.
e-mail - customercare@amsttd.com



ADVAXXXX
X-X(X metric)
XX cm

Needle
description



VXXXXX
LOT

MM/YYYY
MFG.

MM/YYYY
EXP.

PEEL HERE

Toll Free No.: 1800 419 0607
Mfg. Lic. No. MFG/MD/2019/000174
AMR/PUN/D/XX

ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)

ADVAMRYL

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 UNDYED
STERILISED SURGICAL NEEDLED SUTURE



Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.
P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusr, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.
e-mail - customercare@amsttd.com



ADVAXXXX
X-X(X metric)
XX cm

Needle
description



VXXXXX
LOT

MM/YYYY
MFG.

MM/YYYY
EXP.

PEEL HERE

Alcamed S.R.L.
Alberto Brandolino
Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TÉCNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL

Achega 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

info@alcamedsrl.com.ar

alcamedsrl@gmail.com

www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
INSUMOS MEDICOS



Toll Free No.: 1800 419 0607
Mfg. Lic. No. MFG/MD/2019/000174
AMR/PUS/D/X

ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)

ADVAMRYL

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 UNDYED
STERILISED SURGICAL SUTURE



Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.

P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjara, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.
a-mail - customerservice@amsmed.com



ADVAXXXX
X-X (X metric)
XX cm



PEEL HERE

Importado por:

ALCAMED S.R.L

Achega 3076, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554

Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

Alcamed S.R.L.
Alberto Brandolino
Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TECNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
Achea 3076 – CABA, Argentina.
Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar




ALCAMED S.R.L
INSUMOS MEDICOS



ROTULADO ENVASE SECUNDARIO (ESTUCHE o CAJA)

Importado por:
ALCAMED S.R.L
Achea 3076, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS
Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554
Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

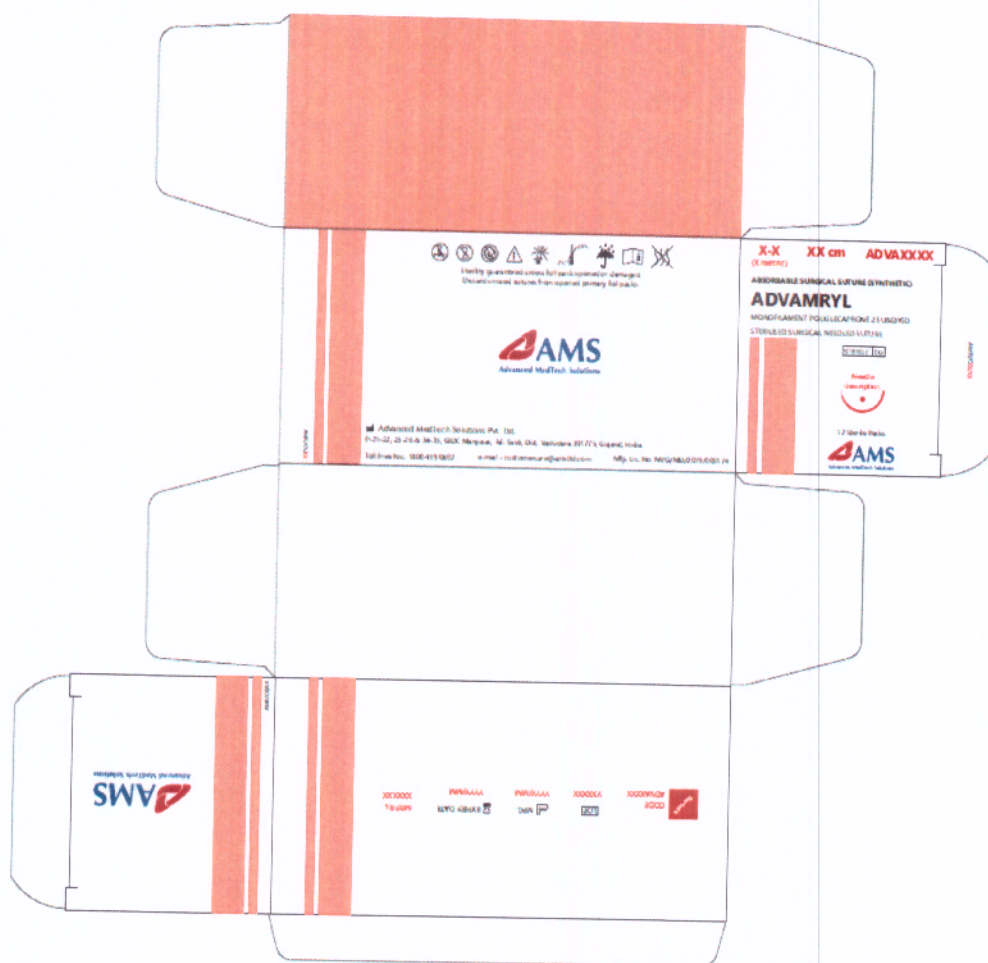


Alberto Brandolino
Alcamed S.R.L.
Alberto Brandolino
Socio Gerente

Mario Mitelman
ALCAMED S.R.L.
DIRECTOR TECNICO
MARIO G. MITELMAN
FARMACEUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
 Achega 3076 – CABA, Argentina.
 Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
 INSUMOS MEDICOS

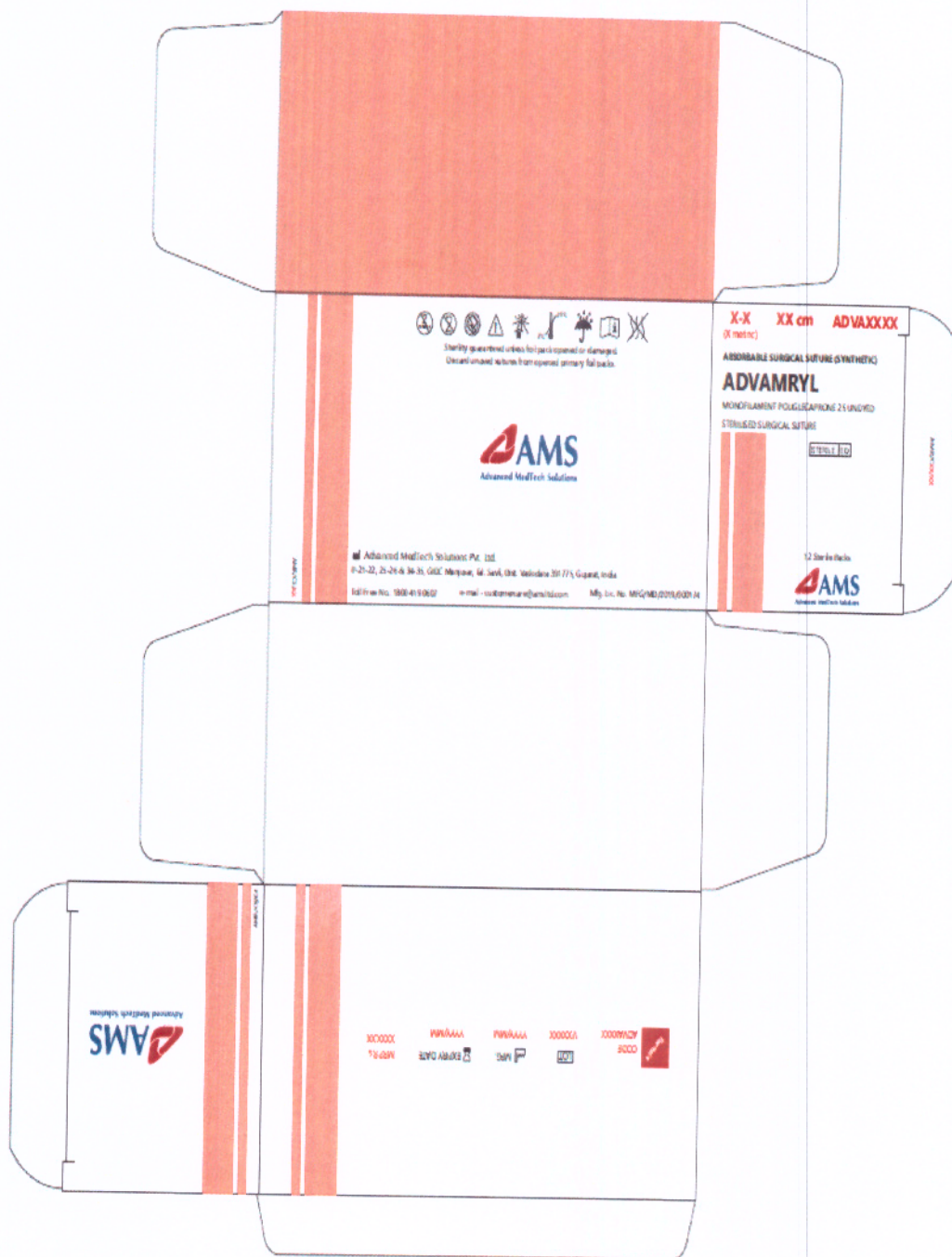


Alcamed S.R.L.
 Alberto Brandolino
 Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
 DIRECTOR TÉCNICO
 MARIO G. MUELMAN
 FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
 Achega 3076 – CABA, Argentina.
 Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
 INSUMOS MEDICOS

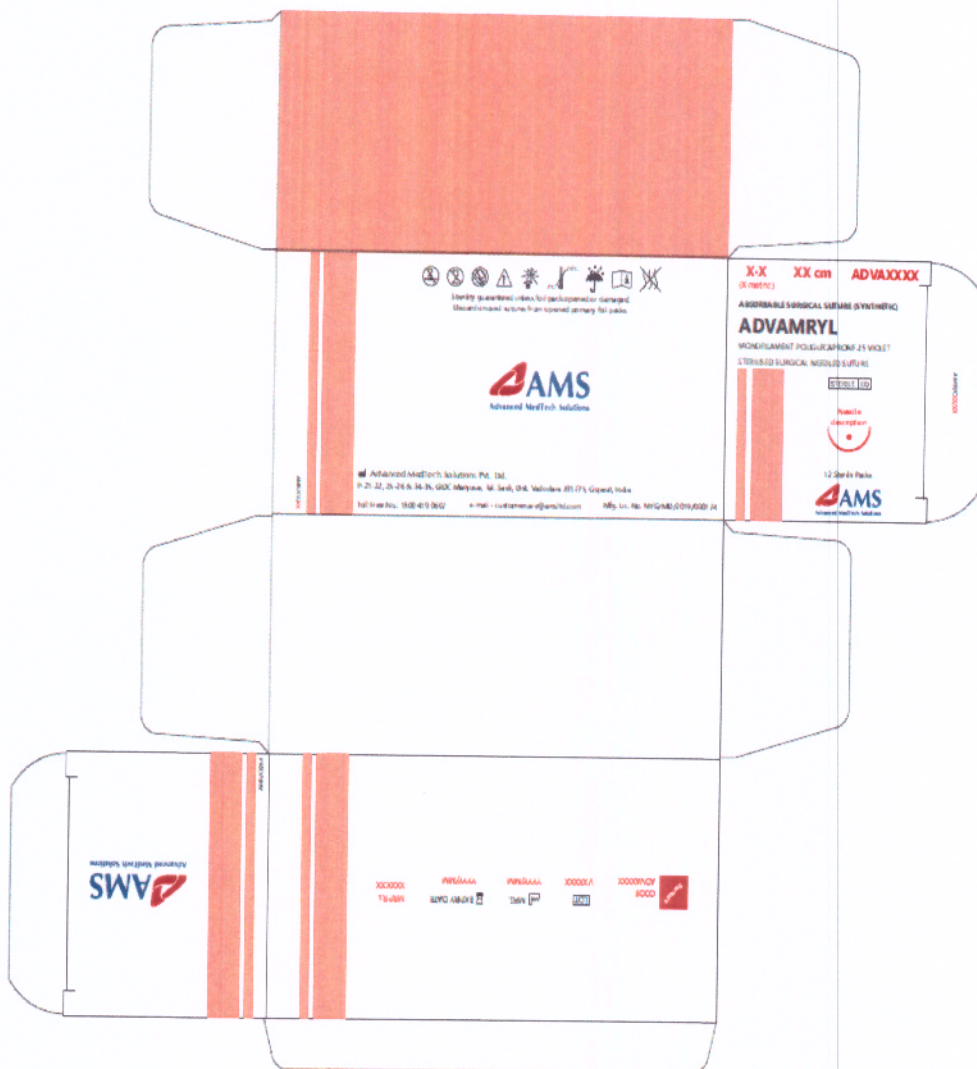


Alcamed S.R.L.
 Alberto Brandolino
 Socio Gerente

ALCAMED S.R.L.
 DIRECTOR TÉCNICO
 MARIO G. MIKELMAN
 FARMACÉUTICO - M.P. 8554

ALCAMED SRL
 Achega 3076 – CABA, Argentina.
 Tel.: +54 11 45715616
info@alcamedsrl.com.ar
alcamedsrl@gmail.com
www.alcamedsrl.com.ar



ALCAMED S.R.L
 INSUMOS MEDICOS

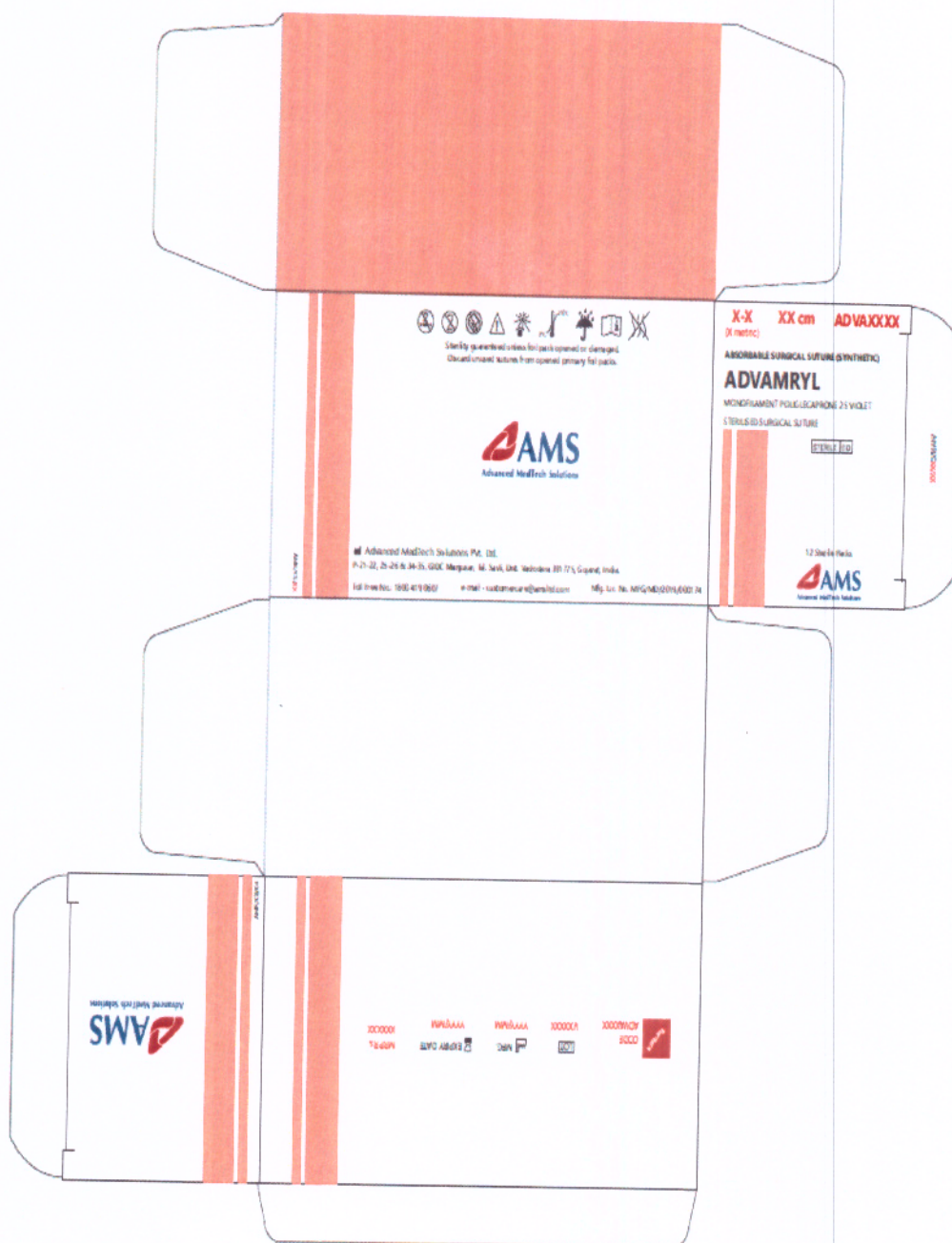

Alberto Brandolino
 Alcamed S.R.L.
 Alberto Brandolino
 Socio Gerente

Mario G. Mitzelman
 ALCAMED S.R.L.
 DIRECTOR TECNICO
 MARIO G. MITZELMAN
 FARMACÉUTICO - M.P. 8554



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- ALCAMED S.R.L.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.