



**LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN
INYECTOR
PROYECTO DE RÓTULO**

A. ROTULO CAJA LENTES INTRAOCULARES SIN INYECTOR

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES SIN INYECTOR

Marca: VISION+ / HEXAPHOB

Modelo: _____

Dioptrías: _____ Código: _____

Diámetro Total: _____ Diámetro Óptico: _____ Constante A: _____

N° de serie: _____ N° de Lote: _____

Fecha de Fabricación: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Método de Esterilización:

Lentes Intraoculares: ÓXIDO DE ETILENO

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

A.1 ETIQUETADO CON DATOS DEL IMPORTADOR

Importador:

CORVISION DE JUAN JOSÉ PAPPOLLA

Tablada Nro. 238, Ciudad Villa Gral. Belgrano, Provincia de Córdoba

Condición de Uso: Uso Exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Directora Técnica: Farm. Luisa Hermenegilda Niedringhaus, M.P. N° 2.300

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 2560-8

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



**LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN
INYECTOR
PROYECTO DE RÓTULO**

B. ROTULO CAJA LENTES INTRAOCULARES CON INYECTOR (ENVASE SECUNDARIO)

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON INYECTOR.

Marca: VISION+ / HEXAPHOB

Modelo: _____

Contiene:

- Una lente intraocular
- Un inyector
- Una tarjeta de implante
- Una instrucción de uso para la Lente intraocular
- Una instrucción de uso para el Inyector y cartucho

Dioptrías: _____ Código: _____

Diámetro Total: _____ Diámetro Óptico: _____ Constante A: _____

N° de serie: _____ N° de Lote: _____

Fecha de Fabricación: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Método de Esterilización:

Lentes Intraoculares: Óxido de Etileno

Inyector: Óxido de Etileno

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmaceutica
M.P. 2300



**LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN
INYECTOR
PROYECTO DE RÓTULO**

B.2 ETIQUETADO CON DATOS DEL IMPORTADOR

Importador:

CORVISION DE JUAN JOSÉ PAPPOLLA

Tablada Nro. 238, Ciudad Villa Gral. Belgrano, Provincia de Córdoba

Condición de Uso: Uso Exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Directora Técnica: Farm. Luisa Hermenegilda Niedringhaus, M.P. N° 2.300

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 2560-8

B3. ROTULO DE POUCH DE LENTES INTRAOCULARES (ENVASE PRIMARIO)

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES

Marca: VISION+ / HEXAPHOB

Modelo: _____

Dioptrías: _____ Código: _____

Diámetro Total: _____ Diámetro Óptico: _____ Constante A: _____

N° de serie: _____ N° de Lote: _____

Fecha de Fabricación: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Método de Esterilización:

Lentes Intraoculares: Óxido de Etileno

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

**PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153**

**Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300**



**LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN
INYECTOR
PROYECTO DE RÓTULO**

B.4 ROTULO DE POUCH INYECTOR (ENVASE PRIMARIO)

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES

Marca: CLEARVIEW

Medida: _____

Ref: _____ N° de Lote: _____

Fecha de Fabricación: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Método de Esterilización:

Inyector: Óxido de Etileno

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmaceutica
M.P. 2300



LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN INYECTOR - INSTRUCCIONES DE USO

Importador:

CORVISION DE JUAN JOSÉ PAPPOLLA

Tablada Nro. 238, Ciudad Villa Gral. Belgrano, Provincia de Córdoba

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN INYECTOR.

Marca: **VISION+ / HEXAPHOB**

Modelo: _____

Método de Esterilización: ÓXIDO DE ETILENO

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

Condición de Uso: Uso Exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Directora Técnica: Farm. Luisa Hermenegilda Niedringhaus, M.P. N° 2.300.

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 2560-8

LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES HIDRÓFOBOS CON ABSORCIÓN DE UV

DESCRIPCIÓN:

Las lentes intraoculares (LIO) hidrofóbicas plegables VISION+ / HEXAPHOB son dispositivos ópticos diseñados para reemplazar el cristalino natural. Estas lentes pueden implantarse en pacientes de 5 años o más. Están fabricadas con material acrílico hidrofóbico de calidad clínica con absorción de rayos UV.

Las lentes están disponibles en potencias de

+6.0 a +15.0 D con incrementos de 1.0 D,

+15.0 a +25.0 D con incrementos de 0.5 D

+25.0 a +35.0 D con incrementos de 1.0 D.

INDICACIONES:

Están indicadas para la corrección visual de la afaquia en pacientes cuyo cristalino se ha extraído mediante extracción extracapsular de catarata. La lente está diseñada para colocarse en el saco capsular. Pueden implantarse en pacientes de 5 años o mayores.

CONTRAINDICACIONES:

Los médicos deben considerar la implantación de lentes intraoculares en las siguientes circunstancias, evaluando cuidadosamente la posible relación riesgo-beneficio:

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN INYECTOR - INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Pacientes con segmentos anteriores acortados, por ejemplo, microftalmos o ciertas formas de glaucoma crónico de ángulo cerrado.
- 2) Pacientes en quienes la Lente intraocular pueda interferir con la capacidad de observar, diagnosticar o tratar la enfermedad del segmento posterior.
- 3) Inflamación grave recurrente del segmento anterior o posterior de etiología desconocida.
- 4) Iris anormal que impida la fijación adecuada de la lente, como aniridia, hemi-iridectomía o atrofia grave.
- 5) Sospecha de infección microbiana.
- 6) Los niños menores de 2 años no son candidatos adecuados para lentes intraoculares.

Dado que el estudio clínico de la LIO hidrofóbica se realizó con la lente implantada principalmente solo en el saco capsular, no hay suficientes datos clínicos disponibles para demostrar su seguridad y eficacia para su colocación en el surco ciliar.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

1. Los médicos que consideren la implantación de lentes en pacientes con cataratas asociadas a degeneración macular o retiniana, glaucoma o enfermedades corneales deben tener en cuenta que es posible que el paciente no logre una mejoría en la agudeza visual central debido a sus patologías.
2. Se ha observado ocasionalmente glaucoma secundario en pacientes con glaucoma preexistente. La presión intraocular de los pacientes con glaucoma a los que se les ha implantado una Lente intraocular debe monitorizarse cuidadosamente después de la operación.
3. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de la lente de cámara posterior si se coloca en la cámara anterior. Se ha demostrado que dicha implantación es insegura en algunos casos.
4. El valor de la constante "A" y la "profundidad de la ACD" son solo valores estimados. Se recomienda que el cirujano calcule su propio valor basándose en su experiencia clínica.

ADVERTENCIAS:

1. No se ha establecido la eficacia de las lentes intraoculares con absorción de rayos UV para reducir la incidencia de trastornos retinianos.
2. No se ha establecido la seguridad del uso del láser de neodimio-YAG con las Lentes Intraoculares que poseen materiales que absorben rayos UV. El médico debe ser extremadamente cauteloso en los casos en que un paciente con LIO que absorbe rayos UV sea tratado con un láser de neodimio-YAG.
3. No se ha establecido la fuerza de compresión que la lente ejerce sobre el tejido ocular. El médico debe tener conocimientos para seleccionar el tipo de lente según las dimensiones del ojo.
4. Las lentes intraoculares solo deben utilizarse cuando se realiza capsulorrexia y la cápsula anterior está en buen estado.
5. Se debe tener cuidado para evitar la rotura de las hápticas al insertar la lente a través del túnel escleral o de una pequeña incisión.

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN INYECTOR - INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES:

- 1) Evite almacenar la lente bajo la luz solar directa o a temperaturas superiores a 45 °C. Manténgalas alejada de temperaturas bajo cero.
- 2) No utilice la lente si el sobre estéril está abierto o dañado.
- 3) Solo cirujanos cualificados con experiencia en la visualización o asistencia de numerosos implantes quirúrgicos deben intentar la implantación de estas lentes.
- 4) La bolsa debe abrirse únicamente en condiciones estériles.
- 5) Evite remojar o enjuagar la LIO en soluciones que no sean solución salina balanceada estéril, solución salina normal estéril o cualquier equivalente de estas soluciones.
- 6) No intente reesterilizar esta lente. La reesterilización de este producto no está validada.
- 7) No esterilice la lente en autoclave.
- 8) Manipule la lente con cuidado. No utilice pinzas de bloqueo ni portaagujas para extraer las lentes.
- 9) No intente remodelar las hápticas.
- 10) Se debe aconsejar al paciente que informe a su médico o al centro médico sobre cualquier efecto secundario no mencionado en esta información.
- 11) Se recomienda el uso del inyector suministrado por OPTHALMIC MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED para la implantación de lentes plegables, a fin de minimizar el trauma quirúrgico.

REACCIONES ADVERSAS:

La reutilización de la LIO puede causar:

1. Contaminación cruzada que puede provocar una infección microbiana.
2. Propiedades mecánicas inadecuadas.
3. El uso repetido puede afectar la apariencia estética de la lente, lo que puede provocar defectos visuales.

¿CÓMO SE PRESENTA?

La caja individual de producto, lentes intraoculares plegables e hidrofóbicas VISION+ / HEXAPHOB, contiene una unidad de lente intraocular (LIO), en un blíster de polipropileno sellado con papel de aluminio y dentro de un pouch esterilizado en autoclave, con o sin un inyector descartable de LIO dispuesto en otro pouch esterilizado.

MODO DE EMPLEO:

Para evitar roturas, no intente expandir las hápticas, flexionarlas fuera del plano de la lente ni torcerla.

1. Antes de la implantación, revise el envase de la lente para comprobar el tipo de LIO, la potencia, la configuración correcta y la fecha de caducidad.
2. Abra la bolsa y el blíster en un entorno estéril.

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmaceutica
M.P. 2300



LENTES INTRAOCULARES HIDROFÓBICOS PLEGABLES CON O SIN INYECTOR - INSTRUCCIONES DE USO

- Las lentes almacenadas en un lugar fresco deben calentarse ligeramente colocándolas junto con su empaque sobre una superficie caliente (no más de 45 °C) durante unos segundos.
- Retire con cuidado la lámina de Tyvek del blíster. Sujete y levante la lente con unas pinzas de borde liso.
- Sumerja o enjuague la lente en una solución salina balanceada o solución salina normal estéril para eliminar la carga estática que pueda haberse acumulado en su superficie.
- Asegúrese de que la lente esté en buen estado y de que las superficies óptica y háptica estén libres de partículas adheridas.
- Si se utilizan pinzas para implantar la lente, se debe aplicar gel viscoelástico a ambos lados de la óptica de la LIO antes de doblarla. Se debe minimizar la fuerza de compresión sobre la lente para reducir la posibilidad de que se adhiera a sí misma o a los instrumentos.
- Si se utilizan pinzas para implantar la lente, asegúrese de que estas no entren en contacto con la parte central de la óptica, ya que podrían formar marcas permanentes en el eje visual.
- La caja contiene etiquetas adicionales. Estas etiquetas facilitan el registro de lentes implantables durante el procedimiento clínico y su seguimiento. Una de ellas debe adherirse a la hoja de registro del paciente para futuras consultas.

SIMBOLOS UTILIZADOS EN EMPAQUE Y ROTULADO



NO REUTILIZAR



NÚMERO DE LOTE



NÚMERO DE SERIE



ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO



Nº DE REFERENCIA



FECHA DE FABRICACIÓN



FECHA DE VENCIMIENTO



RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO



NO REESTERILIZAR



NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO



FABRICANTE



CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO



BARRERA SIMPLE DE PROTECCIÓN DE ESTERILIDAD



PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA



PROTEGER DE LA HUMEDAD



DISPOSITIVO MÉDICO

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES INSTRUCCIONES DE USO

Importador:

CORVISION DE JUAN JOSÉ PAPPOLLA

Tablada Nro. 238, Ciudad Villa Gral. Belgrano, Provincia de Córdoba

Fabricante:

OPHTHALMIC MARKETING AND SERVICES PVT. LIMITED.

Plot No 87/3//B, Phase I, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad-382445, Gujarat, India.

INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES

Marca: _____

Modelo: _____

Método de Esterilización:

Inyector y Cartucho: Óxido de Etileno

PROTEGER DE LUZ SOLAR DIRECTA – PROTEGER DE LA HUMEDAD

Temperatura de almacenamiento: 5°C a 45°C

NO REUTILIZAR - NO REESTERILIZAR - NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO

Condición de Uso: Uso Exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Directora Técnica: Farm. Luisa Hermenegilda Niedringhaus, M.P. N° 2.300.

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM- 2560-8

DESCRIPCIÓN:

El sistema de administración de LIO desechables de OMS (Ophthalmic Marketing & Services Pvt. Ltd.) está fabricado en polipropileno. Consta de dos componentes: inyector y cartucho. El cartucho debe insertarse en el inyector solo después de cargar la LIO. El sistema de administración se suministra estéril y es apto para un solo uso. El sistema está diseñado para insertar fácilmente LIO plegables hidrofóbicas e hidrofílicas en el ojo, minimizando así el traumatismo del paciente.

Características principales del dispositivo:

Tamaño de incisión recomendado: 2,2 mm / 2,4 mm / 2,8 mm

Punta del cartucho: Redonda

Mecanismo: Tipo émbolo

CONTRAINDICACIONES:

1. No utilice el sistema de cartucho e inyector si observa algún daño estructural.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:

1. Utilice el inyector solo para LIO plegables.

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES INSTRUCCIONES DE USO

2. Se recomienda revisar el sistema de administración antes de su uso: inspeccione el cartucho con un microscopio para detectar cualquier defecto mínimo. Por lo tanto, se pueden tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la máxima seguridad del paciente.

ADVERTENCIAS:

Las siguientes advertencias se refieren al uso del sistema de administración de LIO desechables:

1. No utilice el conjunto inyector OMS con otros cartuchos, ni viceversa, que no sean los proporcionados por OMS.
2. No se recomienda utilizar el dispositivo con otros tipos de LIO ni con LIO fabricadas por la competencia, ya que podría dañarlas.
3. No se deben utilizar cartuchos mellados para la inserción de LIO.
4. Evite utilizar el inyector si la varilla o el resorte parecen estar doblados.
5. Si la ranura de sujeción del inyector que sujeta el cartucho parece estar agrietada o dañada, deseche dicho inyector. De igual manera, si el cartucho no encaja correctamente en el inyector, deseche tanto el inyector como el cartucho.
6. Incluso siguiendo las instrucciones de uso, si la LIO y sus hápticos no encajan completamente en el cartucho, se recomienda no utilizar dicha LIO ni el sistema de administración.

Se deben tomar las siguientes precauciones durante el almacenamiento y el uso del dispositivo:

1. La preparación del cartucho, la carga de la LIO y la administración de la LIO deben realizarse según las instrucciones de uso de Ophthalmic Marketing & Services Pvt. Ltd. (OMS).
2. Inyecte visco en el cartucho justo antes de cargar la LIO e inmediatamente después de cargarla.
3. La combinación de bajas temperaturas en el quirófano y altas potencias dióptricas de la LIO puede requerir una administración más lenta.
4. Si el dispositivo se cae accidentalmente después de abrir el envase, no lo utilice.
5. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 °C y 45 °C.

REACCIONES ADVERSAS:

La reutilización del sistema de administración de LIO desechable puede causar:

1. Contaminación cruzada que puede provocar una infección microbiana.
2. Propiedades mecánicas inadecuadas.
3. El uso repetido o la reesterilización del cartucho y del inyector pueden alterar las características del material y existe la posibilidad de que el dispositivo pierda su función.

El uso de este tipo de dispositivo puede ser perjudicial para el paciente.

¿CÓMO SE SUMINISTRA?

El cartucho de OMS se entrega sellado en un pouch de grado médico. El cartucho y el inyector se entregan sellados en una bolsa de grado médico. El dispositivo se esteriliza con óxido de etileno (ETO).

NOTA:

El contenido de la bolsa es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.



PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmaceutica
M.P. 2300



INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE EMPLEO

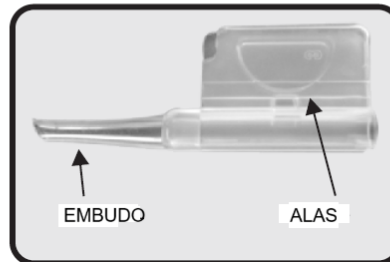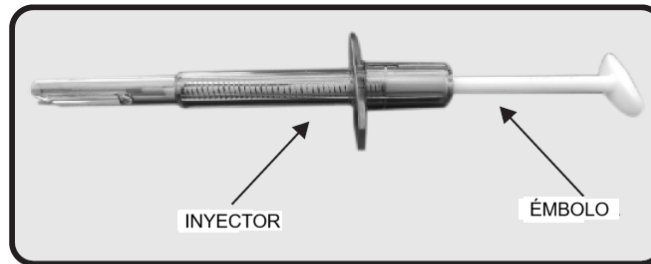

El sistema de inyección desechable OMS presenta un diseño avanzado que facilita al cirujano la carga e implantación simplificadas de la LIO en el ojo.




CARGA DE LA LIO

1. Abra la bolsa que contiene el inyector y el cartucho.
2. Con los dedos pulgar e índice, abra el cartucho 180°.
3. Aplique la sustancia viscoelástica dentro del cartucho. Esto asegurará el libre movimiento de la lente durante la inyección.
4. Sujete la lente con unas pinzas y colóquela en la ranura del cartucho.
5. Presione suavemente la lente con unas pinzas planas y cierre parcialmente las alas del cartucho.
6. Con la ayuda de las pinzas, acerque ambas hápticas a la óptica y luego cierre el cartucho.
7. Si el cartucho no se bloquea, abra las alas e intente volver a cargar la lente.
8. Después de cerrar el cartucho, confirme visualmente que ninguna parte de la lente quede atrapada entre las alas.

Háptica en C



Otros

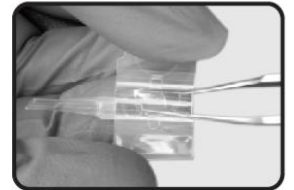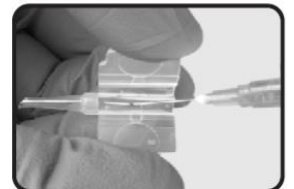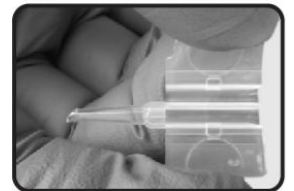

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153



Luisa Niedringhaus
Farmacéutica
M.P. 2300



INYECTOR PARA LENTES INTRAOCULARES PLEGABLES INSTRUCCIONES DE USO

CARGA DEL CARTUCHO:

1. Cargue el cartucho desde la parte frontal del inyector.
2. Alinee la parte posterior del cartucho con la parte frontal del inyector.
3. Introduzca el cartucho en el inyector hasta oír un clic.
4. Compruebe que el cartucho esté firmemente bloqueado.
5. Con la ayuda del orificio en la parte superior del inyector, asegúrese de que la punta de silicona esté alineada con la abertura posterior del cartucho.

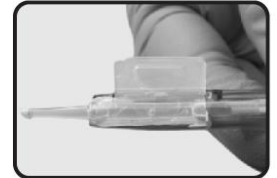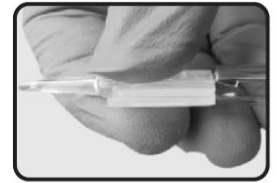


IMPLANTE DE LIO

1. Inserte la punta del cartucho en el ojo a través de una incisión de 2,2 mm, 2,4 mm o 2,8 mm o mayor.
2. Ahora presione el émbolo con una fuerza uniforme hasta que la LIO se introduzca en el ojo.

VENTAJAS:

- Fácil - Fiable - Seguro para el paciente

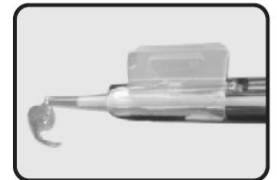

PAPPOLLA JUAN JOSE
DNI 13.740.153

Luisa Niedringhaus
Farmaceutica
M.P. 2300



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO PAPPOLLA JUAN JOSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.