

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amikacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AK 0.016-256 µg/ml

REF 0001B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amikacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AK 0.016-256 µg/ml

REF 0001B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amikacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AK 0.016-256 µg/ml

REF 0001B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Amikacin

AK 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0001B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Amoxicillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AX

0.016-256 µg/ml

REF

0002B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Amoxicillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AX

0.016-256 µg/ml

REF

0002B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Amoxicillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AX

0.016-256 µg/ml

REF

0002B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Amoxicillin

AX

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0002B01



YYYY/MM





8°C





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0003B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0003B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0003B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Amoxicillin-clavulanic acid

AMC 0.016/2-256/2 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0003B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016-256 µg/ml

REF 0004B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016-256 µg/ml

REF 0004B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Amoxicillin-clavulanic acid(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMC 0.016-256 µg/ml

REF 0004B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Amoxicillin-clavulanic acid(2:1)

AMC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0004B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AM 0.016-256 µg/ml

REF 0005B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AM 0.016-256 µg/ml

REF 0005B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AM 0.016-256 µg/ml

REF 0005B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ampicillin

AM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0005B01 IVD

YYYY/MM

8°C

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0006B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0006B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0006B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ampicillin-sulbactam

SAM 0.016/4-256/4 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0006B01

YYYY/MM

8°C

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam (2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016-256 µg/ml

REF 0007B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam (2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016-256 µg/ml

REF 0007B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ampicillin-sulbactam (2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SAM 0.016-256 µg/ml

REF 0007B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ampicillin-sulbactam (2:1)

SAM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0007B01 **IVD** **CE** **1**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Azithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AZM 0.016-256 µg/ml

REF 0008B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Azithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AZM 0.016-256 µg/ml

REF 0008B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Azithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AZM 0.016-256 µg/ml

REF 0008B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Azithromycin

AZM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0008B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Aztreonam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM

0.016-256 µg/ml

REF

0009B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Aztreonam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM

0.016-256 µg/ml

REF

0009B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Aztreonam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM

0.016-256 µg/ml

REF

0009B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Aztreonam

1

ATM

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0009B01

IVD

CE

8°C

-20°C

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Aztreonam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM 0.064-1024 µg/ml

REF 0010B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Aztreonam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM 0.064-1024 µg/ml

REF 0010B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Aztreonam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ATM 0.064-1024 µg/ml

REF 0010B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Aztreonam**  1

ATM 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0010B01

YYYY/MM

-20°C 8°C IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Cefaclor

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CEC

0.016-256 µg/ml

REF

0012B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefaclor

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CEC

0.016-256 µg/ml

REF

0012B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefaclor

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CEC

0.016-256 µg/ml

REF

0012B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cefaclor

CEC

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

REF

0012B01

IVD

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefadroxil

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFR 0.016-256 µg/ml

REF 0013B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefadroxil

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFR 0.016-256 µg/ml

REF 0013B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefadroxil

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFR 0.016-256 µg/ml

REF 0013B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefadroxil

CFR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0013B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Cefalexin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CL

0.016-256 µg/ml

REF

0014B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefalexin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CL

0.016-256 µg/ml

REF

0014B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefalexin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CL

0.016-256 µg/ml

REF

0014B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefalexin

CL

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0014B01



YYYY/MM

IVD






BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefazolin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KZ 0.016-256 µg/ml

REF 0015B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: +48 81 745 51 40; Fax: +48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefazolin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KZ 0.016-256 µg/ml

REF 0015B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: +48 81 745 51 40; Fax: +48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefazolin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KZ 0.016-256 µg/ml

REF 0015B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: +48 81 745 51 40; Fax: +48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefazolin

KZ 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0015B01 IVD CE

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefdinir

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CDR 0.016-256 µg/ml

REF 0016B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefdinir

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CDR 0.016-256 µg/ml

REF 0016B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefdinir

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CDR 0.016-256 µg/ml

REF 0016B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefdinir

CDR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0016B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP

0.002-32 µg/ml

REF

0017B05

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP

0.002-32 µg/ml

REF

0017B10

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP

0.002-32 µg/ml

REF

0017B30

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefepime

FEP

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0017B01



YYYY/MM





-20°C





1





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefepime
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP 0.016-256 µg/ml

REF 0018B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefepime
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP 0.016-256 µg/ml

REF 0018B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefepime
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP 0.016-256 µg/ml

REF 0018B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefepime

FEP 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0018B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

Σ 1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime/Tazobactam (2:1)

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPT

0.016-256 µg/ml

REF

0019B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

5 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime/Tazobactam (2:1)

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPT

0.016-256 µg/ml

REF

0019B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

10 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefepime/Tazobactam (2:1)

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPT

0.016-256 µg/ml

REF

0019B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

30 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cefepime/Tazobactam (2:1)

CPT

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0019B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefiderocol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FDC

0.016-256 µg/ml

REF

0020B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefiderocol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FDC

0.016-256 µg/ml

REF

0020B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefiderocol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FDC

0.016-256 µg/ml

REF

0020B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cefiderocol

FDC

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0020B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

-20°C

8°C

Σ

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefixime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFM 0.016-256 µg/ml

REF 0021B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefixime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFM 0.016-256 µg/ml

REF 0021B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefixime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFM 0.016-256 µg/ml

REF 0021B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefixime

CFM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0021B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefmetazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CMZ 0.016-256 µg/ml

REF 0022B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefmetazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CMZ 0.016-256 µg/ml

REF 0022B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefmetazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CMZ 0.016-256 µg/ml

REF 0022B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefmetazole

CMZ 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0022B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefonicid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CID 0.016-256 µg/ml

REF 0023B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefonicid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CID 0.016-256 µg/ml

REF 0023B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefonicid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CID 0.016-256 µg/ml

REF 0023B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefonicid

CID 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0023B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefoperazone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFP 0.016-256 µg/ml

REF 0024B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefoperazone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFP 0.016-256 µg/ml

REF 0024B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefoperazone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CFP 0.016-256 µg/ml

REF 0024B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefoperazone

CFP 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0024B01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Cefoperazone-sulbactam
(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CES 0.016-256 µg/ml

REF 0025B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Cefoperazone-sulbactam
(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CES 0.016-256 µg/ml

REF 0025B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Cefoperazone-sulbactam
(2:1)

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CES 0.016-256 µg/ml

REF 0025B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Cefoperazone-sulbactam (2:1)**

CES 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0025B01 IVD

YYYY/MM

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.002-32 µg/ml

REF 0026B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.002-32 µg/ml

REF 0026B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.002-32 µg/ml

REF 0026B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefotaxime

CTX 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0026B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.016-256 µg/ml

REF 0027B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.016-256 µg/ml

REF 0027B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefotaxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX 0.016-256 µg/ml

REF 0027B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefotaxime

CTX 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0027B01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefotetan

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT

0.016-256 µg/ml

REF

0028B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefotetan

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT

0.016-256 µg/ml

REF

0028B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefotetan

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT

0.016-256 µg/ml

REF

0028B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cefotetan

CTT

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0028B01

IVD

CE

Info

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefoxitin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOX 0.016-256 µg/ml

REF 0029B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM









 5 szt./pcs.

 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefoxitin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOX 0.016-256 µg/ml

REF 0029B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM









 10 szt./pcs.

 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Cefoxitin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOX 0.016-256 µg/ml

REF 0029B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM









 30 szt./pcs.

 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cefoxitin

FOX 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0029B01

YYYY/MM



IVD 

 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefpirome

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CR 0.016-256 µg/ml

REF 0030B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefpirome

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CR 0.016-256 µg/ml

REF 0030B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefpirome

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CR 0.016-256 µg/ml

REF 0030B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefpirome

CR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0030B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Cefpodoxime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPD

0.016-256 µg/ml

REF

0031B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefpodoxime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPD

0.016-256 µg/ml

REF

0031B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Cefpodoxime

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPD

0.016-256 µg/ml

REF

0031B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefpodoxime

CPD

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0031B01

IVD





YYYY/MM



-20°C



BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com



1

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefprozil
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPR 0.016-256 µg/ml

REF 0032B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefprozil
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPR 0.016-256 µg/ml

REF 0032B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefprozil
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPR 0.016-256 µg/ml

REF 0032B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefprozil

CPR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0032B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Ceftaroline

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL

REF

LOT



YYYY/MM



-20°C



5 szt./pcs.

0.002-32 µg/ml

IVD

CE





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Ceftaroline

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL

REF

LOT



YYYY/MM



-20°C



10 szt./pcs.

0.002-32 µg/ml

IVD

CE





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Ceftaroline

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL

REF

LOT



YYYY/MM



-20°C



30 szt./pcs.

0.002-32 µg/ml

IVD

CE





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftaroline

CTL

REF

LOT



YYYY/MM



-20°C



1

0.002-32 µg/ml

IVD

CE





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftaroline
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL 0.016-256 µg/ml

REF 0034B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftaroline
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL 0.016-256 µg/ml

REF 0034B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftaroline
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTL 0.016-256 µg/ml

REF 0034B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftaroline

CTL 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0034B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ

0.016-256 µg/ml

REF

0035B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ

0.016-256 µg/ml

REF

0035B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ

0.016-256 µg/ml

REF

0035B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Ceftazidime

CAZ

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0035B01

IVD

CE

Σ

YYYY/MM

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime-avibactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZA

0.016/4-256/4 µg/ml

REF

0036B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

CE

i

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime-avibactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZA

0.016/4-256/4 µg/ml

REF

0036B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

CE

i

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftazidime-avibactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZA

0.016/4-256/4 µg/ml

REF

0036B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

CE

i

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Ceftazidime-avibactam

CZA

0.016/4-256/4 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0036B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftibuten

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTB

0.002-32 µg/ml

REF

0037B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftibuten

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTB

0.002-32 µg/ml

REF

0037B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftibuten

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTB

0.002-32 µg/ml

REF

0037B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Ceftibuten

CTB

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0037B01

IVD

YYYY/MM

-20°C - 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX 0.002-32 µg/ml

REF 0038B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX 0.002-32 µg/ml

REF 0038B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX 0.002-32 µg/ml

REF 0038B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftizoxime

CZX 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0038B01 **IVD** **CE** **8°C**

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX

0.016-256 µg/ml

REF

0039B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX

0.016-256 µg/ml

REF

0039B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Ceftizoxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CZX

0.016-256 µg/ml

REF

0039B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftizoxime

Σ 1

CZX

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0039B01

IVD

CE

Σ

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftobiprole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BPR 0.002-32 µg/ml

REF 0040B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftobiprole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BPR 0.002-32 µg/ml

REF 0040B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftobiprole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BPR 0.002-32 µg/ml

REF 0040B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftobiprole

BPR 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0040B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftolozane-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0041B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftolozane-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0041B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftolozane-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0041B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftolozane-tazobactam

CTT 0.016/4-256/4 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0041B01

YYYY/MM

8°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO

0.002-32 µg/ml

REF

0042B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO

0.002-32 µg/ml

REF

0042B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO

0.002-32 µg/ml

REF

0042B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Ceftriaxone

CRO

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0042B01

IVD

YYYY/MM

-20°C - 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO 0.016-256 µg/ml

REF 0043B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO 0.016-256 µg/ml

REF 0043B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ceftriaxone

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO 0.016-256 µg/ml

REF 0043B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ceftriaxone

CRO 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0043B01 IVD

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefuroxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CXM 0.016-256 µg/ml

REF 0044B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefuroxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CXM 0.016-256 µg/ml

REF 0044B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cefuroxime

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CXM 0.016-256 µg/ml

REF 0044B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cefuroxime

CXM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0044B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cephalothin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KF 0.016-256 µg/ml

REF 0045B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cephalothin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KF 0.016-256 µg/ml

REF 0045B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Cephalothin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KF 0.016-256 µg/ml

REF 0045B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cephalothin

KF 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0045B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com


BMIC™

Chloramphenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

C
REF 0046B05
LOT XXXXXXXX
 YYYY/MM
 -20°C / 8°C
 5 szt./pcs.

IVD





 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com


BMIC™

Chloramphenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

C
REF 0046B10
LOT XXXXXXXX
 YYYY/MM
 -20°C / 8°C
 10 szt./pcs.

IVD





 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com


BMIC™

Chloramphenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

C
REF 0046B30
LOT XXXXXXXX
 YYYY/MM
 -20°C / 8°C
 30 szt./pcs.

IVD





 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Chloramphenicol

C
LOT XXXXXXXX
 YYYY/MM


REF 0046B01
IVD



BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CIP 0.002-32 µg/ml

REF 0047B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CIP 0.002-32 µg/ml

REF 0047B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CIP 0.002-32 µg/ml

REF 0047B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ciprofloxacin

CIP 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0047B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPH 0.016-256 µg/ml

REF 0048B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPH 0.016-256 µg/ml

REF 0048B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ciprofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPH 0.016-256 µg/ml

REF 0048B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ciprofloxacin

CPH 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0048B01 IVD CE

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clarithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CLR 0.016-256 µg/ml

REF 0049B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clarithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CLR 0.016-256 µg/ml

REF 0049B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clarithromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CLR 0.016-256 µg/ml

REF 0049B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Clarithromycin

CLR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0049B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clindamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DA 0.016-256 µg/ml

REF 0050B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clindamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DA 0.016-256 µg/ml

REF 0050B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Clindamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DA 0.016-256 µg/ml

REF 0050B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Clindamycin

DA 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0050B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Cloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CX

0.016-256 µg/ml

REF

0051B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CX

0.016-256 µg/ml

REF

0051B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Cloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CX

0.016-256 µg/ml

REF

0051B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Cloxacillin

CX

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0051B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.016-256 µg/ml

REF 0052B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.016-256 µg/ml

REF 0052B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.016-256 µg/ml

REF 0052B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Colistin

CT 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0052B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.064-1024 µg/ml

REF 0053B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.064-1024 µg/ml

REF 0053B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Colistin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CT 0.064-1024 µg/ml

REF 0053B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Colistin

CT 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0053B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL

0.002-32 µg/ml

REF

0054B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL

0.002-32 µg/ml

REF

0054B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL

0.002-32 µg/ml

REF

0054B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Dalbavancin

DAL

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0054B01

IVD

CE

Info

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

 **BMICTM**

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL 0.016-256 µg/ml

REF 0055B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

 **YYYY/MM** 

 -20°C  **i** 

 5 szt./pcs.

 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com; E-mail: info@biomaxima.com

 **BMIC™**

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL 0.016-256 µg/ml
REF 0055B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

 **YYYY/MM**

 **8°C**

-20°C

 **i**



 **10 szt./pcs.**

 **BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland**
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Dalbavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAL 0.016-256 µg/ml

REF 0055B30

LOT XXXXXXXX

IVD

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BiMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Daptomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAP 0.016-256 µg/ml

REF 0056B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Daptomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAP 0.016-256 µg/ml

REF 0056B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Daptomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DAP 0.016-256 µg/ml

REF 0056B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Daptomycin

DAP 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0056B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Delafloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DLX 0.002-32 µg/ml

REF 0057B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Delafloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DLX 0.002-32 µg/ml

REF 0057B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Delafloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DLX 0.002-32 µg/ml

REF 0057B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Delafloxacin

DLX 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0057B01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Dicloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DIC 0.016-256 µg/ml

REF 0058B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Dicloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DIC 0.016-256 µg/ml

REF 0058B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Dicloxacillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DIC 0.016-256 µg/ml

REF 0058B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Dicloxacillin

DIC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0058B01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Doripenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DOR 0.002-32 µg/ml

REF 0059B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Doripenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DOR 0.002-32 µg/ml

REF 0059B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Doripenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DOR 0.002-32 µg/ml

REF 0059B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Doripenem

DOR 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0059B01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Doxycycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DO

0.016-256 µg/ml

REF

0060B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Doxycycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DO

0.016-256 µg/ml

REF

0060B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Doxycycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DO

0.016-256 µg/ml

REF

0060B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Doxycycline

1

DO

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0060B01

IVD

CE

8°C

20°C

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Enrofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ENR 0.002-32 µg/ml

REF 0061B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Enrofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ENR 0.002-32 µg/ml

REF 0061B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Enrofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ENR 0.002-32 µg/ml

REF 0061B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Enrofloxacin

ENR 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0061B01 IVD

YYYY/MM

8°C

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Eravacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ERV 0.002-32 µg/ml

REF 0062B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Eravacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ERV 0.002-32 µg/ml

REF 0062B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Eravacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ERV 0.002-32 µg/ml

REF 0062B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Eravacycline

ERV 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0062B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ertapenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP 0.002-32 µg/ml

REF 0063B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ertapenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP 0.002-32 µg/ml

REF 0063B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ertapenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP 0.002-32 µg/ml

REF 0063B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ertapenem

ETP 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0063B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Erythromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

E

0.016-256 µg/ml

REF

0064B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Erythromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

E

0.016-256 µg/ml

REF

0064B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Erythromycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

E

0.016-256 µg/ml

REF

0064B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Erythromycin

E

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0064B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Faropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FAR

0.002-32 µg/ml

REF

0065B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Faropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FAR

0.002-32 µg/ml

REF

0065B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Faropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FAR

0.002-32 µg/ml

REF

0065B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Faropenem

1

FAR

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0065B01

IVD

CE

Info

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fidaxomicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FID 0.016-256 µg/ml

REF 0066B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fidaxomicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FID 0.016-256 µg/ml

REF 0066B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fidaxomicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FID 0.016-256 µg/ml

REF 0066B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Fidaxomicin** **Σ 1**

FID 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0066B01 **IVD** **CE** **Σ**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
BMIC™

Florfenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FFC
REF
0067B05
IVD

LOT
XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C
8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
BMIC™

Florfenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FFC
REF
0067B10
IVD

LOT
XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C
8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
BMIC™

Florfenicol
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FFC
REF
0067B30
IVD

LOT
XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C
8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Florfenicol

FFC
0.016-256 µg/ml

LOT
XXXXXXXX

YYYY/MM

REF
0067B01

-20°C
8°C

IVD

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com



BMIC™

Flucloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLC

0.016-256 µg/ml

REF

0068B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Flucloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLC

0.016-256 µg/ml

REF

0068B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Flucloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLC

0.016-256 µg/ml

REF

0068B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Flucloxacillin

FLC

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0068B01



YYYY/MM

IVD





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.016-256 µg/ml

REF 0069B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.016-256 µg/ml

REF 0069B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.016-256 µg/ml

REF 0069B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Fosfomycin

FF 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0069B01 IVD CE

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.064-1024 µg/ml

REF 0070B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.064-1024 µg/ml

REF 0070B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosfomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FF 0.064-1024 µg/ml

REF 0070B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Fosfomycin

FF 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0070B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosmidomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOM 0.016-256 µg/ml

REF 0071B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosmidomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOM 0.016-256 µg/ml

REF 0071B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fosmidomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FOM 0.016-256 µg/ml

REF 0071B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Fosmidomycin

FOM 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0071B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fusidic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FA 0.016-256 µg/ml

REF 0072B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fusidic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FA 0.016-256 µg/ml

REF 0072B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Fusidic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FA 0.016-256 µg/ml

REF 0072B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Fusidic acid

FA 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0072B01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Gatifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GAT

0.002-32 µg/ml

REF

0073B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Gatifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GAT

0.002-32 µg/ml

REF

0073B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Gatifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GAT

0.002-32 µg/ml

REF

0073B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Gatifloxacin

GAT

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0073B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Gemifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GEM

0.002-32 µg/ml

REF

0074B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Gemifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GEM

0.002-32 µg/ml

REF

0074B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Gemifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GEM

0.002-32 µg/ml

REF

0074B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Gemifloxacin

GEM

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0074B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN 0.016-256 µg/ml

REF 0075B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN 0.016-256 µg/ml

REF 0075B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN 0.016-256 µg/ml

REF 0075B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Gentamicin

CN 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0075B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN

0.064-1024 µg/ml

REF

0076B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN

0.064-1024 µg/ml

REF

0076B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Gentamicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CN

0.064-1024 µg/ml

REF

0076B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

Info

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Gentamicin

CN

0.064-1024 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0076B01

IVD

CE

Info

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Griseofulvin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GRI 0.016-256 µg/ml

REF 0077B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Griseofulvin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GRI 0.016-256 µg/ml

REF 0077B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Griseofulvin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

GRI 0.016-256 µg/ml

REF 0077B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Griseofulvin

GRI 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0077B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Imipenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP

0.002-32 µg/ml

REF

0078B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Imipenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP

0.002-32 µg/ml

REF

0078B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Imipenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP

0.002-32 µg/ml

REF

0078B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Imipenem

1

IMP

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0078B01

IVD

CE

YYYY/MM

-20°C

8°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP 0.016-256 µg/ml

REF 0079B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP 0.016-256 µg/ml

REF 0079B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMP 0.016-256 µg/ml

REF 0079B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Imipenem

IMP 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0079B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem/Relebactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMR 0.002/4-32/4 µg/ml

REF 0080B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem/Relebactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMR 0.002/4-32/4 µg/ml

REF 0080B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Imipenem/Relebactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMR 0.002/4-32/4 µg/ml

REF 0080B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Imipenem/Relebactam**  1

IMR 0.002/4-32/4 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0080B01

YYYY/MM

-20°C 8°C IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Kanamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K 0.016-256 µg/ml

REF 0081B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Kanamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K 0.016-256 µg/ml

REF 0081B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Kanamycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K 0.016-256 µg/ml

REF 0081B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Kanamycin

K 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0081B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

Kanamycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K

0.002-32 $\mu\text{g/ml}$

REF

0082B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Kanamycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K

0.002-32 $\mu\text{g/ml}$

REF

0082B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Kanamycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

K

0.002-32 $\mu\text{g/ml}$

REF

0082B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Kanamycin

1

K

0.002-32 $\mu\text{g/ml}$

LOT

XXXXXXXX

REF

0082B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Lefamulin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LMU0.016-256 µg/ml

REF0083B05

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Lefamulin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LMU0.016-256 µg/ml

REF0083B10

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Lefamulin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LMU0.016-256 µg/ml

REF0083B30

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Lefamulin

LMU0.016-256 µg/ml

LOTXXXXXXX

REF0083B01

IVD

CE

YYYY/MM

-20°C

8°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.002-32 µg/ml

REF 0084B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.002-32 µg/ml

REF 0084B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.002-32 µg/ml

REF 0084B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Levofloxacin

LEV 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0084B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.016-256 µg/ml

REF 0085B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.016-256 µg/ml

REF 0085B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Levofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LEV 0.016-256 µg/ml

REF 0085B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Levofloxacin

LEV 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0085B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ 0.016-256 µg/ml

REF 0086B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ 0.016-256 µg/ml

REF 0086B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ 0.016-256 µg/ml

REF 0086B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Linezolid

LNZ 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0086B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ

0.002-32 µg/ml

REF

0087B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ

0.002-32 µg/ml

REF

0087B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Linezolid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

LNZ

0.002-32 µg/ml

REF

0087B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Linezolid

LNZ

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0087B01

IVD

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Marbofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MAR 0.002-32 µg/ml

REF 0088B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Marbofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MAR 0.002-32 µg/ml

REF 0088B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Marbofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MAR 0.002-32 µg/ml

REF 0088B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Marbofloxacin

MAR 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0088B01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Mecillinam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEC 0.016-256 µg/ml

REF 0089B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Mecillinam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEC 0.016-256 µg/ml

REF 0089B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Mecillinam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEC 0.016-256 µg/ml

REF 0089B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Mecillinam

MEC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0089B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.002-32 µg/ml

REF

0090B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.002-32 µg/ml

REF

0090B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.002-32 µg/ml

REF

0090B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Meropenem

Σ 1

MEM

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0090B01

IVD

CE

Σ

YYYY/MM

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.016-256 µg/ml

REF

0091B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.016-256 µg/ml

REF

0091B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Meropenem

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM

0.016-256 µg/ml

REF

0091B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Meropenem

MEM

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0091B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Meropenem/Vaborbactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMV 0.016/8-256/8 µg/ml

REF 0092B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Meropenem/Vaborbactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMV 0.016/8-256/8 µg/ml

REF 0092B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Meropenem/Vaborbactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMV 0.016/8-256/8 µg/ml

REF 0092B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Meropenem/Vaborbactam**  1

MEMV 0.016/8-256/8 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0092B01

YYYY/MM

-20°C 8°C IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Metronidazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET

0.016-256 µg/ml

REF

0093B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Metronidazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET

0.016-256 µg/ml

REF

0093B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Metronidazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET

0.016-256 µg/ml

REF

0093B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Metronidazole

1

MET

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0093B01

IVD

CE

8°C

20°C

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC**

Metronidazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET 0.002-32 µg/ml

REF 0094B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC**

Metronidazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET 0.002-32 µg/ml

REF 0094B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC**

Metronidazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MET 0.002-32 µg/ml

REF 0094B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC **Metronidazole** 1

MET 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0094B01

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Minocycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MN 0.016-256 µg/ml

REF 0095B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Minocycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MN 0.016-256 µg/ml

REF 0095B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Minocycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MN 0.016-256 µg/ml

REF 0095B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Minocycline

MN 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0095B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxalactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MOM

0.016-256 µg/ml

REF

0096B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxalactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MOM

0.016-256 µg/ml

REF

0096B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxalactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MOM

0.016-256 µg/ml

REF

0096B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Moxalactam

1

MOM

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0096B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

-20°C

8°C

Σ

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF 0.002-32 µg/ml

REF 0097B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF 0.002-32 µg/ml

REF 0097B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF 0.002-32 µg/ml

REF 0097B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Moxifloxacin

MXF 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0097B01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF0.016-256 µg/ml

REF0098B05

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF0.016-256 µg/ml

REF0098B10

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Moxifloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MXF0.016-256 µg/ml

REF0098B30

IVD

LOTXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Moxifloxacin

MXF0.016-256 µg/ml

LOTXXXXXXX

REF0098B01

IVD

CE

YYYY/MM

-20°C

8°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Mupirocin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MUP

0.064-1024 µg/ml

REF

0099B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

i

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Mupirocin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MUP

0.064-1024 µg/ml

REF

0099B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

i

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Mupirocin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MUP

0.064-1024 µg/ml

REF

0099B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

i

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Mupirocin

MUP

0.064-1024 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0099B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

-20°C

8°C

i

QR

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.016-256 µg/ml

REF 0101B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.016-256 µg/ml

REF 0101B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.016-256 µg/ml

REF 0101B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nalidixic acid

NA 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0101B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.064-1024 µg/ml

REF 0102B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.064-1024 µg/ml

REF 0102B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nalidixic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NA 0.064-1024 µg/ml

REF 0102B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nalidixic acid

NA 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0102B01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Netilmicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NET 0.016-256 µg/ml

REF 0103B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Netilmicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NET 0.016-256 µg/ml

REF 0103B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Netilmicin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NET 0.016-256 µg/ml

REF 0103B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Netilmicin

NET 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0103B01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F 0.032-512 µg/ml

REF 0104B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F 0.032-512 µg/ml

REF 0104B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F 0.032-512 µg/ml

REF 0104B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nitrofurantoin

F 0.032-512 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0104B01

YYYY/MM

8°C

20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F

0.016-256 µg/ml

REF

0105B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F

0.016-256 µg/ml

REF

0105B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nitrofurantoin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

F

0.016-256 µg/ml

REF

0105B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C - 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Nitrofurantoin

F

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0105B01

IVD

YYYY/MM

-20°C - 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitroxoline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NI 0.016-256 µg/ml

REF 0106B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitroxoline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NI 0.016-256 µg/ml

REF 0106B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Nitroxoline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NI 0.016-256 µg/ml

REF 0106B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Nitroxoline

NI 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0106B01 IVD CE

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR 0.016-256 µg/ml

REF 0107B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR 0.016-256 µg/ml

REF 0107B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR 0.016-256 µg/ml

REF 0107B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Norfloxacin

NOR 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0107B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.002-32 µg/ml

REF

0108B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.002-32 µg/ml

REF

0108B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.002-32 µg/ml

REF

0108B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Norfloxacin

NOR

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0108B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

1 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.032-512 µg/ml

REF

0109B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.032-512 µg/ml

REF

0109B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Norfloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NOR

0.032-512 µg/ml

REF

0109B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Norfloxacin

NOR

0.032-512 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0109B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.002-32 µg/ml

REF 0110B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.002-32 µg/ml

REF 0110B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.002-32 µg/ml

REF 0110B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ofloxacin

OFX 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0110B01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.016-256 µg/ml

REF 0111B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.016-256 µg/ml

REF 0111B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ofloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OFX 0.016-256 µg/ml

REF 0111B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ofloxacin

OFX 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0111B01 **IVD** **CE** **1**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Omadacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OMC 0.002-32 µg/ml

REF 0112B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Omadacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OMC 0.002-32 µg/ml

REF 0112B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Omadacycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OMC 0.002-32 µg/ml

REF 0112B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Omadacycline

OMC 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0112B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oritavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ORO 0.016-256 µg/ml

REF 0113B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oritavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ORO 0.016-256 µg/ml

REF 0113B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oritavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ORO 0.016-256 µg/ml

REF 0113B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Oritavancin

ORO 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0113B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.016-256 µg/ml

REF

0114B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.016-256 µg/ml

REF

0114B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.016-256 µg/ml

REF

0114B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Oxacillin

OX

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0114B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:

info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.002-32 µg/ml

REF

0115B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.002-32 µg/ml

REF

0115B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Oxacillin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX

0.002-32 µg/ml

REF

0115B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

i

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Oxacillin

OX

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0115B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

8°C

-20°C

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:

info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oxacillin/Vancomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX/VAN 0.064-8/0.25-16 µg/ml

REF 0116B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oxacillin/Vancomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX/VAN 0.064-8/0.25-16 µg/ml

REF 0116B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Oxacillin/Vancomycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

OX/VAN 0.064-8/0.25-16 µg/ml

REF 0116B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Oxacillin/Vancomycin**  1

OX/VAN 0.064-8/0.25-16 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0116B01 

YYYY/MM **IVD** **CE** 

 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Paromomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PAR

0.064-1024 µg/ml

REF

0117B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Paromomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PAR

0.064-1024 µg/ml

REF

0117B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Paromomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PAR

0.064-1024 µg/ml

REF

0117B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Paromomycin

PAR

0.064-1024 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0117B01



YYYY/MM





8°C





1



BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Pefloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PEF 0.016-256 µg/ml

REF 0118B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Pefloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PEF 0.016-256 µg/ml

REF 0118B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Pefloxacin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PEF 0.016-256 µg/ml

REF 0118B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Pefloxacin

PEF 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0118B01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.002-32 µg/ml

REF

0119B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.002-32 µg/ml

REF

0119B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.002-32 µg/ml

REF

0119B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Penicillin G

P

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0119B01

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:

info@biomaxima.com



BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.016-256 µg/ml

REF

0120B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.016-256 µg/ml

REF

0120B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Penicillin G

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

P

0.016-256 µg/ml

REF

0120B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

QR

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Penicillin G

P

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0120B01

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Phenoxymethylpenicillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PV 0.016-256 µg/ml

REF 0121B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Phenoxymethylpenicillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PV 0.016-256 µg/ml

REF 0121B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Phenoxymethylpenicillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PV 0.016-256 µg/ml

REF 0121B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Phenoxymethylpenicillin

PV 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0121B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Piperacillin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRL

0.016-256 µg/ml

REF

0122B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Piperacillin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRL

0.016-256 µg/ml

REF

0122B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Piperacillin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRL

0.016-256 µg/ml

REF

0122B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Piperacillin

PRL

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0122B01

IVD

YYYY/MM

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Piperacillin-tazobactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0123B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Piperacillin-tazobactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0123B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Piperacillin-tazobactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP 0.016/4-256/4 µg/ml

REF 0123B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Piperacillin-tazobactam

TZP 0.016/4-256/4 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0123B01

YYYY/MM

IVD **CE** **i**

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Piperacillin-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP

0.064/4-1024/4 µg/ml

REF

0124B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Piperacillin-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP

0.064/4-1024/4 µg/ml

REF

0124B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

BMIC™

Piperacillin-tazobactam

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZP

0.064/4-1024/4 µg/ml

REF

0124B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

Σ

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Piperacillin-tazobactam

TZP

0.064/4-1024/4 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0124B01

IVD

CE

i

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Plazomicin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PLZ

0.016-256 µg/ml

REF

0125B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Plazomicin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PLZ

0.016-256 µg/ml

REF

0125B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Plazomicin
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PLZ

0.016-256 µg/ml

REF

0125B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Plazomicin

PLZ

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0125B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.016-256 µg/ml

REF 0126B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.016-256 µg/ml

REF 0126B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.016-256 µg/ml

REF 0126B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Polymyxin B

PB 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0126B01 IVD

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.064-1024 µg/ml

REF 0127B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.064-1024 µg/ml

REF 0127B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Polymyxin B

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PB 0.064-1024 µg/ml

REF 0127B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Polymyxin B

PB 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0127B01 **IVD** **CE** **1**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Quinupristin-dalfopristin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

QDA 0.002-32 µg/ml

REF 0128B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Quinupristin-dalfopristin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

QDA 0.002-32 µg/ml

REF 0128B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Quinupristin-dalfopristin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

QDA 0.002-32 µg/ml

REF 0128B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Quinupristin-dalfopristin

QDA 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0128B01 **IVD**

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.002-32 µg/ml

REF

0129B05

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.002-32 µg/ml

REF

0129B10

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.002-32 µg/ml

REF

0129B30

IVD

LOT

XXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Rifampicin

RA

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0129B01



YYYY/MM

IVD






BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.016-256 µg/ml

REF

0130B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.016-256 µg/ml

REF

0130B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Rifampicin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

RA

0.016-256 µg/ml

REF

0130B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Rifampicin

RA

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0130B01



YYYY/MM



-20°C





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Roxithromycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ROX 0.002-32 µg/ml

REF 0131B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Roxithromycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ROX 0.002-32 µg/ml

REF 0131B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Roxithromycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ROX 0.002-32 µg/ml

REF 0131B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Roxithromycin

ROX 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0131B01 **IVD**

YYYY/MM

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

Sparfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPA

0.016-256 µg/ml

REF

0132B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Sparfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPA

0.016-256 µg/ml

REF

0132B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Sparfloxacin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPA

0.016-256 µg/ml

REF

0132B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

SPA

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0132B01

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Spectinomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPT

0.064-1024 µg/ml

REF

0133B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Spectinomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPT

0.064-1024 µg/ml

REF

0133B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Spectinomycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SPT

0.064-1024 µg/ml

REF

0133B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Spectinomycin

SPT

0.064-1024 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0133B01

IVD

CE





YYYY/MM



-20°C



BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com



1



BMIC™

Spiramycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SP

0.002-32 µg/ml

REF

0134B05

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Spiramycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SP

0.002-32 µg/ml

REF

0134B10

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Spiramycin

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SP

0.002-32 µg/ml

REF

0134B30

IVD

LOT

XXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.



BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Spiramycin

SP

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXX

REF

0134B01

YYYY/MM

-20°C

8°C

IVD

CE

i

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:

info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.016-256 µg/ml

REF 0135B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.016-256 µg/ml

REF 0135B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.016-256 µg/ml

REF 0135B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Streptomycin** **Σ 1**

S 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0135B01 **IVD** **CE** **Σ**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.064-1024 µg/ml

REF 0136B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.064-1024 µg/ml

REF 0136B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.064-1024 µg/ml

REF 0136B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Streptomycin**  1

S 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0136B01

YYYY/MM

IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.002-32 µg/ml

REF 0137B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.002-32 µg/ml

REF 0137B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Streptomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

S 0.002-32 µg/ml

REF 0137B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Streptomycin

S 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0137B01

YYYY/MM

8°C

20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SUL 0.016-256 µg/ml

REF 0138B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SUL 0.016-256 µg/ml

REF 0138B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Sulbactam
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SUL 0.016-256 µg/ml

REF 0138B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Sulbactam

SUL 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0138B01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SMZ

0.064-1024 µg/ml

REF

0139B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SMZ

0.064-1024 µg/ml

REF

0139B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SMZ

0.064-1024 µg/ml

REF

0139B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Sulfamethoxazole

SMZ

0.064-1024 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0139B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:

info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tedizolid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZD 0.002-32 µg/ml

REF 0140B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tedizolid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZD 0.002-32 µg/ml

REF 0140B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tedizolid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TZD 0.002-32 µg/ml

REF 0140B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tedizolid

TZD 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0140B01

YYYY/MM

8°C

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEC 0.016-256 µg/ml

REF 0141B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEC 0.016-256 µg/ml

REF 0141B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEC 0.016-256 µg/ml

REF 0141B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Teicoplanin

TEC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0141B01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Telavancin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV 0.002-32 µg/ml

REF 0142B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Telavancin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV 0.002-32 µg/ml

REF 0142B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Telavancin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV 0.002-32 µg/ml

REF 0142B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Telavancin**  1

TLV 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0142B01

YYYY/MM

8°C

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Telavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV

0.016-256 µg/ml

REF

0143B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Telavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV

0.016-256 µg/ml

REF

0143B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Telavancin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TLV

0.016-256 µg/ml

REF

0143B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

1

Telavancin

TLV

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0143B01

IVD

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Telithromycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEL

0.016-256 µg/ml

REF

0144B05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Telithromycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEL

0.016-256 µg/ml

REF

0144B10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Telithromycin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TEL

0.016-256 µg/ml

REF

0144B30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





8°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Telithromycin

TEL

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0144B01

IVD





YYYY/MM



8°C



1





BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Temocillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMO 0.064-1024 µg/ml

REF 0145B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Temocillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMO 0.064-1024 µg/ml

REF 0145B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Temocillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMO 0.064-1024 µg/ml

REF 0145B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Temocillin** 1

TMO 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0145B01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Tetracycline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TE

0.016-256 µg/ml

REF

0146B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

-20°C

Σ

5 szt./pcs.

QR code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Tetracycline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TE

0.016-256 µg/ml

REF

0146B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

-20°C

Σ

10 szt./pcs.

QR code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



BMIC™

Tetracycline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TE

0.016-256 µg/ml

REF

0146B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

-20°C

Σ

30 szt./pcs.

QR code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tetracycline

TE

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0146B01

YYYY/MM

CE

8°C

i

-20°C

Σ

1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tiamulin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIA 0.002-32 µg/ml

REF 0147B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tiamulin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIA 0.002-32 µg/ml

REF 0147B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tiamulin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIA 0.002-32 µg/ml

REF 0147B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Tiamulin**  1

TIA 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0147B01

YYYY/MM

IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TC 0.016-256 µg/ml

REF 0148B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TC 0.016-256 µg/ml

REF 0148B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TC 0.016-256 µg/ml

REF 0148B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Ticarcillin

TC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0148B01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin/Clavulanic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TTC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0149B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin/Clavulanic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TTC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0149B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Ticarcillin/Clavulanic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TTC 0.016/2-256/2 µg/ml

REF 0149B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **1**

Ticarcillin/Clavulanic acid

TTC 0.016/2-256/2 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0149B01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tigecycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TGC 0.016-256 µg/ml

REF 0150B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tigecycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TGC 0.016-256 µg/ml

REF 0150B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tigecycline

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TGC 0.016-256 µg/ml

REF 0150B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tigecycline

TGC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0150B01 IVD

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tilmicosin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIL 0.002-32 µg/ml

REF 0151B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tilmicosin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIL 0.002-32 µg/ml

REF 0151B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tilmicosin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TIL 0.002-32 µg/ml

REF 0151B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tilmicosin

TIL 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0151B01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.016-256 µg/ml

REF 0152B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.016-256 µg/ml

REF 0152B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.016-256 µg/ml

REF 0152B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tobramycin

TOB 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0152B01 **IVD** CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.064-1024 µg/ml

REF 0153B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.064-1024 µg/ml

REF 0153B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Tobramycin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TOB 0.064-1024 µg/ml

REF 0153B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Tobramycin

TOB 0.064-1024 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0153B01 **IVD** CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Trimethoprim
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP 0.002-32 µg/ml

REF 0154B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Trimethoprim
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP 0.002-32 µg/ml

REF 0154B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Trimethoprim
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP 0.002-32 µg/ml

REF 0154B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Trimethoprim

TMP 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0154B01

YYYY/MM

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BMIC™

Trimethoprim

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP

0.016-256 µg/ml

REF

0155B05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Trimethoprim

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP

0.016-256 µg/ml

REF

0155B10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Trimethoprim

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TMP

0.016-256 µg/ml

REF

0155B30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Trimethoprim

TMP

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

REF

0155B01

IVD

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.002-32 µg/ml

REF 0156B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.002-32 µg/ml

REF 0156B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.002-32 µg/ml

REF 0156B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Trimethoprim-sulfamethoxazole**  1

SXT 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0156B01

YYYY/MM

8°C

20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.016-256 µg/ml

REF 0157B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.016-256 µg/ml

REF 0157B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**
Trimethoprim-sulfamethoxazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

SXT 0.016-256 µg/ml

REF 0157B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Trimethoprim-sulfamethoxazole**  1

SXT 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0157B01

YYYY/MM

8°C

20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.016-256 µg/ml

REF 0158B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.016-256 µg/ml

REF 0158B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.016-256 µg/ml

REF 0158B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Vancomycin**  1

VA 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0158B01

YYYY/MM

IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.002-32 µg/ml

REF 0159B05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.002-32 µg/ml

REF 0159B10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VA 0.002-32 µg/ml

REF 0159B30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Vancomycin

VA 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0159B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin/Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VATEC 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0160B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin/Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VATEC 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0160B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin/Teicoplanin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VATEC 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0160B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™ **Vancomycin/Teicoplanin**  1

VATEC 0.5-32/0.5-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0160B01 

YYYY/MM **IVD** **CE** 

 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin-Cefoxitin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VACX 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0161B05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin-Cefoxitin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VACX 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0161B10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **BMIC™**

Vancomycin-Cefoxitin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VACX 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0161B30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BMIC™

Vancomycin-Cefoxitin

VACX 0.5-32/0.5-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0161B01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD **CE**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com



FMIC™

Amphotericin B

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMB

0.002-32 µg/ml

REF

0162F05

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





5 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



FMIC™

Amphotericin B

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMB

0.002-32 µg/ml

REF

0162F10

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





10 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com



FMIC™

Amphotericin B

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AMB

0.002-32 µg/ml

REF

0162F30

IVD

LOT

XXXXXXXX



YYYY/MM





-20°C





30 szt./pcs.





BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Amphotericin B



1

AMB

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0162F01

IVD






YYYY/MM



-20°C



BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Anidulafungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AND 0.002-32 µg/ml

REF 0163F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Anidulafungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AND 0.002-32 µg/ml

REF 0163F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Anidulafungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

AND 0.002-32 µg/ml

REF 0163F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Anidulafungin

AND 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0163F01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Caspofungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAS 0.002-32 µg/ml

REF 0164F05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Caspofungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAS 0.002-32 µg/ml

REF 0164F10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Caspofungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAS 0.002-32 µg/ml

REF 0164F30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Caspofungin

CAS 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0164F01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Fluconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLU 0.016-256 µg/ml

REF 0165F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Fluconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLU 0.016-256 µg/ml

REF 0165F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Fluconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FLU 0.016-256 µg/ml

REF 0165F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Fluconazole

FLU 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0165F01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Flucytosine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FC 0.002-32 µg/ml

REF 0166F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Flucytosine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FC 0.002-32 µg/ml

REF 0166F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Flucytosine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FC 0.002-32 µg/ml

REF 0166F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Flucytosine

FC 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0166F01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Isavuconazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IVU 0.002-32 µg/ml

REF 0167F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Isavuconazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IVU 0.002-32 µg/ml

REF 0167F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Isavuconazole
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IVU 0.002-32 µg/ml

REF 0167F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Isavuconazole

IVU 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0167F01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
FMIC™

Itraconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ITR

0.002-32 µg/ml

REF 0168F05

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C
8°C

Σ
5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
FMIC™

Itraconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ITR

0.002-32 µg/ml

REF 0168F10

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C
8°C

Σ
10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
FMIC™

Itraconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ITR

0.002-32 µg/ml

REF 0168F30

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C
8°C

Σ
30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Itraconazole

ITR

0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX

REF 0168F01

IVD

CE

Σ
1

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Ketoconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KCA 0.002-32 µg/ml

REF 0169F05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Ketoconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KCA 0.002-32 µg/ml

REF 0169F10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Ketoconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

KCA 0.002-32 µg/ml

REF 0169F30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™ **Ketoconazole** **Σ 1**

KCA 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0169F01 **IVD** **CE** **Σ**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

FMICTM

Micafungin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MYC 0.002-32 µg/ml

REF 0170F05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

 **YYYY/MM** 

 -20°C  **i** 

 5 szt./pcs.

 BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com; E-mail: info@biomaxima.com

 **FMIC™**

Micafungin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MYC
REF 0170F10
LOT XXXXXXXX
YYYY/MM

0.002-32 µg/ml

IVD

CE

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

 **BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland**
Tel: + 48 71 745 51 40; Fax: + 48 71 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA

FMIC™

Micafungin

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MYC 0.002-32 µg/ml

REF 0170F30

LOT XXXXXXXX

IVD

YYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™		 1	
Micafungin			
MYC		0.002-32 µg/ml	
LOT XXXXXXXX	REF 0170F01		
 YYYY/MM	-20°C / 8°C	IVD	 
 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com			

BIOMAXIMA **FMIC™**

Miconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEZ 0.002-32 µg/ml

REF 0171F05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Miconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEZ 0.002-32 µg/ml

REF 0171F10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Miconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEZ 0.002-32 µg/ml

REF 0171F30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Miconazole

MEZ 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0171F01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Nystatin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NS 0.002-32 µg/ml

REF 0172F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Nystatin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NS 0.002-32 µg/ml

REF 0172F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Nystatin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

NS 0.002-32 µg/ml

REF 0172F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Nystatin

NS 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0172F01 IVD

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Posaconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

POS 0.002-32 µg/ml

REF 0173F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Posaconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

POS 0.002-32 µg/ml

REF 0173F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Posaconazole
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

POS 0.002-32 µg/ml

REF 0173F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™ **Posaconazole**  1

POS 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0173F01

YYYY/MM

IVD CE 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Terbinafine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TRB 0.002-32 µg/ml

REF 0174F05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Terbinafine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TRB 0.002-32 µg/ml

REF 0174F10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **FMIC™**

Terbinafine
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

TRB 0.002-32 µg/ml

REF 0174F30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Terbinafine

TRB 0.002-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0174F01 IVD

YYYY/MM

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

FMIC™

Voriconazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VOR

0.002-32 µg/ml

REF

0175F05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Voriconazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VOR

0.002-32 µg/ml

REF

0175F10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

Voriconazole

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

VOR

0.002-32 µg/ml

REF

0175F30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

FMIC™

1

Voriconazole

VOR

0.002-32 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0175F01

IVD

YYYY/MM

-20°C

8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefepime/ Cefepime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP/FEC 0.25-16/0.064-4 µg/ml

REF 0176R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefepime/ Cefepime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP/FEC 0.25-16/0.064-4 µg/ml

REF 0176R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefepime/ Cefepime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

FEP/FEC 0.25-16/0.064-4 µg/ml

REF 0176R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™  1

Cefepime/ Cefepime+ Clavulanic acid

FEP/FEC 0.25-16/0.064-4 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0176R01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cefotaxime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX/CTC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0177R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cefotaxime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX/CTC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0177R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cefotaxime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTX/CTC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0177R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ 1
Cefotaxime/ Cefotaxime+ Clavulanic acid

CTX/CTC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0177R01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

RMIC™

Cefotaxime/ Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCL 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0178R05

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Cefotaxime/ Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCL 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0178R10

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Cefotaxime/ Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCL 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0178R30

IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

1

Cefotaxime/ Cloxacillin

CTCL 0.25-16/0.016-1 µg/ml

LOT XXXXXXXX

REF 0178R01

8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cloxacillin/
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCLC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0179R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cloxacillin/
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCLC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0179R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotaxime/ Cloxacillin/
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTCLC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

REF 0179R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **1**
Cefotaxime/ Cloxacillin/ Clavulanic acid

CTCLC 0.25-16/0.016-1 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0179R01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotetan/ Cefotetan+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT/CXT 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0180R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotetan/ Cefotetan+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT/CXT 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0180R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Cefotetan/ Cefotetan+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CTT/CXT 0.5-32/0.5-32 µg/ml

REF 0180R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ 1

Cefotetan/ Cefotetan+ Cloxacillin

CTT/CXT 0.5-32/0.5-32 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0180R01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Cefpodoxime/ Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPC 0.016-256 µg/ml

REF 0181R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Cefpodoxime/ Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPC 0.016-256 µg/ml

REF 0181R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Cefpodoxime/ Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CPC 0.016-256 µg/ml

REF 0181R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Cefpodoxime/ Clavulanic acid

CPC 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0181R01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftazidime/ Ceftazidime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ/CZC 0.5-32/0.064-4 µg/ml

REF 0182R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftazidime/ Ceftazidime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ/CZC 0.5-32/0.064-4 µg/ml

REF 0182R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftazidime/ Ceftazidime+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CAZ/CZC 0.5-32/0.064-4 µg/ml

REF 0182R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **1**
Ceftazidime/ Ceftazidime+ Clavulanic acid

CAZ/CZC 0.5-32/0.064-4 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0182R01 **IVD** **CE** **i**

YYYY/MM

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftriaxone/ Ceftriaxone+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO/CROC 0.016-4/0.25-16 µg/ml

REF 0183R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftriaxone/ Ceftriaxone+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO/CROC 0.016-4/0.25-16 µg/ml

REF 0183R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ceftriaxone/ Ceftriaxone+
Clavulanic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

CRO/CROC 0.016-4/0.25-16 µg/ml

REF 0183R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ 1
Ceftriaxone/ Ceftriaxone+ Clavulanic acid

CRO/CROC 0.016-4/0.25-16 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0183R01

YYYY/MM

8°C

20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0184R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0184R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Cloxacillin

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0184R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™  1

Ertapenem/ Ertapenem+ Cloxacillin

ETP/ECX 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0184R01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/EBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0185R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/EBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0185R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Ertapenem/ Ertapenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ETP/EBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0185R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ 1
Ertapenem/ Ertapenem+ Phenylboronic acid

ETP/EBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0185R01

YYYY/MM

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Dipicolinic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPDP 0.125-8 µg/ml

REF 0186R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Dipicolinic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPDP 0.125-8 µg/ml

REF 0186R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Dipicolinic acid
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPDP 0.125-8 µg/ml

REF 0186R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **Imipenem/ Dipicolinic acid**  1

IMPDP 0.125-8 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0186R01 

YYYY/MM **IVD** **CE** 

 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0187R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0187R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0187R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ 1

Imipenem/ Imipenem+EDTA

IMPE 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0187R01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 4-256/1-64 µg/ml

REF 0188R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 4-256/1-64 µg/ml

REF 0188R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Imipenem/ Imipenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IMPE 4-256/1-64 µg/ml

REF 0188R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Imipenem/ Imipenem+EDTA

IMPE 4-256/1-64 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0188R01 IVD

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

RMIC™

Meropenem/Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMCL 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0189R05

IVD

LOT XXXXXXXX

CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Meropenem/Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMCL 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0189R10

IVD

LOT XXXXXXXX

CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

Meropenem/Cloxacillin
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMCL 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0189R30

IVD

LOT XXXXXXXX

CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™

1

Meropenem/Cloxacillin

MEMCL 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX

REF 0189R01

YYYY/MM

-20°C 8°C

IVD

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Meropenem/ Dipicolinic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMDP 0.125-8 µg/ml

REF 0190R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Meropenem/ Dipicolinic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMDP 0.125-8 µg/ml

REF 0190R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**

Meropenem/ Dipicolinic acid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMDP 0.125-8 µg/ml

REF 0190R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **Meropenem/ Dipicolinic acid** **Σ 1**

MEMDP 0.125-8 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0190R01 **IVD** **CE** **Σ**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0191R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0191R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA
 IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0191R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™  1

Meropenem/ Meropenem+EDTA

MEM/MRD 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0191R01

YYYY/MM

-20°C 8°C **IVD** **CE** 

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 4-256/1-64 µg/ml

REF 0192R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 4-256/1-64 µg/ml

REF 0192R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/
Meropenem+EDTA

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MRD 4-256/1-64 µg/ml

REF 0192R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **Meropenem/ Meropenem+EDTA**

MEM/MRD 4-256/1-64 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0192R01 **IVD** **CE**

YYYY/MM

8°C

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0193R05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0193R10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem/Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEM/MBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

REF 0193R30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™  1
Meropenem/Meropenem+ Phenylboronic acid

MEM/MBO 0.125-8/0.032-2 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0193R01

YYYY/MM

8°C

-20°C

IVD CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMBO 0.125-8 µg/ml

REF 0194R05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMBO 0.125-8 µg/ml

REF 0194R10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **RMIC™**
Meropenem+
Phenylboronic acid

IMPORTADO POR:
 Laboratorios Britania S.A.
 Los Patos 2175 - C.A.B.A.
 Autorizado ANMAT: PM-1292-56

MEMBO 0.125-8 µg/ml

REF 0194R30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
 Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
 www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

RMIC™ **Meropenem+ Phenylboronic acid** **1**

MEMBO 0.125-8 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0194R01

YYYY/MM

20°C 8°C

IVD **CE** **i**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
 tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
 info@biomaxima.com

Bedaquiline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BED

0.016-256 µg/ml

REF

0195T05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

Σ

5 szt./pcs.

QR Code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Bedaquiline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BED

0.016-256 µg/ml

REF

0195T10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

Σ

10 szt./pcs.

QR Code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

Bedaquiline

IMPORTADO POR:

Laboratorios Britania S.A.

Los Patos 2175 - C.A.B.A.

Autorizado ANMAT: PM-1292-56

BED

0.016-256 µg/ml

REF

0195T30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

8°C

i

Σ

30 szt./pcs.

QR Code

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;

www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BED

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0195T01

IVD

CE

i

8°C

i

Σ

1 szt./pcs.

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska

tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Delamanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DEL 0.016-256 µg/ml

REF 0196T05 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Delamanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DEL 0.016-256 µg/ml

REF 0196T10 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Delamanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

DEL 0.016-256 µg/ml

REF 0196T30 **IVD**

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C **8°C**

Σ 30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Delamanid

DEL 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX **REF** 0196T01 **IVD** **CE** **1**

YYYY/MM

-20°C **8°C**

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Ethambutol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

EB 0.016-256 µg/ml

REF 0197T05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Ethambutol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

EB 0.016-256 µg/ml

REF 0197T10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Ethambutol

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

EB 0.016-256 µg/ml

REF 0197T30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

CE

-20°C 8°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Ethambutol

EB 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0197T01 IVD CE

YYYY/MM

-20°C 8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

TMIC™

Ethionamide

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ET

0.016-256 µg/ml

REF

0198T05

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Ethionamide

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ET

0.016-256 µg/ml

REF

0198T10

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Ethionamide

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

ET

0.016-256 µg/ml

REF

0198T30

IVD

LOT

XXXXXXXX

YYYY/MM

-20°C

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Ethionamide

ET

0.016-256 µg/ml

LOT

XXXXXXXX

REF

0198T01

IVD

YYYY/MM

-20°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
TMIC™

Isoniazide
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IZ
0.016-256 µg/ml
REF
0199T05
IVD
LOT
XXXXXXX
YYYY/MM
CE
-20°C
8°C
5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
TMIC™

Isoniazide
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IZ
0.016-256 µg/ml
REF
0199T10
IVD
LOT
XXXXXXX
YYYY/MM
CE
-20°C
8°C
10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA
TMIC™

Isoniazide
IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

IZ
0.016-256 µg/ml
REF
0199T30
IVD
LOT
XXXXXXX
YYYY/MM
CE
-20°C
8°C
30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™
Isoniazide

IZ
0.016-256 µg/ml
LOT
XXXXXXX
REF
0199T01
IVD
CE
-20°C
8°C

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Pretomanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRP 0.016-256 µg/ml

REF 0200T05 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

5 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Pretomanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRP 0.016-256 µg/ml

REF 0200T10 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

10 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

BIOMAXIMA **TMIC™**

Pretomanid

IMPORTADO POR:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175 - C.A.B.A.
Autorizado ANMAT: PM-1292-56

PRP 0.016-256 µg/ml

REF 0200T30 IVD

LOT XXXXXXXX

YYYY/MM

8°C

CE

30 szt./pcs.

BioMaxima S.A. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
Tel: + 48 81 745 51 40; Fax: + 48 81 744 29 15;
www.biomaxima.com, E-mail: info@biomaxima.com

TMIC™

Pretomanid

PRP 0.016-256 µg/ml

LOT XXXXXXXX REF 0200T01 IVD

YYYY/MM

8°C

CE

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Polska
tel.: 81 745 51 40; fax: 81 744 29 15; e-mail:
info@biomaxima.com



BMIC™

Concentración Inhibitoria Mínima Antibacteriana

Prueba para la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima Antibacteriana

Producto para uso profesional exclusivo en pruebas diagnósticas in vitro

REFERENCIAS

	Nombre	Escala	Cat. No 1 tiras	Cat. No 5 tiras	Cat. No 10 tiras	Cat. No 30 tiras
BMIC	Amikacina	0.016-256	0001B01	0001B05	0001B10	0001B30
BMIC	Amoxicilina	0.016-256	0002B01	0002B05	0002B10	0002B30
BMIC	Amoxicilina - ácido clavulánico	0.016/2-256/2	0003B01	0003B05	0003B10	0003B30
BMIC	Amoxicilina - ácido clavulánico (2:1)	0.016-256	0004B01	0004B05	0004B10	0004B30
BMIC	Ampicilina	0.016-256	0005B01	0005B05	0005B10	0005B30
BMIC	Ampicilina -sulbactama	0.016/4-256/4	0006B01	0006B05	0006B10	0006B30
BMIC	Ampicilina -sulbactama (2:1)	0.016-256	0007B01	0007B05	0007B10	0007B30
BMIC	Azitromicina	0.016-256	0008B01	0008B05	0008B10	0008B30
BMIC	Aztreonam	0.016-256	0009B01	0009B05	0009B10	0009B30
BMIC	Aztreonam	0.064-1024	0010B01	0010B05	0010B10	0010B30
BMIC	Bacitracina	0.016-256	0011B01	0011B05	0011B10	0011B30
BMIC	Cefaclor	0.016-256	0012B01	0012B05	0012B10	0012B30
BMIC	Cefadroxil	0.016-256	0013B01	0013B05	0013B10	0013B30
BMIC	Cefalexina	0.016-256	0014B01	0014B05	0014B10	0014B30
BMIC	Cefazolin	0.016-256	0015B01	0015B05	0015B10	0015B30
BMIC	Cefdinir	0.016-256	0016B01	0016B05	0016B10	0016B30
BMIC	Cefepime	0.002-32	0017B01	0017B05	0017B10	0017B30
BMIC	Cefepime	0.016-256	0018B01	0018B05	0018B10	0018B30
BMIC	Cefepime/Tazobactam (2:1)	0.016-256	0019B01	0019B05	0019B10	0019B30
BMIC	Cefiderocol	0.016-256	0020B01	0020B05	0020B10	0020B30
BMIC	Cefixima	0.016-256	0021B01	0021B05	0021B10	0021B30
BMIC	Cefmetazol	0.016-256	0022B01	0022B05	0022B10	0022B30
BMIC	Cefonicid	0.016-256	0023B01	0023B05	0023B10	0023B30
BMIC	Cefoperazon	0.016-256	0024B01	0024B05	0024B10	0024B30
BMIC	Cefoperazon-sulbactama (2:1)	0.016-256	0025B01	0025B05	0025B10	0025B30
BMIC	Cefotaxima	0.002-32	0026B01	0026B05	0026B10	0026B30
BMIC	Cefotaxima	0.016-256	0027B01	0027B05	0027B10	0027B30
BMIC	Cefotetan	0.016-256	0028B01	0028B05	0028B10	0028B30
BMIC	Cefoxitin	0.016-256	0029B01	0029B05	0029B10	0029B30
BMIC	Cefpiroma	0.016-256	0030B01	0030B05	0030B10	0030B30
BMIC	Cefpodoxima	0.016-256	0031B01	0031B05	0031B10	0031B30
BMIC	Cefprozil	0.016-256	0032B01	0032B05	0032B10	0032B30
BMIC	Ceftarolina	0.002-32	0033B01	0033B05	0033B10	0033B30
BMIC	Ceftarolina	0.016-256	0034B01	0034B05	0034B10	0034B30
BMIC	Ceftazidima	0.016-256	0035B01	0035B05	0035B10	0035B30
BMIC	Ceftazidima-avibactam	0.016/4-256/4	0036B01	0036B05	0036B10	0036B30
BMIC	Ceftibuten	0.002-32	0037B01	0037B05	0037B10	0037B30
BMIC	Ceftizoxima	0.002-32	0038B01	0038B05	0038B10	0038B30
BMIC	Ceftizoxima	0.016-256	0039B01	0039B05	0039B10	0039B30
BMIC	Ceftobiprol	0.002-32	0040B01	0040B05	0040B10	0040B30
BMIC	Ceftolozano-tazobactam	0.016/4-256/4	0041B01	0041B05	0041B10	0041B30
BMIC	Ceftriaxona	0.002-32	0042B01	0042B05	0042B10	0042B30
BMIC	Ceftriaxona	0.016-256	0043B01	0043B05	0043B10	0043B30
BMIC	Cefuroxima	0.016-256	0044B01	0044B05	0044B10	0044B30
BMIC	Cefalotina	0.016-256	0045B01	0045B05	0045B10	0045B30
BMIC	Cloranfenicol	0.016-256	0046B01	0046B05	0046B10	0046B30
BMIC	Ciprofloxacina	0.002-32	0047B01	0047B05	0047B10	0047B30
BMIC	Ciprofloxacina	0.016-256	0048B01	0048B05	0048B10	0048B30
BMIC	Claritromicina	0.016-256	0049B01	0049B05	0049B10	0049B30
BMIC	Clindamicina	0.016-256	0050B01	0050B05	0050B10	0050B30
BMIC	Cloxacilina	0.016-256	0051B01	0051B05	0051B10	0051B30



BMIC	Colistina	0.016-256	0052B01	0052B05	0052B10	0052B30
BMIC	Colistina	0.064-1024	0053B01	0053B05	0053B10	0053B30
BMIC	Dalbavancina	0.002-32	0054B01	0054B05	0054B10	0054B30
BMIC	Dalbavancina	0.016-256	0055B01	0055B05	0055B10	0055B30
BMIC	Daptomicina	0.016-256	0056B01	0056B05	0056B10	0056B30
BMIC	Delafloxacina	0.002-32	0057B01	0057B05	0057B10	0057B30
BMIC	Dicloxacilina	0.016-256	0058B01	0058B05	0058B10	0058B30
BMIC	Doripenem	0.002-32	0059B01	0059B05	0059B10	0059B30
BMIC	Doxiciclina	0.016-256	0060B01	0060B05	0060B10	0060B30
BMIC	Enrofloxacin	0.002-32	0061B01	0061B05	0061B10	0061B30
BMIC	Eravaciclina	0.002-32	0062B01	0062B05	0062B10	0062B30
BMIC	Ertapenem	0.002-32	0063B01	0063B05	0063B10	0063B30
BMIC	Eritromicina	0.016-256	0064B01	0064B05	0064B10	0064B30
BMIC	Faropenem	0.002-32	0065B01	0065B05	0065B10	0065B30
BMIC	Fidaxomicina	0.016-256	0066B01	0066B05	0066B10	0066B30
BMIC	Florfenicol	0.016-256	0067B01	0067B05	0067B10	0067B30
BMIC	Flucloxacilina	0.016-256	0068B01	0068B05	0068B10	0068B30
BMIC	Fosfomicina	0.016-256	0069B01	0069B05	0069B10	0069B30
BMIC	Fosfomicina	0.064-1024	0070B01	0070B05	0070B10	0070B30
BMIC	Fosmidomicina	0.016-256	0071B01	0071B05	0071B10	0071B30
BMIC	Ácido fusídico	0.016-256	0072B01	0072B05	0072B10	0072B30
BMIC	Gatifloxacina	0.002-32	0073B01	0073B05	0073B10	0073B30
BMIC	Gemifloxacina	0.002-32	0074B01	0074B05	0074B10	0074B30
BMIC	Gentamicina	0.016-256	0075B01	0075B05	0075B10	0075B30
BMIC	Gentamicina	0.064-1024	0076B01	0076B05	0076B10	0076B30
BMIC	Griseofulvina	0.016-256	0077B01	0077B05	0077B10	0077B30
BMIC	Imipenem	0.002-32	0078B01	0078B05	0078B10	0078B30
BMIC	Imipenem	0.016-256	0079B01	0079B05	0079B10	0079B30
BMIC	Imipenem/Relebactam	0.002/4-32/4	0080B01	0080B05	0080B10	0080B30
BMIC	Kanamicina	0.016-256	0081B01	0081B05	0081B10	0081B30
BMIC	Kanamicina	0.002-32	0082B01	0082B05	0082B10	0082B30
BMIC	Lefamulina	0.016-256	0083B01	0083B05	0083B10	0083B30
BMIC	Levofloxacina	0.002-32	0084B01	0084B05	0084B10	0084B30
BMIC	Levofloxacina	0.016-256	0085B01	0085B05	0085B10	0085B30
BMIC	Linezolid	0.016-256	0086B01	0086B05	0086B10	0086B30
BMIC	Linezolid	0.002-32	0087B01	0087B05	0087B10	0087B30
BMIC	Marbofloxacina	0.002-32	0088B01	0088B05	0088B10	0088B30
BMIC	Mecilinam	0.016-256	0089B01	0089B05	0089B10	0089B30
BMIC	Meropenem	0.002-32	0090B01	0090B05	0090B10	0090B30
BMIC	Meropenem	0.016-256	0091B01	0091B05	0091B10	0091B30
BMIC	Meropenem/Vaborbactam	0.016/8-256/8	0092B01	0092B05	0092B10	0092B30
BMIC	Metronidazol	0.016-256	0093B01	0093B05	0093B10	0093B30
BMIC	Metronidazol	0.002-32	0094B01	0094B05	0094B10	0094B30
BMIC	Minociclina	0.016-256	0095B01	0095B05	0095B10	0095B30
BMIC	Moxalactam	0.016-256	0096B01	0096B05	0096B10	0096B30
BMIC	Moxifloxacina	0.002-32	0097B01	0097B05	0097B10	0097B30
BMIC	Moxifloxacina	0.016-256	0098B01	0098B05	0098B10	0098B30
BMIC	Mupirocina	0.064-1024	0099B01	0099B05	0099B10	0099B30
BMIC	Mupirocina	0.002-32	0100B01	0100B05	0100B10	0100B30
BMIC	Ácido nalidíxico	0.016-256	0101B01	0101B05	0101B10	0101B30
BMIC	Ácido nalidíxico	0.064-1024	0102B01	0102B05	0102B10	0102B30
BMIC	Netilmicina	0.016-256	0103B01	0103B05	0103B10	0103B30
BMIC	Nitrofurantoina	0.032-512	0104B01	0104B05	0104B10	0104B30
BMIC	Nitrofurantoina	0.016-256	0105B01	0105B05	0105B10	0105B30
BMIC	Nitroxolina	0.016-256	0106B01	0106B05	0106B10	0106B30
BMIC	Norfloxacina	0.016-256	0107B01	0107B05	0107B10	0107B30
BMIC	Norfloxacina	0.002-32	0108B01	0108B05	0108B10	0108B30
BMIC	Norfloxacina	0.032-512	0109B01	0109B05	0109B10	0109B30
BMIC	Ofloxacina	0.002-32	0110B01	0110B05	0110B10	0110B30
BMIC	Ofloxacina	0.016-256	0111B01	0111B05	0111B10	0111B30
BMIC	Omadaciclina	0.002-32	0112B01	0112B05	0112B10	0112B30



BMIC	Oritavancina	0.016-256	0113B01	0113B05	0113B10	0113B30
BMIC	Oxacilina	0.016-256	0114B01	0114B05	0114B10	0114B30
BMIC	Oxacilina	0.002-32	0115B01	0115B05	0115B10	0115B30
BMIC	Oxacilina /Vancomicina	0.064-8/0.25-16	0116B01	0116B05	0116B10	0116B30
BMIC	Paromomicina	0.064-1024	0117B01	0117B05	0117B10	0117B30
BMIC	Pefloxacin	0.016-256	0118B01	0118B05	0118B10	0118B30
BMIC	Penicilina G	0.002-32	0119B01	0119B05	0119B10	0119B30
BMIC	Penicilina G	0.016-256	0120B01	0120B05	0120B10	0120B30
BMIC	Fenoximetilpenicilina	0.016-256	0121B01	0121B05	0121B10	0121B30
BMIC	Piperacilina	0.016-256	0122B01	0122B05	0122B10	0122B30
BMIC	Piperacilina-tazobactam	0.016/4-256/4	0123B01	0123B05	0123B10	0123B30
BMIC	Piperacilina-tazobactam	0.064/4-1024/4	0124B01	0124B05	0124B10	0124B30
BMIC	Plazomicina	0.016-256	0125B01	0125B05	0125B10	0125B30
BMIC	Polimixina B	0.016-256	0126B01	0126B05	0126B10	0126B30
BMIC	Polimixina B	0.064-1024	0127B01	0127B05	0127B10	0127B30
BMIC	Quinupristina-dalfopristina	0.002-32	0128B01	0128B05	0128B10	0128B30
BMIC	Rifampicina	0.002-32	0129B01	0129B05	0129B10	0129B30
BMIC	Rifampicina	0.016-256	0130B01	0130B05	0130B10	0130B30
BMIC	Roxitromicina	0.002-32	0131B01	0131B05	0131B10	0131B30
BMIC	Sparfloxacin	0.016-256	0132B01	0132B05	0132B10	0132B30
BMIC	Espectinomicina	0.064-1024	0133B01	0133B05	0133B10	0133B30
BMIC	Espiramicina	0.002-32	0134B01	0134B05	0134B10	0134B30
BMIC	Estreptomicina	0.016-256	0135B01	0135B05	0135B10	0135B30
BMIC	Estreptomicina	0.064-1024	0136B01	0136B05	0136B10	0136B30
BMIC	Estreptomicina	0.002-32	0137B01	0137B05	0137B10	0137B30
BMIC	Sulbactam	0.016-256	0138B01	0138B05	0138B10	0138B30
BMIC	Sulfametoxazol	0.064-1024	0139B01	0139B05	0139B10	0139B30
BMIC	Tedizolid	0.002-32	0140B01	0140B05	0140B10	0140B30
BMIC	Teicoplanina	0.016-256	0141B01	0141B05	0141B10	0141B30
BMIC	Telavancina	0.002-32	0142B01	0142B05	0142B10	0142B30
BMIC	Telavancina	0.016-256	0143B01	0143B05	0143B10	0143B30
BMIC	Telitromicina	0.016-256	0144B01	0144B05	0144B10	0144B30
BMIC	Temocilina	0.064-1024	0145B01	0145B05	0145B10	0145B30
BMIC	Tetraciclina	0.016-256	0146B01	0146B05	0146B10	0146B30
BMIC	Tiamulina	0.002-32	0147B01	0147B05	0147B10	0147B30
BMIC	Ticarcilina	0.016-256	0148B01	0148B05	0148B10	0148B30
BMIC	Ticarcilina /Ácido clavulánico	0.016/2-256/2	0149B01	0149B05	0149B10	0149B30
BMIC	Tigeciclina	0.016-256	0150B01	0150B05	0150B10	0150B30
BMIC	Tilmicosina	0.002-32	0151B01	0151B05	0151B10	0151B30
BMIC	Tobramicina	0.016-256	0152B01	0152B05	0152B10	0152B30
BMIC	Tobramicina	0.064-1024	0153B01	0153B05	0153B10	0153B30
BMIC	Trimetoprima	0.002-32	0154B01	0154B05	0154B10	0154B30
BMIC	Trimetoprima	0.016-256	0155B01	0155B05	0155B10	0155B30
BMIC	Trimetoprima-sulfametoxazol	0.002-32	0156B01	0156B05	0156B10	0156B30
BMIC	Trimetoprima-sulfametoxazol	0.016-256	0157B01	0157B05	0157B10	0157B30
BMIC	Vancomicina	0.016-256	0158B01	0158B05	0158B10	0158B30
BMIC	Vancomicina	0.002-32	0159B01	0159B05	0159B10	0159B30
BMIC	Vancomicina /Teicoplanina	0.5-32/0.5-32	0160B01	0160B05	0160B10	0160B30
BMIC	Vancomicina-Cefoxitina	0.5-32/0.5-32	0161B01	0161B05	0161B10	0161B30

PRESENTACION

1 x 5 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 10 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 30 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

INTRODUCCION

Las pruebas con tiras BMIC™ proporcionan valores de CIM en µg/ml, que indican la cantidad de antibiótico que inhibe el crecimiento de microorganismos en condiciones específicas y estandarizadas de cultivo in vitro. La tira está diseñada para lograr la máxima repetibilidad de los resultados, aunque pueden presentarse ligeras variaciones en el valor de CIM obtenido, con más o menos una dilución 1/2 (incluso con procedimientos de prueba perfectamente replicados). Cabe destacar que el valor indicado es mínimo; por lo tanto, para inhibir eficazmente el crecimiento, se debe utilizar una cantidad al menos un valor superior. Se puede encontrar información útil en la recomendación elaborada por el CLSI y el EUCAST.



USO PREVISTO

La prueba BMIC™ está diseñada para determinar la CIM (Concentración Inhibitoria Mínima Antibacteriana), que es la concentración mínima de un antibiótico que inhibe el crecimiento de microorganismos. Las tiras tienen aplicado un gradiente de antibiótico y una escala clara con marcadores que permite leer el valor de la CIM en una escala de dilución doble. La prueba se realiza en placas de Petri con un medio de agar estandarizado, y el tiempo y las condiciones de incubación dependen de la especie analizada. BMIC™ permite examinar todas las especies de microorganismos cultivados en placas; el método de realización de la prueba puede requerir ajustes. La prueba proporciona resultados preliminares, y podrían requerirse estudios adicionales para confirmarlos.

PRINCIPIO DEL METODO

Las tiras BMIC™ se basan en un método combinado de microdilución y difusión. Estas innovadoras tiras, con un gradiente constante definido de antibiótico en su superficie, permiten la lectura del valor de CIM en una escala de dilución doble. Esta escala está diseñada para facilitar la lectura tanto de los valores principales (gradiente doble) como de los intermedios. En la parte superior, la tira contiene, en el área del logotipo, un código de dos o tres letras con el nombre del antibiótico; debajo de esta área, se encuentra una escala clara con los valores expresados en µg/ml. Las tiras están dimensionadas para su uso en placas de Petri estándar (90 mm y 150 mm). Es posible utilizar dos o más tiras en una placa. La tira está diseñada para interactuar con la superficie de la placa contra los microorganismos inoculados e inhibir su crecimiento proporcionalmente a la resistencia del microorganismo. La susceptibilidad se puede determinar leyendo el valor de CIM en µg/ml en la escala, que se indica mediante la zona de inhibición elíptica. Su extremo estrecho intersecta la escala de la tira en un punto específico que indica el valor. A continuación, se proporciona información detallada sobre la lectura de los valores. Las tiras están diseñadas para garantizar la durabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. El usuario debe verificar los valores obtenidos con una cepa de control para garantizar su precisión. Los valores de CIM para cepas y antibióticos específicos se actualizan y se incluyen en las recomendaciones elaboradas por EUCAST y CLSI.

CONSERVACION

1. Conserve las tiras en su envase original a la temperatura indicada en el mismo (-20-8 °C o -20 °C). Para un almacenamiento prolongado, se recomiendan temperaturas inferiores a -20 °C (+/- 2 °C).
2. Utilice primero las tiras con la fecha de caducidad más corta.
3. Inmediatamente antes de la prueba, deje que las tiras alcancen la temperatura ambiente (20 °C; +/- 2 °C). No caliente los productos con fuentes de calor externas; deje que alcancen la temperatura ambiente sacando las tiras del congelador/refrigerador con antelación.
4. Protéjelas de la humedad. El envase sellado proporciona suficiente protección. Una vez abierto el envase con tiras sin usar, vuelva a colocarlo en una bolsa sellada (contenedor) junto con un desecante. Este producto debe utilizarse inmediatamente, a más tardar unos días después de su apertura. Debe conservarse refrigerado (6 °C; +/- 2 °C) o congelado (-20 °C; +/- 2 °C).
5. Las tiras deben almacenarse en un ambiente seco.
6. No utilice las tiras después de su fecha de caducidad.
7. Si se observan zonas de inhibición incorrectas durante la prueba con cepas de control, verifique el procedimiento de prueba. Los resultados incorrectos pueden deberse a un almacenamiento deficiente, la calidad del medio o errores de procedimiento.

MODO DE USO

Al retirar el producto de la caja, compruebe que los sobres individuales no estén dañados. No utilice una tira si el sobre está dañado; utilice una tira nueva de un sobre intacto. Verifique la fecha de caducidad y no utilice tiras vencidas.

Antes de usar el producto, déjelo a temperatura ambiente (consulte las instrucciones de almacenamiento). Retire las tiras con suficiente antelación (aproximadamente 30-60 minutos antes de la prueba). Compruebe si se ha acumulado humedad ambiental en el embalaje exterior; de ser así, retírela con una toalla de papel. El contacto con superficies húmedas o la exposición directa a líquidos sobre la tira puede provocar un funcionamiento incorrecto. No utilice una tira humedecida; utilice una nueva. Las tiras almacenadas a temperatura ambiente pueden usarse inmediatamente.

Abra el paquete rasgando la parte superior; el borde tiene una marca para facilitar su apertura. Retire la tira con pinzas, intentando sujetarla por la zona del logotipo. Evite tocar la zona de la escala; el gradiente de antibiótico se aplica en su reverso y tocarlo puede causar un mal funcionamiento del producto. Las pinzas deben estar secas y no remojadas en soluciones de esterilización, o deben secarse antes de su uso. Se pueden utilizar otros instrumentos de aplicación siguiendo sus instrucciones de uso. Se puede tocar la parte superior de la tira. Su diseño especial evita que el gradiente de antibiótico interactúe con la parte superior. Después de colocar la tira, alísela suavemente deslizando las pinzas por su parte superior; esto alineará su posición y garantizará una adhesión óptima a la superficie de la placa.

Coloque las tiras según el objetivo de la prueba: una, dos, o más. Al aplicar varias tiras, colóquelas de manera que ningún borde toque a otro, dejando al menos 2 cm de espacio en la parte inferior (disponiéndolas en forma de estrella). Si coloca varias tiras una al lado de la otra en paralelo, mantenga una separación mínima de 3 cm entre ellas. Colocar varias tiras con gradientes de diferentes antibióticos una al lado de la otra puede complicar la lectura de los valores de CIM debido al crecimiento microbiano desigual, la sinergia o el antagonismo. Considere las interacciones farmacológicas al analizar los resultados obtenidos.

NOTAS

Las tiras BMIC™ están diseñadas para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

Las tiras BMIC™ deben utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones y únicamente para su finalidad prevista.

Es fundamental el estricto cumplimiento de los procedimientos asepticos y las medidas de protección personal, de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente al trabajar con microorganismos patógenos.

Los residuos generados por las pruebas deben considerarse peligrosos debido a la presencia de microorganismos y antibióticos. Es fundamental seguir estrictamente la normativa para la eliminación de dichos residuos, considerando la posibilidad de que los microorganismos desarrollen resistencia a los antibióticos.

Los materiales de las pruebas no deben almacenarse más tiempo del necesario y se deben tomar medidas para evitar la propagación al medio ambiente de microorganismos resistentes, potencialmente resistentes o resistentes a los antibióticos.



PROCEDIMIENTO

Materiales provistos

5, 10, o 30 tiras de prueba BMIC™ envasadas individualmente en sobres con desecante

Instrucciones de uso

Materiales necesarios pero no provistos

Placas de Petri con un diámetro mínimo de 90mm y con el agar especial para el tipo de microorganismos en estudio; en la Tabla 1 se proporcionan instrucciones detalladas.

Medio de suspensión para preparar el inóculo; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Hisopos moderadamente flexibles, tubos, tijeras, pipetas, puntas, esparcidores y otros instrumentos de laboratorio pequeños, estériles, no tóxicos. Densitómetro.

Patrones McFarland 0,5 y 1.

Incubadora (35 °C; ± 2 °C), incubadora con atmósfera controlada de CO₂ o anaerostato, según la cepa en estudio; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Cepas de referencia.

Medio de cultivo

Ajuste el medio de cultivo al microorganismo específico en estudio; los detalles se encuentran en la Tabla 1. Asegúrese de que las placas de agar sean uniformes y permitan un crecimiento adecuado según el control de calidad. El agar debe adherirse bien a toda la superficie de las placas y a sus paredes laterales. Deje las placas a temperatura ambiente antes de la inoculación; no las caliente con una fuente de calor externa. Verifique la fecha de caducidad; para estudios comparativos, utilice el mismo lote de placas para todas las muestras analizadas. Siga las recomendaciones del fabricante.

Preparación del inóculo

Prepare el inóculo siguiendo las instrucciones de la Tabla 1. Utilice el método estándar de preparación del inóculo según las recomendaciones de EUCAST: seleccione varias colonias de un cultivo puro y fresco para preparar el inóculo con la densidad adecuada en comparación con el estándar. El inóculo debe prepararse como mínimo 15 minutos antes de la inoculación. Inmediatamente antes de la siembra, mézclelo para asegurar la uniformidad y la densidad adecuada. El inóculo tiende a sedimentarse.

Inoculación

Coloque un hisopo estéril, flexible y no tóxico en el inóculo preparado, girándolo varias veces en la suspensión. Retire el exceso de solución presionando la cabeza (hisopo de algodón) contra el borde interior del tubo. Ajuste el método según el tamaño de las placas que se sembrarán. Inocule la placa con movimientos suaves y fluidos para cubrir uniformemente toda la superficie. Después de cubrir la placa, gírela 60° y repita la siembra con el mismo hisopo; luego, repita el proceso girando la placa otros 60°. Después de extender la suspensión sobre la superficie de la placa tres veces, haga círculos suaves alrededor del borde de la placa. Deje que las placas absorban la solución; espere aproximadamente 15 minutos antes de colocar las tiras para asegurarse de que la superficie de la placa esté seca. El fabricante recomienda este método de siembra, pero también se pueden utilizar otros métodos automáticos o manuales (extensión con un esparcidor); sin embargo, asegúrese de que estos métodos proporcionen una cobertura uniforme en toda la superficie de la placa.

Advertencia:

El método turbidimétrico no garantiza la densidad adecuada de células vivas en el inóculo. Realice un recuento microbiano para verificar la cantidad correcta de células vivas en el inóculo. Una preparación adecuada del inóculo y la siembra permiten un crecimiento homogéneo y constante de los microorganismos en la placa, lo que permite una lectura precisa de los valores de CIM.

Aplicación

Asegúrese de que las placas inoculadas estén secas antes de la aplicación. Abra el sobre de la prueba según las instrucciones de la sección "MODO DE USO". Determine la mejor posición en la placa, teniendo en cuenta que las tiras requieren una superficie de aproximadamente 6 x 4 cm. Coloque una o un máximo de dos tiras con el mismo gradiente de antibiótico en placas de 90 mm. En placas de 150 mm, puede colocar de una a seis tiras; el fabricante recomienda un máximo de 4 a 6 tiras. Ajuste el número de tiras según el tamaño previsto de las zonas de inhibición del crecimiento. Si se prevé una zona de inhibición de crecimiento grande (organismo sensible al antibiótico), reduzca el número de tiras.

Las tiras se pueden aplicar con pinzas u otros sistemas que apliquen succión o vacío para su manipulación, siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la tira se adhiera bien a la superficie de la placa; si es necesario, alise suavemente la parte superior de la tira con pinzas. Si una tira cae incorrectamente sobre la superficie del agar, puede dejar una marca que se observará después de la incubación. Dicha placa debe desecharse o marcarse, y el usuario debe evaluar si puede leer correctamente el valor de CIM. Si una tira se coloca con el lado de la escala hacia la superficie del agar, no se obtendrán resultados correctos. Dicha tira debe levantarse y colocarse correctamente con el lado de la escala hacia arriba. Dicha placa debe desecharse o dejarse para que el usuario la evalúe después de la incubación. El resultado puede ser incorrecto o difícil de leer. El fabricante recomienda repetir la prueba con una nueva placa inoculada y una nueva tira.

Incubación

Incubar las placas boca abajo según los requisitos de los microorganismos analizados; las pautas se proporcionan en la Tabla 1. Seguir los métodos estándar aceptados de incubación.

Notas

Las placas de agar utilizadas para las pruebas pueden variar en parámetros como el contenido de iones de calcio y magnesio, y el pH, incluso si provienen del mismo proveedor. El contenido de iones y el pH pueden afectar la magnitud de los valores de CIM obtenidos. Utilice únicamente proveedores verificados y el mismo lote para las pruebas de control.

Lea los resultados después de un tiempo de incubación específico; las lecturas tomadas demasiado pronto o demasiado tarde pueden producir resultados inexactos. Supervise el tiempo de incubación. Una temperatura de incubación incorrecta, la inestabilidad de la temperatura o las interrupciones en el funcionamiento de la incubadora pueden generar resultados erróneos. Supervise el funcionamiento de los dispositivos de



incubación; antes de leer los resultados, asegúrese de que el dispositivo haya funcionado de forma estable durante la incubación.

Conserve el manual del usuario y consúltelo en caso de duda, o consulte con el fabricante.

Realice siempre controles con cepas de referencia, compare los resultados obtenidos con los estándares disponibles y repita la prueba si existen dudas. Los usuarios deben validar el método según sus necesidades específicas y de acuerdo con los estándares requeridos.

Lectura de los resultados

Las tiras BMIC™ están especialmente diseñadas para facilitar la interpretación de los resultados. Sin embargo, se requiere capacitación y experiencia para casos más complejos o controvertidos. Estas innovadoras tiras cuentan con una escala y marcadores a lo largo del borde para facilitar la lectura. El resultado indica el límite entre la zona de inhibición del crecimiento (superficie sin turbidez visible, colonias individuales - zona libre de crecimiento de microorganismos) y la superficie donde se observa crecimiento. La línea límite arbitraria corre por debajo de la tira, con sus extremos tocando la escala a ambos lados. Esta ubicación indica el valor de CIM para una cepa y un antibiótico determinados. Los valores mayores se colocan en la escala para fines de diagnóstico médico. La tira permite la lectura de valores intermedios para fines de investigación o diagnósticos más precisos. Se leen valores intermedios si el límite entre las zonas se encuentra en el campo oscuro entre los campos claros. Se leen valores mayores si el límite termina en un área clara. Para fines de diagnóstico médico, si el límite se encuentra en un área oscura, lea el valor del campo claro sobre el valor intermedio (aumente la lectura). Si no se observa una zona de inhibición del crecimiento elíptica o circular, o incluso una zona mínima, lea el resultado máximo indicado en la tira e indique que la cepa del microorganismo es resistente al antibiótico. Exprese su resistencia con el símbolo ">" e indique el valor máximo en la tira. Si se observa una zona de inhibición del crecimiento extensa alrededor de la tira, de modo que la rodee por completo, significa que la cepa es sensible al antibiótico e indica que la concentración inhibitoria mínima es menor que el valor mínimo de la tira. Existen varios tipos de tiras con diferentes escalas para distintos antibióticos; preste atención a los valores indicados en la tira. Si se observan colonias individuales resistentes al antibiótico dentro de la zona de inhibición del crecimiento, indique el valor en el que no hay colonias presentes (zona de inhibición total del crecimiento). Los microorganismos vivos pueden presentar diferentes tipos de crecimiento y características del "tapiz" obtenido; por lo tanto, pueden presentarse diversos tipos de deformaciones de la zona, en forma de embudos a lo largo de la escala, o una fina capa de crecimiento a lo largo de la misma; en la mayoría de los casos, estas deformaciones deben ignorarse. Si los valores leídos en ambos lados de la tira son diferentes, indique el valor más alto. En caso de duda, repita la prueba. Tenga en cuenta el propósito del estudio, ya que algunos antibióticos presentan propiedades bacteriostáticas que provocan la aparición de una zona de inhibición parcial del crecimiento. Según el propósito, indique correctamente el valor de CIM. Para los bacteriostáticos, indique el valor de CIM al 80 % de la zona de inhibición del crecimiento, donde se observa la primera reducción significativa-limitación del crecimiento a simple vista. Los valores de CIM bactericida de un antibiótico determinado deben determinarse indicando el límite de inhibición total del crecimiento.

Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados debe ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las tiras BMIC™ proporcionan datos cuantitativos, por lo que los valores deben indicarse con precisión, junto con información sobre si una cepa en particular es resistente o sensible. La información sobre resistencia está disponible en tablas de acceso público elaboradas por CLSI® y EUCAST. Para fines de control, deben utilizarse las cepas de referencia recomendadas por estas organizaciones. Las tablas especifican los valores a partir de los cuales una cepa debe considerarse resistente o sensible. Las pruebas se han diseñado para indicar con precisión los valores de CIM de las cepas de referencia. Para fines de diagnóstico médico, no deben indicarse los valores intermedios, sino redondearse al valor superior más cercano.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Todos los residuos generados por las pruebas con BMIC™ deben considerarse material potencialmente infeccioso. Cabe destacar que las tiras contienen antibióticos y su uso con microorganismos puede provocar el desarrollo de mecanismos de resistencia a estos. Por lo tanto, todos los residuos deben eliminarse inmediatamente después de las pruebas para evitar su contaminación ambiental. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con las normas de eliminación de residuos, implementar los procedimientos adecuados y garantizar su cumplimiento.

REFERENCIAS

1. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. Requirements for antibiotic susceptibility test: 1.: WHO Technical reports series No 610. Geneva: WHO, 1977.
2. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, January, 2024.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; latest edition. CLSI supplement M100.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; latest edition. CLSI standard M07.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria; Approved Standard, latest edition. CLSI document M11.

Tabla 1

Medios de cultivo, temperaturas, condiciones y tiempos de incubación recomendados por EUCAST

Microorganismos de prueba	Medio	Temperatura de incubación	Condiciones de incubación	Tiempo de incubación
Enterobacterales	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Pseudomonas spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Stenotrophomonas maltophilia	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Burkholderia pseudomallei	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Acinetobacter spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Staphylococcus spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Enterococcus spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16-20 h; 24 h para glicopéptido

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



Aeromonas spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Achromobacter xylosoxidans	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Bacillus spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 18 h
Vibrio spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Streptococcus spp. grupo A,B,C,G	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Streptococcus pneumoniae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Streptococcus spp. grupo Viridans	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Haemophilus influenzae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Moraxella catarrhalis	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Listeria monocytogenes	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Pasteurella multocida	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5 % CO2	16 – 20 h
Campylobacter jejuni y coli	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	41 o C ± 1	condiciones microaerofilicas	24 h, hasta 40-48 h
Corynebacterium spp.	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5% CO2	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Aerococcus sanguinicola y urinae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5% CO2	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Kingella kingae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5% CO2	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Brucella melitensis	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C ± 1	5% CO2	46 – 50 h
Anaerobios	Fastidious Anaerobic Agar (FAA)	35-37 o C ± 1	Condiciones anaeróbicas	16 – 20 h



Explanation of symbols

	Precaución, consultar documentos acompañantes		Consultar instrucciones de uso		Fabricante
IVD	Para uso diagnóstico in vitro	LOT	Número de lote	REF	Número de catálogo
	Límites de temperatura		Utilizar antes de		

TD-7-BMIC

Version 1.2/2024-12-16

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



FMIC™

Determinación de Concentración Inhibitoria Mínima Antifúngicos

Prueba para la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima para Antifúngicos
Producto para uso profesional exclusivo en pruebas diagnósticas in vitro

REFERENCIAS

Nombre	Escala	Cat.No Tira	Cat.No caja 5 tiras	Cat.No caja 10 tiras	Cat.No caja 30 tiras
Anfotericina B	0.002-32	0162F01	0162F05	0162F10	0162F30
Anidulafungin	0.002-32	0163F01	0163F05	0163F10	0163F30
Caspofungin	0.002-32	0164F01	0164F05	0164F10	0164F30
Fluconazol	0.016-256	0165F01	0165F05	0165F10	0165F30
Flucitosina	0.002-32	0166F01	0166F05	0166F10	0166F30
Isavuconazol	0.002-32	0167F01	0167F05	0167F10	0167F30
Itraconazol	0.002-32	0168F01	0168F05	0168F10	0168F30
Ketoconazol	0.002-32	0169F01	0169F05	0169F10	0169F30
Micafungin	0.002-32	0170F01	0170F05	0170F10	0170F30
Miconazol	0.002-32	0171F01	0171F05	0171F10	0171F30
Nistatina	0.002-32	0172F01	0172F05	0172F10	0172F30
Posaconazol	0.002-32	0173F01	0173F05	0173F10	0173F30
Terbinafina	0.002-32	0174F01	0174F05	0174F10	0174F30
Voriconazol	0.002-32	0175F01	0175F05	0175F10	0175F30

PRESENTACION

1 x 5 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 10 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 30 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

INTRODUCCION

Las pruebas con tiras FMIC™ proporcionan valores de CIM en µg/ml, que indican la cantidad de antifúngico que inhibe el crecimiento de microorganismos en condiciones específicas y estandarizadas de cultivo in vitro. La tira está diseñada para lograr la máxima repetibilidad de los resultados, aunque pueden presentarse ligeras variaciones en el valor de CIM obtenido, con más o menos una dilución 1/2 (incluso con procedimientos de prueba perfectamente replicados). Cabe destacar que el valor indicado es mínimo; por lo tanto, para inhibir eficazmente el crecimiento, se debe utilizar una cantidad al menos un valor superior. Se puede encontrar información útil en las recomendaciones elaboradas por el CLSI y el EUCAST.

USO PREVISTO

La prueba FMIC™ está diseñada para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima para Antifúngicos (CIM), que es la mínima concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento de microorganismos. Las tiras tienen aplicado un gradiente de antimicóticos y una escala clara con marcadores que permite leer el valor de la CIM en una escala de dilución doble. La prueba se realiza en placas de Petri con un medio de agar estandarizado, y el tiempo y las condiciones de incubación dependen de la especie analizada. FMIC™ permite examinar todas las especies de microorganismos cultivados en placas; el método de realización de la prueba puede requerir ajustes. La prueba proporciona resultados preliminares, y podrían requerirse estudios adicionales para confirmarlos.

PRINCIPIO DEL METODO

Las tiras FMIC™ se basan en un método combinado de microdilución y difusión. Estas innovadoras tiras, con un gradiente constante definido de antibiótico en su superficie, permiten la lectura del valor de CIM en una escala de dilución doble. Esta escala está diseñada para facilitar la lectura tanto de los valores principales (gradiente doble) como de los intermedios. En la parte superior, la tira contiene, en el área del logotipo, un código de dos o tres letras con el nombre del antibiótico; debajo de esta área, se encuentra una escala clara con los valores expresados en µg/ml. Las tiras están dimensionadas para su uso en placas de Petri estándar (90 mm y 150 mm). Es posible utilizar dos o más tiras en una placa. La tira está diseñada para interactuar con la superficie de la placa contra los microorganismos inoculados e inhibir su crecimiento proporcionalmente a la resistencia del microorganismo. La susceptibilidad se puede determinar leyendo el valor de CIM en µg/ml en la escala, que se indica mediante la zona de inhibición elíptica. Su extremo estrecho intersecta la escala de la tira en un punto específico que indica el valor. A continuación, se proporciona información detallada sobre la lectura de los valores. Las tiras están diseñadas para garantizar la durabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. El usuario debe verificar los valores obtenidos con una cepa de control para garantizar su precisión. Los valores de CIM para cepas y antibióticos específicos se actualizan y se incluyen en las recomendaciones elaboradas por EUCAST y CLSI.



CONSERVACION

1. Conserve las tiras en su envase original a la temperatura indicada en el mismo (-20-8 °C o -20 °C). Para un almacenamiento prolongado, se recomiendan temperaturas inferiores a -20 °C (+/- 2 °C).
2. Utilice primero las tiras con la fecha de caducidad más corta.
3. Inmediatamente antes de la prueba, deje que las tiras alcancen la temperatura ambiente (20 °C; +/- 2 °C). No caliente los productos con fuentes de calor externas; deje que alcancen la temperatura ambiente sacando las tiras del congelador/refrigerador con antelación.
4. Protéjalas de la humedad. El envase sellado proporciona suficiente protección. Una vez abierto el envase con tiras sin usar, vuelva a colocarlo en una bolsa sellada (contenedor) junto con un desecante. Este producto debe utilizarse inmediatamente, a más tardar unos días después de su apertura. Debe conservarse refrigerado (6 °C; +/- 2 °C) o congelado (-20 °C; +/- 2 °C).
5. Las tiras deben almacenarse en un ambiente seco.
6. No utilice las tiras después de su fecha de caducidad.
7. Si se observan zonas de inhibición incorrectas durante la prueba con cepas de control, verifique el procedimiento de prueba. Los resultados incorrectos pueden deberse a un almacenamiento deficiente, la calidad del medio o errores de procedimiento.

MODO DE USO

Al retirar el producto de la caja, compruebe que los sobres individuales no estén dañados. No utilice una tira si el sobre está dañado; utilice una tira nueva de un sobre intacto. Verifique la fecha de caducidad y no utilice tiras vencidas.

Antes de usar el producto, déjelo alcanzar temperatura ambiente (consulte las instrucciones de almacenamiento). Retire las tiras con suficiente antelación (aproximadamente 30-60 minutos antes de la prueba). Compruebe si se ha acumulado humedad ambiental en el embalaje exterior; de ser así, retírela con una toalla de papel. El contacto con superficies húmedas o la exposición directa a líquidos sobre la tira puede provocar un funcionamiento incorrecto. No utilice una tira humedecida; utilice una nueva. Las tiras almacenadas a temperatura ambiente pueden usarse inmediatamente.

Abra el paquete rasgando la parte superior; el borde tiene una marca para facilitar su apertura. Retire la tira con pinzas, intentando sujetarla por la zona del logotipo. Evite tocar la zona de la escala; el gradiente de antibiótico se aplica en su reverso y tocarlo puede causar un mal funcionamiento del producto. Las pinzas deben estar secas y no remojadas en soluciones de esterilización, o deben secarse antes de su uso. Se pueden utilizar otros instrumentos de aplicación siguiendo sus instrucciones de uso. Se puede tocar la parte superior de la tira. Su diseño especial evita que el gradiente de antibiótico interactúe con la parte superior. Después de colocar la tira, alísela suavemente deslizando las pinzas por su parte superior; esto alineará su posición y garantizará una adhesión óptima a la superficie de la placa.

Coloque las tiras según el objetivo de la prueba: una, dos, o más. Al aplicar varias tiras, colóquelas de manera que ningún borde toque a otro, dejando al menos 2 cm de espacio en la parte inferior (disponiéndolas en forma de estrella). Si coloca varias tiras una al lado de la otra en paralelo, mantenga una separación mínima de 3 cm entre ellas. Colocar varias tiras con gradientes de diferentes antibióticos una al lado de la otra puede complicar la lectura de los valores de CIM debido al crecimiento microbiano desigual, la sinergia o el antagonismo. Considere las interacciones farmacológicas al analizar los resultados obtenidos.

NOTAS

Las tiras FMIC™ están diseñadas para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

Las tiras FMIC™ deben utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones y únicamente para su finalidad prevista.

Es fundamental el estricto cumplimiento de los procedimientos asépticos y las medidas de protección personal, de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente al trabajar con microorganismos patógenos.

Los residuos generados por las pruebas deben considerarse peligrosos debido a la presencia de microorganismos y antibióticos. Es fundamental seguir estrictamente la normativa para la eliminación de dichos residuos, considerando la posibilidad de que los microorganismos desarrollen resistencia a los antibióticos.

Los materiales de las pruebas no deben almacenarse más tiempo del necesario y se deben tomar medidas para evitar la propagación al medio ambiente de microorganismos resistentes, potencialmente resistentes o resistentes a los antibióticos.

PROCEDIMIENTO

Materiales provistos

5, 10, o 30 tiras de prueba FMIC™ envasadas individualmente en sobres con desecante

Instrucciones de uso

Materiales necesarios pero no provistos

Placas de Petri con un diámetro mínimo de 90mm y con el agar especial para el tipo de microorganismos en estudio; en la Tabla 1 se proporcionan instrucciones detalladas.

Medio de suspensión para preparar el inóculo; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Hisopos moderadamente flexibles, tubos, tijeras, pipetas, puntas, esparcidores y otros instrumentos de laboratorio pequeños, estériles, no tóxicos.

Densitómetro.

Patrones McFarland 0,5 y 1.

Incubadora (37 °C; ± 1 °C).

Cepas de referencia.

Medio de cultivo

Ajuste el medio de cultivo al microorganismo específico en estudio; los detalles se encuentran en la Tabla 1. Asegúrese de que las placas de agar sean uniformes y permitan un crecimiento adecuado según el control de calidad. El agar debe adherirse bien a toda la superficie de las placas y a sus paredes laterales. Deje las placas a temperatura ambiente antes de la inoculación; no las caliente con una fuente de calor externa. Verifique la fecha



de caducidad; para estudios comparativos, utilice el mismo lote de placas para todas las muestras analizadas. Siga las recomendaciones del fabricante.

Preparación del inóculo

Prepare el inóculo siguiendo las instrucciones de la Tabla 1. Utilice el método estándar de preparación del inóculo según las recomendaciones de EUCAST: seleccione varias colonias de un cultivo puro y fresco para preparar el inóculo con la densidad adecuada en comparación con el estándar. El inóculo debe prepararse como mínimo 15 minutos antes de la inoculación. Inmediatamente antes de la siembra, mézclelo para asegurar la uniformidad y la densidad adecuada. El inóculo tiende a sedimentarse.

Inoculación

Coloque un hisopo estéril, flexible y no tóxico en el inóculo preparado, girándolo varias veces en la suspensión. Retire el exceso de solución presionando la cabeza (hisopo de algodón) contra el borde interior del tubo. Ajuste el método según el tamaño de las placas que se sembrarán. Inocule la placa con movimientos suaves y fluidos para cubrir uniformemente toda la superficie. Después de cubrir la placa, gírela 60° y repita la siembra con el mismo hisopo; luego, repita el proceso girando la placa otros 60°. Después de extender la suspensión sobre la superficie de la placa tres veces, haga círculos suaves alrededor del borde de la placa. Deje que las placas absorban la solución; espere aproximadamente 15 minutos antes de colocar las tiras para asegurarse de que la superficie de la placa esté seca. El fabricante recomienda este método de siembra, pero también se pueden utilizar otros métodos automáticos o manuales (extensión con un esparcidor); sin embargo, asegúrese de que estos métodos proporcionen una cobertura uniforme en toda la superficie de la placa.

Advertencia:

El método turbidimétrico no garantiza la densidad adecuada de células vivas en el inóculo. Realice un recuento microbiano para verificar la cantidad correcta de células vivas en el inóculo. Una preparación adecuada del inóculo y la siembra permiten un crecimiento homogéneo y constante de los microorganismos en la placa, lo que permite una lectura precisa de los valores de CIM.

Aplicación

Asegúrese de que las placas inoculadas estén secas antes de la aplicación. Abra el sobre de la prueba según las instrucciones de la sección "MODO DE USO". Determine la mejor posición en la placa, teniendo en cuenta que las tiras requieren una superficie de aproximadamente 6 x 4 cm. Coloque una o un máximo de dos tiras con el mismo gradiente de antibiótico en placas de 90 mm. En placas de 150 mm, puede colocar de una a seis tiras; el fabricante recomienda un máximo de 4 a 6 tiras. Ajuste el número de tiras según el tamaño previsto de las zonas de inhibición del crecimiento. Si se prevé una zona de inhibición de crecimiento grande (organismo sensible al antibiótico), reduzca el número de tiras.

Las tiras se pueden aplicar con pinzas u otros sistemas que apliquen succión o vacío para su manipulación, siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la tira se adhiera bien a la superficie de la placa; si es necesario, alise suavemente la parte superior de la tira con pinzas. Si una tira cae incorrectamente sobre la superficie del agar, puede dejar una marca que se observará después de la incubación. Dicha placa debe desecharse o marcarse, y el usuario debe evaluar si puede leer correctamente el valor de CIM. Si una tira se coloca con el lado de la escala hacia la superficie del agar, no se obtendrán resultados correctos. Dicha tira debe levantarse y colocarse correctamente con el lado de la escala hacia arriba. Dicha placa debe desecharse o dejarse para que el usuario la evalúe después de la incubación. El resultado puede ser incorrecto o difícil de leer. El fabricante recomienda repetir la prueba con una nueva placa inoculada y una nueva tira.

Incubación

Incubar las placas boca abajo según los requisitos de los microorganismos analizados; las pautas se proporcionan en la Tabla 1. Seguir los métodos estándar aceptados de incubación.

Notas

Las placas de agar utilizadas para las pruebas pueden variar en parámetros como el contenido de iones de calcio y magnesio, y el pH, incluso si provienen del mismo proveedor. El contenido de iones y el pH pueden afectar la magnitud de los valores de CIM obtenidos. Utilice únicamente proveedores verificados y el mismo lote para las pruebas de control.

Lea los resultados después de un tiempo de incubación específico; las lecturas tomadas demasiado pronto o demasiado tarde pueden producir resultados inexactos. Supervise el tiempo de incubación. Una temperatura de incubación incorrecta, la inestabilidad de la temperatura o las interrupciones en el funcionamiento de la incubadora pueden generar resultados erróneos. Supervise el funcionamiento de los dispositivos de incubación; antes de leer los resultados, asegúrese de que el dispositivo haya funcionado de forma estable durante la incubación.

Conserve el manual del usuario y consúltelo en caso de duda, o consulte con el fabricante.

Realice siempre controles con cepas de referencia, compare los resultados obtenidos con los estándares disponibles y repita la prueba si existen dudas. Los usuarios deben validar el método según sus necesidades específicas y de acuerdo con los estándares requeridos.

Lectura de los resultados

Las tiras FMIC™ están especialmente diseñadas para facilitar la interpretación de los resultados. Sin embargo, se requiere capacitación y experiencia para casos más complejos o controvertidos. Estas innovadoras tiras cuentan con una escala y marcadores a lo largo del borde para facilitar la lectura. El resultado indica el límite entre la zona de inhibición del crecimiento (superficie sin turbidez visible, colonias individuales - zona libre de crecimiento de microorganismos) y la superficie donde se observa crecimiento. La línea límite arbitraria corre por debajo de la tira, con sus extremos tocando la escala a ambos lados. Esta ubicación indica el valor de CIM para una cepa y un antibiótico determinados. Los valores mayores se colocan en la escala para fines de diagnóstico médico. La tira permite la lectura de valores intermedios para fines de investigación o diagnósticos más precisos. Se leen valores intermedios si el límite entre las zonas se encuentra en el campo oscuro entre los campos claros. Se leen valores mayores si el límite termina en un área clara. Para fines de diagnóstico médico, si el límite se encuentra en un área oscura, lea el valor del campo claro sobre el valor intermedio (aumente la lectura). Si no se observa una zona de inhibición del crecimiento elíptica o circular, o incluso una zona mínima, lea el resultado máximo indicado en la tira e indique que la cepa del microorganismo es resistente al antibiótico. Exprese su resistencia con el símbolo ">" e indique el valor máximo en la tira. Si se observa una zona de inhibición del crecimiento extensa alrededor de la tira, de modo que la rodee por completo, significa que la cepa es sensible al antibiótico e indica que la concentración inhibitoria mínima es menor que el valor mínimo de la tira. Existen varios tipos de tiras con diferentes escalas para distintos antibióticos; preste atención a los valores indicados en la tira. Si se observan colonias individuales resistentes al antibiótico dentro de la zona de inhibición del crecimiento, indique el valor en el que no hay colonias presentes (zona de inhibición total del



crecimiento). Los microorganismos vivos pueden presentar diferentes tipos de crecimiento y características del "tapiz" obtenido; por lo tanto, pueden presentarse diversos tipos de deformaciones de la zona, en forma de embudos a lo largo de la escala, o una fina capa de crecimiento a lo largo de la misma; en la mayoría de los casos, estas deformaciones deben ignorarse. Si los valores leídos en ambos lados de la tira son diferentes, indique el valor más alto. En caso de duda, repita la prueba. Tenga en cuenta el propósito del estudio, ya que algunos antibióticos presentan propiedades bacteriostáticas que provocan la aparición de una zona de inhibición parcial del crecimiento. Según el propósito, indique correctamente el valor de CIM. Para los bacteriostáticos, indique el valor de CIM al 80 % de la zona de inhibición del crecimiento, donde se observa la primera reducción significativa-limitación del crecimiento a simple vista. Los valores de CIM bactericida de un antibiótico determinado deben determinarse indicando el límite de inhibición total del crecimiento.

Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados debe ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las tiras FMIC™ proporcionan datos cuantitativos, por lo que los valores deben indicarse con precisión, junto con información sobre si una cepa en particular es resistente o sensible. La información sobre resistencia está disponible en tablas de acceso público elaboradas por CLSI® y EUCAST. Para fines de control, deben utilizarse las cepas de referencia recomendadas por estas organizaciones. Las tablas especifican los valores a partir de los cuales una cepa debe considerarse resistente o sensible. Las pruebas se han diseñado para indicar con precisión los valores de CIM de las cepas de referencia. Para fines de diagnóstico médico, no deben indicarse los valores intermedios, sino redondearse al valor superior más cercano.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Todos los residuos generados por las pruebas con FMIC™ deben considerarse material potencialmente infeccioso. Cabe destacar que las tiras contienen antibióticos y su uso con microorganismos puede provocar el desarrollo de mecanismos de resistencia a estos. Por lo tanto, todos los residuos deben eliminarse inmediatamente después de las pruebas para evitar su contaminación ambiental. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con las normas de eliminación de residuos, implementar los procedimientos adecuados y garantizar su cumplimiento.

REFERENCIAS

1. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. Requirements for antibiotic susceptibility test: 1.: WHO Technical reports series No 610. Geneva: WHO, 1977.
2. European Committee on Antifungal Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 10.0, February 2020.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts, latest edition. CLSI supplement M60.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts; latest edition. CLSI standard M27.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi; latest edition. CLSI supplement M61.
6. Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Filamentous Fungi; latest edition. CLSI standard M38.

Tabla 1

Medios de cultivo, temperaturas, condiciones y tiempos de incubación recomendados por EUCAST

Microorganismos de prueba	Medio	Temperatura de incubación	Condiciones de incubación	Tiempo de incubación
<i>Candida</i> y <i>Cryptococcus</i> spp	RPMI 1640-2% glucosa, buffer MOPS	37 °C ± 1	Aeróbica	18 – 24 h
<i>Aspergillus</i> spp.	RPMI 1640-2% glucosa, buffer MOPS	37 °C ± 1	Aeróbica	48 h



Explanation of symbols

	Precaución, consultar documentos acompañantes		Consultar instrucciones de uso		Fabricante
	Para uso diagnóstico in vitro		Número de lote		Número de catálogo
	Límites de temperatura		Utilizar antes de		



RMIC™

Determinación de Concentración Inhibitoria Mínima Antibacteriana

Prueba para la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima para Mecanismos de Resistencia

Producto para uso profesional exclusivo en pruebas diagnósticas in vitro

REFERENCIAS

Nombre	Escala	Código	Cat.No Tira	Cat.No caja 5 tiras	Cat.No caja 10 tiras	Cat.No caja 30 tiras
Cefepime/Cefepime+Ácido Clavulánico	0.25-16/0.064-4	FEP/FEC	0176R01	0176R05	0176R10	0176R30
Cefotaxima/Cefotaxima+Ácido Clavulánico	0.25-16/0.016-1	CTX/CTC	0177R01	0177R05	0177R10	0177R30
Cefotaxima/Cloxacilina	0.25-16/0.016-1	CTCL	0178R01	0178R05	0178R10	0178R30
Cefotaxima/Cloxacilina/Ácido Clavulánico	0.25-16/0.016-1	CTCLC	0179R01	0179R05	0179R10	0179R30
Cefotetan/Cefotetan+Cloxacilina	0.5-32/0.5-32	CTT/CXT	0180R01	0180R05	0180R10	0180R30
Cefpodoxima/Ácido Clavulánico	0.016-256	CPC	0181R01	0181R05	0181R10	0181R30
Ceftazidima/Ceftazidima+ Ácido Clavulánico	0.5-32/0.064-4	CAZ/CZC	0182R01	0182R05	0182R10	0182R30
Ceftriaxona/Ceftriaxona+ Ácido Clavulánico	0.016-4/0.25-16	CRO/CROC	0183R01	0183R05	0183R10	0183R30
Ertapenem/Ertapenem+Cloxacilina	0.125-8/0.032-2	ETP/ECX	0184R01	0184R05	0184R10	0184R30
Ertapenem/Ertapenem+Ácido fenilborónico	0.125-8/0.032-2	ETP/EBO	0185R01	0185R05	0185R10	0185R30
Imipenem/ Ácido Dipicolínico	0.125-8	IMPDP	0186R01	0186R05	0186R10	0186R30
Imipenem/Imipenem+EDTA	0.125-8/0.032-2	IMPE	0187R01	0187R05	0187R10	0187R30
Imipenem/Imipenem+EDTA	4-256/1-64	IMPE	0188R01	0188R05	0188R10	0188R30
Meropenem/Cloxacilina	0.125-8/0.032-2	MEMCL	0189R01	0189R05	0189R10	0189R30
Meropenem/ Ácido Dipicolínico	0.125-8	MEMDP	0190R01	0190R05	0190R10	0190R30
Meropenem/Meropenem+EDTA	0.125-8/0.032-2	MEM/MRD	0191R01	0191R05	0191R10	0191R30
Meropenem/Meropenem+EDTA	4-256/1-64	MEM/MRD	0192R01	0192R05	0192R10	0192R30
Meropenem/Meropenem+ Ácido fenilborónico	0.125-8/0.032-2	MEM/MBO	0193R01	0193R05	0193R10	0193R30
Meropenem+ Ácido fenilborónico	0.125-8	MEMBO	0194R01	0194R05	0194R10	0194R30

PRESENTACION

1 x 5 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 10 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

1 x 30 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

INTRODUCCION

Las pruebas con tiras RMIC™ proporcionan valores de CIM en µg/ml, que indican la cantidad de antibiótico que inhibe el crecimiento de microorganismos en condiciones específicas y estandarizadas de cultivo in vitro. La tira está diseñada para lograr la máxima repetibilidad de los resultados, aunque pueden presentarse ligeras variaciones en el valor de CIM obtenido, con más o menos una dilución 1/2 (incluso con procedimientos de prueba perfectamente replicados). Cabe destacar que el valor indicado es mínimo; por lo tanto, para inhibir eficazmente el crecimiento, se debe utilizar una cantidad al menos un valor superior. Se puede encontrar información útil en las recomendaciones elaboradas por el CLSI y el EUCAST.



USO PREVISTO

La prueba RMIC™ está diseñada para determinar la resistencia a antimicrobianos (ESBL, MBL, GRD, AmpC y KPC). Las tiras tienen aplicado un doble gradiente de antibióticos y una escala clara con marcadores que permite leer el valor de la CIM en una escala de dilución doble. La prueba se realiza en placas de Petri con un medio de agar estandarizado, y el tiempo y las condiciones de incubación dependen de la especie analizada. RMIC™ permite examinar todas las especies de microorganismos cultivados en placas; el método de realización de la prueba puede requerir ajustes. La prueba proporciona resultados preliminares, y podrían requerirse estudios adicionales para confirmarlos.

PRINCIPIO DEL METODO

Las tiras RMIC™ se basan en un método combinado de microdilución y difusión. Estas innovadoras tiras, con un gradiente constante definido de antibiótico en su superficie, permiten la lectura del valor de CIM en una escala de dilución doble. Esta escala está diseñada para facilitar la lectura tanto de los valores principales (gradiente doble) como de los intermedios. En la parte superior, la tira contiene, en el área del logotipo, un código de dos o tres letras con el nombre del antibiótico; debajo de esta área, se encuentra una escala clara con los valores expresados en µg/ml. Las tiras están dimensionadas para su uso en placas de Petri estándar (90 mm y 150 mm). Es posible utilizar dos o más tiras en una placa. La tira está diseñada para interactuar con la superficie de la placa contra los microorganismos inoculados e inhibir su crecimiento proporcionalmente a la resistencia del microorganismo. La susceptibilidad se puede determinar leyendo el valor de CIM en µg/ml en la escala, que se indica mediante la zona de inhibición elíptica. Su extremo estrecho intersecta la escala de la tira en un punto específico que indica el valor. A continuación, se proporciona información detallada sobre la lectura de los valores. Las tiras están diseñadas para garantizar la durabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. El usuario debe verificar los valores obtenidos con una cepa de control para garantizar su precisión. Los valores de CIM para cepas y antibióticos específicos se actualizan y se incluyen en las recomendaciones elaboradas por EUCAST y CLSI.

CONSERVACION

1. Conserve las tiras en su envase original a la temperatura indicada en el mismo (-20-8 °C o -20 °C). Para un almacenamiento prolongado, se recomiendan temperaturas inferiores a -20 °C (+/- 2 °C).
2. Utilice primero las tiras con la fecha de caducidad más corta.
3. Inmediatamente antes de la prueba, deje que las tiras alcancen la temperatura ambiente (20 °C; +/- 2 °C). No caliente los productos con fuentes de calor externas; deje que alcancen la temperatura ambiente sacando las tiras del congelador/refrigerador con antelación.
4. Protéjalas de la humedad. El envase sellado proporciona suficiente protección. Una vez abierto el envase con tiras sin usar, vuelva a colocarlo en una bolsa sellada (contenedor) junto con un desecante. Este producto debe utilizarse inmediatamente, a más tardar unos días después de su apertura. Debe conservarse refrigerado (6 °C; +/- 2 °C) o congelado (-20 °C; +/- 2 °C).
5. Las tiras deben almacenarse en un ambiente seco.
6. No utilice las tiras después de su fecha de caducidad.
7. Si se observan zonas de inhibición incorrectas durante la prueba con cepas de control, verifique el procedimiento de prueba. Los resultados incorrectos pueden deberse a un almacenamiento deficiente, la calidad del medio o errores de procedimiento.

MODO DE USO

Al retirar el producto de la caja, compruebe que los sobres individuales no estén dañados. No utilice una tira si el sobre está dañado; utilice una tira nueva de un sobre intacto. Verifique la fecha de caducidad y no utilice tiras vencidas.

Antes de usar el producto, déjelo alcanzar temperatura ambiente (consulte las instrucciones de almacenamiento). Retire las tiras con suficiente antelación (aproximadamente 30-60 minutos antes de la prueba). Compruebe si se ha acumulado humedad ambiental en el embalaje exterior; de ser así, retírela con una toalla de papel. El contacto con superficies húmedas o la exposición directa a líquidos sobre la tira puede provocar un funcionamiento incorrecto. No utilice una tira humedecida; utilice una nueva. Las tiras almacenadas a temperatura ambiente pueden usarse inmediatamente.

Abra el paquete rasgando la parte superior; el borde tiene una marca para facilitar su apertura. Retire la tira con pinzas, intentando sujetarla por la zona del logotipo. Evite tocar la zona de la escala; el gradiente de antibiótico se aplica en su reverso y tocarlo puede causar un mal funcionamiento del producto. Las pinzas deben estar secas y no remojadas en soluciones de esterilización, o deben secarse antes de su uso. Se pueden utilizar otros instrumentos de aplicación siguiendo sus instrucciones de uso. Se puede tocar la parte superior de la tira. Su diseño especial evita que el gradiente de antibiótico interactúe con la parte superior. Después de colocar la tira, alísela suavemente deslizando las pinzas por su parte superior; esto alineará su posición y garantizará una adhesión óptima a la superficie de la placa.

Coloque las tiras según el objetivo de la prueba: una, dos, o más. Al aplicar varias tiras, colóquelas de manera que ningún borde toque a otro, dejando al menos 2 cm de espacio en la parte inferior (disponiéndolas en forma de estrella). Si coloca varias tiras una al lado de la otra en paralelo, mantenga una separación mínima de 3 cm entre ellas. Colocar varias tiras con gradientes de diferentes antibióticos una al lado de la otra puede complicar la lectura de los valores de CIM debido al crecimiento microbiano desigual, la sinergia o el antagonismo. Considere las interacciones farmacológicas al analizar los resultados obtenidos.

NOTAS

Las tiras RMIC™ están diseñadas para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

Las tiras RMIC™ deben utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones y únicamente para su finalidad prevista.

Es fundamental el estricto cumplimiento de los procedimientos asepticos y las medidas de protección personal, de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente al trabajar con microorganismos patógenos.

Los residuos generados por las pruebas deben considerarse peligrosos debido a la presencia de microorganismos y antibióticos. Es fundamental seguir estrictamente la normativa para la eliminación de dichos residuos, considerando la posibilidad de que los microorganismos desarrollen resistencia a los antibióticos.

Los materiales de las pruebas no deben almacenarse más tiempo del necesario y se deben tomar medidas para evitar la propagación al medio ambiente de microorganismos resistentes, potencialmente resistentes o resistentes a los antibióticos.



PROCEDIMIENTO

Materiales provistos

5, 10, o 30 tiras de prueba RMIC™ envasadas individualmente en sobres con desecante

Instrucciones de uso

Materiales necesarios pero no provistos

Placas de Petri con un diámetro mínimo de 90mm y con el agar especial para el tipo de microorganismos en estudio; en la Tabla 1 se proporcionan instrucciones detalladas.

Medio de suspensión para preparar el inóculo; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Hisopos moderadamente flexibles, tubos, tijeras, pipetas, puntas, esparcidores y otros instrumentos de laboratorio pequeños, estériles, no tóxicos. Densitómetro.

Patrones McFarland 0,5 y 1.

Incubadora (35 °C; ± 2 °C), incubadora con atmósfera controlada de CO₂ o anaerostato, según la cepa en estudio; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Cepas de referencia.

Medio de cultivo

Ajuste el medio de cultivo al microorganismo específico en estudio; los detalles se encuentran en la Tabla 1. Asegúrese de que las placas de agar sean uniformes y permitan un crecimiento adecuado según el control de calidad. El agar debe adherirse bien a toda la superficie de las placas y a sus paredes laterales. Deje las placas a temperatura ambiente antes de la inoculación; no las caliente con una fuente de calor externa. Verifique la fecha de caducidad; para estudios comparativos, utilice el mismo lote de placas para todas las muestras analizadas. Siga las recomendaciones del fabricante.

Preparación del inóculo

Prepare el inóculo siguiendo las instrucciones de la Tabla 1. Utilice el método estándar de preparación del inóculo según las recomendaciones de EUCAST: seleccione varias colonias de un cultivo puro y fresco para preparar el inóculo con la densidad adecuada en comparación con el estándar. El inóculo debe prepararse como mínimo 15 minutos antes de la inoculación. Inmediatamente antes de la siembra, mézclelo para asegurar la uniformidad y la densidad adecuada. El inóculo tiende a sedimentarse.

Inoculación

Coloque un hisopo estéril, flexible y no tóxico en el inóculo preparado, girándolo varias veces en la suspensión. Retire el exceso de solución presionando la cabeza (hisopo de algodón) contra el borde interior del tubo. Ajuste el método según el tamaño de las placas que se sembrarán. Inocule la placa con movimientos suaves y fluidos para cubrir uniformemente toda la superficie. Después de cubrir la placa, gírela 60° y repita la siembra con el mismo hisopo; luego, repita el proceso girando la placa otros 60°. Después de extender la suspensión sobre la superficie de la placa tres veces, haga círculos suaves alrededor del borde de la placa. Deje que las placas absorban la solución; espere aproximadamente 15 minutos antes de colocar las tiras para asegurarse de que la superficie de la placa esté seca. El fabricante recomienda este método de siembra, pero también se pueden utilizar otros métodos automáticos o manuales (extensión con un esparcidor); sin embargo, asegúrese de que estos métodos proporcionen una cobertura uniforme en toda la superficie de la placa.

Advertencia:

El método turbidimétrico no garantiza la densidad adecuada de células vivas en el inóculo. Realice un recuento microbiano para verificar la cantidad correcta de células vivas en el inóculo. Una preparación adecuada del inóculo y la siembra permiten un crecimiento homogéneo y constante de los microorganismos en la placa, lo que permite una lectura precisa de los valores de CIM.

Aplicación

Asegúrese de que las placas inoculadas estén secas antes de la aplicación. Abra el sobre de la prueba según las instrucciones de la sección "MODO DE USO". Determine la mejor posición en la placa, teniendo en cuenta que las tiras requieren una superficie de aproximadamente 6 x 4 cm. Coloque una o un máximo de dos tiras con el mismo gradiente de antibiótico en placas de 90 mm. En placas de 150 mm, puede colocar de una a seis tiras; el fabricante recomienda un máximo de 4 a 6 tiras. Ajuste el número de tiras según el tamaño previsto de las zonas de inhibición del crecimiento. Si se prevé una zona de inhibición de crecimiento grande (organismo sensible al antibiótico), reduzca el número de tiras.

Las tiras se pueden aplicar con pinzas u otros sistemas que apliquen succión o vacío para su manipulación, siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la tira se adhiera bien a la superficie de la placa; si es necesario, alise suavemente la parte superior de la tira con pinzas. Si una tira cae incorrectamente sobre la superficie del agar, puede dejar una marca que se observará después de la incubación. Dicha placa debe desecharse o marcarse, y el usuario debe evaluar si puede leer correctamente el valor de CIM. Si una tira se coloca con el lado de la escala hacia la superficie del agar, no se obtendrán resultados correctos. Dicha tira debe levantarse y colocarse correctamente con el lado de la escala hacia arriba. Dicha placa debe desecharse o dejarse para que el usuario la evalúe después de la incubación. El resultado puede ser incorrecto o difícil de leer. El fabricante recomienda repetir la prueba con una nueva placa inoculada y una nueva tira.

Incubación

Incubar las placas boca abajo según los requisitos de los microorganismos analizados; las pautas se proporcionan en la Tabla 1. Seguir los métodos estándar aceptados de incubación.

Notas

Las placas de agar utilizadas para las pruebas pueden variar en parámetros como el contenido de iones de calcio y magnesio, y el pH, incluso si provienen del mismo proveedor. El contenido de iones y el pH pueden afectar la magnitud de los valores de CIM obtenidos. Utilice únicamente proveedores verificados y el mismo lote para las pruebas de control.

Lea los resultados después de un tiempo de incubación específico; las lecturas tomadas demasiado pronto o demasiado tarde pueden producir resultados inexactos. Supervise el tiempo de incubación. Una temperatura de incubación incorrecta, la inestabilidad de la temperatura o las interrupciones en el funcionamiento de la incubadora pueden generar resultados erróneos. Supervise el funcionamiento de los dispositivos de



incubación; antes de leer los resultados, asegúrese de que el dispositivo haya funcionado de forma estable durante la incubación.

Conserve el manual del usuario y consúltelo en caso de duda, o consulte con el fabricante.

Realice siempre controles con cepas de referencia, compare los resultados obtenidos con los estándares disponibles y repita la prueba si existen dudas. Los usuarios deben validar el método según sus necesidades específicas y de acuerdo con los estándares requeridos.

Lectura de los resultados

Las tiras RMIC™ están especialmente diseñadas para facilitar la interpretación de los resultados. Sin embargo, se requiere capacitación y experiencia para casos más complejos o controvertidos. Estas innovadoras tiras cuentan con una escala y marcadores a lo largo del borde para facilitar la lectura. El resultado indica el límite entre la zona de inhibición del crecimiento (superficie sin turbidez visible, colonias individuales - zona libre de crecimiento de microorganismos) y la superficie donde se observa crecimiento. La línea límite arbitraria corre por debajo de la tira, con sus extremos tocando la escala a ambos lados. Esta ubicación indica el valor de CIM para una cepa y un antibiótico determinados. Los valores mayores se colocan en la escala para fines de diagnóstico médico. La tira permite la lectura de valores intermedios para fines de investigación o diagnósticos más precisos. Se leen valores intermedios si el límite entre las zonas se encuentra en el campo oscuro entre los campos claros. Se leen valores mayores si el límite termina en un área clara. Para fines de diagnóstico médico, si el límite se encuentra en un área oscura, lea el valor del campo claro sobre el valor intermedio (aumente la lectura). Si no se observa una zona de inhibición del crecimiento elíptica o circular, o incluso una zona mínima, lea el resultado máximo indicado en la tira e indique que la cepa del microorganismo es resistente al antibiótico. Expresé su resistencia con el símbolo ">" e indique el valor máximo en la tira. Si se observa una zona de inhibición del crecimiento extensa alrededor de la tira, de modo que la rodee por completo, significa que la cepa es sensible al antibiótico e indica que la concentración inhibitoria mínima es menor que el valor mínimo de la tira. Existen varios tipos de tiras con diferentes escalas para distintos antibióticos; preste atención a los valores indicados en la tira. Si se observan colonias individuales resistentes al antibiótico dentro de la zona de inhibición del crecimiento, indique el valor en el que no hay colonias presentes (zona de inhibición total del crecimiento). Los microorganismos vivos pueden presentar diferentes tipos de crecimiento y características del "tapiz" obtenido; por lo tanto, pueden presentarse diversos tipos de deformaciones de la zona, en forma de embudos a lo largo de la escala, o una fina capa de crecimiento a lo largo de la misma; en la mayoría de los casos, estas deformaciones deben ignorarse. Si los valores leídos en ambos lados de la tira son diferentes, indique el valor más alto. En caso de duda, repita la prueba. Tenga en cuenta el propósito del estudio, ya que algunos antibióticos presentan propiedades bacteriostáticas que provocan la aparición de una zona de inhibición parcial del crecimiento. Según el propósito, indique correctamente el valor de CIM. Para los bacteriostáticos, indique el valor de CIM al 80 % de la zona de inhibición del crecimiento, donde se observa la primera reducción significativa-limitación del crecimiento a simple vista. Los valores de CIM bactericida de un antibiótico determinado deben determinarse indicando el límite de inhibición total del crecimiento.

Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados debe ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las tiras RMIC™ proporcionan datos cuantitativos, por lo que los valores deben indicarse con precisión, junto con información sobre si una cepa en particular es resistente o sensible. La información sobre resistencia está disponible en tablas de acceso público elaboradas por CLSI® y EUCAST. Para fines de control, deben utilizarse las cepas de referencia recomendadas por estas organizaciones. Las tablas especifican los valores a partir de los cuales una cepa debe considerarse resistente o sensible. Las pruebas se han diseñado para indicar con precisión los valores de CIM de las cepas de referencia. Para fines de diagnóstico médico, no deben indicarse los valores intermedios, sino redondearse al valor superior más cercano.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Todos los residuos generados por las pruebas con RMIC™ deben considerarse material potencialmente infeccioso. Cabe destacar que las tiras contienen antibióticos y su uso con microorganismos puede provocar el desarrollo de mecanismos de resistencia a estos. Por lo tanto, todos los residuos deben eliminarse inmediatamente después de las pruebas para evitar su contaminación ambiental. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con las normas de eliminación de residuos, implementar los procedimientos adecuados y garantizar su cumplimiento.

REFERENCIAS

1. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. Requirements for antibiotic susceptibility test: 1.: WHO Technical reports series No 610. Geneva: WHO, 1977.
2. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, January, 2024.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; latest edition. CLSI supplement M100.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; latest edition. CLSI standard M07.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria; Approved Standard, latest edition. CLSI document M11.

Tabla 1

Medios de cultivo, temperaturas, condiciones y tiempos de incubación recomendados por EUCAST

Microorganismos de prueba	Medio	Temperatura de incubación	Condiciones de incubación	Tiempo de incubación
Enterobacterales	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Pseudomonas spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Stenotrophomonas maltophilia	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Burkholderia pseudomallei	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Acinetobacter spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Staphylococcus spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16 – 20 h
Enterococcus spp.	MH Agar (MH)	35 o C ± 1	Aeróbica	16-20 h; 24 h para glicopéptido

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



Aeromonas spp.	MH Agar (MH)	35 o C $\pm$ 1	Aeróbica	16 – 20 h
Achromobacter xylosoxidans	MH Agar (MH)	35 o C $\pm$ 1	Aeróbica	16 – 20 h
Bacillus spp.	MH Agar (MH)	35 o C $\pm$ 1	Aeróbica	16 – 18 h
Vibrio spp.	MH Agar (MH)	35 o C $\pm$ 1	Aeróbica	16 – 20 h
Streptococcus spp. grupo A,B,C,G	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Streptococcus pneumoniae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Streptococcus spp. grupo Viridans	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Haemophilus influenzae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Moraxella catarrhalis	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Listeria monocytogenes	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Pasteurella multocida	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5 % CO ₂	16 – 20 h
Campylobacter jejuni y coli	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	41 o C $\pm$ 1	condiciones microaerofílicas	24 h, hasta 40-48 h
Corynebacterium spp.	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5% CO ₂	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Aerococcus sanguinicola y urinae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5% CO ₂	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Kingella kingae	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5% CO ₂	16 – 20 h, hasta 40-44 h
Brucella melitensis	MH+5% KK+20 mg/l NAD (MH-F)	35 o C $\pm$ 1	5% CO ₂	46 – 50 h
Anaerobios	Fastidious Anaerobic Agar (FAA)	35-37 o C $\pm$ 1	Condiciones anaeróbicas	16 – 20 h



Explanation of symbols

	Precaución, consultar documentos acompañantes		Consultar instrucciones de uso		Fabricante
IVD	Para uso diagnóstico in vitro	LOT	Número de lote	REF	Número de catálogo
	Límites de temperatura		Utilizar antes de		

TD-7-RMIC

Version 1.2/2024-12-16

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



TMIC™

Determinación de Concentración Inhibitoria Mínima Antimicobacteriales

Prueba para la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima para Antimicobacteriales
Producto para uso profesional exclusivo en pruebas diagnósticas in vitro

PRESENTACION

1 x 5 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso
1 x 10 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso
1 x 30 tiras envasadas individualmente en bolsas selladas con un desecante, en una caja de cartón con instrucciones de uso

INTRODUCCION

Las pruebas con tiras TMIC™ proporcionan valores de CIM en µg/ml, que indican la cantidad de droga TB que inhibe el crecimiento de microorganismos en condiciones específicas y estandarizadas de cultivo in vitro. La tira está diseñada para lograr la máxima repetibilidad de los resultados, aunque pueden presentarse ligeras variaciones en el valor de CIM obtenido, con más o menos una dilución 1/2 (incluso con procedimientos de prueba perfectamente replicados). Cabe destacar que el valor indicado es mínimo; por lo tanto, para inhibir eficazmente el crecimiento, se debe utilizar una cantidad al menos un valor superior. Se puede encontrar información útil en las recomendaciones elaboradas por el CLSI y el EUCAST.

USO PREVISTO

La prueba TMIC™ está diseñada para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima para Antimicobacteriales (CIM), que es la mínima concentración de droga TB que inhibe el crecimiento de microorganismos. Las tiras tienen aplicado un gradiente de antimicrobóticos y una escala clara con marcadores que permite leer el valor de la CIM en una escala de dilución doble. La prueba se realiza en placas de Petri con un medio de agar estandarizado, y el tiempo y las condiciones de incubación dependen de la especie analizada. TMIC™ permite examinar todas las especies de microorganismos cultivados en placas; el método de realización de la prueba puede requerir ajustes. La prueba proporciona resultados preliminares, y podrían requerirse estudios adicionales para confirmarlos.

PRINCIPIO DEL METODO

Las tiras TMIC™ se basan en un método combinado de microdilución y difusión. Estas innovadoras tiras, con un gradiente constante definido de antibiótico en su superficie, permiten la lectura del valor de CIM en una escala de dilución doble. Esta escala está diseñada para facilitar la lectura tanto de los valores principales (gradiente doble) como de los intermedios. En la parte superior, la tira contiene, en el área del logotipo, un código de dos o tres letras con el nombre del antibiótico; debajo de esta área, se encuentra una escala clara con los valores expresados en µg/ml. Las tiras están dimensionadas para su uso en placas de Petri estándar (90 mm y 150 mm). Es posible utilizar dos o más tiras en una placa. La tira está diseñada para interactuar con la superficie de la placa contra los microorganismos inoculados e inhibir su crecimiento proporcionalmente a la resistencia del microorganismo. La susceptibilidad se puede determinar leyendo el valor de CIM en µg/ml en la escala, que se indica mediante la zona de inhibición elíptica. Su extremo estrecho intersecta la escala de la tira en un punto específico que indica el valor. A continuación, se proporciona información detallada sobre la lectura de los valores. Las tiras están diseñadas para garantizar la durabilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. El usuario debe verificar los valores obtenidos con una cepa de control para garantizar su precisión. Los valores de CIM para cepas y antibióticos específicos se actualizan y se incluyen en las recomendaciones elaboradas por EUCAST y CLSI.

CONSERVACION

1. Conserve las tiras en su envase original a la temperatura indicada en el mismo (-20-8 °C o -20 °C). Para un almacenamiento prolongado, se recomiendan temperaturas inferiores a -20 °C (+/- 2 °C).
2. Utilice primero las tiras con la fecha de caducidad más corta.
3. Inmediatamente antes de la prueba, deje que las tiras alcancen la temperatura ambiente (20 °C; +/- 2 °C). No caliente los productos con fuentes de calor externas; deje que alcancen la temperatura ambiente sacando las tiras del congelador/refrigerador con antelación.
4. Protéjalas de la humedad. El envase sellado proporciona suficiente protección. Una vez abierto el envase con tiras sin usar, vuelva a colocarlo en una bolsa sellada (contenedor) junto con un desecante. Este producto debe utilizarse inmediatamente, a más tardar unos días después de su apertura. Debe conservarse refrigerado (6 °C; +/- 2 °C) o congelado (-20 °C; +/- 2 °C).
5. Las tiras deben almacenarse en un ambiente seco.
6. No utilice las tiras después de su fecha de caducidad.
7. Si se observan zonas de inhibición incorrectas durante la prueba con cepas de control, verifique el procedimiento de prueba. Los resultados incorrectos pueden deberse a un almacenamiento deficiente, la calidad del medio o errores de procedimiento.

MODO DE USO

Al retirar el producto de la caja, compruebe que los sobres individuales no estén dañados. No utilice una tira si el sobre está dañado; utilice una tira nueva de un sobre intacto. Verifique la fecha de caducidad y no utilice tiras vencidas.

Antes de usar el producto, déjelo alcanzar temperatura ambiente (consulte las instrucciones de almacenamiento). Retire las tiras con suficiente antelación (aproximadamente 30-60 minutos antes de la prueba). Compruebe si se ha acumulado humedad ambiental en el embalaje exterior; de ser así, retírela con una toalla de papel. El contacto con superficies húmedas o la exposición directa a líquidos sobre la tira puede provocar un funcionamiento incorrecto. No utilice una tira humedecida; utilice una nueva. Las tiras almacenadas a temperatura ambiente pueden usarse inmediatamente.

Abra el paquete rasgando la parte superior; el borde tiene una marca para facilitar su apertura. Retire la tira con pinzas, intentando sujetarla por la zona del logotipo. Evite tocar la zona de la escala; el gradiente de antibiótico se aplica en su reverso y tocarlo puede causar un mal funcionamiento del producto. Las pinzas deben estar secas y no remojadas en soluciones de esterilización, o deben secarse antes de su uso. Se pueden utilizar otros instrumentos de aplicación siguiendo sus instrucciones de uso. Se puede tocar la parte superior de la tira. Su diseño especial evita que el gradiente de antibiótico interactúe con la parte superior. Después de colocar la tira, alísela suavemente deslizando las pinzas por su parte superior; esto alineará su posición y garantizará una adhesión óptima a la superficie de la placa.



Coloque las tiras según el objetivo de la prueba: una, dos, o más. Al aplicar varias tiras, colóquelas de manera que ningún borde toque a otro, dejando al menos 2 cm de espacio en la parte inferior (disponiéndolas en forma de estrella). Si coloca varias tiras una al lado de la otra en paralelo, mantenga una separación mínima de 3 cm entre ellas. Colocar varias tiras con gradientes de diferentes antibióticos una al lado de la otra puede complicar la lectura de los valores de CIM debido al crecimiento microbiano desigual, la sinergia o el antagonismo. Considere las interacciones farmacológicas al analizar los resultados obtenidos.

NOTAS

Las tiras TMIC™ están diseñadas para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

Las tiras TMIC™ deben utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones y únicamente para su finalidad prevista.

Es fundamental el estricto cumplimiento de los procedimientos asepticos y las medidas de protección personal, de acuerdo con la normativa aplicable, especialmente al trabajar con microorganismos patógenos.

Los residuos generados por las pruebas deben considerarse peligrosos debido a la presencia de microorganismos y antibióticos. Es fundamental seguir estrictamente la normativa para la eliminación de dichos residuos, considerando la posibilidad de que los microorganismos desarrollen resistencia a los antibióticos.

Los materiales de las pruebas no deben almacenarse más tiempo del necesario y se deben tomar medidas para evitar la propagación al medio ambiente de microorganismos resistentes, potencialmente resistentes o resistentes a los antibióticos.

PROCEDIMIENTO

Materiales provistos

5, 10, o 30 tiras de prueba TMIC™ envasadas individualmente en sobres con desecante

Instrucciones de uso

Materiales necesarios pero no provistos

Placas de Petri con un diámetro mínimo de 90mm y con el agar especial para el tipo de microorganismos en estudio; en la Tabla 1 se proporcionan instrucciones detalladas.

Medio de suspensión para preparar el inóculo; los detalles se proporcionan en la Tabla 1.

Hisopos moderadamente flexibles, tubos, tijeras, pipetas, puntas, esparcidores y otros instrumentos de laboratorio pequeños, estériles, no tóxicos. Densitómetro.

Patrones McFarland 0,5 y 1.

Incubadora (36°C; $\pm 1^\circ\text{C}$).

Cepas de referencia.

Medio de cultivo

Ajuste el medio de cultivo al microorganismo específico en estudio; los detalles se encuentran en la Tabla 1. Asegúrese de que las placas de agar sean uniformes y permitan un crecimiento adecuado según el control de calidad. El agar debe adherirse bien a toda la superficie de las placas y a sus paredes laterales. Deje las placas a temperatura ambiente antes de la inoculación; no las caliente con una fuente de calor externa. Verifique la fecha de caducidad; para estudios comparativos, utilice el mismo lote de placas para todas las muestras analizadas. Siga las recomendaciones del fabricante.

Preparación del inóculo

Prepare el inóculo siguiendo las instrucciones de la Tabla 1. Utilice el método estándar de preparación del inóculo según las recomendaciones de EUCAST: seleccione varias colonias de un cultivo puro y fresco para preparar el inóculo con la densidad adecuada en comparación con el estándar. El inóculo debe prepararse como mínimo 15 minutos antes de la inoculación. Inmediatamente antes de la siembra, mézclelo para asegurar la uniformidad y la densidad adecuada. El inóculo tiende a sedimentarse.

Inoculación

Coloque un hisopo estéril, flexible y no tóxico en el inóculo preparado, girándolo varias veces en la suspensión. Retire el exceso de solución presionando la cabeza (hisopo de algodón) contra el borde interior del tubo. Ajuste el método según el tamaño de las placas que se sembrarán. Inocule la placa con movimientos suaves y fluidos para cubrir uniformemente toda la superficie. Después de cubrir la placa, gírela 60° y repita la siembra con el mismo hisopo; luego, repita el proceso girando la placa otros 60°. Después de extender la suspensión sobre la superficie de la placa tres veces, haga círculos suaves alrededor del borde de la placa. Deje que las placas absorban la solución; espere aproximadamente 15 minutos antes de colocar las tiras para asegurarse de que la superficie de la placa esté seca. El fabricante recomienda este método de siembra, pero también se pueden utilizar otros métodos automáticos o manuales (extensión con un esparcidor); sin embargo, asegúrese de que estos métodos proporcionen una cobertura uniforme en toda la superficie de la placa.

Advertencia:

El método turbidimétrico no garantiza la densidad adecuada de células vivas en el inóculo. Realice un recuento microbiano para verificar la cantidad correcta de células vivas en el inóculo. Una preparación adecuada del inóculo y la siembra permiten un crecimiento homogéneo y constante de los microorganismos en la placa, lo que permite una lectura precisa de los valores de CIM.

Aplicación

Asegúrese de que las placas inoculadas estén secas antes de la aplicación. Abra el sobre de la prueba según las instrucciones de la sección "MODO DE USO". Determine la mejor posición en la placa, teniendo en cuenta que las tiras requieren una superficie de aproximadamente 6 x 4 cm. Coloque una o un máximo de dos tiras con el mismo gradiente de antibiótico en placas de 90 mm. En placas de 150 mm, puede colocar de una a seis tiras; el fabricante recomienda un máximo de 4 a 6 tiras. Ajuste el número de tiras según el tamaño previsto de las zonas de inhibición del crecimiento. Si se prevé una zona de inhibición de crecimiento grande (organismo sensible al antibiótico), reduzca el número de tiras.



Las tiras se pueden aplicar con pinzas u otros sistemas que apliquen succión o vacío para su manipulación, siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que la tira se adhiera bien a la superficie de la placa; si es necesario, alise suavemente la parte superior de la tira con pinzas. Si una tira cae incorrectamente sobre la superficie del agar, puede dejar una marca que se observará después de la incubación. Dicha placa debe desecharse o marcarse, y el usuario debe evaluar si puede leer correctamente el valor de CIM. Si una tira se coloca con el lado de la escala hacia la superficie del agar, no se obtendrán resultados correctos. Dicha tira debe levantarse y colocarse correctamente con el lado de la escala hacia arriba. Dicha placa debe desecharse o dejarse para que el usuario la evalúe después de la incubación. El resultado puede ser incorrecto o difícil de leer. El fabricante recomienda repetir la prueba con una nueva placa inoculada y una nueva tira.

Incubación

Incubar las placas boca abajo según los requisitos de los microorganismos analizados; las pautas se proporcionan en la Tabla 1. Seguir los métodos estándar aceptados de incubación.

Notas

Las placas de agar utilizadas para las pruebas pueden variar en parámetros como el contenido de iones de calcio y magnesio, y el pH, incluso si provienen del mismo proveedor. El contenido de iones y el pH pueden afectar la magnitud de los valores de CIM obtenidos. Utilice únicamente proveedores verificados y el mismo lote para las pruebas de control.

Lea los resultados después de un tiempo de incubación específico; las lecturas tomadas demasiado pronto o demasiado tarde pueden producir resultados inexactos. Supervise el tiempo de incubación. Una temperatura de incubación incorrecta, la inestabilidad de la temperatura o las interrupciones en el funcionamiento de la incubadora pueden generar resultados erróneos. Supervise el funcionamiento de los dispositivos de incubación; antes de leer los resultados, asegúrese de que el dispositivo haya funcionado de forma estable durante la incubación.

Conserve el manual del usuario y consúltelo en caso de duda, o consulte con el fabricante.

Realice siempre controles con cepas de referencia, compare los resultados obtenidos con los estándares disponibles y repita la prueba si existen dudas. Los usuarios deben validar el método según sus necesidades específicas y de acuerdo con los estándares requeridos.

Lectura de los resultados

Las tiras TMIC™ están especialmente diseñadas para facilitar la interpretación de los resultados. Sin embargo, se requiere capacitación y experiencia para casos más complejos o controvertidos. Estas innovadoras tiras cuentan con una escala y marcadores a lo largo del borde para facilitar la lectura. El resultado indica el límite entre la zona de inhibición del crecimiento (superficie sin turbidez visible, colonias individuales - zona libre de crecimiento de microorganismos) y la superficie donde se observa crecimiento. La línea límite arbitraria corre por debajo de la tira, con sus extremos tocando la escala a ambos lados. Esta ubicación indica el valor de CIM para una cepa y un antibiótico determinados. Los valores mayores se colocan en la escala para fines de diagnóstico médico. La tira permite la lectura de valores intermedios para fines de investigación o diagnósticos más precisos. Se leen valores intermedios si el límite entre las zonas se encuentra en el campo oscuro entre los campos claros. Se leen valores mayores si el límite termina en un área clara. Para fines de diagnóstico médico, si el límite se encuentra en un área oscura, lea el valor del campo claro sobre el valor intermedio (aumente la lectura). Si no se observa una zona de inhibición del crecimiento elíptica o circular, o incluso una zona mínima, lea el resultado máximo indicado en la tira e indique que la cepa del microorganismo es resistente al antibiótico. Exprese su resistencia con el símbolo ">" e indique el valor máximo en la tira. Si se observa una zona de inhibición del crecimiento extensa alrededor de la tira, de modo que la rodee por completo, significa que la cepa es sensible al antibiótico e indica que la concentración inhibitoria mínima es menor que el valor mínimo de la tira. Existen varios tipos de tiras con diferentes escalas para distintos antibióticos; preste atención a los valores indicados en la tira. Si se observan colonias individuales resistentes al antibiótico dentro de la zona de inhibición del crecimiento, indique el valor en el que no hay colonias presentes (zona de inhibición total del crecimiento). Los microorganismos vivos pueden presentar diferentes tipos de crecimiento y características del "tapiz" obtenido; por lo tanto, pueden presentar diversos tipos de deformaciones de la zona, en forma de embudos a lo largo de la escala, o una fina capa de crecimiento a lo largo de la misma; en la mayoría de los casos, estas deformaciones deben ignorarse. Si los valores leídos en ambos lados de la tira son diferentes, indique el valor más alto. En caso de duda, repita la prueba. Tenga en cuenta el propósito del estudio, ya que algunos antibióticos presentan propiedades bacteriostáticas que provocan la aparición de una zona de inhibición parcial del crecimiento. Según el propósito, indique correctamente el valor de CIM. Para los bacteriostáticos, indique el valor de CIM al 80 % de la zona de inhibición del crecimiento, donde se observa la primera reducción significativa-limitación del crecimiento a simple vista. Los valores de CIM bactericida de un antibiótico determinado deben determinarse indicando el límite de inhibición total del crecimiento.

Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados debe ser realizada por personal capacitado y con experiencia. Las tiras TMIC™ proporcionan datos cuantitativos, por lo que los valores deben indicarse con precisión, junto con información sobre si una cepa en particular es resistente o sensible. La información sobre resistencia está disponible en tablas de acceso público elaboradas por CLSI® y EUCAST. Para fines de control, deben utilizarse las cepas de referencia recomendadas por estas organizaciones. Las tablas especifican los valores a partir de los cuales una cepa debe considerarse resistente o sensible. Las pruebas se han diseñado para indicar con precisión los valores de CIM de las cepas de referencia. Para fines de diagnóstico médico, no deben indicarse los valores intermedios, sino redondearse al valor superior más cercano.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Todos los residuos generados por las pruebas con TMIC™ deben considerarse material potencialmente infeccioso. Cabe destacar que las tiras contienen antibióticos y su uso con microorganismos puede provocar el desarrollo de mecanismos de resistencia a estos. Por lo tanto, todos los residuos deben eliminarse inmediatamente después de las pruebas para evitar su contaminación ambiental. Es responsabilidad de los laboratorios cumplir con las normas de eliminación de residuos, implementar los procedimientos adecuados y garantizar su cumplimiento.

REFERENCIAS

1. World Health Organization Expert Committee on Biological Standardization. Requirements for antibiotic susceptibility test: 1.: WHO Technical reports series No 610. Geneva: WHO, 1977.
2. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 12.0, January, 2022.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; latest edition. CLSI supplement M100.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; latest edition. CLSI standard M07.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria; Approved Standard, latest edition. CLSI

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



document M11.

Tabla 1

Medios de cultivo, temperaturas, condiciones y tiempos de incubación recomendados por EUCAST

Microorganismos de prueba	Medio	Temperatura de incubación	Condiciones de incubación	Tiempo de incubación
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Middlebrook 7H9 con 10% OADC en placas de poliestireno	36 °C ± 1	Aeróbico	7-21 días



Explanation of symbols

	Precaución, consultar documentos acompañantes		Consultar instrucciones de uso		Fabricante
IVD	Para uso diagnóstico in vitro	LOT	Número de lote	REF	Número de catálogo
	Límites de temperatura		Utilizar antes de		

TD-7-TMIC

Version 1.2/2024-12-16

MEDA
Federico
o
Ignacio

Firmado digitalmente por MEDA Federico Ignacio
Fecha: 2025.11.12 16:38:30 -03'00'

Firmado digitalmente por ROSSI Alejandro Martin
Fecha: 2025.11.10 09:05:33 -03'00'

Fabricado por:
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
www.biomaxima.com
info@biomaxima.com

Importado por:
Laboratorios Britania S.A.
Los Patos 2175, C.A.B.A.
www.britanialab.com



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y Manual de instrucciones - 72554

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 220 pagina/s.