

PROYECTO RÓTULO

HIDROGEL ESTÉRIL TRANSPARENTE

Cutimed Gel 72610-XX

Marca: BSN Medical

Composición:

Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.

Componentes del Gel: Carbomer 980, Agua purificada, glicerol, sodio EDTA, hidróxido de sodio.

Contenido: (según modelo)

72610-00 Caja conteniendo 10 tubos, de 8g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

72610-01 Caja conteniendo 10 tubos, de 15g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

72610-02 Caja conteniendo 10 tubos, de 25g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

INDICACIONES:

Cutimed® Gel produce un entorno óptimo de humedad fisiológico que permite la limpieza autolítica de heridas necróticas o sucias (p. ej., úlcera venosa, úlcera de pie diabético, úlcera por presión o quemaduras de primer y segundo grado).

Advertencia: Consulte las instrucciones de uso porque contienen información importante como las advertencias y precauciones.

Almacenamiento:

Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 30°C y humedad relativa no mayor a 85%, Proteger de las heladas y calores excesivos.

Estéril mediante radiación gamma

Fabricado por: BSN medical GmbH., Schützenstraße 1 – 3, 22761 Hamburgo, Alemania.

Importado por: Algodonera Aconcagua S.A., Av. Paseo Colón Nro. 746, Piso 1, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.

Hecho en Canadá


Director Técnico: Daniel Santos

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Autorizado por la ANMAT: PM 2854-336

Lote:

Vencimiento:

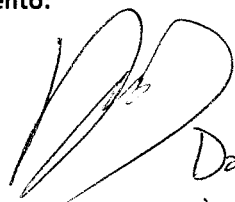

Daniel Santos
Director Técnico



Adriana Santos
ApoDERada

PROYECTO INSTRUCCIONES DE USO

HIDROGEL ESTÉRIL TRANSPARENTE Cutimed Gel

Marca: BSN Medical

Composición:

Polímero de poliacrilato, agua y glicerina.

Componentes del Gel: Carbomer 980, Agua purificada, glicerol, sodio EDTA, hidróxido de sodio.

Contenido: (según modelo)

72610-00 Caja conteniendo 10 tubos, de 8g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

72610-01 Caja conteniendo 10 tubos, de 15g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

72610-02 Caja conteniendo 10 tubos, de 25g cada uno y 10 puntas aplicadoras.

INDICACIONES:

Cutimed® Gel produce un entorno óptimo de humedad fisiológico que permite la limpieza autolítica de heridas necróticas o sucias (p. ej., úlcera venosa, úlcera de pie diabético, úlcera por presión o quemaduras de primer y segundo grado).

Advertencia: Consulte las instrucciones de uso porque contienen información importante como las advertencias y precauciones.

Almacenamiento:

Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 30°C y humedad relativa no mayor a 85%, Proteger de las heladas y calores excesivos.

Estéril mediante radiación gamma

El producto se suministra estéril. En caso de rotura del envase que comprometa la esterilidad, no debe utilizarse.

FINALIDAD DE USO

Hidrogel estéril transparente destinado a favorecer el desbridamiento autolítico y mantener un ambiente húmedo en el lecho de la herida. Se utiliza para la preparación del lecho de la herida, favoreciendo la cicatrización por segunda intención.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han identificado efectos secundarios cuando el producto se utiliza según las instrucciones de uso


INSTRUCCIONES DE USO

Cutimed® Gel puede


A. Aplicarse directamente desde el tubo.

B. Aplicarse mediante espátula.

C. Aplicarse en una herida profunda mediante una punta aplicadora estéril.

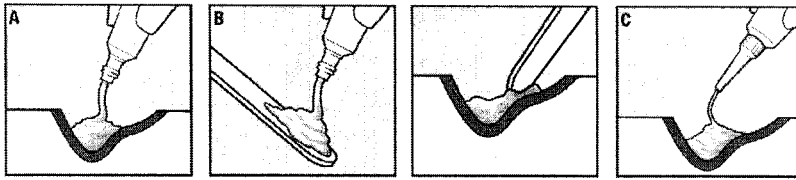

1. Abrir el capuchón
2. Quitar el sello estéril
3. Sacar la punta aplicadora de su envase estéril
4. Enroscar en el cuello del tubo

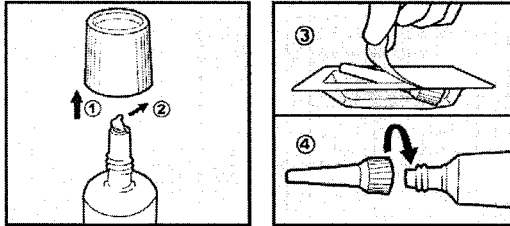

Lavar primero la herida con solución RINGER, solución de cloruro de sodio fisiológica, etc. Aplicar a continuación Cutimed® Gel cubriendo por completo las áreas necróticas y cruentas.

Para mantener el entorno de herida fisiológico y húmedo, aplique con regularidad Cutimed® Gel a la herida, hasta que haya cicatrizado por completo. Si es necesario, proteja la herida con un apósito adecuado.

Cambio del apósito:

Cutimed® Gel debe cambiarse con la frecuencia que indique el médico; el apósito secundario no debe estar saturado por completo. Cutimed® Gel puede permanecer en la herida durante el período comprendido entre cambios de apósito.

Retirada:

Sí utiliza un apósito secundario, levántelo por la esquina, retírelo suavemente y deséchelo.

Duración de la aplicación / Periodo de uso

Se recomienda efectuar el cambio de la aplicación de Cutimed Gel como muy tarde a los 3 días.

En el caso de las heridas limpias en la granulación o la fase epitelial, el momento óptimo para cambiar el vendaje debe ser juzgado de acuerdo con la cantidad de exudado.

El vendaje se debe cambiar cuando el apósito secundario este saturado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Uso Individual, no reutilizar o re esterilizar ya que existe el riesgo de transmisión de fluidos corporales o tejido contaminado entre los pacientes.

Indicado solo para aplicación externa.

Para limpiar heridas necróticas o escaradas, como complemento de una terapia antimicrobiana bajo supervisión médica.

CONTRAINDICACIONES


Intolerancia conocida a alguno de los componentes del producto.

ELIMINACIÓN.

No debe ser arrojado a fuentes de agua.

Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos.

La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales.

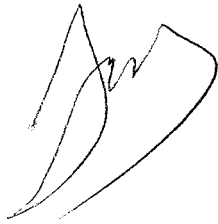

Daniel Santos
Director Técnico



Adriana Santos
Apostada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y manual de instrucciones 77516

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.