

LASER DE DIODO PARA ODONTOLOGÍA

INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE PRODUCTOS MEDICOS

según APÉNDICE IV - Disposición ANMAT 64/25

RÓTULOS

LASER DE DIODO PARA ODONTOLOGÍA

FABRICANTE: WUHAN PIOON TECHNOLOGY CO., LTD., 12th Floor, Building 1, Innovative Unit, R&D Center Project, Marine World Shipbuilding Park, No. 16; Fozuling 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, 430205 Wuhan, Hubei, República Popular de China

IMPORTADOR: DISDEN ODONTOLOGIA de Horacio y Norberto Calamante S.H., Santa Fe 3153, Rosario, Santa Fe, República Argentina.

MODELOS: S1, S1-C10; S1-G10; S1-K12; S1 Pro; S1 Pro+; S1 Pro Plus; H1; H1-G10; S3; S3 Plus; UTU-G20B; UTU-G20W; UTU3-F7B; UTU3-F7W; UTU3-G7B; UTU3-G7W; UTU4-F15; UTU4-G12; Helipen Omni; Helipen Surg

ALMACENAMIENTO: en ambientes bien ventilados, temperatura 0°C a 30°C, humedad < 80%. Evite luz solar directa.

DT. FARM. ANA PAULA BOVERI - MP.4176

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 640-205

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto;

Temperatura de funcionamiento: 10~30°C

Humedad ambiental de uso: 30 %~75 %

Presión atmosférica de uso: 860 hPa~1060 hPa

HORACIO y NORBERTO CALAMANTE S.H.
SANTA FE 3153
C.U.I.T. N° 30-72069584-7


ANA PAULA BOVERI¹
Farmacéutica
Mat. 4176

- Evitar la luz solar directa; la lluvia está estrictamente prohibida.
- Mantener bien ventilado.
- Evitar almacenar en entornos con fuertes campos electromagnéticos.
- Evitar vibraciones intensas.
- Evitar almacenar en ambientes con gases explosivos o corrosivos, polvo excesivo o sal.

La batería puede almacenarse a corto plazo en un rango de temperatura de -10°C a 45°C.

Para almacenamiento a largo plazo, la batería debe cargarse cada tres meses. Por favor, cargue la batería con la corriente de carga estándar durante aproximadamente 0,5 a 1 hora para mantener un nivel de carga del 40-60%.

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos;

NA

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse;

CONTRAINDICACIONES

Todos los procedimientos clínicos realizados con el láser de diodo médico deben someterse al mismo criterio clínico y cuidado que las técnicas tradicionales. El riesgo para el paciente debe considerarse y comprenderse completamente antes del tratamiento clínico.

El médico debe conocer a fondo el historial médico del paciente antes del tratamiento y tener precaución con las afecciones médicas generales que podrían contraindicar un procedimiento local. Dichas afecciones pueden incluir, entre otras, alergia a anestésicos locales o tópicos, cardiopatías, enfermedades pulmonares, trastornos hemorrágicos, apnea del sueño, deficiencia del sistema inmunitario o cualquier afección o medicamento que pueda contraindicar el uso de ciertas fuentes de luz/láser asociadas con este dispositivo.

Se recomienda obtener la autorización médica del paciente cuando existan dudas sobre el tratamiento.

El tratamiento con láser de diodo médico puede estar contraindicado para pacientes con fotodermatosis, personas fotosensibles y pacientes que estén tomando medicamentos fotosensibles. No se conocen contraindicaciones para la energía láser en casos como el embarazo o la presencia de marcapasos.

HELIPEN

Se prohíbe su uso en casos de lesiones precancerosas, enfermedades hemorrágicas agudas, enfermedades tiroideas, hemorragias activas, insuficiencia cardiopulmonar y renal, trastornos de la cicatrización de heridas, trastornos de la coagulación, mujeres embarazadas y mujeres en período de lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Por razones médico-legales, el profesional debe conocer el historial médico del paciente y debe sopesar los beneficios frente a los riesgos al realizar procedimientos con láser.

- No dirija la luz láser directamente a los ojos, con o sin protección ocular.
- No aplique el láser directamente sobre la glándula tiroides.

PRECAUCIÓN:

Las especificaciones de las gafas de protección incluidas con el sistema láser médico están indicadas en el lateral de las gafas. Compruebe siempre las especificaciones de las gafas para asegurarse de que ofrecen la protección necesaria para la longitud de onda específica del láser.

El láser de diodo médico está diseñado para eliminar tejidos blandos. Por lo tanto, tenga siempre en cuenta las estructuras adyacentes y subestructuras durante su uso.

Tenga mucho cuidado de no penetrar ni ablacionar accidentalmente los tejidos subyacentes o adyacentes. No dirija la energía hacia tejidos duros como dientes o huesos.

No dirija la energía hacia amalgamas, oro u otras superficies metálicas.

No dirija la energía hacia cementos u otros materiales de obturación.

Tenga extrema precaución al usar este dispositivo en áreas como bolsas periodontales, cavidades o conductos como los alvéolos de los terceros molares, donde estructuras vitales (p. ej., nervios, vasos sanguíneos) podrían dañarse.

No utilice el láser si la visibilidad es limitada en estas áreas.

PRECAUCIÓN:

El humo láser puede contener partículas de tejido viable.

Se debe tener especial cuidado para prevenir infecciones por el humo láser generado por la vaporización de tejido infectado por virus o bacterias. Se debe utilizar un sistema de succión de alto volumen y equipo de protección personal, incluyendo, entre otros: guantes, mascarilla, protectores faciales, gafas de seguridad y protección ocular.

Durante los procedimientos láser, se debe utilizar en todo momento equipo de protección.

Utilice este dispositivo únicamente en entornos clínicos que observen las técnicas asépticas estándar adecuadas en todos los procedimientos orales.

Nota

En casos de tejidos blandos, es posible que no se requiera anestesia, pero los pacientes deben ser vigilado de cerca para detectar signos de dolor o malestar en todo momento. Si tales signos se observan, ajuste la configuración, aplique anestesia o suspenda el tratamiento si es necesario.

Nota

Utilice su criterio clínico para determinar todos los aspectos del tratamiento, incluyendo, entre otros, el protocolo de tratamiento láser, la técnica, los ajustes de potencia, la duración y el intervalo de pulso, el modo de operación, así como los accesorios utilizados (p. ej., tipo de punta) y otros requisitos del procedimiento.

Observe y supervise atentamente los efectos clínicos y utilice su criterio para determinar los parámetros clínicos y el enfoque del tratamiento. Realice los ajustes necesarios de potencia, duración e intervalo de pulso para compensar las variaciones en la composición, densidad y grosor

de los tejidos. Siempre inicie el tratamiento con la potencia más baja para la indicación específica y aumentela según sea necesario. PIOON no se responsabiliza de los parámetros, las técnicas, los métodos ni los resultados.

HELIPEN- ADVERTENCIAS

- No se recomienda utilizar este producto para fines distintos a los previstos.
- No modifique ni intente reparar este equipo sin la autorización del fabricante, ya que podría dañarlo o provocar un mal funcionamiento.
- El uso de este equipo por personal no capacitado puede generar riesgos, incluyendo lesiones al paciente o al operador, o daños al equipo.
- Preste atención a las estructuras adyacentes en la cavidad bucal. No dirija el láser hacia superficies duras (dientes, hueso, empastes, superficies metálicas).
- Seguridad láser: Este dispositivo es un sistema láser de Clase 4. Evite la exposición accidental a los haces láser, ya sean directos o reflejados.
- No mire directamente al láser ni a su haz para evitar lesiones oculares irreversibles.
- Existe riesgo de incendio o explosión en presencia de materiales inflamables, oxígeno, óxido nitroso, etc. Los disolventes inflamables utilizados para la limpieza y desinfección deben evaporarse completamente antes de usar el láser.
- No limpie ni desinfecte el dispositivo en la lavadora.
- No sumerja el dispositivo en ningún líquido.
- Asegúrese de que la tapa protectora del sistema óptico esté colocada en la unidad principal antes de limpiarla.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de radiación intensa y entornos con interferencias electromagnéticas.
- Todos los componentes ópticos, especialmente los del sistema de suministro láser, deben manipularse con sumo cuidado para evitar la acumulación de polvo y la contaminación.
- Utilice únicamente accesorios homologados. PIOON no garantiza que los accesorios, baterías o adaptadores no suministrados por PIOON cumplan con los requisitos de

compatibilidad electromagnética (CEM) de la norma IEC 60601-1-2.

Los residuos generados por el uso de los accesorios del dispositivo láser deben reciclarse o eliminarse de forma segura para las personas y el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional vigente.

2.10. Si corresponde, el método de esterilización;

INSTRUCCIONES DE USO

Preparativos

- Asegúrese de que se hayan completado las siguientes tareas antes de encender el dispositivo láser:
- Todo el personal (usuarios, pacientes y demás personas presentes) lleva gafas de seguridad láser;
 - El cable de alimentación del equipo está conectado a una toma de tierra de la fuente de alimentación externa;
 - La pieza de mano láser está firmemente conectada al dispositivo;
 - El enclavamiento está bien conectado.

Arranque del sistema

- 1) Encienda la fuente de alimentación del sistema. El indicador de encendido se iluminará, el ventilador del sistema se pondrá en marcha y la pantalla LCD se iluminará;
- 2) El sistema comenzará a funcionar;
- 3) Acceda a la página de inicio.

Instrucciones de uso para regímenes de gestión personalizados

- 1) Encienda el dispositivo para acceder a la página de inicio de sesión e introduzca la palabra PIN de encendido.

Nota: La contraseña de inicio de sesión tiene 4 dígitos.

Advertencia: La contraseña de inicio de sesión es propiedad del personal autorizado. El personal no autorizado no puede utilizar este dispositivo sin permiso.



The screenshot shows the Windows 8 Start screen. At the top, there is a 'Home' tile. Below it, there are six application tiles arranged in a 2x3 grid: 'Presets' (with a calendar icon), 'Customize' (with a camera icon), 'Favorites' (with a folder icon), 'Q-start' (with a magnifying glass icon), and 'Activities' (with a triangle icon). The bottom of the screen shows the 'R. (Quick Mirror)' logo and the 'Admin' user name.

Menú principal

Diagram illustrating the various dental specialties that utilize lasers:


- Presets Prosthodontics
- Aesthetic
- Implant
- Periodontics
- LLLT/Photobiomodulation
- Endodontics
- Oral Surgery
- Pedodontics

Clasificación oficial del programa

LABORATORY REPORT
SANTO DOMINGO
C.U.I.T. N° 206489384-7

ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176


aparece debajo de la categoría.

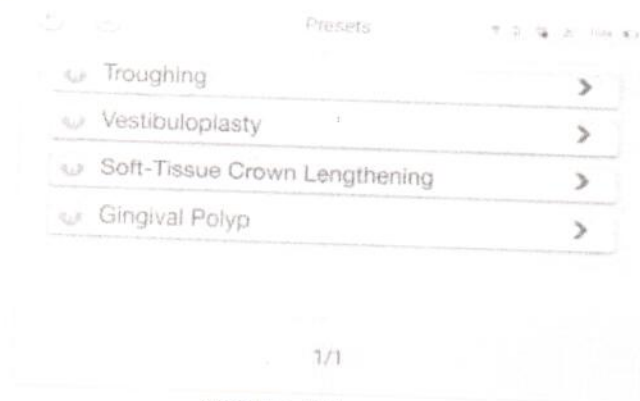

Nombre del programa

3-2) Haga clic en el nombre del preajuste para acceder a la página oficial del preajuste.

3-2-1) En el modo rápido (predeterminado), el usuario solo puede ajustar el valor de potencia dentro del rango permitido.

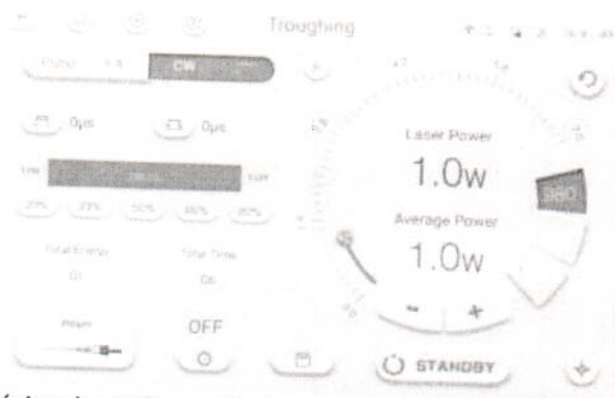


Página de configuración de parámetros del modo rápido

3-2-2) En el modo Experto, el usuario puede ajustar todos los parámetros preestablecidos según sus necesidades y hacer clic en el botón Deshacer para restaurar los valores iniciales del preajuste




Página de configuración de parámetros del modo experto

3-2-3) Después de que el usuario ingrese presets, se generará automáticamente una lista de presets rápidos después de que el láser se emita durante más de 6 segundos en la página de tratamiento.

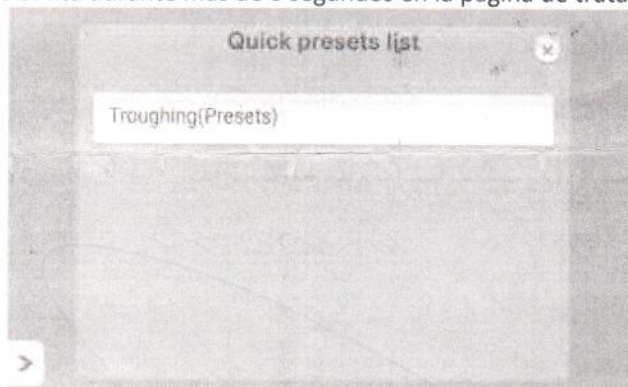

Lista de preajustes rápidos

3-2-4) Cada vez que ingreses la contraseña para acceder a la página de inicio, aparecerá automáticamente una lista de preajustes rápidos y podrás acceder directamente al estado Listo seleccionando un preajuste.

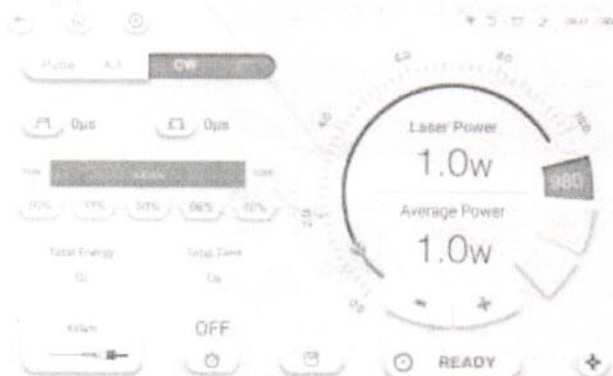

Página de emisión de preajuste rápido

3-2-5) En la página de tratamiento, haga clic en el icono de configuración para seleccionar rápidamente el

SANTA FÉ
C.U.I.T. N° 20-684692
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176

tipo de sonido que emite el láser: bocina o zumbador. También puede ajustar el volumen y el brillo de la luz de puntería.



Seleccione el tipo de página de sonido

3-2-6) Página oficial de tratamientos con ajustes preestablecidos, haga clic para ver el vídeo de asistencia y guía de tratamiento.

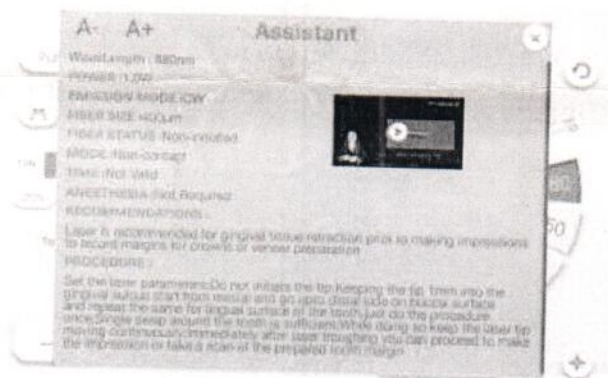

Página de asistencia para el tratamiento

4) Haga clic en «Personalizar» para acceder a la interfaz de personalización.


① La primera vez que acceda a la interfaz de personalización, un tutorial para principiantes le guiará para familiarizarse con los botones y las funciones básicas.


② Posteriormente, el tutorial no volverá a aparecer.

4-1) Interfaz de personalización

4-1-1) En el tutorial de la interfaz de personalización, puede elegir el modo de salida: modo pulsado o modo continuo CW.



SANTA...
C.U.I.T. ... 3384-7

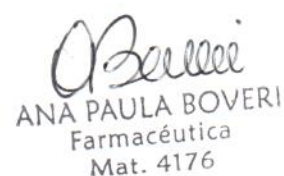
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176

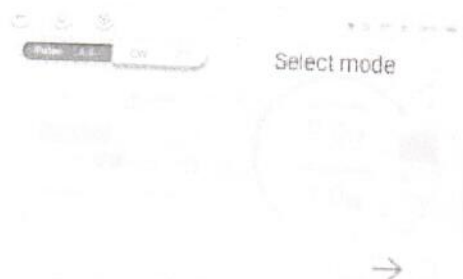


Personalizar la interfaz del tutorial: Seleccionar modo CW/Pulso

4-1-2). Seleccione el modo pulso; es posible que deba configurar el ancho y el intervalo del pulso.

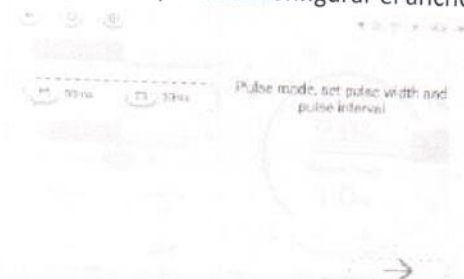


Personaliza la interfaz del tutorial: ancho de pulso e intervalo de pulso.

4-1-3) En el modo de ajuste de pulsos, puede configurar el ancho y el intervalo de pulso en el rango de 1 a 999 ms o de 25 a 999 μ s.

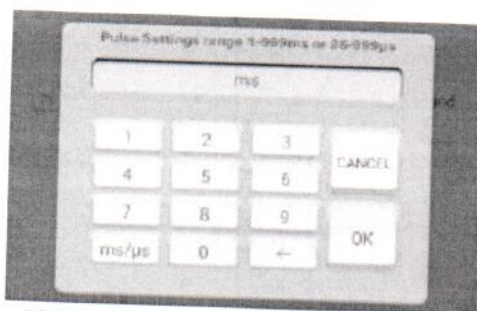

Ajuste del ancho del intervalo de pulso

4-1-4) En el modo de pulsos, es posible que deba configurar el ciclo de trabajo

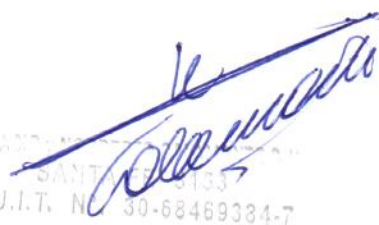
C.U.I.T. N° 30-68469384-7


ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176



Personalizar la interfaz del tutorial: configurar el ciclo de trabajo.

4-2) A continuación, la interfaz del tutorial Personalizar solicita ajustar la longitud de onda y la potencia;




Personalizar la interfaz de guiado: ajustar la longitud de onda y la potencia.

4-3) A continuación, personalice la interfaz del tutorial: configure el tiempo de cuenta regresiva.



SANTA CRUZ
C.U.I.T. N° 30-68488-0-047


ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176

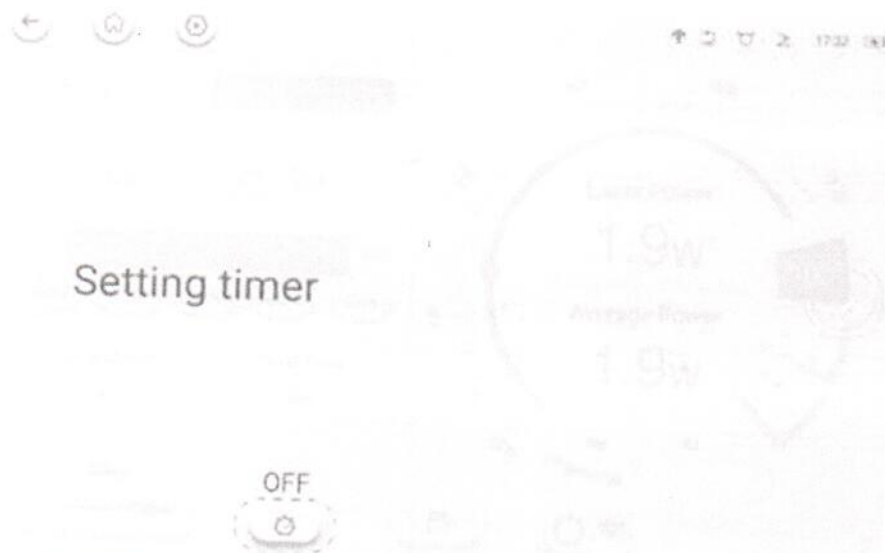

Personalizar la interfaz del tutorial - Establecer el tiempo de cuenta regresiva

4-4) Configure el cuadro emergente de cuenta regresiva en el rango de 0 a 3600 s; si configura la cuenta regresiva, la emisión del láser se detendrá después de que finalice la cuenta regresiva.

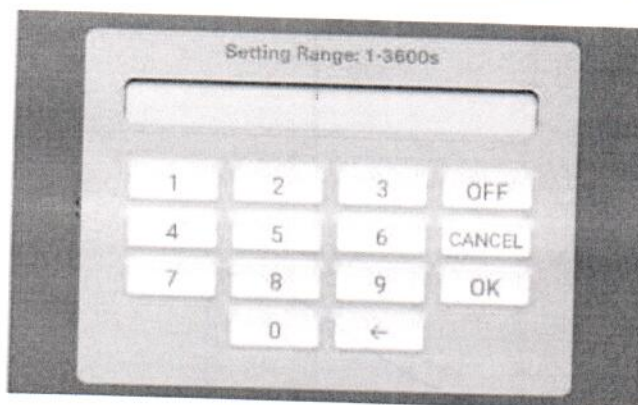

4-5-1) Personalizar la interfaz del tutorial: En espera, haga clic en En espera para cambiar al estado Listo.


SANTA FE
C.U.I.T. M.P. 89-68460
[Handwritten signature]

*[Handwritten signature]*¹³
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176




Personalizar la interfaz de arranque en modo de espera

4-5-2) Pulse Standby para cambiar al estado Listo.

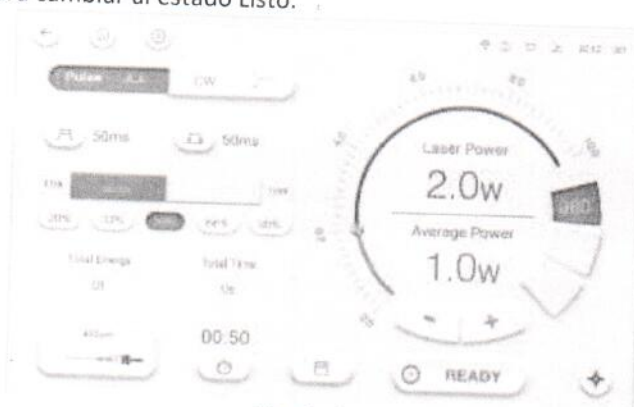

Estado listo

4-5-3) En estado listo, presione la palanca o el interruptor de pie para emitir el láser; la interfaz pasará al estado EMITTING. En este momento, no podrá modificar ningún parámetro. Si necesita modificar los parámetros, vuelva al estado Standby o Ready.

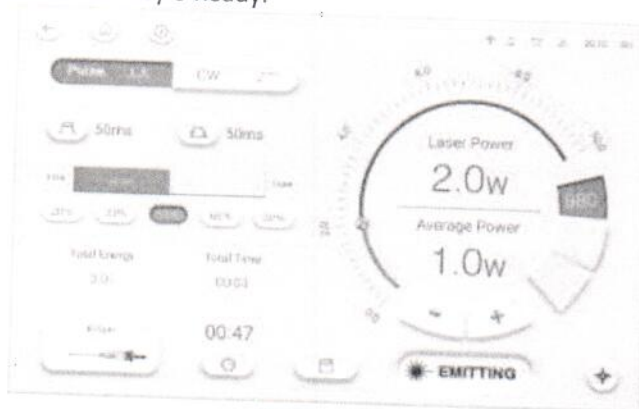

Estado emisor

SANTO DOMINGO, D.R.
C.U.I.T. N° 1-884689-0
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176

4-6) En la interfaz de personalización, el usuario puede personalizar los parámetros, incluidos el modo de salida, el ancho del pulso, el ciclo de trabajo, el tiempo, la longitud de onda, la potencia, etc.



Personalizar la página de parámetros del esquema


4-6-1) En el modo de pulso, el ancho del pulso se puede configurar en el rango de 1-999ms o 25-999us.


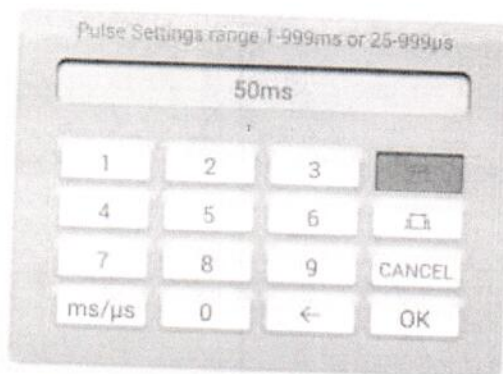


Ajuste del ancho del intervalo de pulso

No.	Botones/Iconos	Significado
1		Ancho de pulso positivo: parámetro configurable.
2		Ancho de pulso negativo: parámetro configurable.
3		Interruptor indicador: cuando el interruptor indicador está en rojo , el El indicador está encendido y cuando es blanco , El indicador está apagado.



 IORADONTOLOGÍA
 S.U. 30-68469384-7

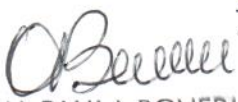16

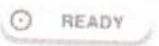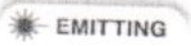 ANA PAULA BOVERI
 Farmacéutica
 Mat. 4176

4	00:30 	Función de cuenta regresiva: cuando el valor inicial del temporizador es 00:00, la emisión láser comenzará una cuenta regresiva; cuando el temporizador esté configurado, la luz comenzará una cuenta regresiva y la emisión láser se detendrá automáticamente cuando se acabe el tiempo.
5		Botón indicador de emisión láser: estado de encendido predeterminado el modo de espera  Cuando el plan de tratamiento esté configurado, haga clic en este botón para ingresar el estado listo.  Presione el interruptor de la manija para entrar al lanzamiento.  EMITTING estado.
6		Volver a la página anterior
7		Guardar ajustes preestablecidos
8	Laser Power	Potencia actual: ajuste deslizante.
9	Average Power	Potencia real: potencia media.
10	Fiber Type 400µm 	Tipo de punta recomendado
11		Acceso a la interfaz de configuración.
12		Relación de intervalo de pulso: configure rápidamente el ciclo de trabajo del intervalo de pulso.
13		Ir al videoblog
14		Acceda a la interfaz de instrucciones oficiales.

APB
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176

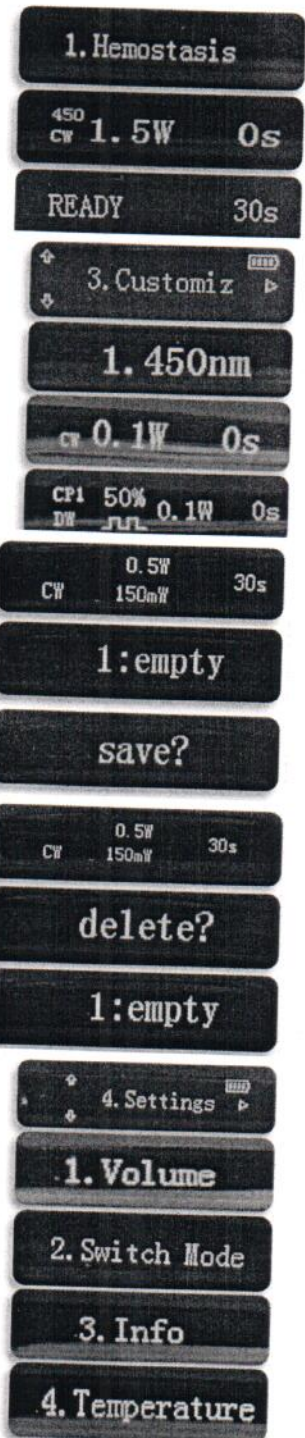3. **Preajustes:** use el botón hacia arriba o hacia abajo para desplazarse y seleccione el ajuste preestablecido deseado. Haga clic derecho para confirmar. Aparecerá la pantalla de vista previa de parámetros. Luego de verificar que los parámetros sean correctos, pulse brevemente el botón central para entrar en el estado LISTO. El indicador del interruptor de control se pondrá verde. Presione el interruptor de control para iniciar la emisión láser.
4. **Personalizar:** Deslice hacia la derecha para seleccionar parámetros secuencialmente: Longitud de onda (varía según la versión del dispositivo), Modo (CW/Pulso), Potencia y Cuenta regresiva. Cuando ajusta parámetros, mueva el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el elemento que se va a ajustar, y mueva el interruptor hacia arriba o hacia abajo para ajustar los valores. Una vez que todos los parámetros se han configurado, mueva el interruptor hacia la derecha hasta que el cursor deje de parpadear, luego, presione brevemente el botón central para ingresar el estado LISTO.
5. **Favorito – Guardar:** En el menú de personalizar, luego de que todos los parámetros se han configurado y el cursor deja de parpadear, mueva el cursor hacia la derecha y manténgalo presionado durante 3 segundos para entrar el mensaje de guardar. Seleccione una ranura vacía y luego presione el botón central para ver el mensaje "¿Guardar?". Presione nuevamente el botón central para completar el guardado. Si selecciona una ranura de parámetro existente para guardar, los parámetros serán sobrescritos. Se puede guardar un total de 8 parámetros preestablecidos.
6. **Favorito-Eliminar:** Ingrese al menú Favoritos y seleccione una ranura de parámetro guardada. Mantenga pulsado el botón derecho durante 3 segundos para que aparezca el mensaje de eliminación. Al eliminarse, la ranura vacía mostrará su número de ranura junto con un indicador de "vacío".
7. **Configuración:** El menú de configuración incluye las siguientes opciones:
 1. Volumen: Ajusta el volumen del zumbador.
 2. Cambiar modo: Cambia el modo de control.
 - Interruptor: Pulse el interruptor de control para encender la emisión del láser; pulse de nuevo para detener.
 - Mantener pulsado: Mantenga pulsado el interruptor de control para iniciar la emisión láser; suelte para detener.
 3. Información: Muestra la información del software.
 4. Temperatura: Cuando está activada, muestra la temperatura del láser en la pantalla de emisión láser.





 ORACIÓN MONTAÑA
 C.U.I.T. 30-9844-234-7



 ANA PAULA BOVERI
 Farmacéutica
 Mat. 4176

OPERACIÓN DE LA PANTALLA

1. Encienda el botón de encendido para acceder a la interfaz de inicio de sesión. Introduzca la contraseña "1234" para acceder a la interfaz principal.

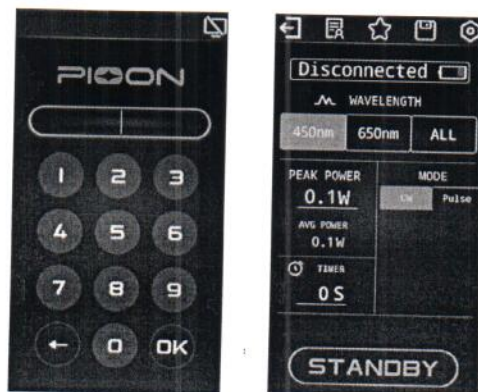

2. Haga clic en la longitud de onda láser correspondiente para establecer los parámetros de salida del láser. En modo Personalizado, la frecuencia de pulso solo se puede configurar en 10 Hz (CP1) o 100 Hz (CP2), y el ciclo de trabajo solo se puede configurar al 25%, 33% o 50%.

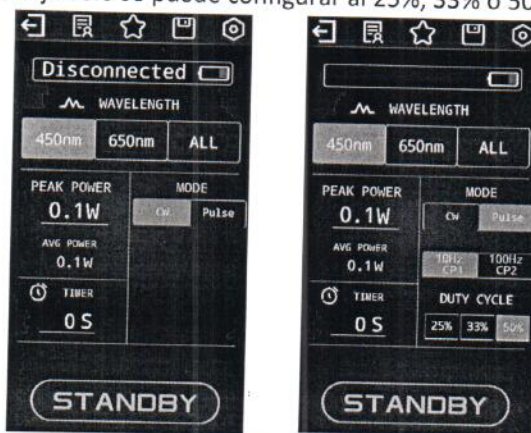


3. Al hacer clic en "TODO" se activa la generación de luz mixta, con los parámetros de salida combinando los parámetros establecidos de cada longitud de onda individual.


 IORACIO Y MONTES, S.P.A.
 C.I. 30-60469384-7


 ANA PAULA BOVERI
 Farmacéutica
 Mat. 4176

Nota: Esta función puede variar según la región y versión del software.

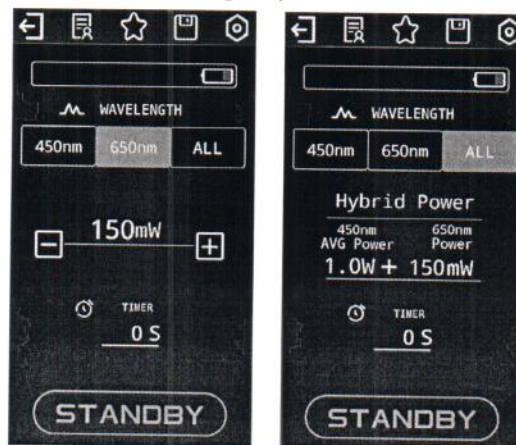

4. Haga clic en "EN ESPERA/ STANDBY" para cambiar el estado a "LISTO". En este punto, la pieza de mano tendrá una luz indicadora verde encendida. Presione el Botón de emisión de luz para comenzar a emitir luz.

Nota: La emisión láser solo se puede activar mediante el interruptor de control en la pieza de mano. La pantalla no se puede utilizar para iniciar la emisión del láser.




5. Después de ajustar los parámetros, haga clic en "Guardar" para ingresar a la interfaz de guardado del esquema. Seleccionando un área en blanco guarda los parámetros actuales como un nuevo esquema, mientras que al seleccionar uno existente lo sobrescribe. Se pueden almacenar hasta 20 esquemas personalizados

Hacer clic en "Favoritos" para añadir sus interfaces favoritas. Seleccione un esquema y luego haga clic en "Confirmar" para cargarlo y volver a la interfaz principal. Para eliminar un esquema, selecciónelo y haga clic en el botón de eliminar en la esquina superior derecha.


 IORACIO Y N. DEPTO. DE ODONTOL. 3.11
 S. J. A. 15.05.2019
 C.U.L. 1.13.15.05.2019
 3469384-7


 ANA PAULA BOVERI
 Farmacéutica
 Mat. 4176

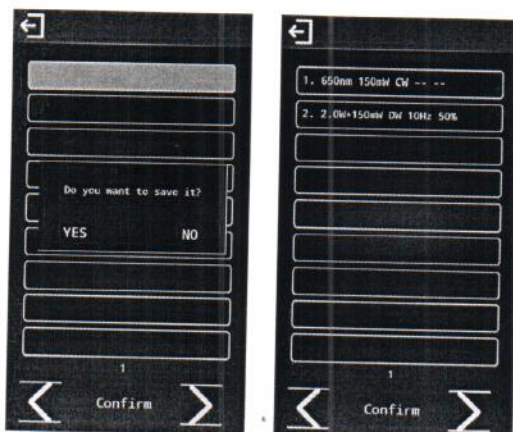

6. Haga clic en el botón “Esquema” para ver los esquemas recomendados clínicamente. Seleccione un esquema y luego haga clic en “Confirmar” para cargarlo e ingresa a la interfaz principal.
Nota: Esta función puede variar según la región y la versión del software.



7. Haga clic en el botón “Configuración” para acceder a la interfaz de configuración. Desde aquí, podrá: ajustar el brillo de la retroiluminación y la intensidad de la luz de puntería, ver información del dispositivo y los datos de contacto, seleccione el idioma deseado y empareje la pieza de mano con la base de carga.

Nota: La función Conectó de la pieza de mano puede variar según la región y la versión del software.

COORDINADOR GENERAL
C.U.I.T. 20-90469384-7

ANA PAULA BOVERI
ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176



DIS·DEN
ODONTOLOGÍA



Los iconos de los botones en la pantalla tienen los siguientes significados:

Botón	Nombre	Significado
	Atrás	Haz clic para volver a la interfaz anterior.
	Ajustes predefinidos	Haga clic para acceder a la interfaz del esquema predeterminado.
	Favorito	Haz clic para acceder a la interfaz de favoritos
	Guardar	Haz clic para guardar el esquema seleccionado actualmente.
	Configuración	Haz clic para acceder a la interfaz de configuración.
	Dormir	Apaga la pantalla pero no interrumpe cargando.
	Batería Nivel	Muestra el nivel de batería restante del mango.

10RACIDY N001 PICOON 12.5.17
C.U.I.T. 157-30-68469384-7

23

ANA PAULA BOVERI
Farmacéutica
Mat. 4176



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo y manual de instrucciones - 79405

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.