



PROYECTO DE ROTULO (Envase de Consumo)
Preservativos Masculinos

Preservativos lisos de látex de caucho natural

Preservativo de látex de caucho natural lubricado con aceite de silicona. Ancho nominal 52mm. Autorizado por ANMAT.

ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE SU USO.

PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

DIRECTOR TÉCNICO: FARM. Tatiana Marina PISCONI PICON M.P. 7418

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.

Fabricado por NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.

Dirección: Calle Soto N° 1.630, B° Ampliación Empalme, Ciudad y Provincia de Córdoba, Argentina.

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2856-11

N° REG. DEL MIN. DE SALUD: LEGAJO UNICO N° 2856

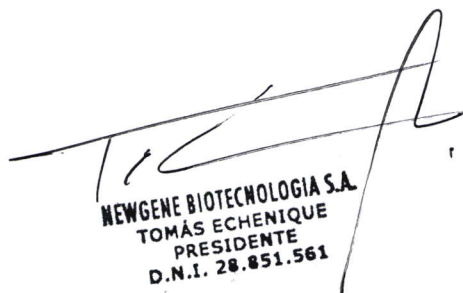
VENTA LIBRE

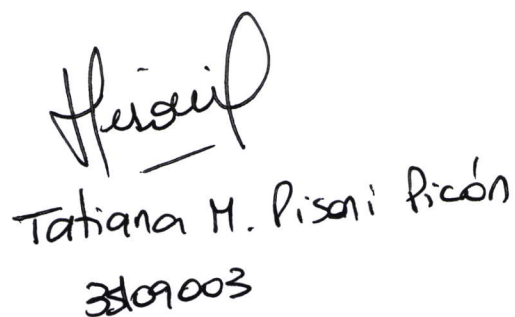
NO FRACCIONAR

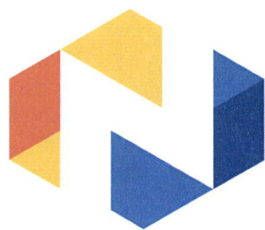
Fecha de fabricación: XXX

Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX


NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.
TOMÁS ECHENIQUE
PRESIDENTE
D.N.I. 28.851.561


Tatiana M. Pisoni Picon
3109003



Newgene
BIOTECHNOLOGY TO IMPROVE

INSTRUCCIONES DE USO. ANEXO IIIB

Descripción:

Preservativo masculino fabricado en látex de caucho natural que cubre completamente el pene con una membrana ajustada y posee un depósito en su extremo para la recolección del semen.

Precauciones:

En caso de que el usuario sea alérgico al látex de caucho natural, no utilice este producto.

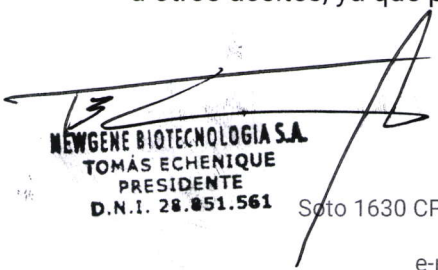
Advertencias:

- Use un preservativo nuevo para cada relación sexual, ya que es un producto de un solo uso.
- Si cambia de pareja durante el mismo contacto sexual, utilice también un preservativo nuevo.
- Este preservativo está diseñado para su uso en relaciones sexuales vaginales. Otros usos pueden aumentar la posibilidad de rotura.
- Ante cualquier irritación o reacción adversa, suspenda su uso y consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Después de su uso, desechar el preservativo en un recipiente para residuos. No arrojar al inodoro.

Indicaciones:

Los preservativos, usados correctamente, representan un método eficaz para evitar el embarazo y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

No utilizar este preservativo junto con productos tales como lociones, vaselina, cremas u otros aceites, ya que pueden deteriorar el látex.

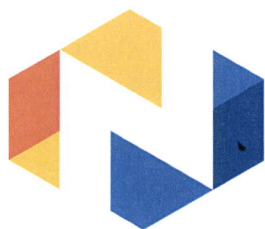

NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.
TOMÁS ECHENIQUE
PRESIDENTE
D.N.I. 28.851.561

Soto 1630 CP: 5006 Ampliación Empalme, Córdoba, Provincia de Córdoba.

e-mail: direcciontecnica@newgenebiotenologia.com


Tatiana Marina
Pisoni Picon
DNI 35109003

[illegible]



Newgene

BIOTECHNOLOGY TO IMPROVE

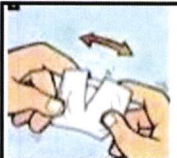
Almacenamiento:

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, el calor y la humedad.

Método de uso:

Para un uso seguro y eficaz del preservativo, siga las siguientes instrucciones.

1. Retire el preservativo del envase evitando el uso de elementos cortantes (tijeras, dientes, etc.)
2. Coloque el preservativo sobre la punta del pene erecto y desenróllelo completamente hasta la base del mismo.
3. Evite dejar aire en la punta del preservativo, presionando el depósito entre el dedo pulgar y el índice antes de desenrollarlo.
4. No introduzca el pene en la vagina sin haber colocado previamente el preservativo, ya que puede liberarse semen antes de la eyaculación.
5. Una vez finalizada la relación sexual y retirado el pene, sujete el preservativo por la base para evitar derrames y retírelo cuidadosamente.
6. Deseche el preservativo utilizado en un recipiente para residuos.

	-Abra el envase evitando el uso de elementos cortantes (tijeras, dientes, etc) y retire el preservativo.
	-Presione la punta del preservativo entre 2 dedos para retirar el aire en ella
	- Coloque el preservativo sobre la punta del pene erecto y desenróllelo completamente a lo largo del pene hasta su base.

No utilizar lubricantes a base de aceite (vaselina, aceites minerales, cremas corporales).

Utilizar únicamente lubricantes compatibles con preservativos de látex (a base de agua o silicona).

Información adicional:

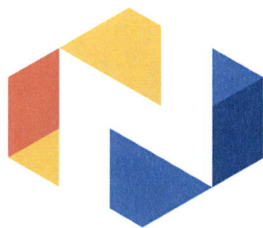
Producto médico de venta libre.

NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.
TOMAS ECHENIQUE
PRESIDENTE
D.N.I. 28.851.561

1630 CP: 5006 Ampliación Empalme, Córdoba, Provincia de Córdoba.

e-mail: direcciontecnica@newgenebiotenologia.com

Handwritten signature:
Tahiana T. Pisoni Picon
DNI 35109003



Newgene
BIOTECHNOLOGY TO IMPROVE

Dir. Tec. Farm. Tatiana Marina PISCONI PICON M.P. 7418

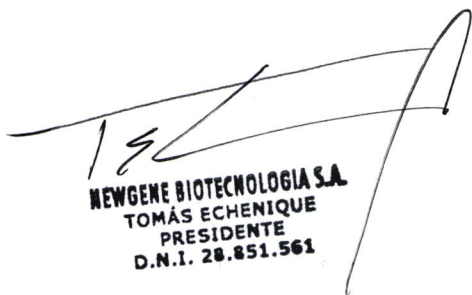
Autorizado por ANMAT Registro PM: 2856-11

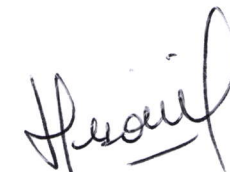
Efectividad:

Aunque ningún método anticonceptivo puede garantizar un 100 % de efectividad, los preservativos de látex, utilizados correctamente, constituyen uno de los métodos más eficaces para evitar el embarazo y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles al látex.

No fraccionar para la venta.


NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.
TOMÁS ECHENIQUE
PRESIDENTE
D.N.I. 28.851.561


Tatiana M. Piconi Picon
35109003



PROYECTO DE ROTULO (Envase Primario)
Preservativos Masculinos

Preservativo liso de látex de caucho natural lubricado con aceite de silicona.

Ancho nominal 52mm. Autorizado por ANMAT.

Proteja este producto del calor, humedad de la luz.

ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE SU USO. PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ

Fecha de fabricación: XXX

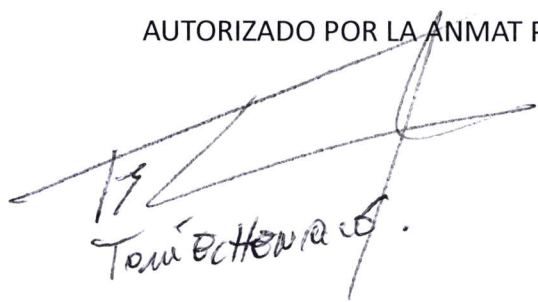
Fecha de vencimiento: XXX

Lote: XXX

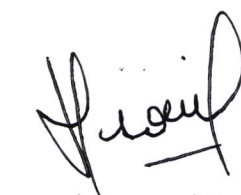
Fabricado por NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.

Dirección: Calle Soto N° 1.630, B° Ampliación Empalme, Ciudad y Provincia de Córdoba, Argentina.

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2856-11


Tomás Echenique

NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.
TOMÁS ECHENIQUE
PRESIDENTE
D.N.I. 28.851.561


Tatiana M. Piseni Picón
38109903



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo e instrucciones de uso- 78286

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.