

A.N.M.A.T.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN - PM CLASE III - IV

Número de revisión: 2130-3#0005

Nombre Descriptivo del producto:

CONDONES MASCULINOS

Marca:

DUREX

Número de PM:

2130-3

Disposición Autorizante o reválida: 6777-2014

Expediente de Autorización original: 1-47-23689--12-0

MODIFICACIONES SOLICITADAS

R	DATOS AUTORIZADOS	MODIFICACION/RECTIFICACION AUTORIZADA
Modificació	SENSITIVO DELGADO	SENSITIVO DELGADO
n de la	Envase de consumo - Frente, cara	
informació	exterior del envase:	Envase de consumo - Frente, cara
n	1) DUREX SENSITIVO DELGADO	exterior del envase:

(según Disp. 2337/02)

2) Condones transparentes de látex natural, anatómicos y con lubricante a base de silicona. (según Disp. 2337/02) natural, anatómicos y con lubricante 3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según la base de silicona. (según Disp. Disp. 2337/02)

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02)
- 5) LUBRICANTE A base de silicona. (según Disp. 2337/02)
- 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural.
- 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 195mm) ANCHO NOMINAL Grande (56mm) ESPESOR Delgados para mayor sensación.

(según Disp. 2337/02)

contenida

rótulos y/o

instruccion

es de uso

modifique

característi

(sin que

dato

co)

en los

- ningún otro 8) Lea las instrucciones de uso en el interior del empaque. (según Disp. 2337/02)
 - 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

10) Este producto contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar interior del empaque. (según Disp. reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite, como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden www.durex.com o escanea el código dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante sea compatible con condones de látex. Para sexo anal usa lubricación adicional en la parte exterior real. IMPORTADO del condón (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empaque individual está dañado,

- 1) DUREX SENSITIVO DELGADO (según Disp. 2337/02)
- 2) Condones transparentes de látex 2337/02)
- 3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según Disp. 2337/02)

Envase de consumo- Caras lexteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02) Durex y el logo de Durex son Marca registrada de Reckitt Benckiser Group of Companies.
- 5) LUBRICANTE A base de silicona. (según Disp. 2337/02)
- 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural.
- 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 195mm) ANCHO NOMINAL Grande (56mm) ESPESOR Delgados para mayor sensación.

(según Disp. 2337/02)

- 8) Lea las instrucciones de uso en el 2337/02)
- 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)

LA VERDAD AL DESNUDO , para obtener más información visita QR

La marca de condones No 1 del mundo. Más de 90 años de sexo

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

desecha ese condón y utiliza uno nuevo 10) Advertencias: Este producto que no presente daños en el empaque. Uso sin prescripción.

11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL

CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail: consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02) 12) Fabricado en Tailandia por: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo 5, Bangna – Trad. Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (según Disp.2337/02)

13) Importado y Distribuido por: Reckitt Benckiser Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36 N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires, Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec. Daniel Bertora MP 21314. (según Disp. 2337/02)

14) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha Manufacturing (Thailand) Ltd. Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; EXP: MM/YYY) (según Disp. 2337/02)

de Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; EXP: MM/YYY) (según Disp. 2337/02)

16) *La marca de mayor venta valor en la categoría de condones a nivel mundial, 2018.

INSTRUCCIONES DE USO - Cara interna de envase de consumo: A) Los condones Durex Sensitivo Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno saber, así que lee toda la información antes del uso, especialmente si estás usando condones para sexo anal u oral. Los condones deben usarse para tener

contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite, como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante sea compatible con condones de látex. Para sexo anal usa lubricación adicional en la parte exterior del condón (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empague individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. Uso sin prescripción.

11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail: consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02) 12) Fabricado en Tailandia por: SSL Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo 5, Bangna – Trad. Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (según Disp.2337/02) 13) Importado y Distribuido por: RB 15) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha (Health) Colombia S.A.S., Cr 12A # 78-40 Piso 5, Bogota D.C.R.S INVIMA 2024DM-0029882. RECKITT BENCKISER PERU S.A Calle Dean Valdivia 148, Int 502 Urb, Jardin, San Isidro, Lima RUC 20195937541. RS N°: DM 27983E, Fabricante Legal: Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Reino Unido. Reckitt Benckiser Ecuador S.A QUITO – RS N° DM120512 Reckitt Benckiser Centro America Sociedad Anonima, San Jose Costa Rica PA:XXXX , CR EMB-XX-XX-XXXXX, NI: II04-XXXXXXX-XXXX, HN: HN-DM-0924-0225,

relaciones sexuales. Si se usan apropiadamente los condones de látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) Reino Unido. Reckitt Benckiser y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo. el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del uso. B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso que, durante mpas de 90 años, millones EXP: MM/YYY) (según Disp. de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy – ten a la mano la correcta protección. C) ANTES DE EMPEZAR. Lee cuidadosamente las instrucciones de uso. Revisa la fecha de expiración del condón antes de usarlo. Si el empaque individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. D) CÓMO USAR EL CONDÓN 1. Abre el empaque por el borde dentado. Manipula con cuidado, el condón puede dañarse con las uñas, joyas u objetos cortantes. 2. Con la parte enrollada por fuera, aprieta el extremo cerrado del condón y condones deben usarse para tener coloca el condón sobre el pene erecto. 3. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base embarazo, el VIH o las infecciones del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona. 4. Desecha el empaque y el condón en el basurero, nunca en el inodoro. (según Disp. 2337/02)

SV:IM135609082024 GT:PMQ-18519, Titular en CR Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36 N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires, Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec. Daniel Bertora MP 21314. (según Disp. 2337/02) 14) INDUSTRIA TAILANDESA 15) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; 2337/02) 16) *La marca de mayor venta valor en la categoría de condones a nivel mundial, 2024. **Vs la fórmula anterior Calidad Durex Indicación de uso en Costa Rica: barrera anticonceptiva para la prevención del embarazo y la prevención de infecciones de

transmisión sexual.

INSTRUCCIONES DE USO - Cara

interna de envase de consumo: A) Los condones Durex Sensitivo Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno saber, así que lee toda la linformación antes del uso. especialmente si estás usando condones para sexo anal u oral. Los relaciones sexuales. Si se usan apropiadamente los condones de látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del

uso.

E) CONSULTA A TU MÉDICO SI:
No estás seguro si eres alérgico al
látex, hay irritación o incomodidad
persistente después del uso o estás
aplicando medicamentos tópicos en el
pene o la vagina. En caso de ruptura
del condón, consulta lo antes posible y
dentro de las 72 horas siguientes.
(según Disp. 2337/02). Conoce más
acerca de tu elección de condón.
Dirígete a durex.com
JEANS

Envase de consumo - Frente, cara exterior del envase:

- 1) DUREX JEANS (según Disp. 2337/02)
- 2) Condones transparentes de látex natural,

anatómicos, con lubricante a base de silicona.

(según Disp. 2337/02)

3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según Disp.

2337/02)

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02)
- 5) LUBRICANTE A base de silicona. (según Disp. 2337/02)
- 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural.
- 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 190mm) ANCHO NOMINAL Ajustado (52,5 mm) ESPESOR Regular.

(según Disp. 2337/02)

- 8) Lea las instrucciones de uso en el interior del empaque. (según Disp. 2337/02)
- 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)

B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL

Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso que, durante mpas de 90 años, millones de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy – ten a la mano la correcta protección.

- C) ANTES DE EMPEZAR. Lee cuidadosamente las instrucciones de uso. Revisa la fecha de expiración del condón antes de usarlo. Si el empaque individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. Coloca este condón antes de que haya cualquier contacto entre el pene y la otra persona. Esto ayuda a prevenir embarazos y reduce el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. D) CÓMO USAR EL CONDÓN
- 1.Abre el empaque por el borde dentado. Manipula con cuidado, el condón puede dañarse con las uñas, joyas u objetos cortantes.
- Con la parte enrollada por fuera, aprieta el extremo cerrado del condón y coloca el condón sobre el pene erecto.
- 3. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona.
- 4. Desecha el empaque y el condón en el basurero, nunca en el inodoro. (según Disp. 2337/02)
- E) CONSULTA A TU MÉDICO SI: No estás seguro si eres alérgico al

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

10) Advertencias: Este producto contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite, como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante 2337/02) sea compatible con condones de látex. Para sexo anal usa lubricación adicional en la parte exterior del condón (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empaque individual esta dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. Los condones pueden presentar riesgo de

asfixia. Mantener los condones fuera del alcance de los niños. Uso sin prescripción.

11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail:

consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02)

12) Fabricado en Tailandia por: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo 5, Bangna – Trad.

Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (según Disp.2337/02)

13) Importado y Distribuido por: Reckitt Benckiser Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36

N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires.

Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado

por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec.

látex, hay irritación o incomodidad persistente después del uso o estás aplicando medicamentos tópicos en el pene o la vagina. En caso de ruptura del condón, consulta lo antes posible y dentro de las 72 horas siguientes. (según Disp. 2337/02). Conoce más acerca de tu elección de condón. Dirígete a durex.com **JEANS**

Envase de consumo - Frente, cara exterior del envase:

- 1) DUREX JEANS (según Disp.
- 2) Condones transparentes de látex natural.

anatómicos, con lubricante a base de silicona.

(según Disp. 2337/02)

3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según Disp.

2337/02)

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02) Durex y el logo de Durex son Marca registrada de Reckitt Benckiser Group of Companies.
- 5) LUBRICANTE A base de silicona. (según Disp. 2337/02)
- 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural.
- 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 190mm) ANCHO NOMINAL Ajustado (52,5 mm)

ESPESOR Regular.

(según Disp. 2337/02)

8) Lea las instrucciones de uso en el interior del empaque. (según Disp. 2337/02)

Daniel Bertora MP 21314. (según Disp.2337/02)

14) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha obtener más información visita

Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; EXP: MM/YYY) (según Disp. 2337/02)

15) La marca de mayor venta valor en la categoría de condones a nivel mundial, 2020

INSTRUCCIONES DE USO - Cara interna de envase de consumo:

A) Los condones Durex Sensitivo Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno saber, así que lee toda la información antes del uso, especialmente si estás usando condones para sexo anal u oral. Los condones deben usarse para tener relaciones sexuales. Si se usan apropiadamente los condones de látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) Para sexo anal usa lubricación v otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del uso. B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso

que, durante mas de 90 años, millones de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy - ten a la mano la correcta protección.

C) ANTES DE EMPEZAR. Lee cuidadosamente las instrucciones de uso. Revisa la fecha de expiración del 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)

LA VERDAD AL DESNUDO, para www.durex.com o escanea el código QR

La marca de condones No 1 del mundo. Más de 90 años de sexo real. IMPORTADO

Envase de consumo- Caras exteriores del envase: 10) Advertencias: Este producto contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite, como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante sea compatible con condones de látex. adicional en la parte exterior del condón (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empague individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. Uso sin prescripción.

- 11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail: consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02) 12) Fabricado en Tailandia por: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo 5, Bangna – Trad. Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (según Disp.2337/02)
- 13) Importado y Distribuido por: RB (Health) Colombia S.A.S., Cr 12A #

condón antes de usarlo. Si el empaque individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. D) CÓMO USAR EL CONDÓN 1.Abre el empague por el borde dentado. Manipula con cuidado, el condón puede dañarse con las uñas, joyas u objetos cortantes. 2. Con la parte enrollada por fuera, aprieta el extremo cerrado del condón y Reckitt Benckiser Centro America coloca el condón sobre el pene erecto. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36 del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona. 4. Desecha el empague y el condón en el basurero, nunca en el inodoro.

(según Disp. 2337/02) E) CONSULTA A TU MÉDICO SI: No estás seguro si eres alérgico al látex, hay irritación o incomodidad persistente después del uso o estás aplicando medicamentos tópicos en el pene o la vagina. En caso de ruptura del condón, consulta lo antes posible y dentro de las 72 horas siguientes. (según Disp. 2337/02). Conoce más acerca de tu elección de condón. Dirígete a durex.com **EXTRA SEGURO** Envase de consumo - Frente, cara exterior del

- 1) DUREX EXTRA SEGURO (según Disp. 2337/02)
- 2) Condones transparentes de látex natural,

anatómicos, con lubricante a base de silicona.

(según Disp. 2337/02)

envase:

3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según saber, así que lee toda la Disp. 2337/02)

78-40 Piso 5, Bogota D.C.R.S INVIMA 2024DM-0029882. RECKITT BENCKISER PERU S.A. Calle Dean Valdivia 148, Int 502 Urb, Jardin, San Isidro, Lima RUC 20195937541. RS N°: DM 27983E, Fabricante Legal: Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Reino Unido. Reckitt Benckiser Ecuador S.A QUITO – RS N° DM120512 Sociedad Anonima, San Jose Costa Rica PA:XXXX , CR EMB-XX-XX-XXXXX, NI: II04-XXXXXX-XXXX, HN: HN-DM-0924-0225, SV:IM135609082024 GT:PMQ-18519, Titular en CR Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Reino Unido. Reckitt Benckiser N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires, Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec. Daniel Bertora MP 21314. (según Disp. 2337/02)

- 14) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; EXP: MM/YYY) (según Disp. 2337/02)
- 15) *La marca de mayor venta valor en la categoría de condones a nivel mundial, 2024. **Vs la fórmula anterior Calidad Durex Indicación de uso en Costa Rica: barrera anticonceptiva para la prevención del embarazo y la prevención de infecciones de transmisión sexual. INSTRUCCIONES DE USO - Cara interna de envase de consumo: A) Los condones Durex Sensitivo Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno información antes del uso, especialmente si estás usando

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN apropiadamente los condones de UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02)
- 5) LUBRICANTE con extra lubricante a base de silicona. (según Disp. 2337/02) 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural. 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL
- Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 195mm) ANCHO NOMINAL Ajustado (56mm) ESPESOR Gruesos.

(según Disp. 2337/02)

- 8) Lea las instrucciones de uso en el interior del empaque. (según Disp. 2337/02)
- 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)
- 10) Advertencias: Este producto contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite, como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante dentado. Manipula con cuidado, el sea compatible con condones de látex. Para sexo anal usa lubricación adicional en la parte exterior del condón 2. Con la parte enrollada por fuera, (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empaque individual esta dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque. Los condones pueden presentar riesgo de asfixia. Mantener los condones fuera del alcance de los niños. Uso sin

condones para sexo anal u oral. Los condones deben usarse para tener relaciones sexuales. Si se usan látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del

B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL

Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso que, durante mas de 90 años, millones de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy – ten a la mano la correcta protección.

- C) ANTES DE EMPEZAR. Lee cuidadosamente las instrucciones de uso. Revisa la fecha de expiración ldel condón antes de usarlo. Si el empague individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque.
- D) CÓMO USAR EL CONDÓN 1.Abre el empaque por el borde condón puede dañarse con las uñas, joyas u objetos cortantes.
- aprieta el extremo cerrado del condón y coloca el condón sobre el pene erecto.
- 3. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a

prescripción.

11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail:

consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02)

12) Fabricado en Tailandia por: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd. Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo 5, Bangna – Trad.

Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (seqún Disp.2337/02)

13) Importado y Distribuido por: Reckitt Benckiser Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36

N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires, Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado

por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec. Daniel Bertora MP 21314. (según Disp.

2337/02)

14) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha 4) Guarda los condones que usarás de Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO,

MM/YYY) (según Disp. 2337/02)

15) La marca de mayor venta valor en la categoría

de condones a nivel mundial, 2020

INSTRUCCIONES DE USO - Cara interna de envase de consumo:
A) Los condones Durex Sensitivo
Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno saber, así que lee toda la información antes del uso, especialmente si estás usando condones para sexo anal u oral. Los

la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona.

4. Desecha el empaque y el condón en el basurero, nunca en el inodoro. (según Disp. 2337/02)

E) CONSULTA A TU MÉDICO SI: No estás seguro si eres alérgico al látex, hay irritación o incomodidad persistente después del uso o estás aplicando medicamentos tópicos en el pene o la vagina. En caso de ruptura del condón, consulta lo antes posible y dentro de las 72 horas siguientes. (según Disp. 2337/02). Conoce más acerca de tu elección de condón. Dirígete a durex.com EXTRA SEGURO

Envase de consumo - Frente, cara exterior del envase:

- 1) DUREX EXTRA SEGURO (según Disp. 2337/02)
- 2) Condones transparentes de látex natural,

anatómicos, con lubricante a base de silicona.

(según Disp. 2337/02)

3) Contiene 3, 6 o 12 condones. (según Disp.

2337/02)

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 4) Guarda los condones que usarás después en la caja. CONSÉRVALO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, LEJOS DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL. (según Disp. 2337/02) Durex y el logo de Durex son Marca registrada de Reckitt Benckiser Group of Companies.
- 5) LUBRICANTE con extra lubricante base de silicona. (según Disp. 2337/02)
- 6) HUELE MEJOR. Condones transparentes de látex natural.
- 7) ENCUENTRA TU MEDIDA IDEAL Cada persona es diferente, pero el ajuste correcto siempre debe ser

condones deben usarse para tener relaciones sexuales. Si se usan apropiadamente los condones de látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del uso.

- B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso que, durante mas de 90 años, millones de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy ten a la mano la correcta protección.
- D) CÓMO USAR EL CONDÓN

 1.Abre el empaque por el borde
 dentado. Manipula con cuidado, el
 condón puede dañarse con las uñas,
 joyas u objetos cortantes.
- Con la parte enrollada por fuera, aprieta el extremo cerrado del condón y coloca el condón sobre el pene erecto.
- 3. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona.
- 4. Desecha el empaque y el condón en el basurero, nunca en el inodoro. (según Disp. 2337/02)
- E) CONSULTA A TU MÉDICO SI: No estás seguro si eres alérgico al látex, hay irritación o incomodidad persistente después del uso o estás aplicando medicamentos tópicos en el

cómodo y seguro.

Fácil de poner. Forma anatómica y ajuste suave. (Largo: 195mm) ANCHO NOMINAL GRANDE (56mm)

ESPESOR Grueso.

(según Disp. 2337/02)

- 8) Lea las instrucciones de uso en el interior del empaque. (según Disp. 2337/02)
- 9) INDUSTRIA TAILANDESA (según Disp. 2337/02)

LA VERDAD AL DESNUDO , para obtener más información visita www.durex.com o escanea el código QR

Envase de consumo- Caras exteriores del envase:

- 10) Advertencias: Este producto contiene látex de goma/hule natural, el cual puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico si el usuario es alérgico al látex. Producto para usar una sola vez. No fraccionar. No uses lubricantes a base de aceite. como el gel de petróleo o petrolato, cremas y aceite vegetal o mineral, ya que pueden dañar el condón. Si necesitas un lubricante adicional asegúrate de que el lubricante sea compatible con condones de látex. Para sexo anal usa lubricación adicional en la parte exterior del condón (no uses Durex Cosquillas de Placer). (según Disp. 2337/02). Si el empague individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno empaque. Uso sin prescripción.
- 11) SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: ARGENTINA: 0-800-345-1397. e-mail: consumerhealth.latam@reckitt.com (según Disp. 2337/02)
 12) Fabricado en Tailandia por: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.

Wellgrow Industrial Estate, 100 Moo

5, Bangna – Trad. Bangsamak KM 36, Bangpakong, Chachoengsao 24180. (según Disp.2337/02)

13) Importado y Distribuido por: RB (Health) Colombia S.A.S., Cr 12A # 78-40 Piso 5, Bogota D.C.R.S INVIMA 2024DM-0029882. RECKITT BENCKISER PERU S.A. Calle Dean Valdivia 148, Int 502 Urb. Jardin, San Isidro, Lima RUC 20195937541. RS N°: DM 27983E, Fabricante Legal: Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Reino Unido. Reckitt Benckiser Ecuador S.A QUITO – RS N° DM120512 Reckitt Benckiser Centro America Sociedad Anonima, San Jose Costa Rica PA:XXXX, CR EMB-XX-XX-XXXXX, NI: II04-XXXXXXX-XXXX, HN: HN-DM-0924-0225, SV:IM135609082024 GT:PMQ-18519. Titular en CR Reckitt Benckiser Healthcara (UK) Limited. Reino Unido. Reckitt Benckiser Health Argentina S.A. Ruta Prov. 36 N° 8300 Ing. Allan, Prov. De Buenos Aires, Argentina. Legajo único N° 2130. Autorizado por la ANMAT Registro PM 2130-3. Dir. Tec. Daniel Bertora MP 21314. (según Disp. 2337/02) 14) Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento. (LOTE:XXXXX; FAB: MM/YYYY; EXP: MM/YYY) (según Disp. 2337/02) 15) *La marca de mayor venta valor en la categoría de condones a nivel mundial, 2024. **Vs la fórmula anterior Calidad Durex

INSTRUCCIONES DE USO - Cara interna de envase de consumo: A) Los condones Durex Sensitivo

Indicación de uso en Costa Rica: barrera anticonceptiva para la prevención del embarazo y la prevención de infecciones de

transmisión sexual.

pene o la vagina. En caso de ruptura del condón, consulta lo antes posible y dentro de las 72 horas siguientes. (según Disp. 2337/02). Conoce más acerca de tu elección de condón. Dirígete a durex.com

Delgado son delgados para una mayor sensación. Siempre es bueno saber, así que lee toda la información antes del uso, especialmente si estás usando condones para sexo anal u oral. Los condones deben usarse para tener relaciones sexuales. Si se usan apropiadamente los condones de látex pueden ayudar a reducir el riesgo de la transmisión de infección por VIH (SIDA) y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerda que ningún método anticonceptivo funciona al 100% contra el embarazo, el VIH o las infecciones de transmisión sexual. Mantener fuera del alcance de los niños. Nunca uses un condón más de una vez. Abrir solamente al momento del uso.

B) MÁS DE 90 AÑOS DE SEXO REAL

Creemos en el sexo real, que se siente bien y sea satisfactorio. Y es por eso que, durante mas de 90 años, millones de personas en todo el mundo han confiado en Durex, todos los días (y todas las noches). Nos han convertido en la marca de condones número uno del mundo. Independientemente de como quieras tu sexo hoy – ten a la mano la correcta protección.

- C) ANTES DE EMPEZAR. Lee cuidadosamente las instrucciones de uso. Revisa la fecha de expiración del condón antes de usarlo. Si el empaque individual está dañado, desecha ese condón y utiliza uno nuevo que no presente daños en el empaque.
- D) CÓMO USAR EL CONDÓN

 1.Abre el empaque por el borde
 dentado. Manipula con cuidado, el
 condón puede dañarse con las uñas,
 joyas u objetos cortantes.
- 2. Con la parte enrollada por fuera, aprieta el extremo cerrado del condón y coloca el condón sobre el pene erecto.

persistente después del uso o estás aplicando medicamentos tópicos en el pene o la vagina. En caso de ruptura del condón, consulta lo antes posible y dentro de las 72 horas siguientes. (según Disp. 2337/02). Conoce más acerca de tu elección de condón. Dirígete a durex.com
4. Desecha el empaque y el condón en el basurero, nunca en el inodoro. (según Disp. 2337/02) E) CONSULTA A TU MÉDICO SI: No estás seguro si eres alérgico al látex, hay irritación o incomodidad
comprueba si sientes que el condón se desliza o se ajusta excesivamente al pene, porque esto puede llevar a la ruptura del condón. Retira el pene lo más pronto posible después de la eyaculación. Sujeta el condón firmemente en la base del pene antes de retirarlo del cuerpo de la otra persona.
3. Desenrolla el condón hasta cubrir la base del pene. Detente y

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO. DISPOSICIÓN ANMAT N° 11467/24 Y GESTIÓN DE RIESGO

ENSAYO/VALIDACION/GESTION DE	LABORATORIO/N° DE	FECHA DE
RIESGO	PROTOCOLO	EMISIÓN
na	na	na

El responsable legal y su responsable técnico en nombre y representación de la firma RECKITT BENCKISER HEALTH ARGENTINA SA, declaran bajo juramento lo antes declarado y son responsables de la veracidad de la documentación e información presentada y declaran bajo juramento mantener en su establecimiento y a disposición de la autoridad sanitaria la documentación allí declarada y la que establece la Disposición ANMAT N° 64/25 y la Disposición 9688/19, bajo apercibimiento de lo que establece la Ley N° 16.463, el Decreto N° 341/92 y las que correspondan del Código Penal en caso de falsedad.

En caso de inexactitud o falsedad de la información o documentación, la Administración Nacional podrá suspender, cancelar, prohibir la comercialización y solicitar retiro del mercado de lo ya autorizado e iniciar los sumarios que pudieran corresponder.

Firma del Responsable Técnico

Firma del Representante Legal

Habiéndose cumplimentado con lo previsto en la Disposición ANMAT Nº 9688/19, se autoriza las modificaciones solicitadas.

LUGAR Y FECHA: Argentina, 24 septiembre 2025

Dirección de Evaluación de Registro de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello Instituto Nacional de Productos Médicos de Productos Médicos ANMAT Firma y Sello



La validez del presente documento deberá verificarse mediante el código QR.

Tramitada por Expediente N°: 1-0047-3110-006164-25-9